


## Monteringsanvisning E-Walk på Rea Assist

### MCG1147

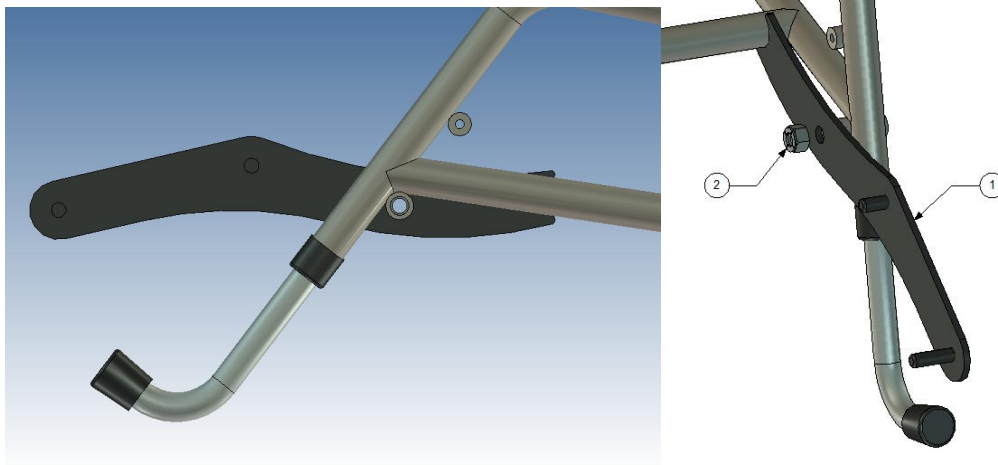

1. Se bild som visar montering av fästet på höger sida.  
För montering skall följande ingå per sida.

Placering	Detalj nummer	Antal	Beskrivning
1	Original hjul mutter	1	Låsmutter M12
2	MCG1147R	1	Fäste höger

2. Montera nu extra hantaget 380020 på styrkontrollen. (se bild nedan)
3. Montera styrkontroll fästet 380030 på höger handtag. (se bild nedan)
4. Montera på styrkontrollen.

