

Airflo finns både som eldriven kompressor eller med uppladdningsbara batterier.


Airflo består av följande delar:

A –kompressor nätansluten 220 V

B -uppladdningsbar kompressor (2 x 12v – 2,1 Ah)

C -handkontroll till kompressorn (används för produkterna Lifting Cushion och Comfort Bather. Vid användning av Easy Lift levereras en speciell handkontroll.)

D -laddaren till uppladdningsbar kompressor

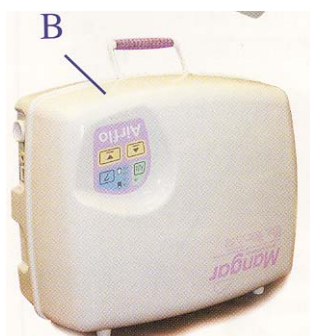


Varning!

Det är inte att rekommendera att använda den eldrivna kompressorn i badrum eller liknade fuktigt miljö.

Vid rengörning av kompressorn bör den inte vara ansluten till elnätet eller under laddning.

Nätansluten Airflo (220 V)


Koppla därefter in luftslangen till kompressorn (till produkten Easy Lift finns en speciell handkontroll/luftslang). När handkontrollen fastnar på luftutloppet hörs ett ”klick”. För att lossa på handkontrollen är det bara att trycka ner låshandtaget på slangen (A). Anslut sedan kompressorn till elnätet.

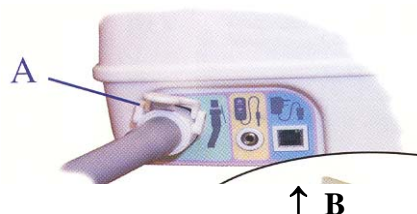

När luftslangen är på plats är det dags att ansluta handkontrollen (se B) till lyfthjälpmidlet. Denna handkontroll skall ej användas med produkterna Easy Lift och ELK, där medföljer en annan handkontroll.

Uppladdningsbar Airflo

Koppla in luftslangen till kompressorn (till produkten Easy Lift finns en speciell handkontroll/luftslang). När handkontrollen fastnar på luftutloppet hörs ett ”klick”. För att lossa på handkontrollen är det bara att trycka ner låshandtaget på slangen (A).

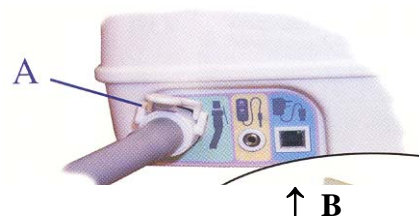


När luftslangen är på plats är det dags att ansluta handkontrollen (se B). Denna handkontroll skall ej användas med produkterna Easy Lift och ELK, där medföljer en annan handkontroll.

OBS! Innan första användningen skall batteriet laddas fullt.

Olika sätt att använda/kontrollera kompressorn på:

Inbyggda knappar på kompressor

Tryck på  för att fylla på med luft.

Tryck på  för att tömma på luft.



Handkontroll

Samma symboler som ovan används på samma sätt.


Auto-funktion


För att använda denna funktion tryck ner  -knappen några sekunder tills det att lampan bredvid knappen lyser grön.


OBS! Auto-funktion avbryts om någon av inbyggda knapparna eller handkontrollens knappar trycks in.

Laddning av batterier

För att ladda batterierna i kompressorn används laddaren som skickas med vid leverans av kompressorn. När laddaren ansluts till elnätet tänds lampa A och lampa B. Lampa B indikerar att batteriet laddas och slocknar när laddningen slutförts.

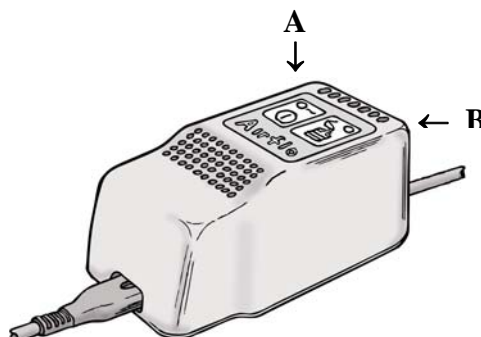


På kompressorn finns en indikator som anger hur mycket batteriet är laddat. Genom att hålla frågetecknet  inne under några sekunder lyser indikatorn upp i följande fyra färger (grön, gul och röd) beroende på hur mycket batteriet är urladdat.

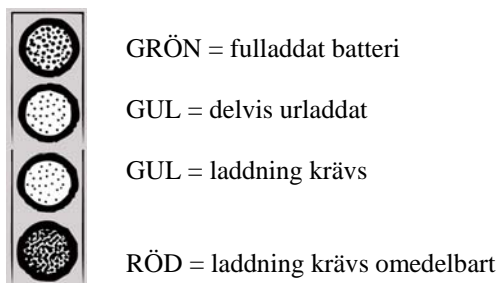

Varning! Ladda inte batteriet i badrum eller liknade fuktig miljö.

Högt/Normalt luftflöde

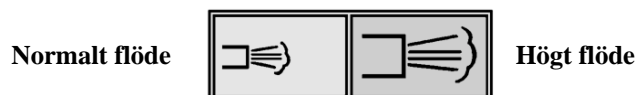


Vid användandet av olika produkter kan luftflödet från kompressorn kontrolleras genom att välja antingen ett normalt flöde (vid användandet av produkterna Lifting Cushion och Comfort Bather) eller ett högt flöde (vid användandet av Easy Lift och ELK). Knappen för att välja flödet finns på kompressorns baksida.

Observera att bara använda högt flöde på de produkter som tillverkaren rekommenderar (Easy Lift). Växla heller inte mellan normalt och högt flöde under användning av kompressorn.

Underhåll av Airflo


Vid behov kan kompressorn rengöras med en fuktig trasa, se bara till att kompressorn inte är ansluten till elnätet eller under laddning (batteridrivnen kompressor).

En gång i halvåret bör luftfiltret ses över och rengöras vid behov. Tvätta filtret och låta det torka innan man monterar tillbaka det.

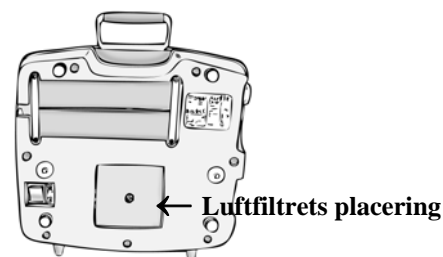


Eldriven Airflo

Kompressorns två säkringar (15 A) kan vid behov ersättas med nya. Lägga kompressorn upp- och ner och lossa de fyra skruvarna så att gallret kan lossas. Lyft därefter upp nätaggregatet och bytt ut säkringarna. Sätt därefter tillbaka nätaggregatet och skruva fast gallret.

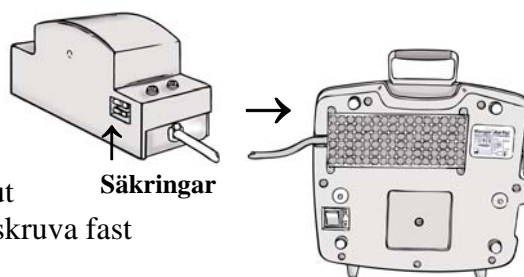

Batteridriven Airflo

Kompressorns två batterier kan vid behov byttas ut. Lägga kompressorn upp- och ner och lossa de fyra skruvarna. Plocka därefter ut de två batterierna och ersätt dem med nya. Skruva därefter fast de fyra skruvarna. Sen är det bara att ladda de nya batterierna innan användning.

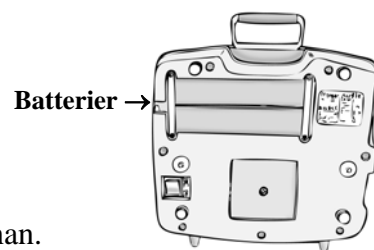

Viktigt är att ersätta batterierna med samma typ av batteri som innan.

Skulle kompressorn indikera något annat fel (t ex blinkade lampor på kompressorns display) kontakta då din leverantör.

Felsökningsguide

Fel	Orsak
Airflo startar inte när du trycker på handkontrollens ”upp”-knapp.	Produktens luftslang måste vara ansluten till kompressorn innan handkontrollen fungerar.
Airflo stannar vid luftfyllning av någon av produkterna Lifting Cushion & Comfort Bather.	Kontrollera att inget skräp kommit in i luftslangens munstycke. Kontrollera så att luftflödet på kompressorn är inställt på ”Normalt”.
”Auto”-lampan blinkar.	Kompressorn har fått för hög temperatur. Stänga av kompressorn och vänta 15 minuter innan vidare användning.
De två översta lamporna på laddningsindikatorn (grön och gul) blinkar.	Kompressorn har blivit överbelastad. Stänga av kompressorn några minuter innan vidare användning.

Teknisk information

Nätansluten Airflo (220 V)

Vikt: 6 kg

Tryck: 0.35 bar (5 psi)

Spänning: 230 V AC 50 Hz, 350W

Sladd: 1,9 meter

Säkring: 2 x 15 A

Batteridrivnen Airflo

Vikt: 6 kg

Tryck: 0.35 bar (5 psi)

Batteri: 2 x 12 V – 2.1 Ah

Laddare: In: 230 V, 10 W

Ut: 24 V, 350 mA

Säkring: 2 A och 130°C –temperatursäkring

Garanti

Garanti för Airflo är 2 år.

För övrig information angående Airflo kontakta din leverantör

Decon Wheel AB
Landerydsvägen
314 33 Hyltebruk
Sverige

Tfn 0345-408 80

Fax 0345-408 95

info@decon.se

www.decon.se