

e-walk



Brukarmanual



e-walk

Inledning

Tack för att du har valt hjälpmotorn e-walk. Den genomtänkta utformningen, funktionaliteten och kvaliteten hos vår produkt gör dig inte besviken.

För att garantera optimal användning av e-walk, bör du läsa bruksanvisningen noggrant innan du använder den första gången.

Den innehåller viktiga säkerhetsföreskrifter och värdefulla tips om hur du använder och sköter om e-walk på rätt sätt.

En följeslagare använder e-walk som hjälpmotor och det är bara rullstolsbrukarens ledsagare som manövrerar den.

Om du har frågor kan du kontakta återförsäljaren, som har levererat e-walk och anpassat den till rullstolen. Återförsäljaren ger även gärna råd om andra produkter från oss.

Innehållsförteckning

Inledning	3
Innehållsförteckning	4
Säkerhetsföreskrifter	5
Tecken och symboler	5
Allmänna säkerhetsföreskrifter	5
Föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	6
Allmänna anvisningar	7
Ändamål	7
Indikation/kontraindikation	7
Ansvar	7
Försäkran om överensstämmelse	7
Identifiering av e-walk	7
Produkt- och leveransöversikt	8
Produkt- och leveransöversikt	8
Leveranskontroll	8
Omfattning av leverans	8
Förpackning och försändelse	8
Montering	10
Montering av monteringsplattorna	10
Anpassning av sittbredden	11
Fastsättning på rullstolen	12
Borttagning från rullstolen	13
Transportanvisningar	13
Användning av manöversystemet	14
Manöversystem	14
Fastsättning av manöversystemet	14
Sätta på och stänga av	14
Förval av hastighet	15
Köra	15
Köra framåt och bakåt	15
Hjälpdrift	16
Batterier	17
Ladda batterierna	17
Montering och demontering av batteripack	18
Byte av batterier	18
Självhjälp	19
Tillbehör	20
Skötselanvisningar för brukaren	22
Rengöring	22
Kontroller av användaren	22
Serviceanvisningar för återförsäljaren	22
Reparation	22
Avfallshantering	23
Överlåtelse	23
Garanti	23
Olyckor/ tillbud	23
Instruktioner	24
Egna anteckningar	25

Säkerhetsföreskrifter

Tecken och symboler



OBS! Markerar föreskrifter som gäller säkerhet. Observera bruksanvisningen!



Viktigt! Markerar särskilt användbar information i respektive sammanhang.



Lastöglor för att säkerställa frakt av e-walk, se Transport anvisningar.



Miljöfarligt gods! Markerar särskilt användbar information i respektive sammanhang.

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Kontrollera före varje användning att alla monterade delar är ordentligt fastsatta och anpassade till rullstolen på ett tillräckligt säkert sätt. För att undvika fallolyckor och farliga situationer, bör du först vänja dig vid e-walk över jämn och överskådlig mark. Instruktioner för handhavande och förklaring av alla funktioner måste ovillkorligen ges. Ledsagare måste både intellektuellt och fysiskt klara av att hantera hjälpmotorn säkert och riskfritt för rullstolsbrukaren, för sig själv och tredje person. Instruktionerna ska antecknas och skrivas under både av återförsäljaren och användarna.



Rullstolstillverkarens angivna värden, som lufttryck, maximal lutning och maximal brukarlast måste beaktas.

Endast auktoriserade återförsäljare får montera hållaren för e-walk.

- Det ska säkerställas att hållaren passar på rullstolsmodellen.
- Bruksanvisningen till rullstolen måste ovillkorligen följas.
- Maximal brukarlast för rullstolen får inte överskridas vid användning av hjälpmotorn.
- Tippskydd rekommenderas i backar på mer än 7°.
- e-walk får endast manövreras av ledsagaren.
- Rullstolsbrukaren får inte under några omständigheter själv använda e-walk som rullstolsdrift.
- Det är inte tillåtet att köra med e-walk i backar eller lutningar på mer än 10 %.
- Det är inte under några omständigheter tillåtet att köra i backar och lutningar med skjutdrift (bortkopplad broms).
- Trappavsatser och höga trottoarkanter ska köras över med avstängd och bortkopplad e-walk.
- Kör endast med e-walk på slätt och fast underlag.
- Ladda om möjligt batterierna till e-walk efter varje körning.
- För att montera e-walk drivaggregat på en rullstol skall den vara i nyskick

- Något man bör tänka på, är att rullstolar egentligen inte är byggda för att vara utrustade med drivaggregat. Detta på grund av den ökade belastningen på rullstolen. Framförallt skall försiktighet iakttas när vägbanan lutar, samt där underlaget är ojämnt eller mjukt.
- Något som får större påkänningar är länkhjulen. Man minskar belastningen på dessa genom att öka diameter storleken på länkhjulen.
- Länkhjulen skall ha en minsta diameter av 150 mm
- Mera avancerade rullstolar med sits/rygg tilt funktioner kan ibland inte utnyttjas till fullo då tilt funktionerna kan hindras av drivaggregatet. Iakttta försiktighet så att dessa funktioner inte skadas av drivaggregatet.



OBS! Allt missbruk av e-walk kan leda till skador på rullstolsbrukaren, ledsagaren eller tredje person.

Föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Eftersom elektromagnetiska störningar blir starkare ju närmare man kommer en sändande antenn, är elektromagnetiska fält från bärbara radiokällor av särskild betydelse. Det är möjligt att oavsiktligt förorsaka höga nivåer av elektromagnetisk energi i närheten av styrsystem medan man använder dessa apparater. Det kan påverka rörelsen eller bromsningen hos hjälpmotorn. Observera därför nedanstående rekommendationer, för att förhindra störningar i hjälpmotorn:



Följande varningar minskar risken för oavsiktligt lossande av bromsen eller fortsatt rörelse hos hjälpmotorn, vilket kan leda till allvarliga skador.

- Ingen användning av bärbara sändare eller mottagare, som kommunikationsradio eller andra bärbara driftberedda apparater, t.ex. mobiltelefoner, medan hjälpmotorn är påslagen.
- Var uppmärksam på sändare, t.ex. radio- eller TV-sändare, som finns i närheten och försök att undvika dessa.
- Om bromsarna skulle lossas oavsiktligt eller e-walk röra sig framåt oavsiktligt, stäng av den så snart den är i säkerhet.
- Observera att tillägg av tillbehör och komponenter eller modifiering av hjälpmotorn kan leda till att den blir känsligare för elektromagnetisk strålning.
- Rapportera alla förekomster av oavsiktliga rörelser och bromsförlopp till återförsäljaren och ange om det finns källor till elektromagnetiska radiostörningar i närheten.



Anvisning! e-walk kan också framkalla störningar genom elektromagnetiska fält. Om du iakttar sådana störningar, ska du stänga av e-walk och underrätta återförsäljaren eller Decon Wheel direkt.

Allmänna anvisningar

Ändamål

e-walk är en elektrisk extra drivanordning för manuella rullstolar som är avsedd att användas både utomhus och inomhus. e-walk är uteslutande avsedd för transport med hjälp av annan person, d.v.s. för att underlätta för ledsagaren att skjuta på och bromsa.

Indikation/kontraindikation

e-walk hjälper ledsagaren att skjuta på och bromsa rullstolen. Med e-walk klarar man längre utflykter. Det är lämpligt att använda e-walk när rullstolsbrukaren inte själv kan förflytta sig och ledsagaren inte är tillräckligt stark för att skjuta rullstolen. Ledsagaren måste intellektuellt och fysiskt kunna hantera e-walk på ett säkert sätt i alla situationer.

Ansvar

Som tillverkare anser vi oss endast ansvariga för säkerhet, tillförlitlighet och användbarhet hos våra produkter under förutsättning att ändringar, kompletteringar, reparationer och service bara utförs av personer som auktoriserats av oss och att hjälpmotorn används i enlighet med bruksanvisningen.

Försäkran om överensstämmelse

Decon Wheel AB försäkrar i egenskap av tillverkare av produkten att hjälpmotorn "e-walk" fullständigt uppfyller kraven i EU-direktivet 93/42/EEG.

Identifiering av e-walk

Identifierings etiketten sitter monterad under batteriboxen, se bilder nedan.
modelltyp serienummer produktionsår + månad



Produkt- och leveransöversikt

Leveranskontroll

Hjälpmotorn e-walk är färdig att användas när den levereras av återförsäljaren. Detta ingår:

- Montering av adapter på rullstolen för att fästa e-walk
- Installation av batteripaket
- Fastsättning av manöverenheten på högra eller vänstra handtaget på rullstolen

Omfattning av leverans

I leveransen ingår som standard:

- Drivenhet
- Manöverenhet
- Batteripaket
- Laddare
- Bruksanvisning
- Adapter för montering på rullstolen
- Förhöjningshantag

Förpackning och försändelse

Om e-walk måste skickas separat (för reparation eller återlämning) vänder du dig till återförsäljaren eller direkt till Decon Wheel. Vi skickar då en transportkartong eller hämtar själva apparaten.



Figur 1: Produktbeskrivning

Montering


Montering av monteringsplattorna

Med hjälp av olika monteringsplattor kan du fästa e-walk på alla gängse typer av rullstolar. Av denna anledning kan monteringsplattan på din rullstol se annorlunda ut än på bilderna i den här bruksanvisningen.

För att kunna använda e-walk på rullstolen måste rätt monteringsplatta vara monterad. Eventuella skruvhål på rullstolsramen används för att sätta fast adaptern. Om inga hål finns används klämfäste. Därmed är det möjligt att demontera e-walk fullständigt och spårlöst från rullstolen och om så önskas använda den på en annan rullstol.



OBS!
Endast auktoriserade återförsäljare får montera monteringsplattorna och utföra justeringar.

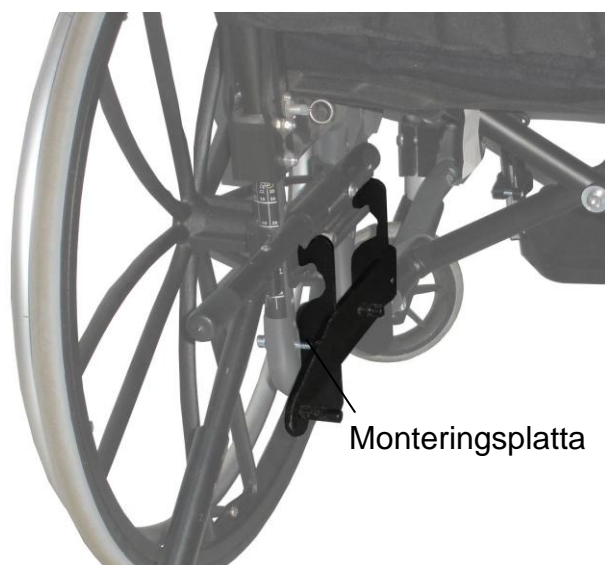

Figur 2: Monteringsplatta



Viktigt!
Kontrollera varje vecka att monteringsplattorna sitter stadigt.
Om någon skruv har lossnat, kontakta återförsäljaren.


Driftspärren resp. spaken som lossar hjälpmotorn monteras och justeras av återförsäljaren.

Anpassning av sittbredden

Hjälpmotorn e-walk kan enkelt anpassas till olika bredder på rullstolar. Se till att monteringsplattorna är korrekt monterade på rullstolen. En e-walk kan följaktligen användas av olika rullstolsbrukare.

Nödvändiga verktyg: Nyckel till infälld bussning SW4

- Vart och ett av de båda sidostyckena är fastsatt med två ställskruvar①.
- Lossa först ställskruvarna ① för de båda sidostyckena

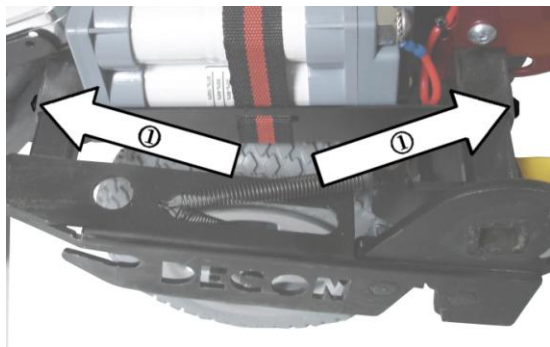

Figur 3: Lossa ställskruvarna

- Skjut in sidostyckena så att du kan skjuta in drivenheten mittemellan de båda monteringsplattorna.
- Dra de båda sidostyckena utåt så att dessa ligger an mot monteringsplattorna.
- Dra åt ställskruvarna igen så att sidostyckena sitter fast.




Figur 4: Justera sidostyckena

Fastsättning på rullstolen

Hjälpmotorn kan med några få handgrepp kopplas fast på rullstolen. Koppla fast den enligt följande:

- Dra åt handbromsarna på rullstolen
- Ställ först drivenheten i skjutdrift
- Skjut på e-walk på rullstolen bakifrån, och se till att den främre ursparningen ① på sidostyckena på e-walk sitter fast på de främre fäststiften på monteringsplattorna
- Sänk ner e-walk över de bakre stiften på monteringsplattan ② tills att man hör att låsningen ③ klickar till.

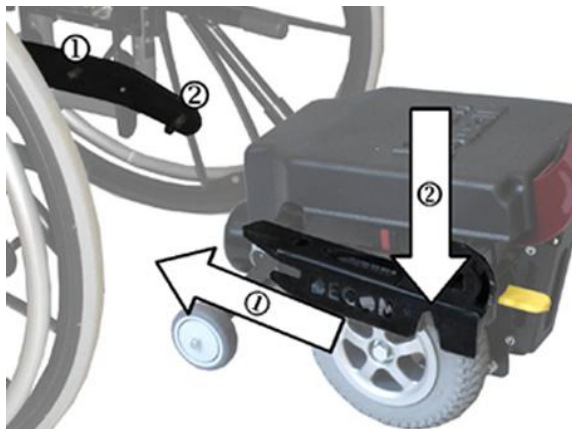

Figur 5: Fastsättning av e-walk



Figur 6: Låsning av e-walk



OBS!
Förbindelsekabeln får inte begränsa ledsagarens rörelsefrihet. Den får inte heller vikas eller klämmas.

Borttagning från rullstolen

Det går lätt att ta bort e-walk.



- Dra åt handbromsarna på rullstolen.
- Dra i lyfthandtaget så att drivhjulen frigörs.
- Tryck på en av de gula pedalerna som därigenom får låsningen att frigöra monteringsplattan.
- Lyft och drag nu i handtaget ut e-walk ur fästet.
- Lossa nu manöverenheten.

Figur 7: Ta bort e-walk

Transportanvisningar

E-walk är försedd med transportfäste.

Vid transport:

- Stänga av e-walk.
- Spänn fast stol och e-walk i dess transportfästen.
- För att späanna fast rullstolen i stolens transportfästen. (Se tillverkans anvisningar)
- För att späanna fast rullstolen i e-walks transportfästen. (Se bilder nedan.)



Vänster Sidan



Höger sidan

Användning av manöversystemet

Manöversystem

E-walk är utrustad med ett programmerbart manöversystem. Acceleration, retardering och hastighet kan anpassas. Inbromsnings- och köregenskaper kan därigenom ändras.



OBS!
Ändringar i programinställningen får endast utföras av återförsäljaren eller Decon Wheel i samråd med er läkare eller terapeut.

Fastsättning av manöversystemet



Figur 8: Fastsättning av manöversystemet

Manöversystemet kan valfritt sättas på det vänstra, högra eller mitten av skjuthandtaget. Sätt manöversystemet på skjuthandtagets fäströr och dra fast fästskruven på undersidan. Se till att manöversystemet sitter säkert och inte glappar. Sätt därefter kontakten enligt bilden ovan till höger. För att ta bort manöversystemet lossar du bara fästskruven och kontakten.

Sätta på och stänga av

För att köra med e-walk måste strömbrytaren sättas på (se pilen). Batteriindikatorn anger hur mycket kapacitet som finns kvar i batterierna och driftsberedskapen hos e-walk.



Figur 9: Strömbrytare

Förval av hastighet

Den maximalt tillåtna hastigheten kan ställas in oberoende av körspaken. Den maximala hastigheten (5,5 km/h) uppnås vid inställningen längst till höger (symbolen hare) och när körspaken dragits ända till anslaget. Vrid ratten till vänster (symbol sköldpadda), vilket minskar den maximalt uppnåbara hastigheten.



Figur 10: Hastighetsratt

Köra

Hastigheten kan anpassas med spaken, se figuren. Välj maximal hastighet med ratten. Ju hårdare du trycker på spaken desto snabbare kör du, men den valda maxhastigheten kan inte överskridas. Genom att släppa spaken bromsar motorn automatiskt.



Figur 11: Hastighetsspak

Köra framåt och bakåt

För att köra ställs riktningsomkopplaren på "Fram" (framåt). Genom att trycka långsamt på körspaken går e-walk i gång mjukt. Drivenhetens hastighet beror på manöverlängden och den förvalda hastigheten.

För att köra bakåt ställs riktningssomkopplaren på "Back" (bakåt). Rullstolen styrs på samma sätt som en vanlig manuell rullstol genom att ange riktning med skjuthandtagen.



Figur 12: Välja färdriktning

Hjälpdrift

Rullstolen kan skjutas även med påhängd hjälpmotor med och utan elektrisk drift. Om drivenheten sitter som i figuren nedtill, är hjälpmotorn urkopplad och rullstolen befinner sig i skjutläge utan motorhjälpdrift. Om drivenhetens handtag föres nedåt kopplas den på och rullstolen befinner sig i drivläge med motorhjälpdrift. Se figur 13.



OBS!

Lossa aldrig drivanordningen i en backe! Det finns risk att brukaren faller omkull om inte handbromsarna på rullstolen är åtdragna.




Figur 13: Koppla ur och sätt på drivenheten

Batterier


Som standard är e-walk utrustad med två underhållsfria 12V/12Ah gelbatterier alternativt ett NiMH 24V/9,6Ah. Aktuellt laddningstillstånd kan avläsas på manöverenheten. Om LED-indikatorn rör sig inom det gröna (+) området, har batterierna tillräcklig kapacitet för en längre utflykt. Om lysdiodindikatorn ligger inom det röda (-) området, ska batterierna laddas omgående.



Nästan tomt batteri

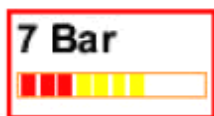

Delvis urladdat batteri

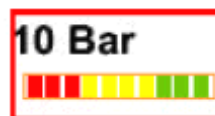

Fulladdat batteri

Undvik att ladda ur batteriet helt och ladda batterierna igen efter varje användning. Batterierna laddas ur vid ett längre uppehåll och förlorar kapacitet. Efter några laddnings-/urladdningscykler står full kapacitet till förfogande igen.



Figur 14: Laddningsuttag

Ladda batterierna

För att ladda batterierna används medföljande laddare. Batterierna behöver inte tas ur för att laddas.

- Fäll upp locket
- Stäng av hjälpmotorn
- Sätt in laddarens kontakt i laddningsuttaget.
- Sätt in laddarens kontakt i ett eluttag.
- Laddningen börjar automatiskt
- Lysdiodindikatorn på laddaren anger aktuellt drifttillstånd för laddaren

Fast sken **rött**:

Laddningsförlopp


Fast sken **gult**:

Laddaren är inte ansluten/ingen laddning pågår

- Dra ut kontakten ur laddningsuttaget efter att batterierna laddats
- Fäll tillbaka locket igen

Montering och demontering av batteripack

1. Fäll upp den svarta batterikåpan.
2. Kontakten skall anslutas/urkopplas.
3. Koppla ur laddnings kontakten endast NiMH batteriet.
4. Spänn/Lossa NiMH batteriets spännbandet.
(Det finnes ej på Blybatteripack.)

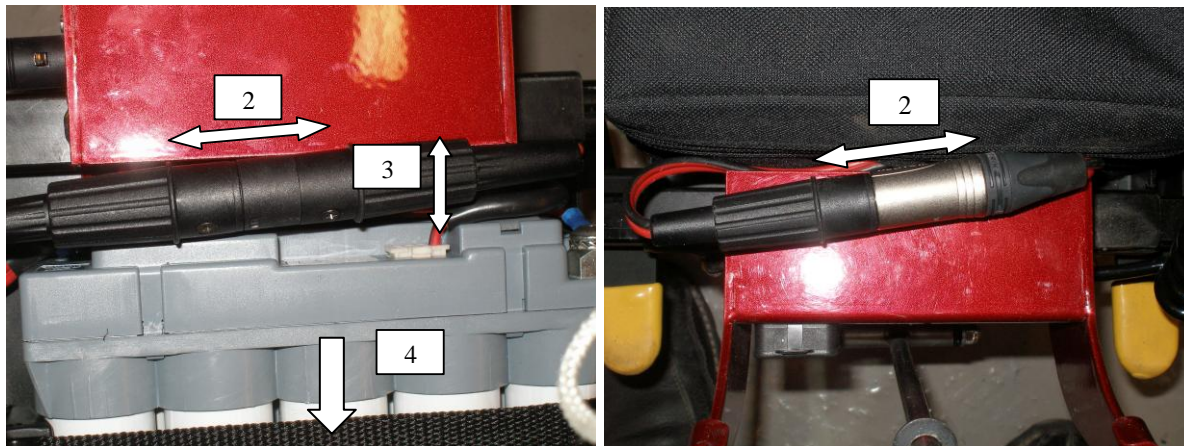

Figur 15: Batterikontakt

Byte av batterier

Kontakta återförsäljaren när du behöver byta batterier.



OBS!

Byte av batterier bör endast utföras av auktoriserade återförsäljare.



OBS! Batteriladdaren gäller enligt EU-direktivet (WEEE 2002/96/CE) som elavfall och tas emot utan kostnad på alla återvinningscentraler. Denna produkt kan innehålla ämnen som vid felaktig avfallshantering kan leda till miljöskador. Skydda miljön genom att lämna uttjänt produkt med batterier till någon återvinningscentral.

Självhjälp

Här följer en lista med vad du kan göra själv. Läs gärna i listan innan du kontaktar en servicerepresentant. Välj det nummer i listan som motsvarar antalet blinkande staplar och följ anvisningen.



Batteriet måste laddas eller så är kopplingen till batteriet dålig. Kontrollera kopplingen till batteriet. Om den är bra kan du försöka ladda batteriet.




Kopplingen till motorn är dålig. Kontrollera alla kopplingar mellan motorn och manöverorganet.




Det har blivit kortslutning mellan motorn och batteriet. Kontakta servicerepresentanten.




Frihjulskomkopplaren är aktiverad eller så är den manuella funktionen för att släppa upp bromsen i bruk. Kontrollera hur omkopplaren eller spaken sitter.

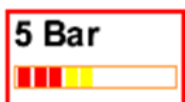

Används inte.

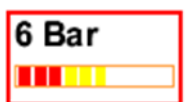

Manöverorganet hindras från att köra skotern. Det kan bero på att batteriladdaren är inkopplad eller på att sätet inte befinner sig i köräge.

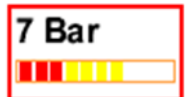


Det är något fel på gasen. Se till att gasen är i viloläge innan du startar skotern.



Det är något fel på gasen. Se till att alla kopplingar sitter stadigt.



Parkeringsbromsen är dåligt ansluten. Kontrollera kopplingen mellan parkeringsbromsen och motorn, och se till att kopplingarna till manöverorganet sitter stadigt.

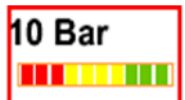


Manöverorganet har utsatts för alltför hög spänning. Det orsakas vanligtvis av dålig batterikoppling. Kontrollera batterikopplingarna.

Tillbehör

Sidostycke

Sidostycke finns i tre utförande.
Stolens sittbredd avgör vilka sidostycke man skall välja.

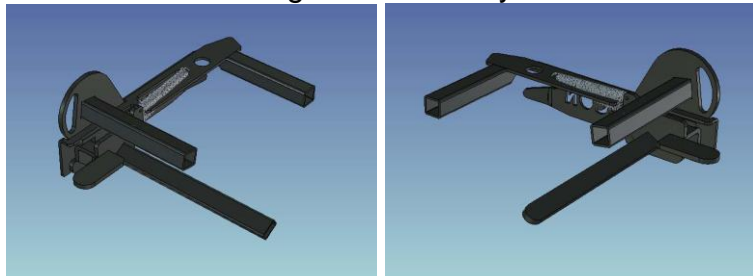

Vänster sidostycke

Höger sidostycke


Följande produkter finnes:

Vänster sidostycke	Stolsbredd 38-45	Detalj nummer: 350160A
Höger sidostycke	Stolsbredd 38-45	Detalj nummer: 350155A
Vänster sidostycke	Stolsbredd 45-53	Detalj nummer: 350160B
Höger sidostycke	Stolsbredd 45-53	Detalj nummer: 350155B
Vänster sidostycke	Stolsbredd 53-60	Detalj nummer: 350160C
Höger sidostycke	Stolsbredd 53-60	Detalj nummer: 350155C

Lyfthjälpmedel



Sidoförflyttat handtagsfäste

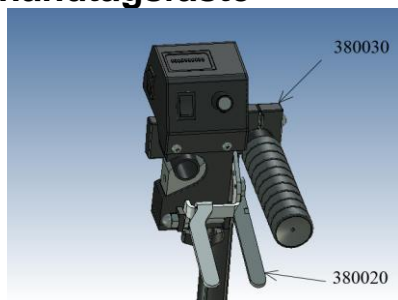

Decon Wheel AB vill hjälpa människor, både brukare och vårdare. Dessa tillbehör är för vårdare som av någon anledning har svårt att böja sig.

Förlängt lyfthandtag Art.Nr: 380002

Manöverspak Art.Nr: 380020

Sidförflyttat fäste Art.Nr: 380030

Tekniska data

Styrenhet	S-drive PG
Motor	200 W
Batteri	Bly 24 V * 12 Ah/NiMH 24 V * 9,6 Ah
Laddare	Mascot
Ram	Stål, rostskyddad genom lackering
Mått/vikt	
Total längd	474 mm
Total bredd	316 mm
Total höjd	362 mm
Rullstolens rambredd	38 – 60 cm
Drivenhetens vikt	15,4 kg
Batteriernas vikt	NiMH 2,5 kg/bly 8 kg
Däck	Helgummi
Köregenskaper	
Hastighet framåt	5,5 km/h
Hastighet bakåt	2,6 km/h
Räckvidd	16 km bly/19 km NiMH
Stigförmåga	8°
Max. hinderhöjd	6 cm
Brukarlast	150 kg

Skötselanvisningar för brukaren

Rengör e-walk med ett vanligt mildt rengöringsmedel. För desinfektion är gängse ytdesinfektionsmedel lämpliga.

Rengöring

Stäng av e-walk och ta loss den från rullstolen när den ska rengöras.

- Drivhjulen rengörs lämpligen med tryckluft eller en torr plastborste.
- Använd ej frätande eller slipande rengöringsmedel.
- Ram och manöverdon på drivenheten kan torkas av med en fuktig trasa. Om den är riktigt smutsig kan ett mildt rengöringsmedel användas.
- Manöverenheten kan desinficeras med gängse ytdesinfektionsmedel.
- Torka av med en mjuk trasa samt lufttorkas.



OBS!

Observera att elektriska och elektroniska komponenter inte får komma i kontakt med vatten. Använd inte högtrycks- eller ångtvätt!

Kontroller av användaren

Kontrollera att däcken är oskadade före varje åktur. Kontrollera däckens profildjup regelbundet en gång per månad. Det bör vara minst 1 mm. Defekta eller slitna däck måste bytas ut av återförsäljaren.

Serviceanvisningar för återförsäljaren

Vi rekommenderar att hjälpmotorn inspekteras minst en gång per år av återförsäljaren. Vid störningar eller fel på hjälpmotorn ska denna utan dröjsmål lämnas till återförsäljaren för reparation.

Reparation

För reparation och beställning av reservdelar vänder du dig till återförsäljaren eller direkt till Decon Wheel. Inställningar och reparationer ska alltid utföras av auktoriserade återförsäljare. De får på begäran detaljerade instruktioner och verktygsförteckningar.

Avfallshantering

Om hjälpmotorn inte längre används och ska kasseras, kontaktar du återförsäljaren. Om du själv vill ta hand om avfallshandlingen, frågar du avfallsföretaget på din ort vilka föreskrifter för hantering av restprodukter som gäller.

Överlåtelse

Avsikten är att e-walk ska kunna återanvändas. När hjälpmotorn överläts bör du tänka på att alla tekniska underlag som krävs för säker användning överlämnas till den nya användaren. Produkten måste rengöras av en fackman, desinficeras och kontrolleras om så behövs.

Garanti

Garantin gäller alla brister hos produkten som bevisligen kan hänföras till material- eller tillverkningsfel.

Garanti och produktansvar gäller inte för skador som beror på normalt slitage, uppsåt, vårdslös eller felaktig manövrering eller användning, inte heller vid byte av originaldelar mot delar av annat fabrikat eller kopior av originalet eller vid användning av olämpliga medel, smörjolja eller fetter.

Garantianspråk preskriberas två år efter leverans av hjälpmotorn. För batterierna ger vi ett års garanti.

Olyckor/ tillbud

Om det har inträffat en olycka/ tillbud, skall detta rapporteras till ägaren eller tillverkaren av E-Walk produkten, rapport skickas till adressen nedan:

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 115
31493 Hyltebruk
Tel 0345-40880
Fax 0345-40895
info@decon.se
www.decon.se

Instruktioner

Återförsäljarens instruktioner gäller säker användning av produkten.
Lyssna till instruktionerna om funktioner och användande och prova första gången under återförsäljarens överinseende.

Följande punkter ska observeras vid instruktionerna

Påkoppling av hjälpmotorn

Borttagning av hjälpmotorn

Anslutning av manöverenheten

Manöverenhetens funktioner

Köra framåt och bakåt

Köra i backar

Skjutdrift

Laddning

Hänvisning till innehåller i bruksanvisningen

Datum / underskrift / stämpel
Återförsäljare

Underskrift
Ledsagare

Används som kopieringsoriginal, om flera personer ska instrueras!

Garanti

Modell:

SN:

Återförsäljare:

Datum och stämpel

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 115
31493 Hyltebruk
Tel 0345-40880
Fax 0345-40895
info@decon.se
www.decon.se

