

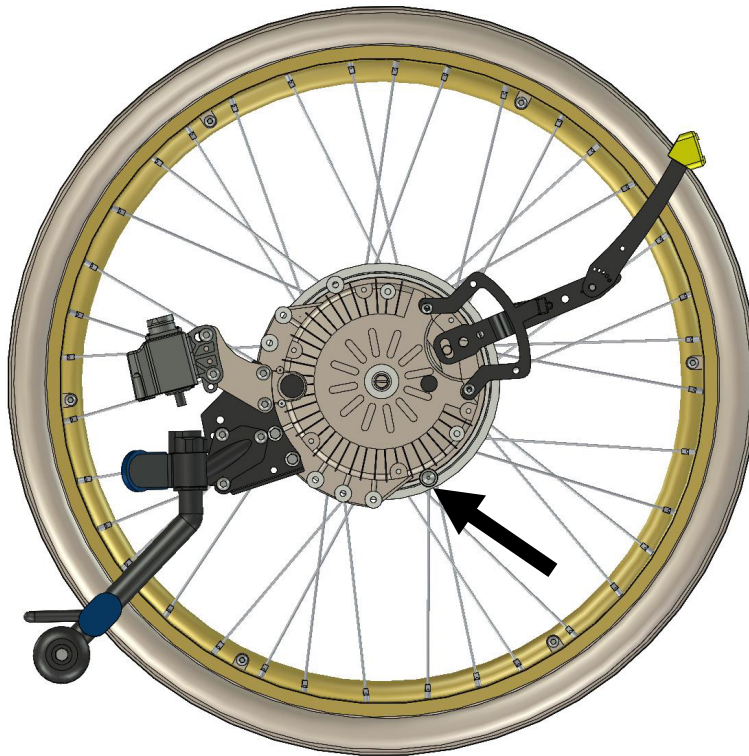


Monterings anvisning för Catalyst 5Vx MED3132

1. Demontera hjulen på båda sidorna.
2. Demontera navhylsa och tippskydd på båda sidorna.

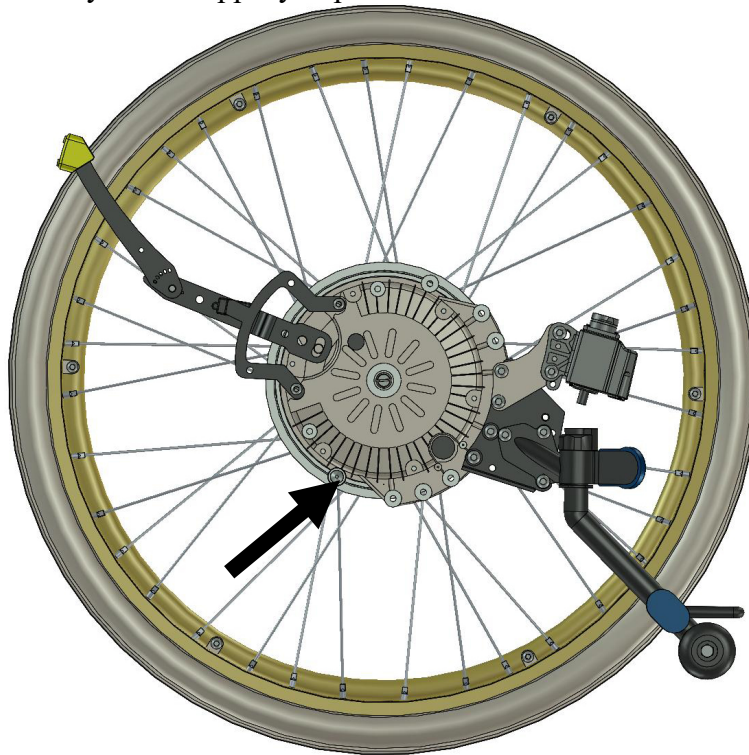

3. Kontrollera att stopp pinnen sitter enligt bilderna ovan, samt att batteri boxen är demonterade.

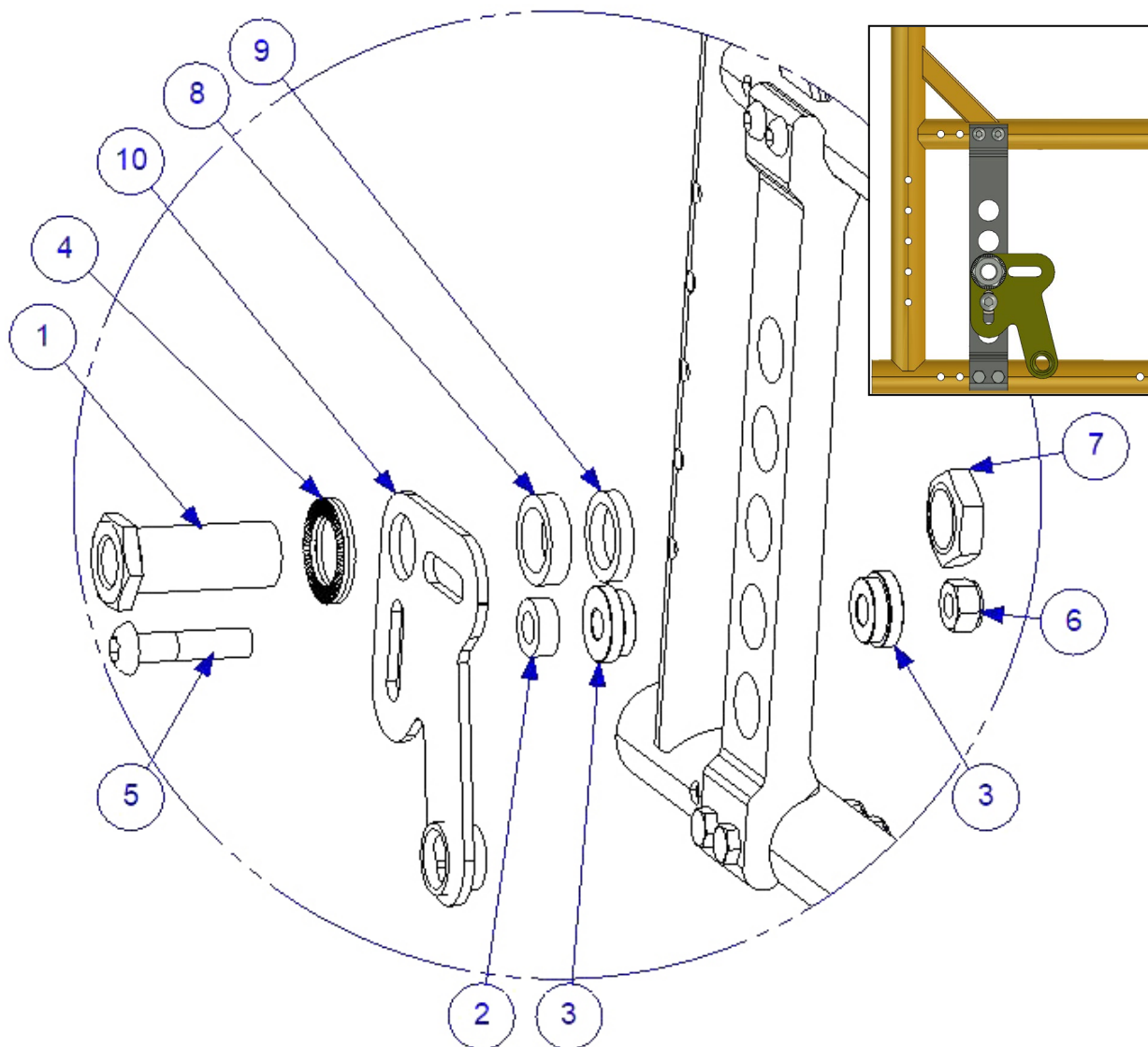


4. Montera nu fästet enligt bilden ovan.

För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	HW084	1	Navhylsa M18X1
2	100 400 002	1	Distans
3	100 400 008	2	Distans
4	405241	1	Nordlock M18 Bricka
5	XSM8X35	1	Skruv Rundad M8 x 35
6	XSM8ML	1	Låsmutter M8
7	XSM18M	1	Mutter M18 x1
8	100 400 015	1	Distans
9	100 400 014	1	Distans
10	MED2000	1	Fäste
Rygghängd batteri väska		1	Väska

5. Montera den rygghängda batteri väskan.

MED1404

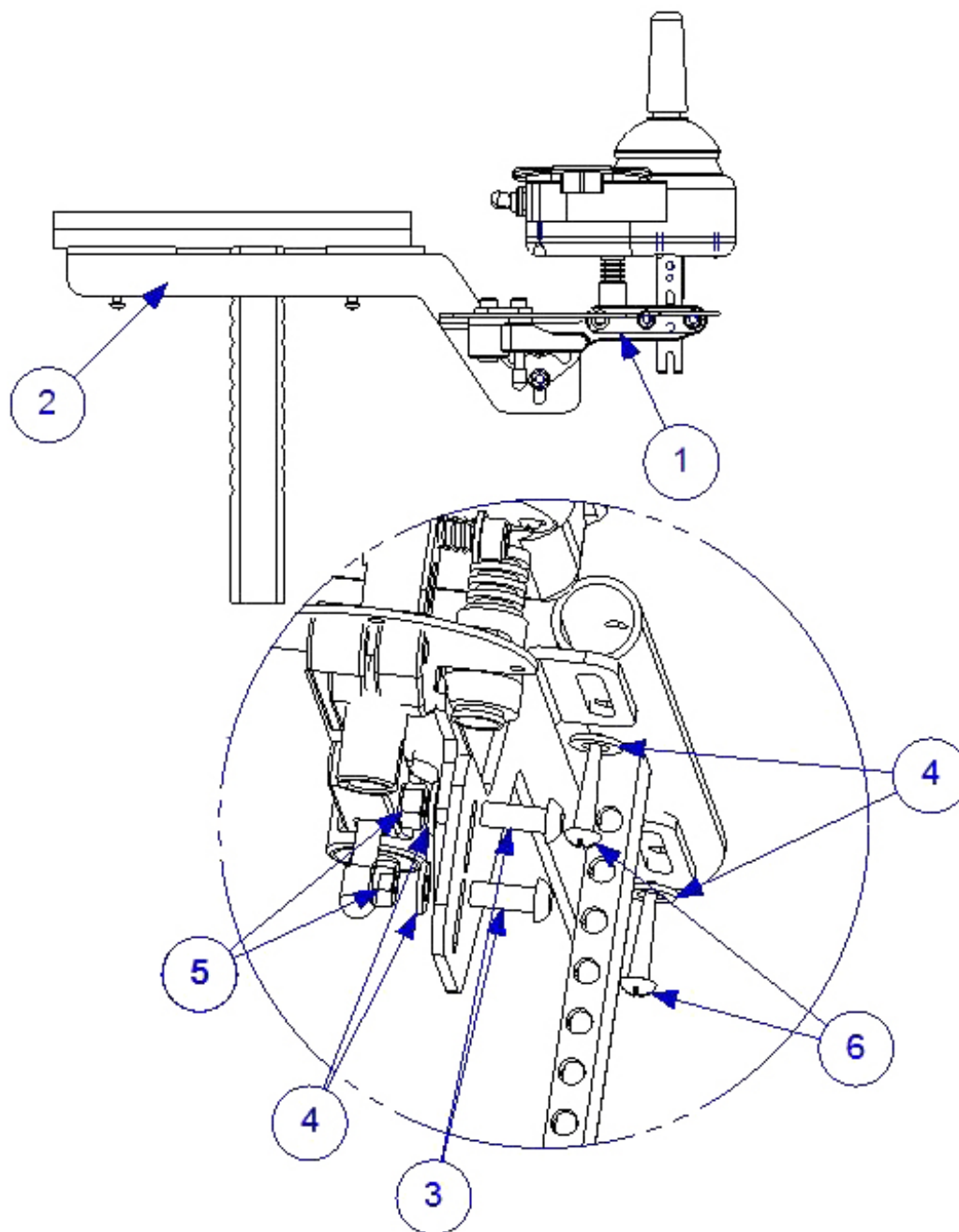

1. Montera Joysticken enligt bilderna ovan.

Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	XOC-48160-B0	1	Övre hållare
2	MED1500	1	Fäste
3	XSM6X16	2	Skruv Rundad M6 x 16
4	XSM6BR	4	Planbricka M6
5	XSM6ML	2	Låsmutter M6
6	Skruv Original Ingår ej	2	Skruv Original Ingår ej