


# Brugsanvisning

DREEFT fra Eppur

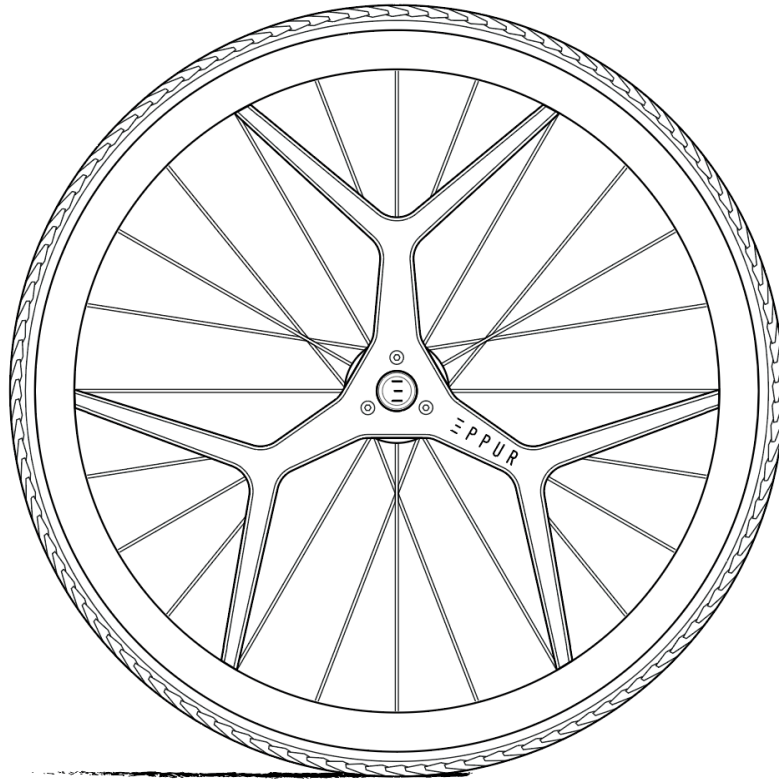

CE

*Dette produkt overholder forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.  
EF-overensstemmelseserklæringen indeholder datoen for, hvornår udstyret blev bragt i omsætning.*







*Producent: Eppur SAS, 4 rue professeur Langevin, 59000 Lille*

*Virksomhedsregistreringsnummer: 88178940800021*

*Momsnummer: FR47881789408*

*E-mailadresse: [hello@eppur.eu](mailto:hello@eppur.eu)*

**INDHOLD** 

<b>I. GENEREL INFORMATION</b> 	<b>3</b>
1) Oplysninger om brugervejledningen	3
2) CE-overensstemmelse	3
3) Garanti og ansvarsbegrænsning	3
4) Tilsigtet anvendelse	4
<b>II. PRODUKTBESKRIVELSE</b> 	<b>4</b>
1) Betjening	4
2) Generelle oplysninger	4
3) Tekniske data	5
1. Dimensioner og vægt på Dreeft-hjul	5
2. Miljøforhold	5
3. Materialer	5
4. Identifikationsmærkat	6
4) Hjulkomponenter	6
1. Oversigt	6
2. Komponenter	7
<b>III. BRUG AF DREEFT-HJUL</b> 	<b>7</b>
1) Montering og afmontering af hjul	7
1. Dreeft-hjulens kompatibilitet med kørestole	7
2. Betjeningsvejledning	8
3. Montering og afmontering af Dreeft-hjul	8
4. Montering af andre hjulmodeller, når kørestolen er udstyret med adaptere A, B eller C	9
2) Brug af hjulene	10
1. Sikkerhedsoplysninger	10
2. Første bevægelser med en kørestol udstyret med Dreeft-hjul	10
3) Vedligeholdelse af hjulene	10
4) Transport af hjulene	10
<b>IV. SIKKERHED</b> 	<b>11</b>
1) Betydningen af advarselssymboler	11
2) Generelle sikkerhedsoplysninger før brug af Dreeft-hjul	11
3) Sikkerhedsoplysninger under brug af Dreeft-hjul	11
4) Generelle sikkerhedsoplysninger under montering af Dreeft-hjul	12
<b>V. VEDLIGEHOLDELSE</b> 	<b>13</b>
1) Sikkerhedsoplysninger	13
2) Vedligeholdelsesplan	14
3) Identificering og reparation af fejl	14
<b>VI. EFTER BRUG</b> 	<b>15</b>
1) Bortskaffelse	15
2) Genoprettelse af funktionsdygtig tilstand	

## I. **GENERELT**

### 1) **Oplysninger om brugervejledningen**

Læs denne vejledning, inden du tager Dreeft-hjulene i brug, og opbevar den i hele den periode, hvor du bruger hjulene, så du kan slå op i den senere, hvis det bliver nødvendigt. Følg alle sikkerhedsinstruktioner for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

Denne manual **SKAL** udleveres til brugeren af produktet.

Det er strengt forbudt at adskille hjulnavene selv uden specifikt samtykke fra Eppur-mærket, ellers bortfalder garantien.

Ved demontering risikerer brugeren at miste kontrollen over kørestolen og falde.

Du kan finde PDF-filen med dette dokument på hjemmesiden: [eppur.eu](http://eppur.eu), i **forhandlerområdet**. PDF-filen kan også vises i et forstørret format.

For yderligere oplysninger vedrørende denne brugsanvisning, tøv ikke med at kontakte det specialiserede personale, der har leveret produktet til dig, eller producenten via følgende e-mailadresse: [help@eppur.eu](mailto:help@eppur.eu).

### 2) **CE-overensstemmelse**

Dreeft-hjul opfylder kravene i forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr. I henhold til bilag VIII til denne forordning er parret af Dreeft-hjul blevet klassificeret som klasse I på baggrund af forordningens klassificeringskriterier. Overensstemmelseserklæringen er udarbejdet af producenten på dennes eget ansvar.

### 3) **Garanti og ansvarsbegrænsning**

Producentens lovmæssige garanti for mangler gælder i 2 år fra produktets fakturadato, forudsat at udstyret anvendes normalt.

Sliddele er ikke omfattet af den lovmæssige garanti for manglende overensstemmelse, da de slides under normal brug af produktet:

- Dæk
- Indvendige slanger
- Fælgkanter
- Gripbelægnings på håndringe (light grip/tetra-udstyr/carbolife)

Producenten er ansvarlig for mangler, hvis produktet anvendes i overensstemmelse med beskrivelserne og anvisningerne i denne vejledning. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes brug, der ikke er i overensstemmelse med de anvendelsesbetingelser, der er angivet i dette dokument.

Garantikrav kan kun rettes til den leverandør, hvorfra produktet er erhvervet.

### 4) **Tilsigtet anvendelse**

Inden du tager produktet i brug, skal du gøre dig bekendt med håndtering, betjening og anvendelse for at undgå ulykker og personskader.

Vær opmærksom på følgende punkter:

- Brugere og deres plejepersonale skal være uddannet i brugen af Dreeft-hjul af specialiseret personale ved hjælp af denne brugsanvisning.
- Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af specialiseret personale. I tilfælde af problemer skal du kontakte den leverandør, der har leveret produktet til dig.
- Alle opdateringer til bruger- og monteringsvejledningen er tilgængelige på eppur.eu-webstedet i forhandlerområdet.

## II. PRODUKTBESKRIVELSE

### 1) Funktion

Dreeft er et par manuelle kørestolshjul med indbygget bremse. Navet på hvert hjul indeholder et bremsesystem, der kan betjenes via hjulets håndring, hvilket giver brugeren mulighed for at bremse uden risiko for skader på hænderne. For at betjene bremsen skal håndringen trækkes bagud. Bremskraften er proportional med den kraft, der udøves på håndringen. Hjulparret kan monteres på kørestolen ved hjælp af en adapter, der fastgøres til kørestolens stel, eller direkte på hjulene. Dreeft-hjul er designet til selvstændig eller assisteret mobilitet for personer med delvis eller total funktionsnedsættelse i underekstremiteterne.

Dreeft-hjul kan bruges både udendørs og indendørs på stabilt underlag.

### 2) Generelle oplysninger

<i>Beskrivelse af Dreeft-hjul</i>	Dreeft er et hjulpar til manuelle kørestole, der indeholder et "bagpedal"-bremsesystem. Navet på hvert hjul indeholder et bremsesystem, der kan styres via håndringen. Dreeft gør det muligt for brugere af manuelle kørestole at bremse, dreje og sænke farten med mindre anstrengelse af overkroppen og uden at gnide hænderne.
<i>Tilsligtet anvendelse</i>	Eliminering af friktion og reduktion af den krævede kraft til at bremse hjulene på en manuel kørestol.
<i>Indikationer</i>	Brugere af manuelle kørestole, hvis kognitive evner gør det muligt for dem at bruge bremsesystemet sikkert, og som af medicinske årsager og/eller på grund af deres omgivelser har behov for intermitterende eller permanent assisteret bremsning. Manglende evne til at udøve kraft kan skyldes koronar og/eller respiratorisk insufficiens og/eller muskuloskeletale, neurologiske eller muskulære lidelser i de øvre lemmer.
<i>Kontraindikationer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brugere, der ikke er i stand til at bevæge sig selvstændigt i en manuel kørestol.</li> <li>- Hemiplegiske brugere</li> <li>- Brugere, der vejer mere end 120 kg.</li> </ul>

### 3) Tekniske data

#### 1. Dimensioner og vægt på Dreeft-hjul

Hjulets vægt afhænger af de komponenter, der vælges på måleskemaet, som findes på [eppur.eu](http://eppur.eu)-webstedet i **forhandlerområdet**.

Samlede dimensioner	Samlet diameter: 600 mm. Bredde (fra aksel til håndring): 87 eller 87 mm (80 mm i kompakt håndringposition)
Fælgdimensioner	ETRTO: 25/540 mm
Eger	24 sorte, galvaniserede stål-eger
Type håndring og fastgørelse	Håndring med 6 M5-indsatser (D = 513 mm)
Vægt	2700 g* pr. hjul Konfiguration*: RTD-adapter, Schwalbe Marathon+ dæk, "klassisk" aluminiumsfælg + aftageligt greb For en anden konfiguration henvises til bestillingsformularen*
Forventet levetid	5 år
Maksimal brugervægt	120 kg

#### 2. Miljøforhold

Dreeft-hjul skal:

- opbevares tørt;
- ikke udsættes for ekstreme temperaturer (under -20 °C eller over 40 °C);
- ikke må bruges i saltvand;
- beskyttes mod sand eller andre støv-/snavspartikler, der kan påvirke hjulenes brug og bremsefunktion.

Dreeft-hjul kan bruges i regnvejr. Dreeft-hjulkomponenter er designet til at være korrosionsbestandige: alle komponenter, der er i kontakt med omgivelserne, er beskyttet af en overfladebehandling, såsom anodisering eller maling. Indersiden af navet er fyldt med fedt og beskyttet af stænktætte tætninger.

#### 3. Materialer

Materialerne afhænger af de komponenter, der vælges på måleskemaet, som findes på [eppur.eu](http://eppur.eu)-webstedet i forhandlerområdet.

Nedenstående komponenter er fælles for alle Dreeft-hjul.

Fælg	Aluminium
Eger	Stål
Nav	Stål
Håndringflange	Aluminium
Dæk	Gummi
Hurtigudløseraksel	Stål og aluminium

#### 4. Identifikationsmærkat


Der er anbragt en identifikationsmærkat for medicinsk udstyr på indersiden af aluminiumsflangerne.



- |   |  |
|---|--|
| 1. Producentens adresse                         | 7. Læs brugsanvisningen inden brug             |
| 2. Handelsnavn                                  | 8. CE-mærket produkt                           |
| 3. Produktnummer                                | 9. Adresse på den schweizis repræsentant       |
| 4. Fremstillingsdato                            | 10. Maksimal brugervægt                        |
| 5. Skørt produkt                                | 11. UDI-sporbarhedsnummer, der lyd som følger: |
| 6. Må ikke anvendes, hvis emballagen beskadiget | (01) PRODUCENTKODE                             |
|   | (11) PRODUKTIONS DATO ÅÅMMDD                   |
|   | (21) SERIENUMMER                               |


#### 4) Hjulkomponenter

##### 1. Oversigt

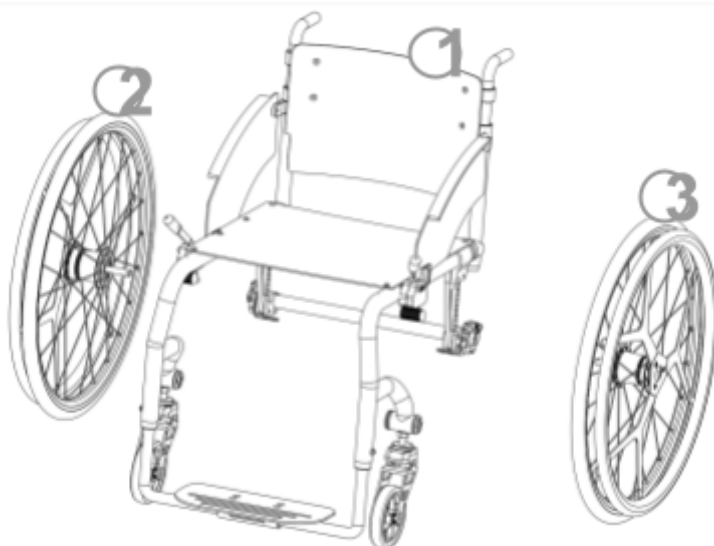

1. Kørestolsstel
2. Højre hjul
3. Venstre hjul

## 2. Komponenter

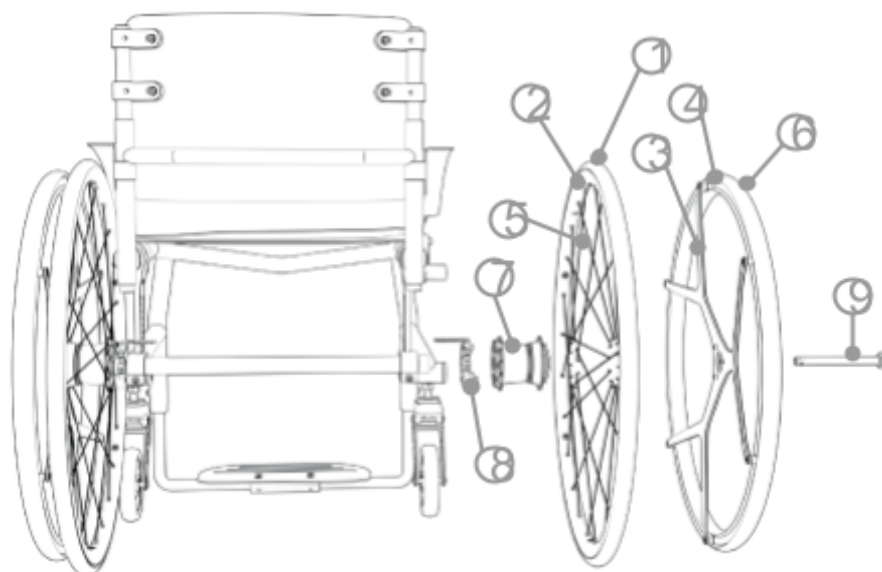

- |               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 1. Dæk        | 6. Grippy-belægning til håndring |
| 2. Fælg       | 7. Nav                           |
| 3. Hjulflange | 8. Adapter                       |
| 4. Håndring   | 9. Hurtigudløseraksel            |
| 5. Eger       |                                  |

### III. BRUG AF DREEFT-HJUL

#### 1) Montering og demontering af hjul

##### 1. Dreeft-hjulens kompatibilitet med kørestole

Adapteren og akslen skal passe til den kørestol, som hjulene monteres på.

**⚠ Hvis en aksel eller adapter ikke passer til kørestolsmodellen, skal du stoppe med at bruge den og kontakte den forhandler, der har leveret produktet.**

Forhandleren, der leverer hjulene, skal sikre, at adapterens referencenummer er kompatibelt med din kørestol. Hvis du er i tvivl, eller hvis du skifter kørestol, skal du bede din forhandler om bekræftelse. Du kan udfylde kompatibilitetsformularen, der findes på hjemmesiden eppur.eu.

#### 2. Trin til betjening

- Fremadkørsel

Dreeft-hjulene aktiveres til fremadgående bevægelse ved at skubbe håndringen fremad. Når du bevæger dig fremad, er aktiveringen direkte, dvs. på samme måde som et konventionelt hjul.

- Frihjul

Under fremadkørsel kan håndringen forblive stationær i forhold til kørestolen uden at forhindre kørestolen i at køre fremad. Håndringens friløbsposition giver mulighed for et par centimeters "frit spil", der hverken aktiverer fremadkørsel eller bremsen.


- Bremsning

Under fremadkørsel aktiverer tryk på håndringen i modsat retning hjulets bremsesystem. Decelerationen er proportional med den kraft, som brugeren udøver bagud.


- Bakke

Når kørestolen er standset, aktiveres baghjulene ved at skubbe bagud. De to hjul kan betjenes uafhængigt af hinanden for at styre kørestolen.

#### 3. Montering og demontering af Dreeft-hjul

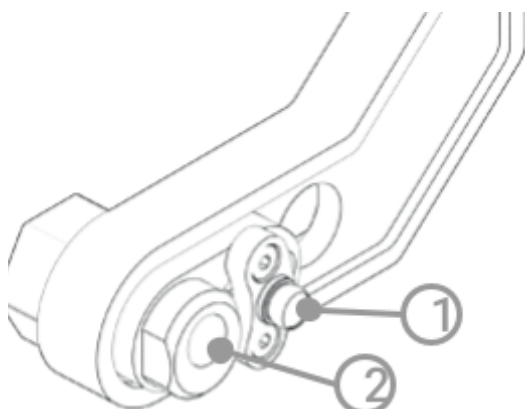


1. Adaptercentreringsstift
2. Akselhylster

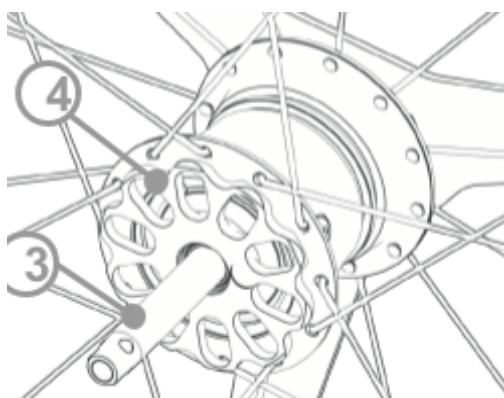

3. Hurtigudløseraksel til drivhjul
4. Navblomst

Sådan monterer du hjulene på din kørestol:

1. Sørg for, at du ikke vender det højre hjul (**gul prik**) og det venstre hjul (**blå prik**) om
2. Tryk på trykknappen på hurtigudløserakslen (3).
3. Indsæt drivhjulets akse (3) i kørestolens akselhylster.
4. Drej hjulet, indtil centreringsstiften (1) på adapteren går ind i et af hullerne i navkappen (4) (gælder kun for adapterne A, B eller C).
5. Kontroller, at trykknappen er sprunget ordentligt ud.
6. Træk i hjulet for at kontrollere, at det er fastlåst i stedet.

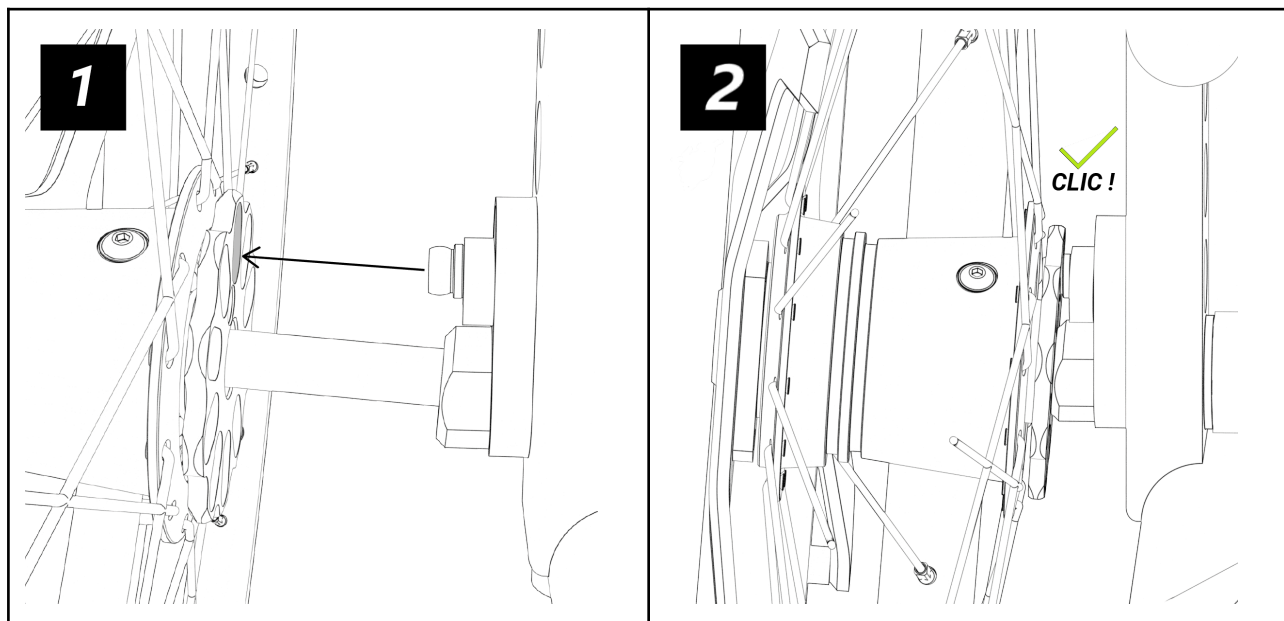

**⚠ Kontroller altid, at hjulet er låst, ved at trække det udad efter hver montering.**

**⚠ Sørg for, at det højre hjul er til højre (**gul prik**) og det venstre hjul er til venstre (**blå prik**). Hvis de to hjul er byttet om, fungerer bremsesystemet ikke.**

#### **4. Montering af andre hjulmodeller, når kørestolen er udstyret med adaptere A, B eller C**

**⚠ Når kørestolen er udstyret med Drift-adaptere A, B eller C, kan andre hjulmodeller blive uforenelige med kørestolen. For at fortsætte med at bruge andre hjul (f.eks. kørestolens originale hjul eller MTB-hjul) skal du bruge RTD-adapteren.**

## **2) Brug af hjulene**

### **1. Sikkerhedsoplysninger**

Hjulene betjenes ikke direkte via håndringen som på et konventionelt hjul. Håndteringen af den manuelle kørestol er derfor helt anderledes, og det er nødvendigt at øve sig under sikre forhold, inden man tager udendørs.

## 2. Første ture med en kørestol udstyret med Dreeft-hjul

Når du bruger hjulene for første gang, skal du udføre følgende øvelser på et fladt underlag sammen med en hjælper for at sikre, at du føler dig tryk ved hjælpemidlet. Hjælperen skal stå bag kørestolen for at kunne gribe ind, hvis du falder, mens du vænner dig til hjælpemidlet.

- **Fremadkørsel:** Skub håndringene fremad for at køre fremad.
- **Bremsning:** Skub håndringene bagud, indtil de når stop, og træk, indtil kørestolen standser helt.
- **Bakkørsel:** Skub håndringene bagud, indtil de når stop, og fortsæt derefter med at trække for at bakke.
- **Passering af forhindringer:** Løft forhjulene for at passere forhindringen. Vær opmærksom på slør, som kan gøre det sværere at opretholde den statiske balance.

 **Øv dig i at vænne dig til slør og undgå at bremse for brat.**

 **Øv dig aldrig i at køre på to hjul eller passere forhindringer uden anti-tip-hjul eller uden en person bagved, der kan gribe dig, hvis du falder.**

## 3) Vedligeholdelse af hjul

Brug ikke aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler eller hårde børster til rengøring. Rengør hjulene med et mildt rengøringsmiddel og vand. Tør alt hurtigt og grundigt. For at desinficere produktet skal du tørre hjulet af med en klud dyppet i en opløsningsmiddelfri bakteriedræbende opløsning. Tør navet, fælgen og bremsearmen omhyggeligt af.

 **Hvis fedt vaskes eller blæses ud af kuglelejerne eller navet med trykluft, kan der opstå skader.**

 **Dæktrykket skal være i overensstemmelse med det tryk, der er angivet på dækket.**




## 4) Transport af hjulene

Hjulene kan afmonteres, så kørestolen kan transporteres i et køretøj.

 **Sørg for at begrænse stød på hjulene under transport.**

# IV. SIKKERHED

## 1) Betydning af advarselssymboler

-  Advarsel om potentielle risici for ulykker og alvorlige skader.
-  Advarsel om potentielle risici for ulykker og skader.
-  Advarsel om mulig teknisk skade.

## 2) Generelle sikkerhedsoplysninger før brug af Dreeft-hjul

 **Risici forbundet med forkert brug af produktet (tab af bremsefunktion, fald, væltning osv.)**

**Situation:**

- **Overskridelse af brugstiden**
- **Defekte dæk**

Råd:

- Brug af produktet ud over den anbefalede levetid (5 år) øger de resterende risici. I følgende tilfælde skal du stoppe med at bruge enheden og kontakte din specialforhandler:
  - Dårlig bremseevne
  - Brud eller problemer med adapterne
  - Hjulskævhed
  - Brudte eger
  - Punkteret eller fladt dæk
  - Enhver usædvanlig adfærd i håndringen eller bremsefunktionen
- Når levetiden er udløbet, anbefales det, at brugeren eller ledsageren kontakter de specialiserede personale, der har indstillet hjulene, eller virksomhedens kundeservice. Brugeren kan få oplysninger om kendte risici og de aktuelle muligheder for reovering af produktet.
- Sørg for, at dækkene ikke er slidte eller beskadigede.
- Udskift dækkene, hvis de er beskadigede, eller kontakt din specialforhandler for at få hjulene repareret.

### 3) Sikkerhedsoplysninger ved brug af Dreeft-hjul

**● Risiko for, at fingrene kommer i klemme**

- Fingrene kan komme i klemme mellem egerne og fælgen, når hjulene bruges
- Fingrene kan komme i klemme mellem håndringen og fælgen ved et sidekollision

Råd:

- Placer ikke fingrene mellem egerne og håndringens flange, når hjulet er i brug, og når det drejer.
- Monter en plastflange på hjulets eger for at forhindre risikoen for, at fingrene klemmes fast.

**● Risiko for overophedning af hjulnavet****Situation:**

- Når man kører ned ad en lang, stejl skråning, kan Dreeft-hjulets bremsesystem blive overophedet og ikke længere fungere korrekt.  
**Bremsesvigt udgør en risiko for, at brugeren falder, hvilket kan medføre blå mærker eller brud.**

Råd

- Undgå at køre på veje med lange, meget stejle bakker. Hold regelmæssige pauser på lange bakker for at forhindre, at bremsesystemet overophedes.

**● Risici under kørsel (væltning, fald, stød)****Situation:**

- for kraftig opbremsning
- dårlige reflekser på grund af bremsevaner
- uøvet eller uerfaren bruger
- pludselig acceleration
- farlig kørsel

Tips:

- Udfør træningsøvelserne for brug af Dreeft-hjul, der er inkluderet i denne manual (side 10).
- Brug aldrig enheden uden anti-tip-hjul, medmindre du har lært at køre på to hjul. Sådan lærer

du at køre på to hjul: Øv dig under sikre forhold med en støttebælte, der holdes af uddannet tredjepart, eller med en person bag dig.

- Lær at bruge hjulene på din kørestol ved hjælp af den selvtræningsvejledning, der beskrevet i manualen.
- Forsøg ikke at køre på skråninger, der er stejlere end 7° og/eller den grænse, der anbefales kørestolsfabrikanten. Systemet forhindrer ikke tab af vejgreb, hvilket resulterer i tab bremsefunktion.

#### 4) **Generelle sikkerhedsoplysninger ved montering af Dreeft-hjul**

##### ● **Manglende kontrol af monteringen før brug**

###### **Situation:**

- **Vælter,**
- **Fald,**
- **Tab af bremsefunktion**

###### **Råd:**

- Når du bruger den for første gang, skal du kontrollere, at hjulene er korrekt monteret i rammen, og at akslen er sikkert låst.
- Kontroller, at højre og venstre hjul ikke er byttet om.
- Sørg for, at de manuelle bremses på hjulet stadig virker.
- Sørg for, at dæktrykket er mellem 6 og 10 bar (marathon +).

##### ● **Risici ved forkert montering (bremsen virker ikke)**

###### **Situation:**

- **Forkert montering af adapteren på stellet / omvendt montering af adapterne**
- **Forkert indstilling af parkeringsbremsen under montering,**
- **fejl ved afmontering/montering af hjulene**
- **forkert valg af adapter (f.eks. ved skift af kørestol)**

###### **Råd:**

- Efter montering skal du kontrollere, at hjulet fungerer korrekt, ved at dreje hjulet frit og trække håndringen bagud for at aktivere bremsen og stoppe hjulet.
- Kontroller, at hjulene er helt fastgjort, når parkeringsbremserne er aktiveret.
- Læs monteringsvejledningen, der forklarer monteringsvejledningen i detaljer.

## V. **VEDLIGEHOLDELSE**

### 1) **Sikkerhedsoplysninger**

Kontroller før hver brug, at Dreeft-hjulene er i god stand.

Hvis der er en fejl, må hjulene ikke bruges. Dette gælder i tilfælde af ustabilitet, tab af bremsefunktion eller teknisk svigt, der forhindrer brugeren i at bevare kontrollen. Specialiseret personale skal informeres så hurtigt som muligt for at udbedre eventuelle fejl.

Hvis du bemærker slitage, deformation, støj, skader eller løse dele, skal du kontakte specialiseret personale (forhandler eller producent).

Producenten anbefaler, at hjulene kontrolleres med jævne mellemrum af specialiseret personale hver 12. måned. Denne vedligeholdelse kan udføres samtidig med vedligeholdelsen af din manuelle kørestol.

Manglende vedligeholdelse kan medføre alvorlig personskade og/eller udgøre en livsfare for brugeren. Kun autoriseret personale eller producenten har tilladelse til at reparere og vedligeholde produktet. Hvis en reparation er nødvendig, udføres den om muligt af forhandleren, ellers sendes hjulene til producenten.

## 2) Vedligeholdelsesplan

<b>Kontrol</b>	<b>Foranstaltninger</b>	<b>Før brug</b>	<b>Hver måned</b>	<b>Hver 12. måned</b>
Betjening af kørestolens parkeringsbremses	Kontroller, at de er korrekt indstillet til at låse hjulene.	X		
Kontrol af dæktryk	Kontroller, at dæktrykket svarer til det, der er angivet for dæktypen.		X	
Hjulbremsernes funktion	Kontroller for eventuelle ændringer i slør og bremseevne.		X	
Kontrol af adapterne	Kontroller, at adapterne stadig sidder fast og ikke er deformede.			X

## 3) Identificering og reparation af fejl

Med lidt håndværksmæssig dygtighed kan du (eller en plejer) vedligeholde visse dele af dit produkt for at sikre, at det fungerer perfekt:

- Kontroller, at skruerne er strammet, især når du bruger kørestolen med Dreeft-hjul for første gang eller efter at have foretaget justeringer af kørestolen med hjulene og adapterne. Hvis der opstår et problem, skal du straks stoppe med at bruge kørestolen og kontakte din specialforhandler så hurtigt som muligt.
- Drivhjulssystemet skal kontrolleres for at sikre, at der ikke har samlet sig snavs eller støv på hjulakslen eller i akselbøsningen. Smør hurtigudløsningsakslen let fra tid til anden med en tynd, harpiksfri olie (f.eks. symaskineolie).
- Hvis Dreeft-hjulene bliver våde, skal de tørres af.

## VI. EFTER BRUG

### 1) Bortskaffelse

Ved bortskaffelse skal produktet returneres til en specialforhandler. Alle produktets komponenter skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende miljøbeskyttelsesbestemmelser i det pågældende land.

Bemærk, at alle dele undtagen dæk og slange er genanvendelige materialer.

### 2) Gendannelse af funktionsdygtig stand

I overensstemmelse med producentens krav i henhold til forordning (EU) 2017/745 kan det være nødvendigt at reovere produktet for at sikre brugersikkerheden, opretholde den tilsigtede ydeevne og forhindre svigt som forberedelse til et nyt liv.

Renovering må kun udføres af en kvalificeret og godkendt fagmand. Før hjulene genbruges, skal du være opmærksom på følgende punkter:

#### 1. Visuel inspektion

Kontroller hjulenes generelle tilstand:

Metal dele må ikke have buler eller ridser, der kan gøre komponenten skarp og forårsage skader på brugerens hænder. Om nødvendigt kan standardkomponenter såsom eger, fælge eller håndtag bestilles hos Eppur eller en autoriseret forhandler.

#### 2. Kontrol af bremsefunktionen

Kontroller bremsesystemets tilstand på den oprindelige kørestol, inden hjulene fjernes. Systemet skal gøre det muligt at standse kørestolen jævnt uden friktion eller overdreven kraftanstrengelse.

- Kontroller, at begge hjul fungerer ens: Kørestolen skal bremse i en lige linje, når der udøves samme kraft på højre og venstre side.
- Bremsningen skal være jævn, uden ryk, og må ikke generere støj. Hvis du bemærker mistænkelig adfærd, skal du kontakte Eppur for at få bremsesystemet bragt i overensstemmelse med kravene.

 **Indersiden af navet må kun demonteres og repareres af producenten, medmindre Eppur specifikt har godkendt det.**

#### 3. Egevinspektion

Kontroller egerne: Der må ikke mangle, være bøjedede eller beskadigede eger.

Drej hjulet og kontroller, at det ikke er skævt. En sideværts skævhed på mindre end 3 mm er acceptabel. En uddannet specialforhandler kan korrigere mindre skævheder i hjulet. I tilfælde af væsentlig deformation eller andre problemer skal du kontakte Eppur for en komplet renovering af hjulets eger.

#### **4. Udskiftning af forbrugsdele**

Monter et nyt sæt dæk, fælgbånd og slanger på hvert hjul.

Ved brug af håndringe med belægning (gummierede overflader) anbefales det også at udskifte håndringene.

#### **5. Desinfektion**

Rengør og desinficer derefter hele produktet i overensstemmelse med anvisningerne på side 10.


#### **6. Montering på en ny kørestol**

For at montere hjulene på en ny kørestol skal du konsultere kompatibilitetstabellen på [eppur.eu](http://eppur.eu) og kontrollere, om adapteren og hurtigudløserakslen passer til den nye kørestol.

Hvis tilpasningen ikke er kompatibel, skal du kontakte Eppur eller en autoriseret forhandler for at købe de nødvendige komponenter til at tilpasse hjulene til den nye kørestol.

Når du monterer hjulene på en ny kørestol, skal du sikre dig, at du har monteringsvejledningen (kan downloades fra [eppur.eu](http://eppur.eu)).

E P P U R

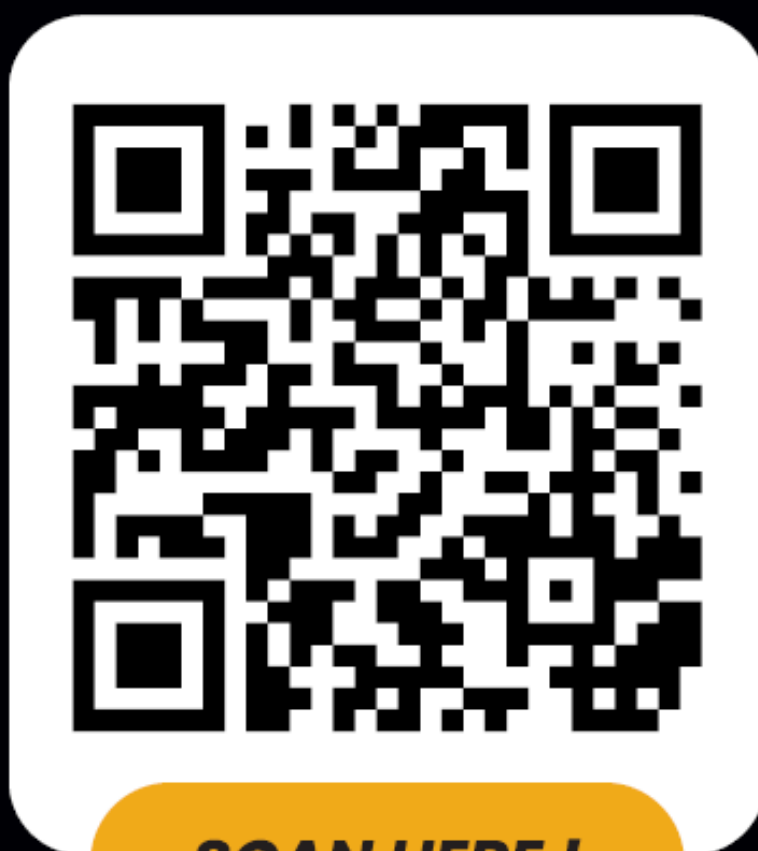**USER WARRANTY  
ACTIVATION****SCAN HERE !****+ QUICK START GUIDE**