


Monteringsanvisning E-Walk på Spirea 4NG (Ej 16tum)

MCG1183

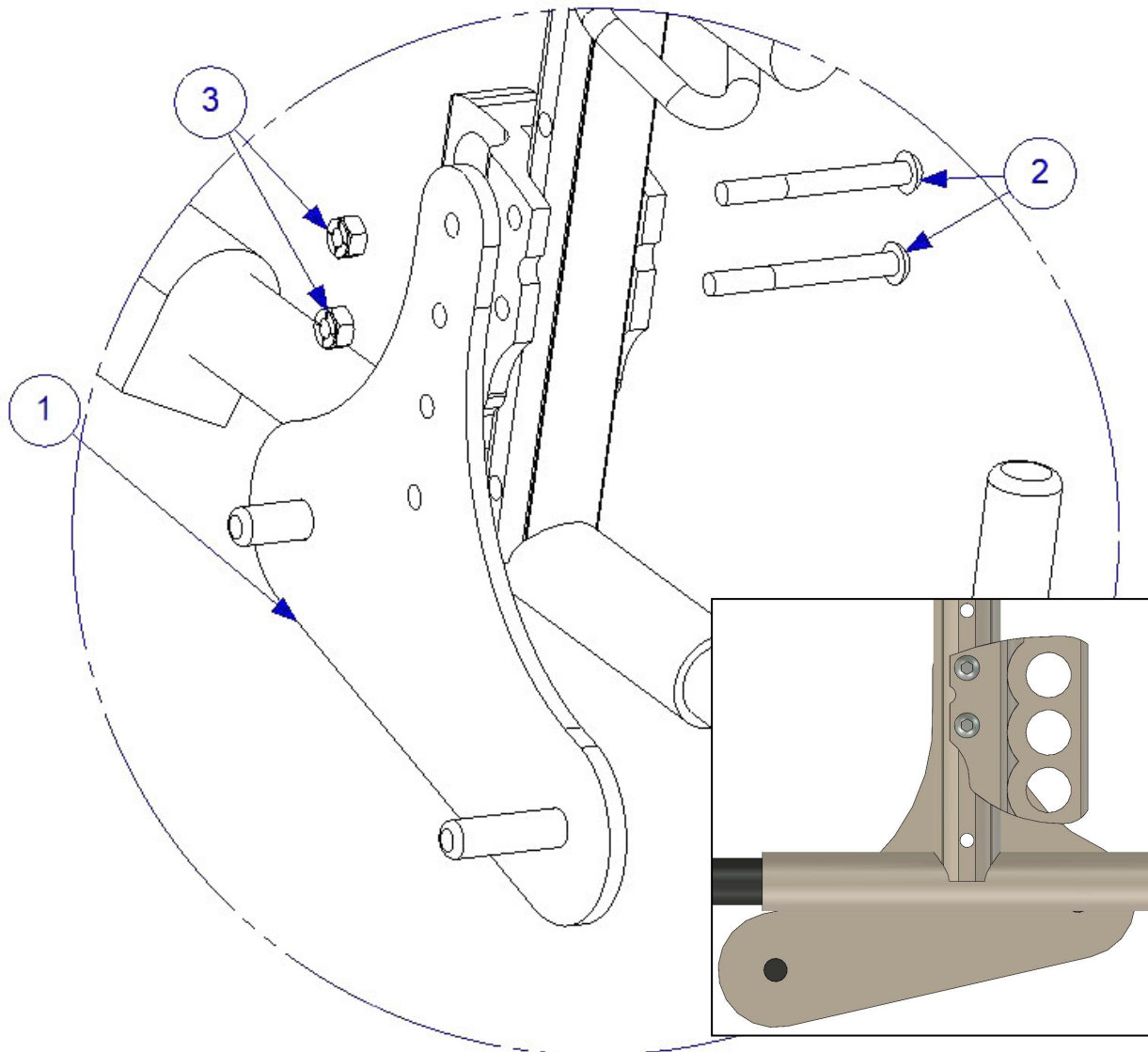


1. För montering av fästet på höger sida så skall följande ingå.

Placering.	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	MCG1183R	1	Höger Fäste
2	XSM6X55	2	Skruv M6 x 55
3	XSM6ML	2	Låsmutter M6


2. Optimal placering för eWalk fäste är att bakre pinne har en cirka höjd på 195 mm och då skall den främre vara 30 mm högre.

Center placerad styrkontroll



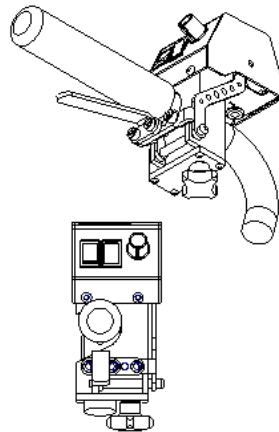


När det ej är monterat broms på körhandtaget, bör denna placering användas.

Sidoplacerad styrkontroll

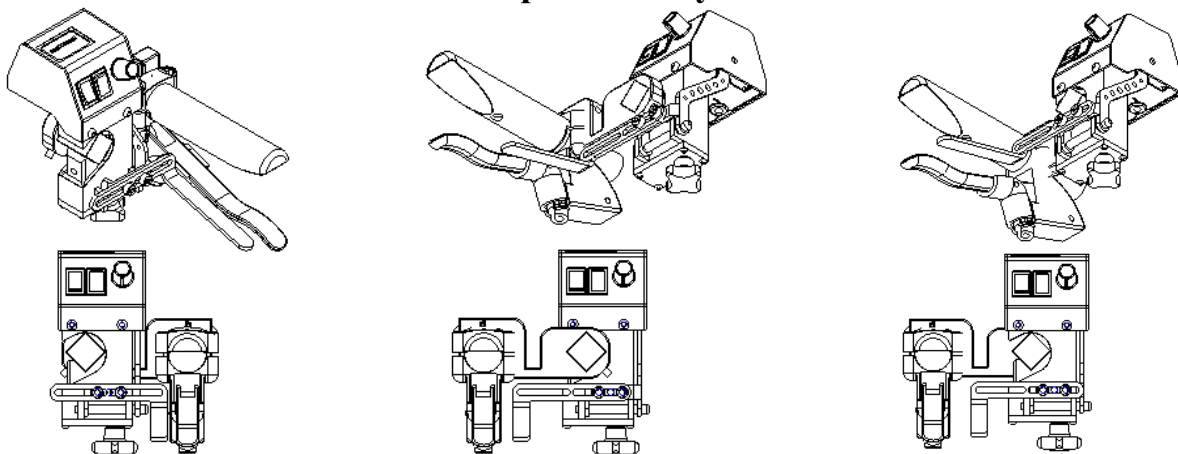

När det är monterat broms på körhandtaget användes sidoplacerad styrkontroll. Det finns olika monteringsalternativ, samt justerings möjligheter.

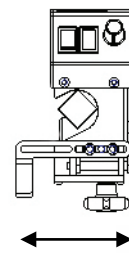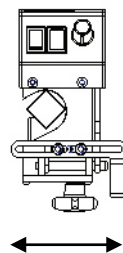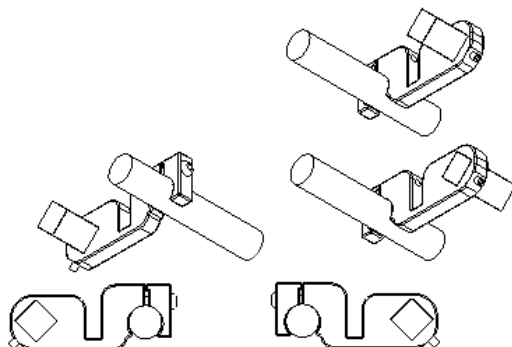

OBS! Använd Loctite på alla skruvar vid montering och justering.

Använd Loctite 2400 på alla skruvar

VARNING!

När man monterar styrkontrollen så skall man alltid kontrollera att styrkontrollens gashandtag eller dess övriga leder inte tar i eller ligger emot någonstans. Om reglage tar i eller ligger emot så kan detta leda till att gasen hänger sig och en olycka kan inträffa.

3. Montera nu Styrkontrollen på valfri plats.