



Monteringsanvisning

INFM7X20DSK, INFM7X22DSK,
INFM7X25DSK, INFM7X28DSK,
INFM7X30DSK, INFM7X32DSK

Infinity Adaptersats
Universal DSK

1. Säkerhet och föreskrifter

Symboler



WARNING!

Risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till skador på operatören eller andra personer.



FÖRSIKTIGHET!

Risk för materiella skador.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till materiella skador.



INFO

Extra viktig eller förklarande information.

Allmänna föreskrifter

Denna monteringsanvisning skall alltid följas vid montering av adaptersats INFM7 Universal DSK. För att sedan kunna koppla Infinity på rullstolen krävs att Infinity ställs in enligt separat monteringsanvisning.


Varningar



WARNING!

Monteringsarbeten och ändringsarbeten som beskrivs i detta dokument får endast utföras av utbildad servicetekniker, återförsäljare eller annan av Decon Wheel utsedd representant.

2. Översikt

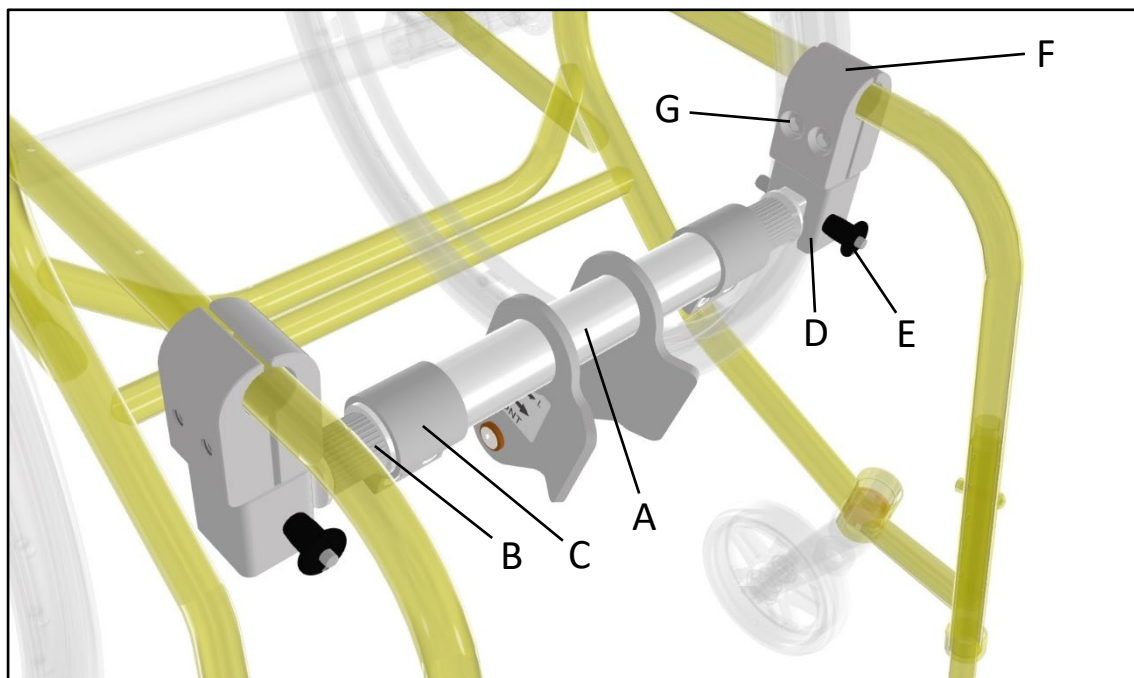

A Centrumrör adapterbalk

B Ytterrör adapterbalk

C Klämma adapterbalk

D Fäste adapterbalk



E QR-Pinne

F Ramklämma

G Skruv ramklämma



Utformningen av ramklämmorna (F) kan variera mellan olika rullstolsmodeller och kanske inte stämmer överens med bilden ovan.

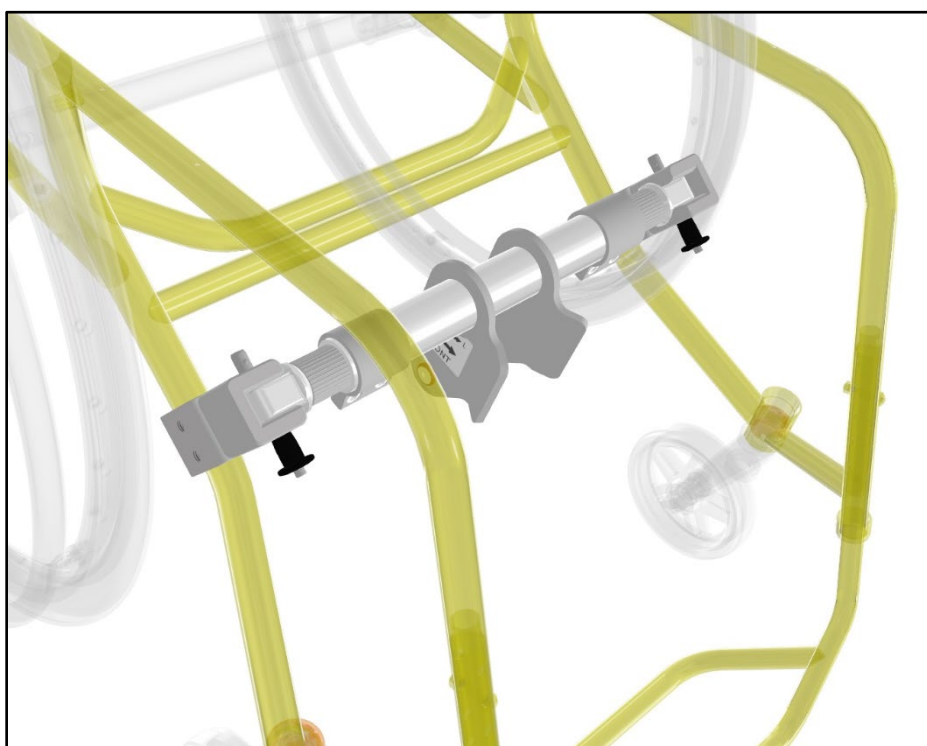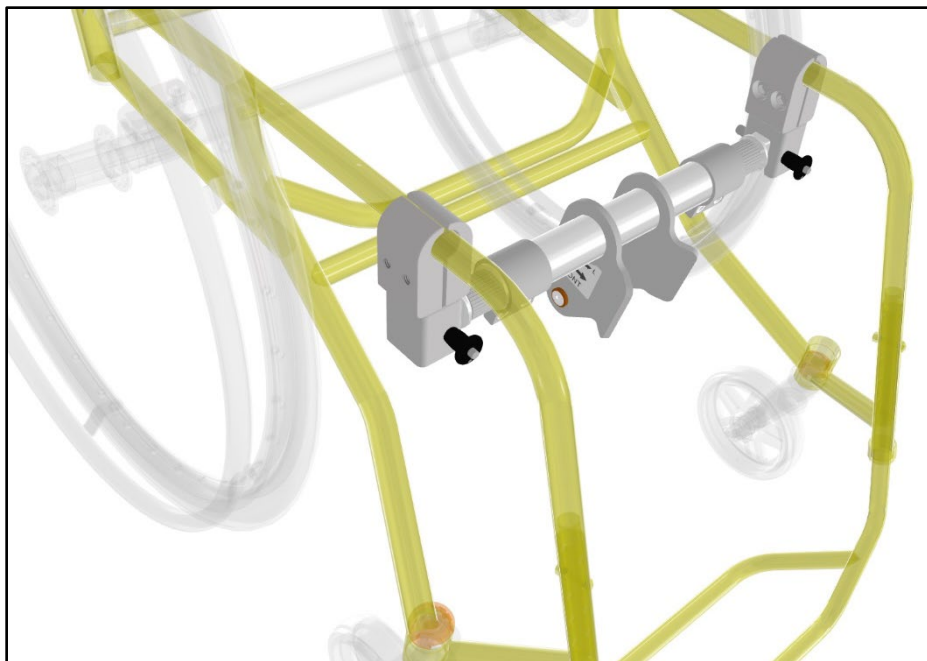

 INFO

Positionen för adaptersatsen kan variera mellan olika rullstolsmodeller. Montering kan ske både i övre och undre delen av rullstolens ram, se exempel ovan. Instruktionerna som följer gäller för båda alternativen.

3. Montering adapter kit

Montera först fäste adapterbalk (D) i klämmorna (F) med hjälp av medföljande skruvar (G) på rullstolens ram.

Dra i detta läge åt skruvarna (G) löst så att klämmorna (F) fortfarande kan flyttas utmed rullstolens ram.

Montera båda sidor.




WARNING!

Loctite 243 eller liknande skall appliceras på skruvarna vid montering.




Om klämmorna (F) monteras under sitsen i den övre delen av rullstolen bör måttet **X**, från dynans framkant till fäste adapterbalk (D) vara **20mm**.

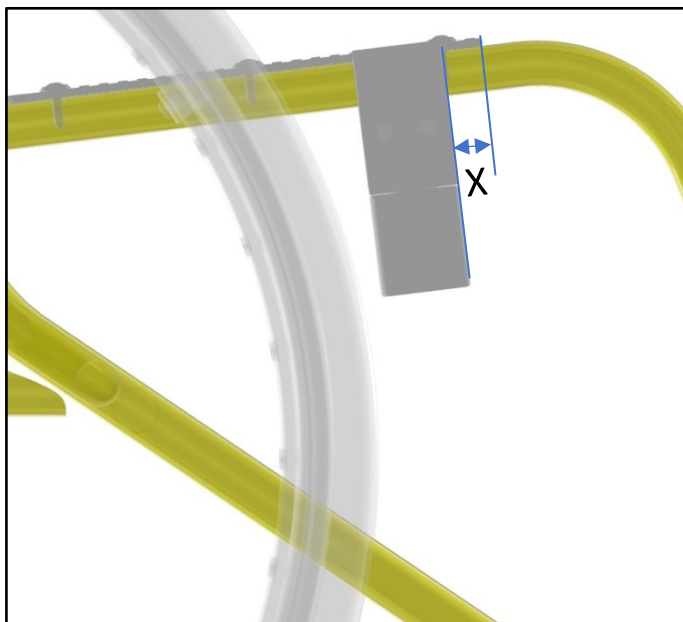

INFO

För att underlätta montaget kan rullstolens bromsar behöva monteras bort. På vissa stolar kan man även behöva lossa på sittklädseln för att göra plats för klämmorna (F) som greppar om rullstolens ramrör.

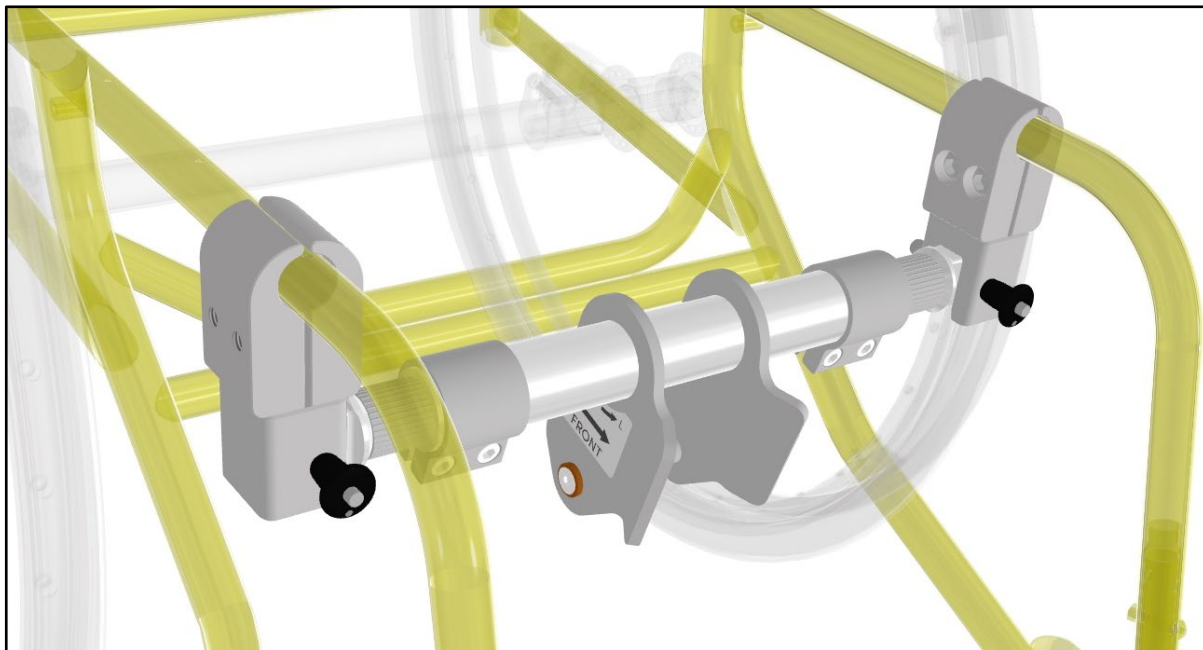

Montera den kompletta adapterbalken bestående av centrumrör (A), yterrör (B) och klämma (C). Denna fästs in i hållarna (D) med hjälp av QR-Pinnarna (E).

Se till att ändarna på dem yttre rören (B) är parallella så att adapterbalken passar i sina hållare. Centrumröret (A) skall kunna flyttas sidled samt roteras.

Dra nu åt skruvarna (G) i samtliga klämmor (F).

INFO

Kontrollera så att pilen på klistermärket monterat på centrumröret (A) pekar framåt i körriktningen. Om detta är vänt fel kommer det ej gå att koppla Infinity mot adapterbalken.


WARNING!

Skruvarna (G) i klämmorna (F) skall dras åt med ett moment om 20-24Nm.

4. Inställning adapterbalk


Adapterbalken har splines med fasta lägen inuti sig. Därför kommer vattenpasset troligen ej att hamna exakt i våg utan man får välja det hack som är närmst. Nivåverktyget har markeringar "H" och "L". Om bubblan i vattenpasset hamnar åt det håll som är markerat "H" kommer länkhjulen lyfta högre från marken än om bubblan hamnar åt det håll som är markerat "L".

Inställning av rätt vinkel för centrumröret kan ske på två sätt beroende på hur långt dem yttre rören är instuckna i centrumröret. Båda sätten beskrivs nedan.

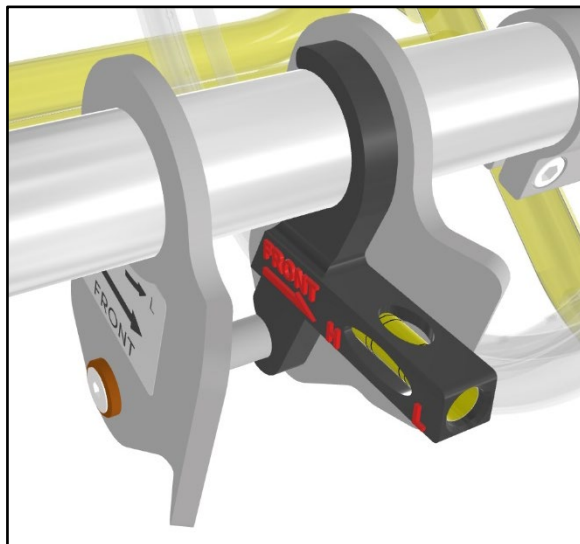


Alt1.

Med hjälp av det nivåverktyg som följer med leveransen av Infinity (inte adapterset). Ställ in rätt vinkel på centrumröret genom att vrida detta tills det hamnar i våg. Röret har splines inuti sig, det kommer kännas ett litet klick för varje steg som röret roteras. När rätt vinkel har uppnåtts, kontrollera att centrumröret är centrerat i rullstolen. Dra nu åt skruvarna i samtliga klämmorna (C).

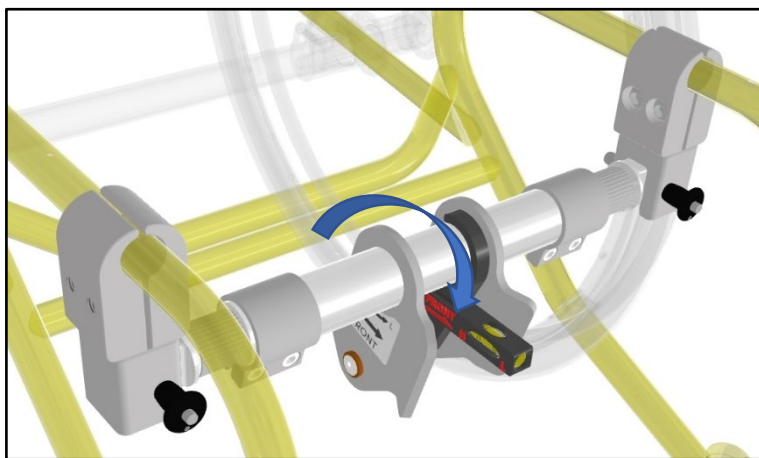


WARNING!

Skruvarna i klämmorna (C) skall dras åt med ett moment om 7-9Nm.

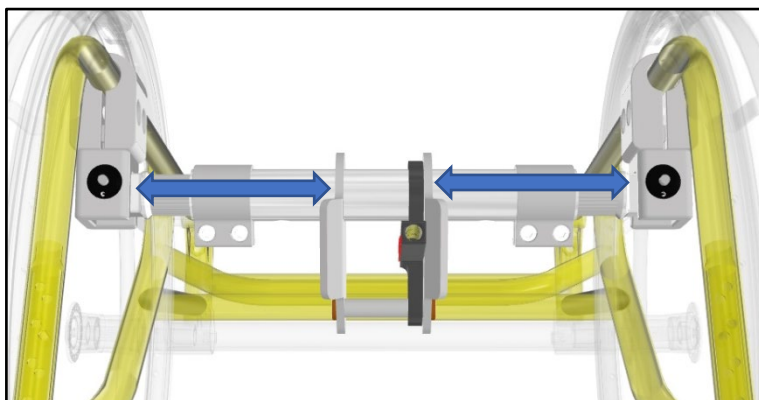


Alt.2

Med hjälp av det nivåverktyg som följer med leveransen av Infinity (inte adapter set) ställ in rätt vinkel på centrumröret. Montera endast ett innerrör i centrumröret och vrida detta tills det hamnar i våg. När rätt vinkel har uppnåtts, montera den andra innerröret i samma position/vinkel som det första. Kontrollera att centrumröret är centrerat i rullstolen. Dra nu åt skruvarna i samtliga klämmorna (C).

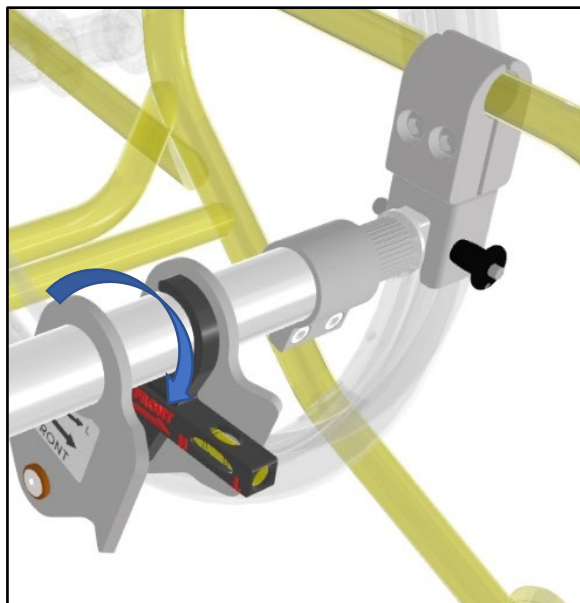**WARNING!**

Skruvarna i klämmorna (C) skall dras åt med ett moment om 7-9Nm.

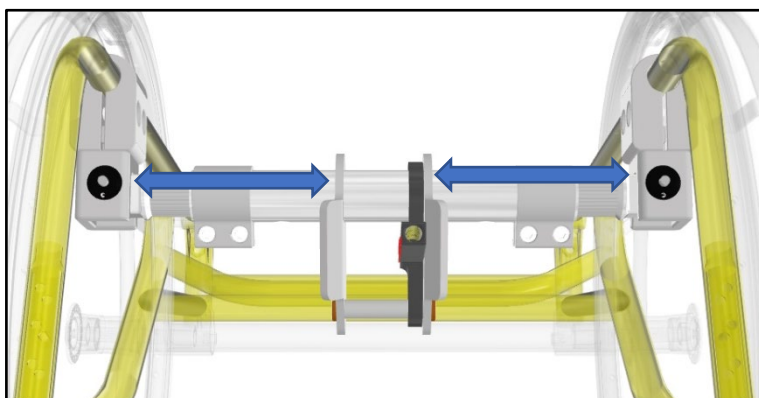**INFO**

I det fall rullstolens bromsar monterats bort vid montage av adapterbalken glöm ej att återmontera dessa. Om sittklädseln har lossats glöm ej heller att återmontera denna.

Läs nu igenom monteringsanvisningen för Infinity som följde med leveransen av denna.
Montera och ställ in Infinity enligt de anvisningar som anges i denna.

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 119, SE-314 93 Hyltebruk, Sweden
Tel: +46 (0)345 40880
Fax: +46 (0)345 40895
E-mail: info@decon.se

