



Monteringsanvisning för Etac Cross/ Twin MED3007


1. Demontera hjulen och tippskydden på båda sidorna.

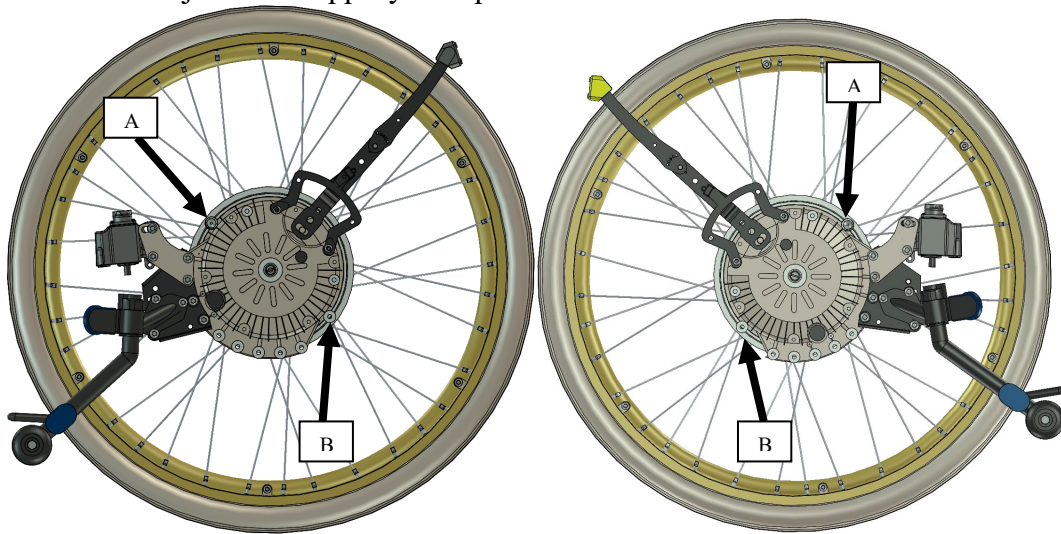

2. Kontrollera att stopp pinnen sitter enligt ett av de monterings alternativ som finns, se bilder både ovan och nedan.

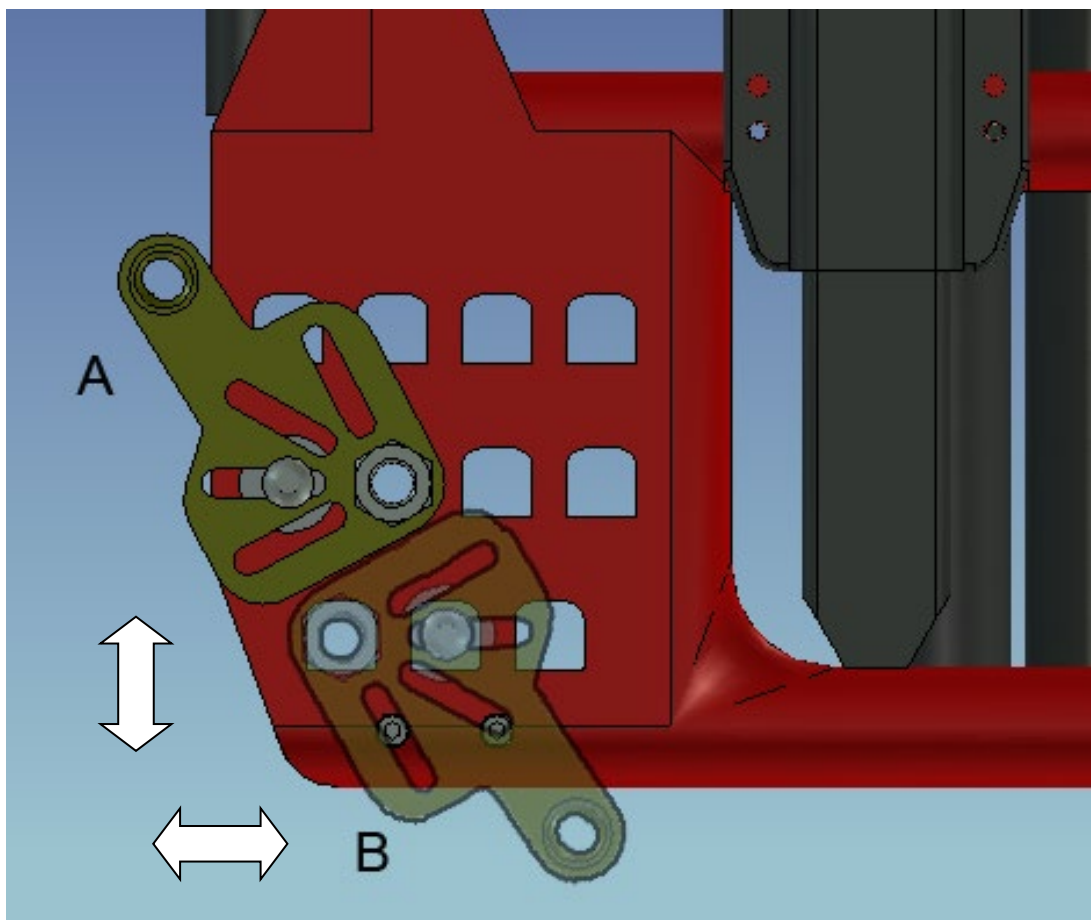


3. Montera nu fästet enligt bilderna ovan, som visar två monterings möjligheter av fästet på höger sida.

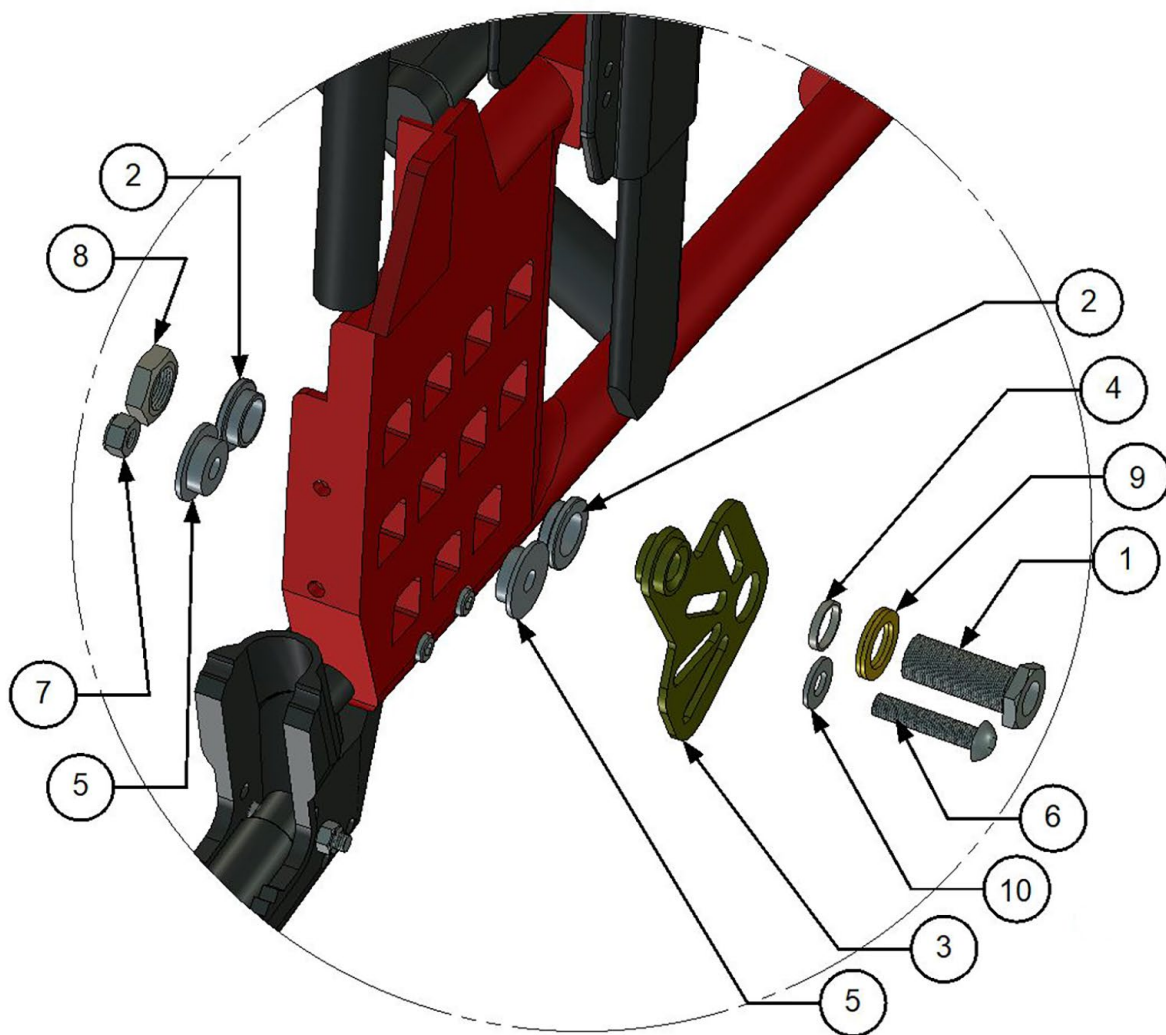


4. Detaljer som ingår för montering på en sida.


Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	HW069	1	Navhylsa
2	BR1100-03	2	Distans
3	MED 2004	1	Fäste
4	100 400 017	1	Distans
5	280008	2	Distans
6	XSM8X40	1	Skruv M8 x 40 Rundat huvud
7	XSM8ML	1	Låsmutter M8
8	XSM16M	1	Mutter M16
9	405239	1	Nordlock bricka
10	XSM8BR	1	Planbricka M8

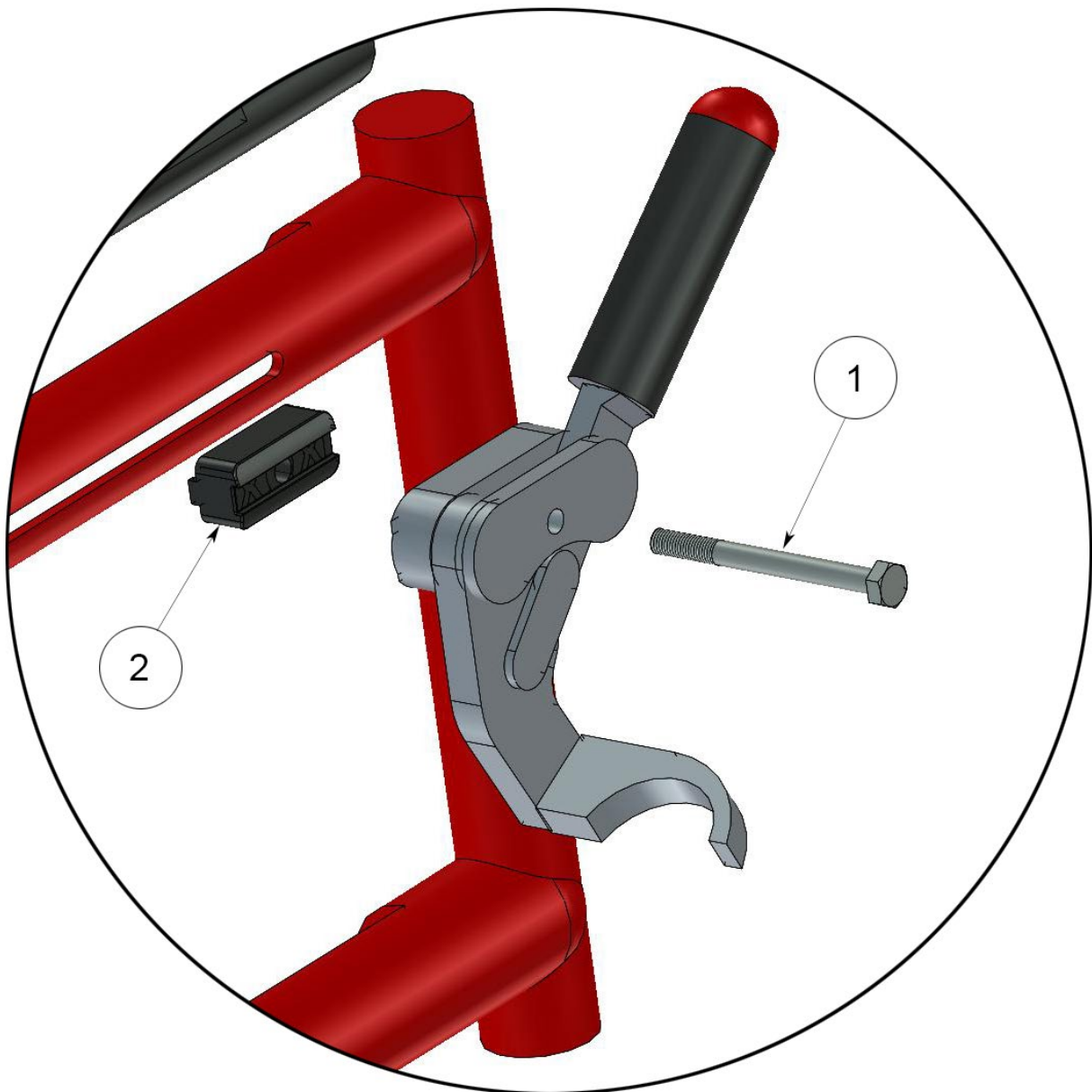

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	M6SM6X65	1	Bult M6 x 65
2	50393	1	Distans

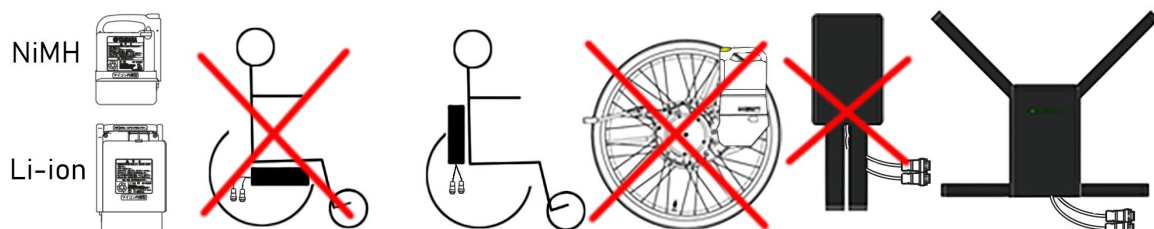


MED1348, MED1348L

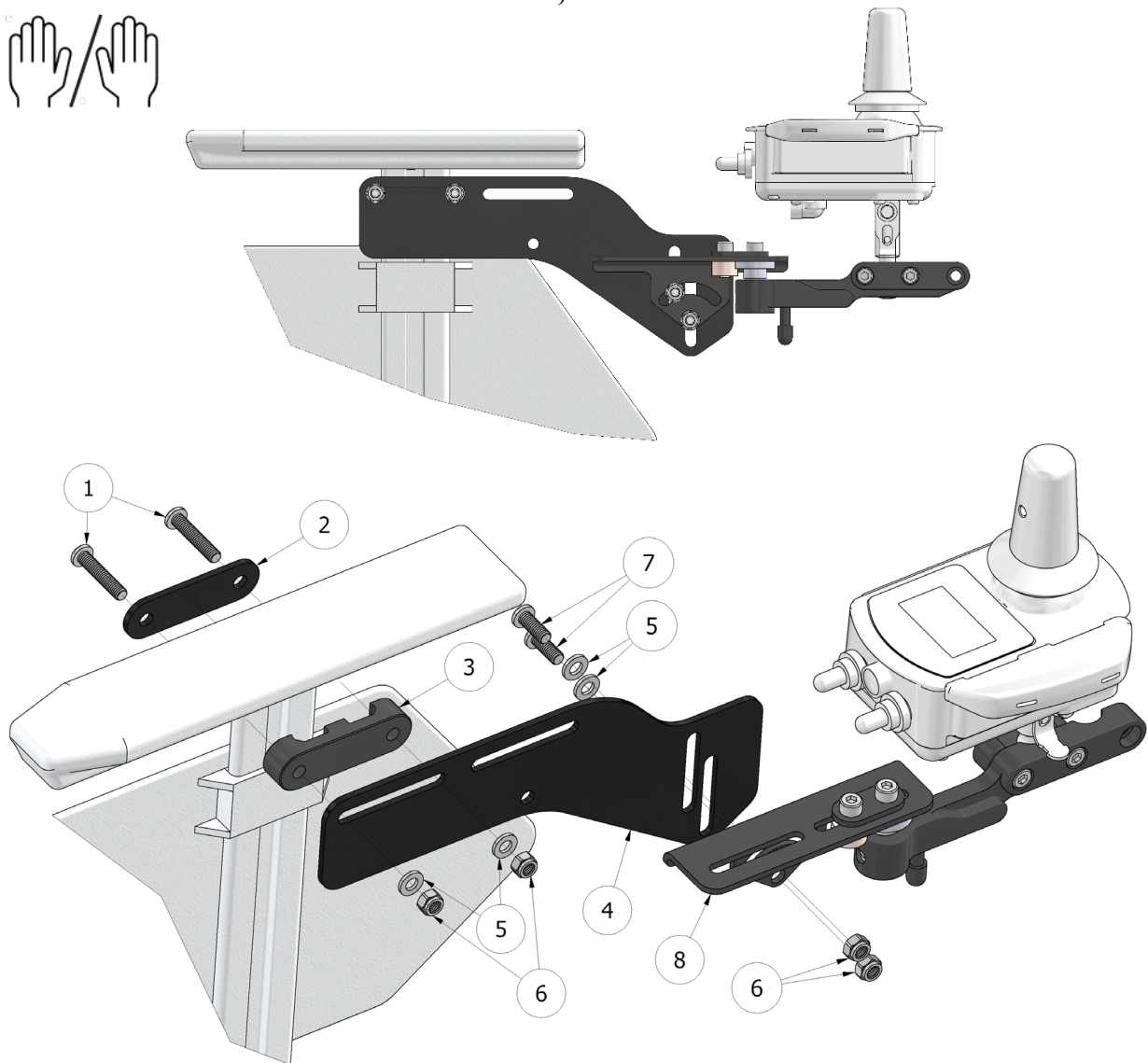


1	XSM6X30	2		
2	MED1547	1		
3	MED4078	1		
4	MED1501	1		(MED1348)
4	MED1482	1		(MED1348L)
5	XSM6BR	4		
6	XSM6ML	4		
7	XSM6X16	2		
8	XOC-48160-B0	1		

MED1644, MED1644L

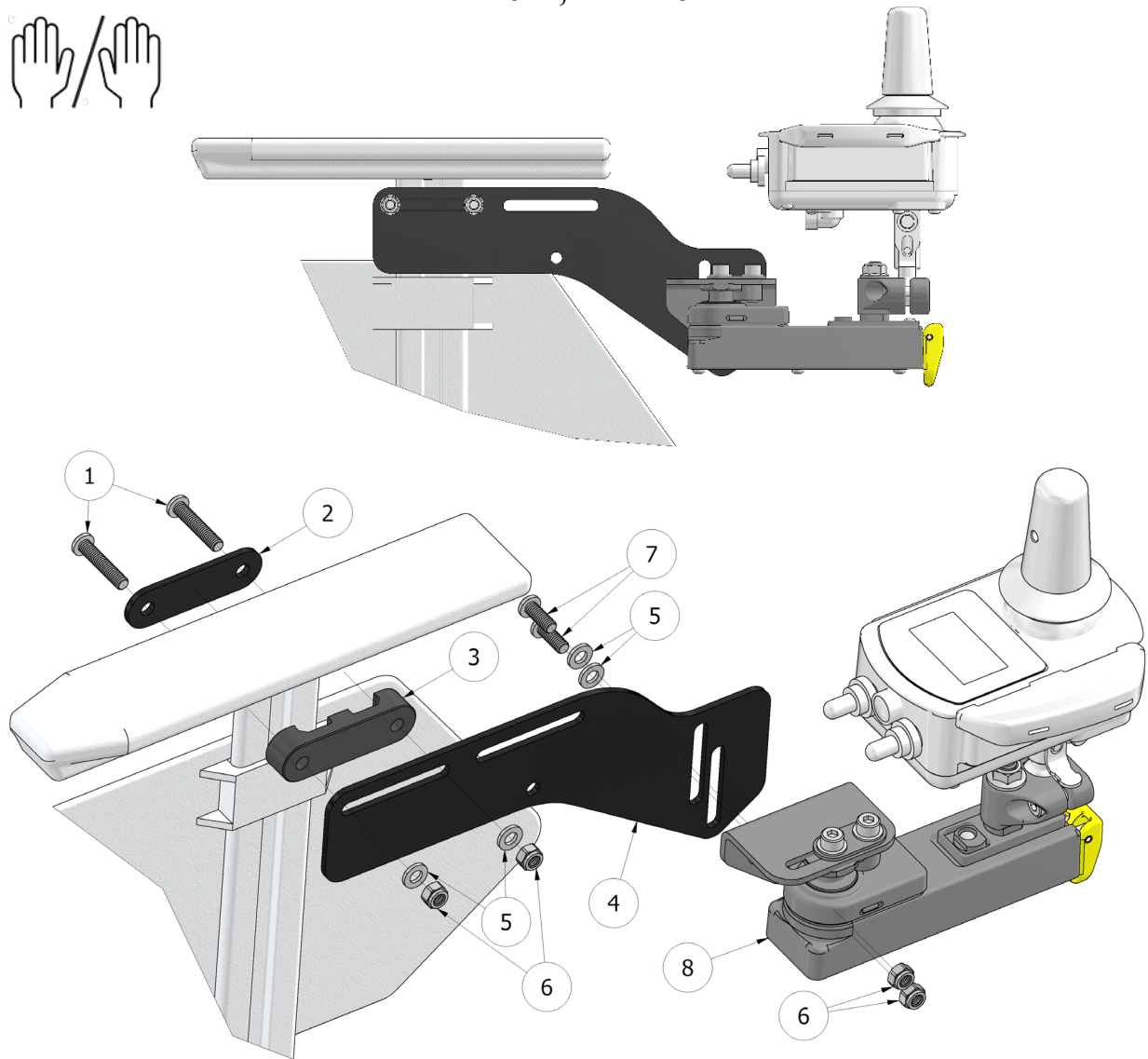


1	XSM6X30	2		
2	MED1547	1		
3	MED4078	1		
4	MED1501	1		(MED1644)
4	MED1482	1		(MED1644L)
5	XSM6BR	4		
6	XSM6ML	4		
7	XSM6X16	2		
8	X0F-48160-D00	1		

MED1356

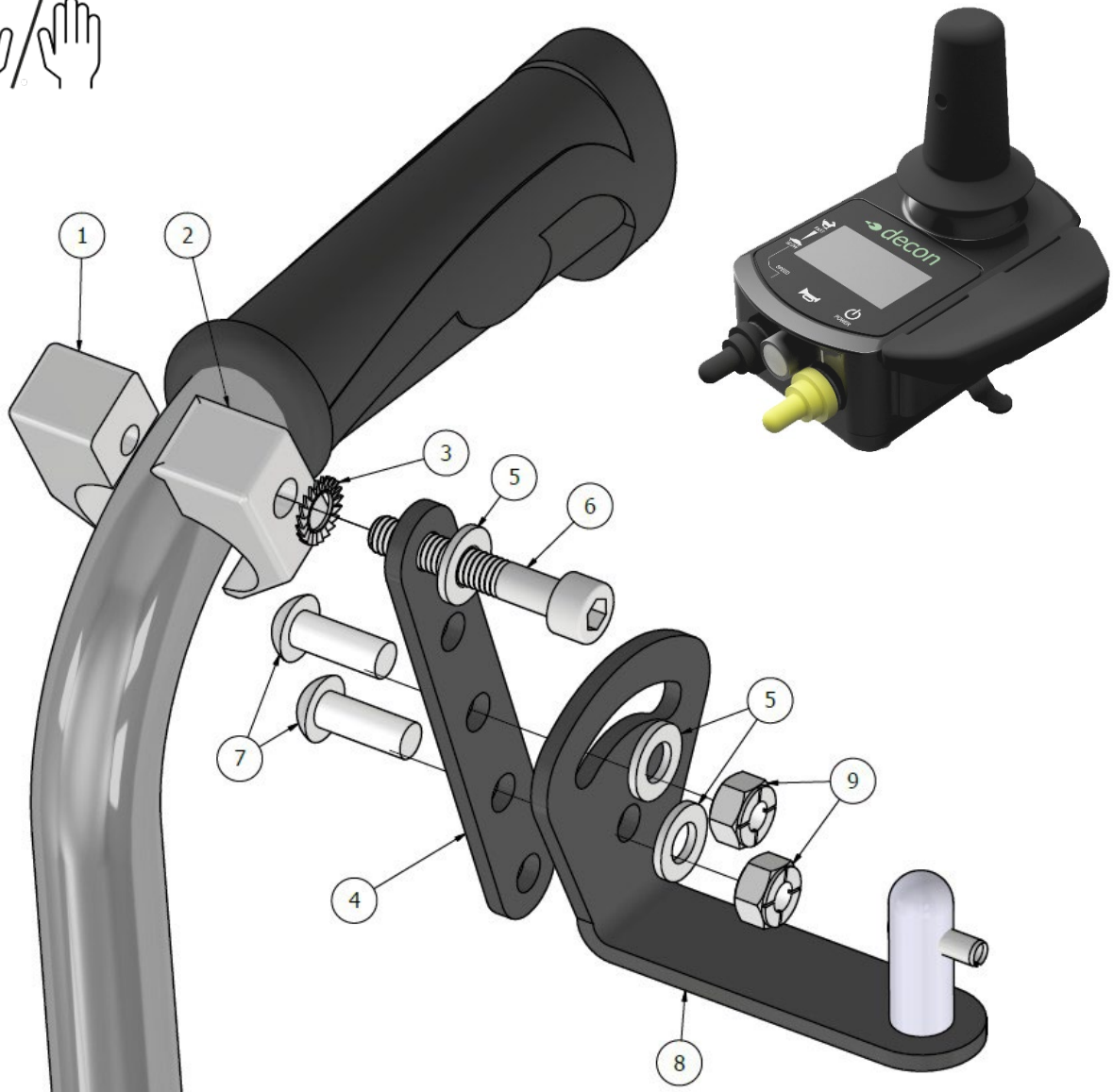

1	XA2-2612K-00	1	
2	XA2-2612E-00	1	
3	XSM6BRTG	1	
4	MED1317	1	
5	XSM6BR	3	
6	MC6SM6X35	1	
7	XSM6X16	2	
8	MED1316	1	
9	XSM6ML	2	

MED1252

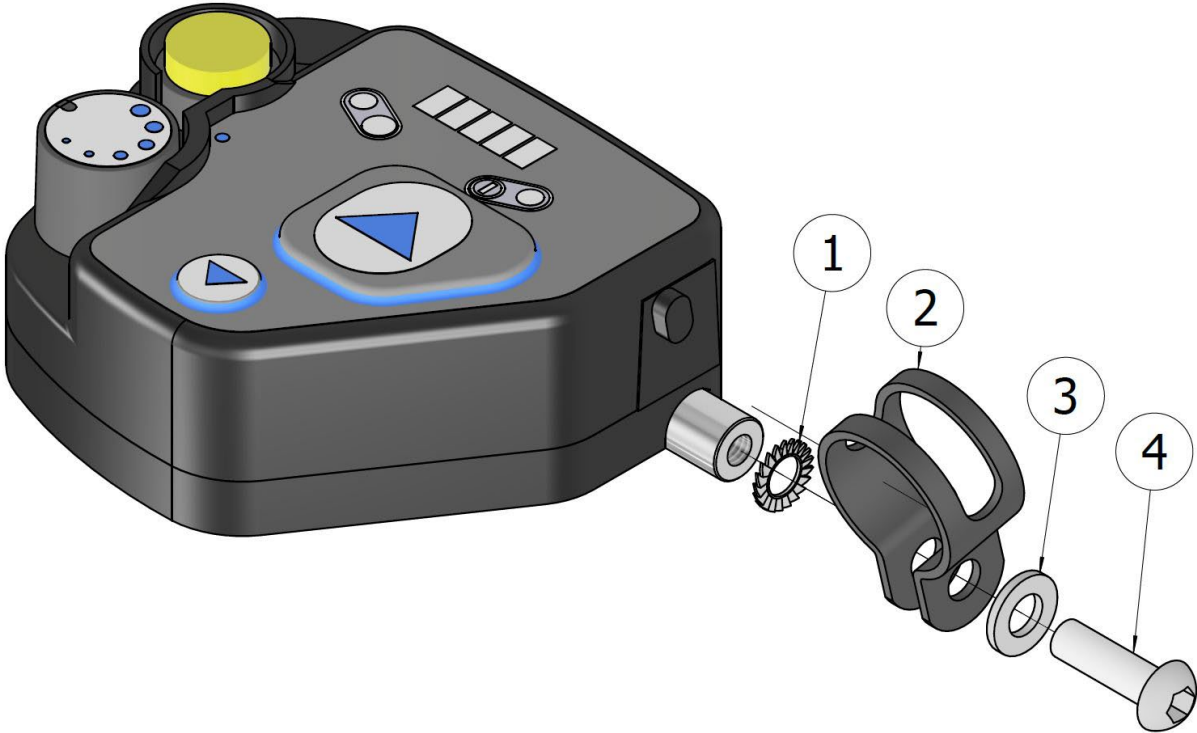


1	XSM6BRTG	1	
2	Xklamma2	1	
3	XSM6BR	1	
4	XSM6X20	1	



MED1252 + MED1643

MED1643

Vårdastyrningen är även möjlig att montera på vänstersida. För detta behöver man komplettera med MED1643, vilken beställs separat.

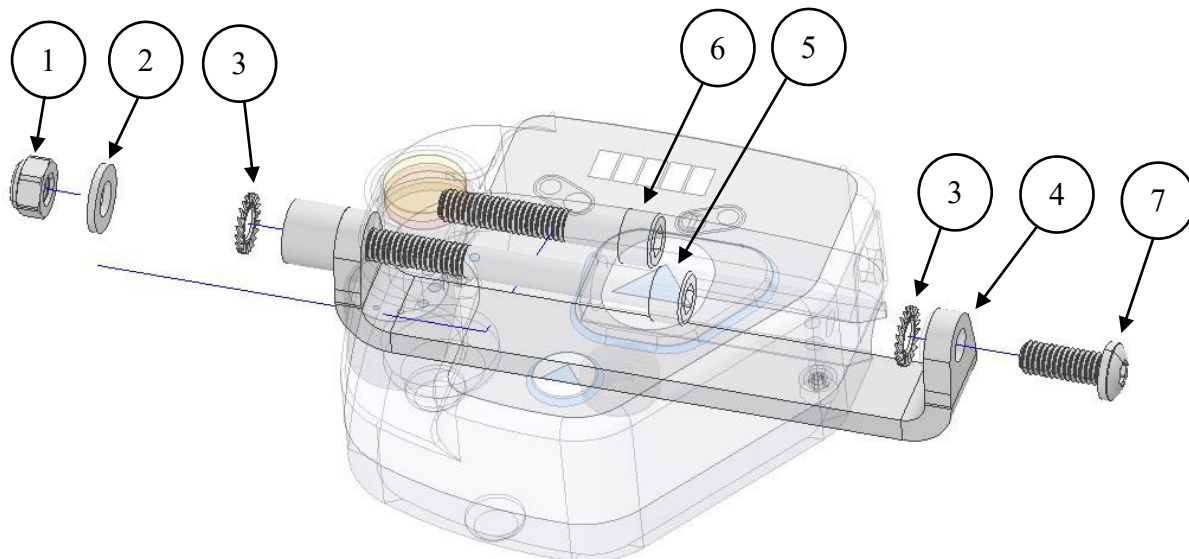


Använd antingen bult med placering 4 eller 5 beroende på vilken klämma som monterats på stolens handtagsrör. Den kortare passar plåtklämman och den gängade aluminiumklämman, den längre aluminiumklämman utan gängor.

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	XSM6M	1	Låsmutter M6
2	XSM6BR	1	Planbricka M6
3	XSM6BRTG	2	Taggbricka M6
4	MED1640	1	Fäste vårdastyrning vänster sida
5	MC6SM6X60	1	Bult M6x60
6	MC6SM6X35	1	Bult M6x35
7	MC6SM6X16	1	Bult M6x16



M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

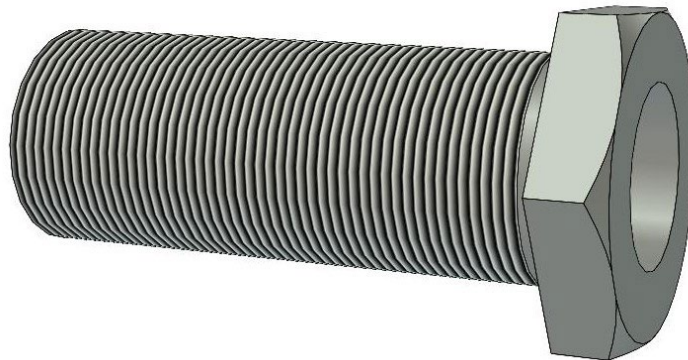

M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm