

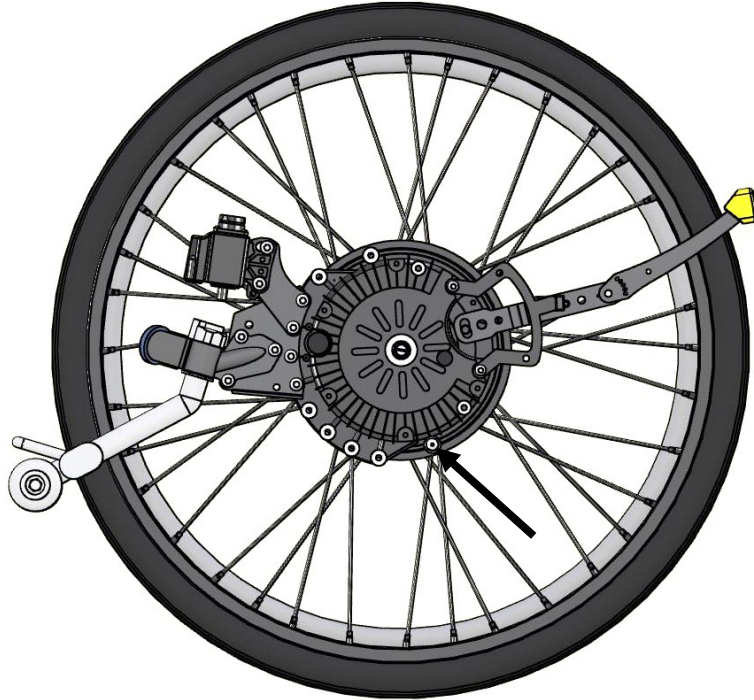


**Monteringsanvisning för Freddy
MED3194**

1. Demontera hjul och bromsar, samt navhylsa på båda sidorna.

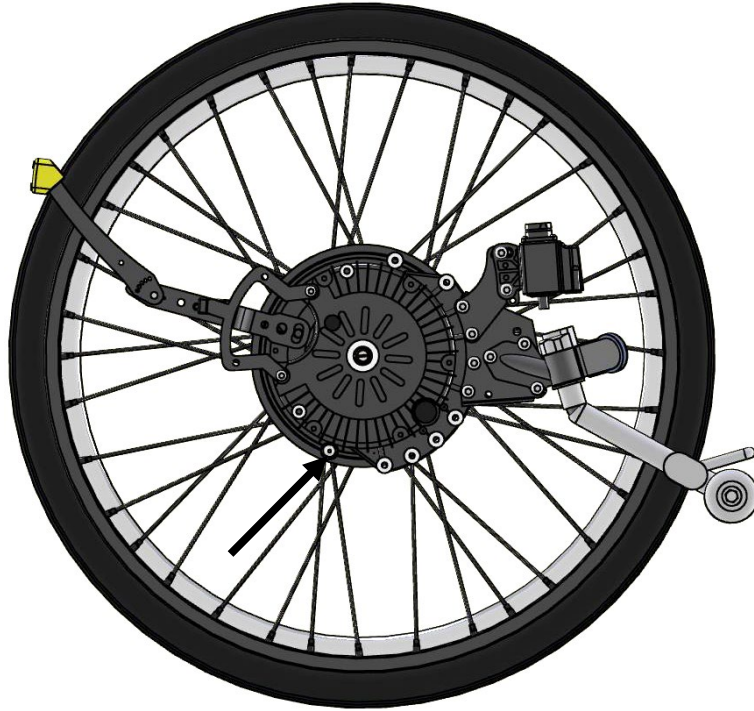

2. Kontrollera att stopp pinnen sitter enligt bilderna ovan, samt att Batteriboxen är demonterad.

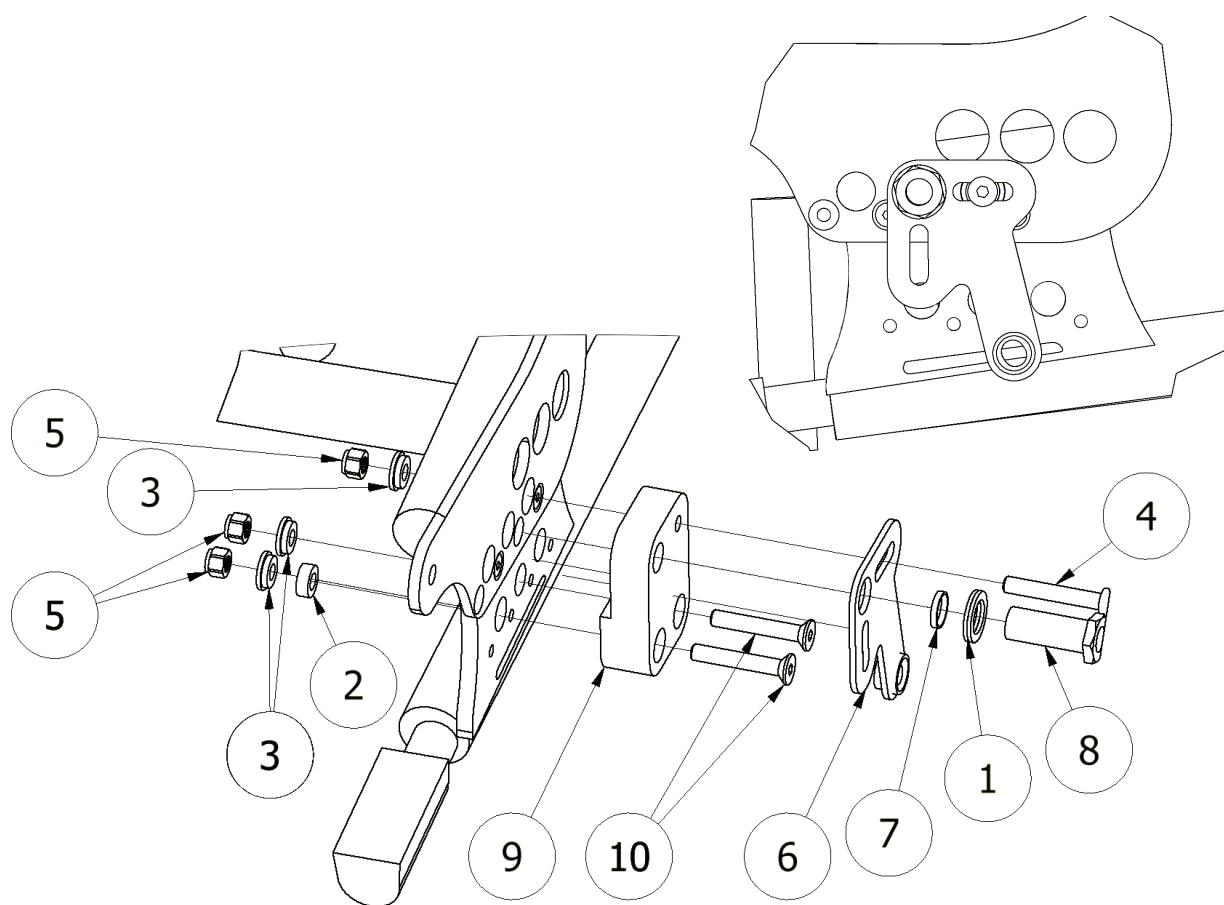


3. Montera nu fästet se bilderna ovan som visar montering av fästet på höger sida.
4. För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	405239	1	Nordlock Washer M16
2	100 400 002	1	Spacer
3	100 400 007	3	Spacer
4	XSM8X50	1	Screw Socket M8 x 50
5	XSM8ML	3	Lock Nut M8
6	MED2000	1	Bracket
7	100 400 017	1	Spacer
8	HW069	1	Sleeve
9	MED1570R	1	Right Bracket
10	XSFM8X50	2	Screw Countersunk M8 x 50

5. Montera rygghängd batteri väska.

MED1202

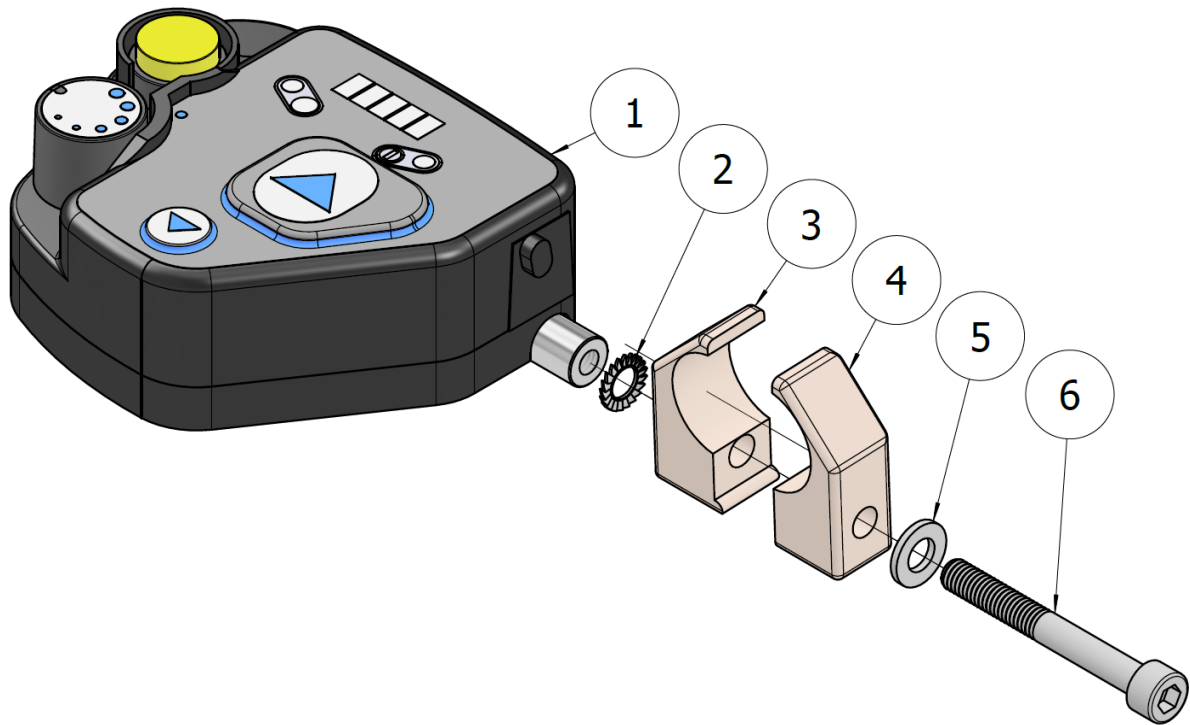


1	MED1200	1	
2	XSM6BRTG	1	
3	XOD-2612K-00	1	
4	XOD-2612E-00	1	
5	XSM6BR	1	
6	XSM6X50	1	



MED1202 + MED1643

MED1356

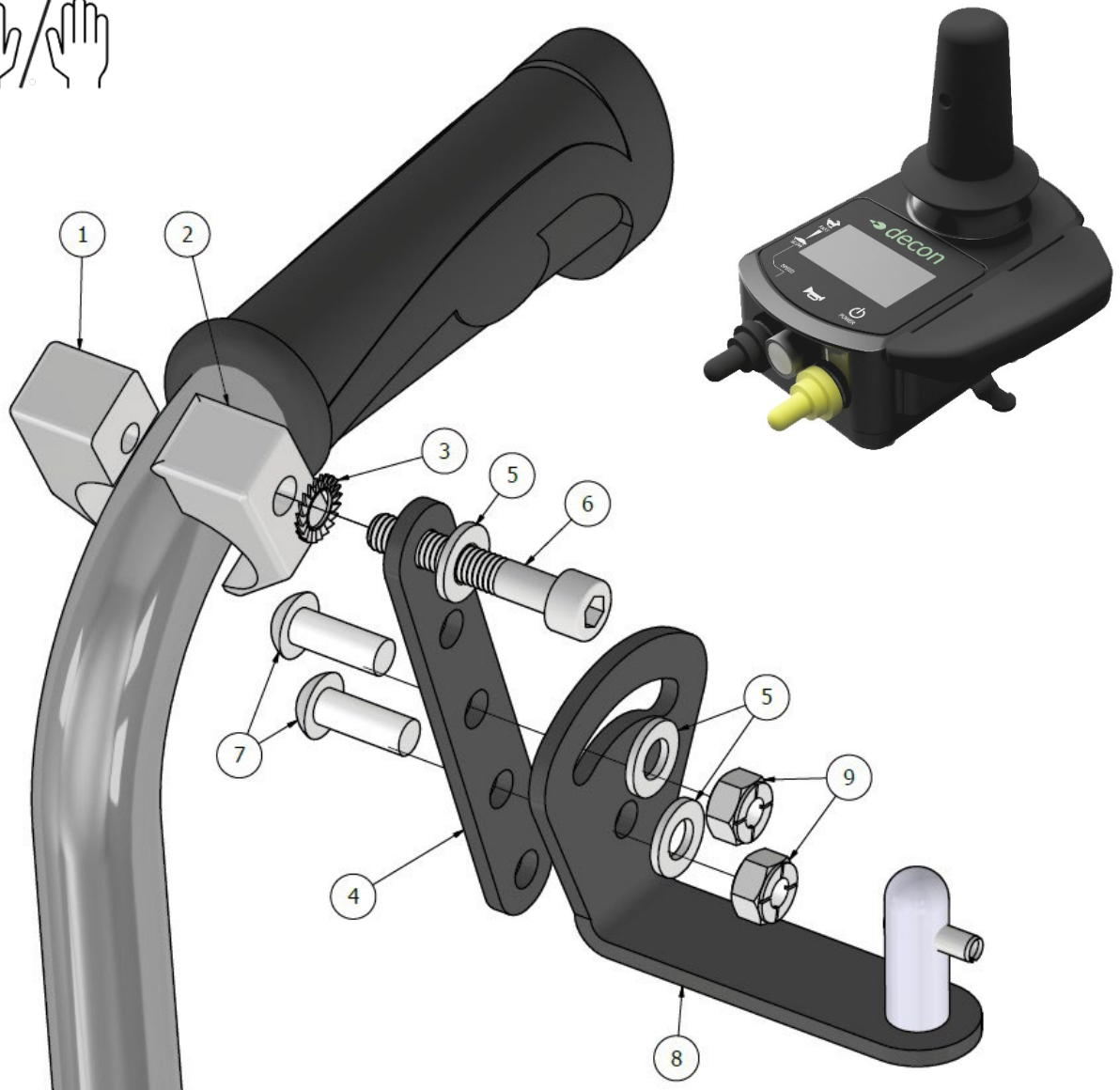

1	XA2-2612K-00	1	
2	XA2-2612E-00	1	
3	XSM6BRTG	1	
4	MED1317	1	
5	XSM6BR	3	
6	MC6SM6X35	1	
7	XSM6X16	2	
8	MED1316	1	
9	XSM6ML	2	