



Monteringsanvisning

Adventus Fotbåge
Universal

1. Säkerhet och föreskrifter

Symboler



WARNING!

Risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till skador på operatören eller andra personer.



FÖRSIKTIGHET!

Risk för materiella skador.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till materiella skador.



INFO

Extra viktig eller förklarande information.

Allmänna föreskrifter

Denna monteringsanvisning skall alltid följas vid montering av Adventus.

Inställning av Adventus hjulet visas i brukarmanualen för Adventus hjulet.


Varningar



WARNING!

Monteringsarbeten och ändringsarbeten som beskrivs i detta dokument får endast utföras av utbildad servicetekniker, återförsäljare eller annan av Decon Wheel utsedd representant.

2. Översikt

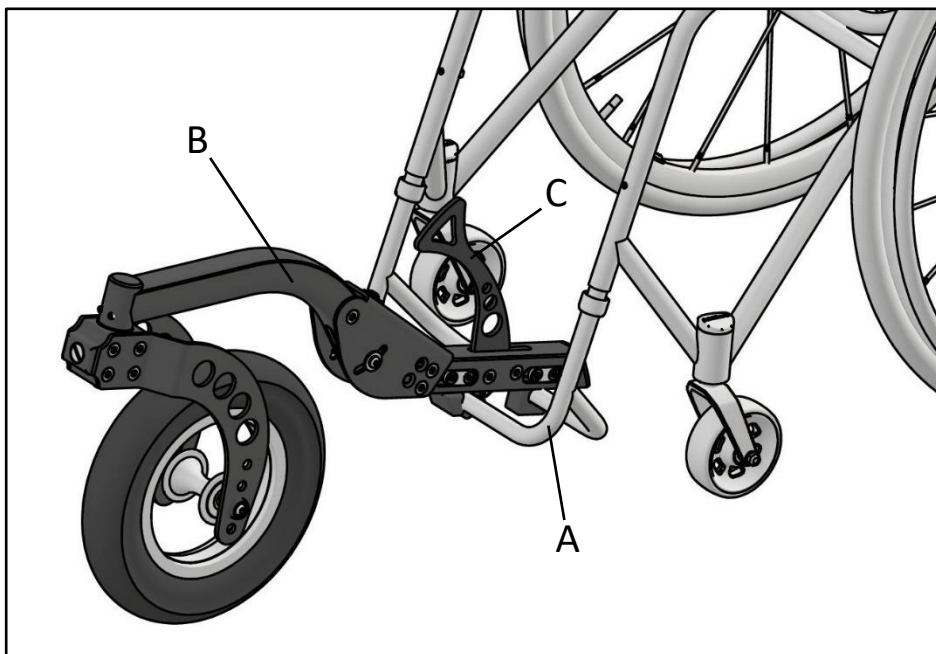

- A Fotbåge
- B Adventus
- C Låsspak




Denna monteringsanvisning visar en generell montering på rullstolar med fotbåge av runda rör där infästning av Adventus kan ske direkt i rullstolens fotbåge.

3. Inställning


Injustering och inställningar beskrivs i bruksmanualen för Adventus, denna kan laddas ned från www.decon.se.

4. Montering


Ställ först hjulet framåt och fäll upp låsspaken för att öppna den främre infästningen. Passa in Adventus i mitten av fotbågen.

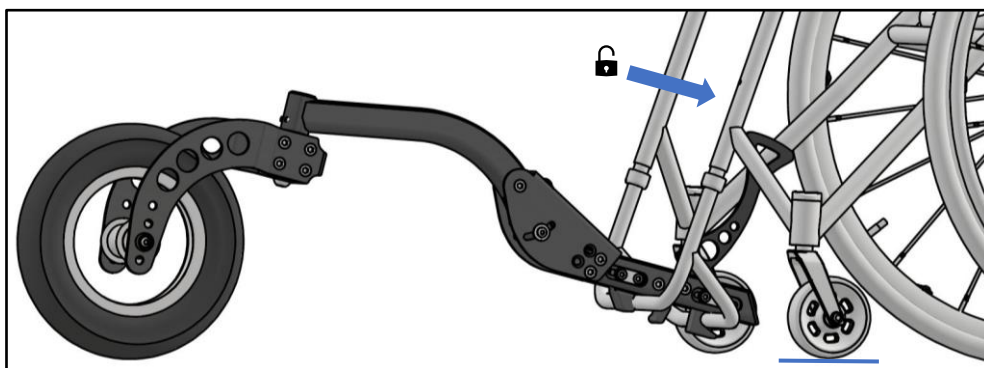

Fäll sedan ner låsspaken för att fästa fast Adventus.

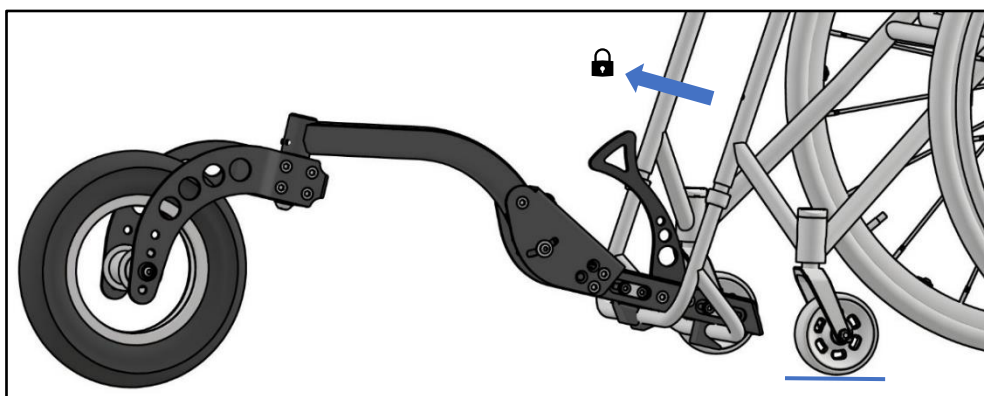

Sväng hjulet bakåt så att länkhjulen lyfts från underlaget.

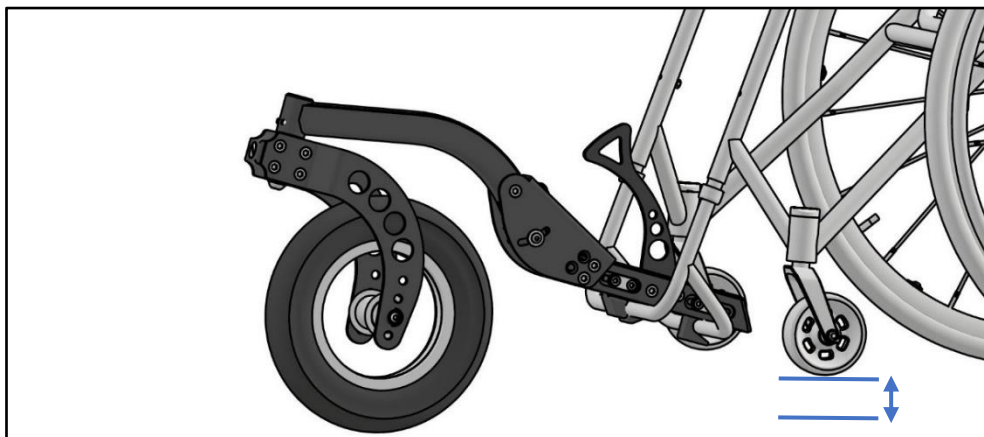

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 119, SE-314 93 Hyltebruk, Sweden
Tel: +46 (0)345 40880
Fax: +46 (0)345 40895
E-mail: info@decon.se

