



Monteringsanvisning Panthera med Spinergy /Spox hjul Bambino, S3/U3

MEM6003-35P och MEM6004-35P



Typ 35

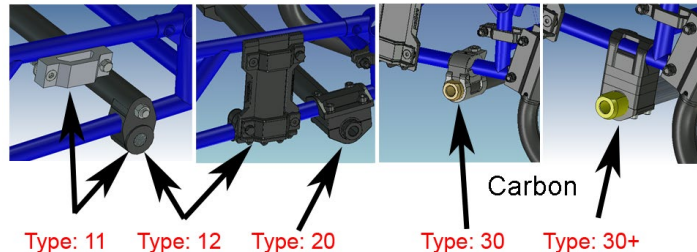


1. Kontrollera att det är modell typ30 samt att det är Spinergy /Spox hjul.
2. Demontera hjulen på båda sidorna.

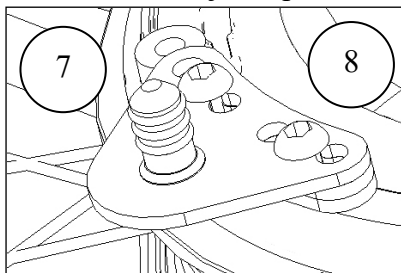

Med +1,5 bakaxel montera 2 styck
distansplattor 300087 under 320003.

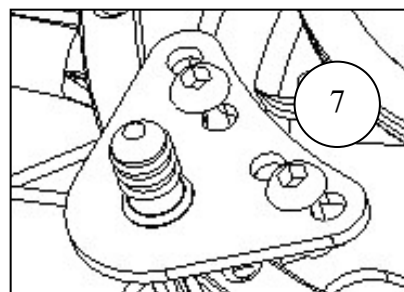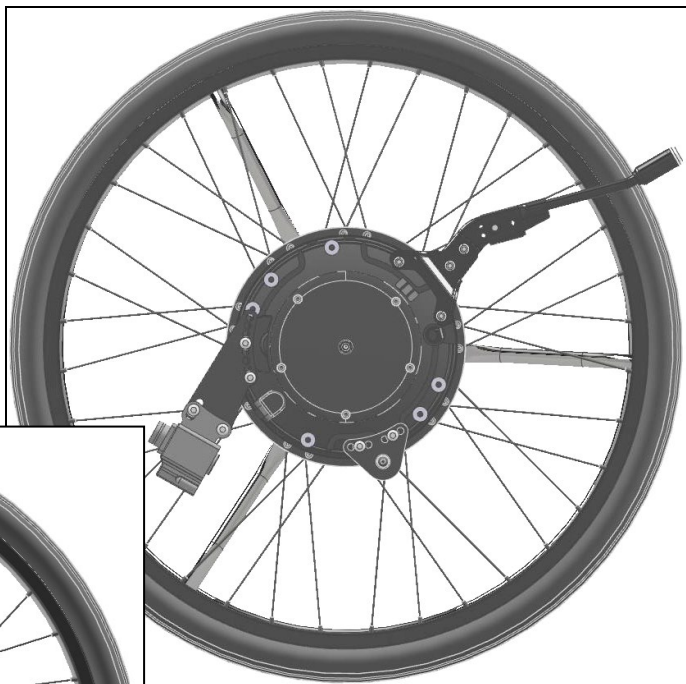

1	XOE-2530E-00	1	Axel Ø12,7 x 46
2	320003	1	Platta
3	300087	2	Distans Platta (Endast +1,5)

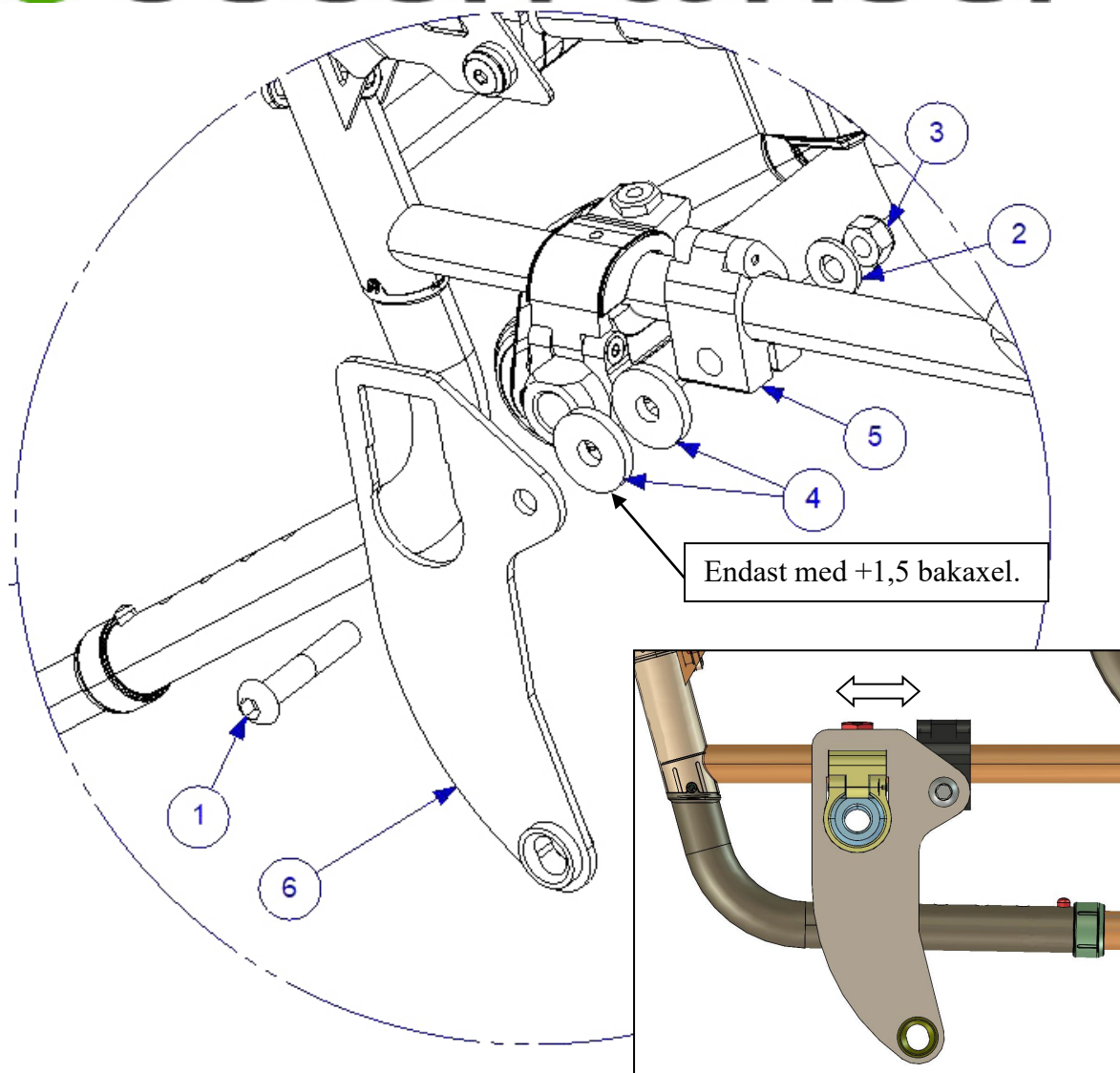

3. Montera nu fästet på chassit enligt bilderna ovan.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Art.Nr.	Antal	Beskrivning
1	XSM8X45 / XSM8X50	1+1	Skruv Rundad M8 x 45 / 50
2	XSM8BR	1	Planbricka M8
3	XSM8ML	1	Låsmutter M8
4	100 400 011	2	Distans (2 styck Endast +1,5)
5	290010	1	Klamma
6	300097	1	Fäste Spinergy

*Vid tveksamheter vilken bakaxel ni har, så kan ni se länken nedan.


http://www.panthera.se/panthera/documentation/montering/montering_bakaxel_kolfiber.pdf

Vid separat köp av monteringsatts **medföljer ej** axel, distans platta eller platta **för byte se servicebok.**

4. Montera den underhängda batteriväskan eller om du har beställt Litiumbatteri så monterar du batteri hållaren. Se bild som följer för rätt modell.


OBS!

Tänk på att den under hängda batteriväskan och batteriboxen är i vägen för tippskydden när dessa skall fällas in. Detta går att komma ifrån genom att beställa en rygghängd batteriväska istället för standardväskan eller så används den medföljande plastklämman till att fästa ihop tippskydden med varandra, se bilden nedan. Montering av klämman kan behöva anpassas till aktuell stolsbredd. Nedan följer två monteringsexempel.

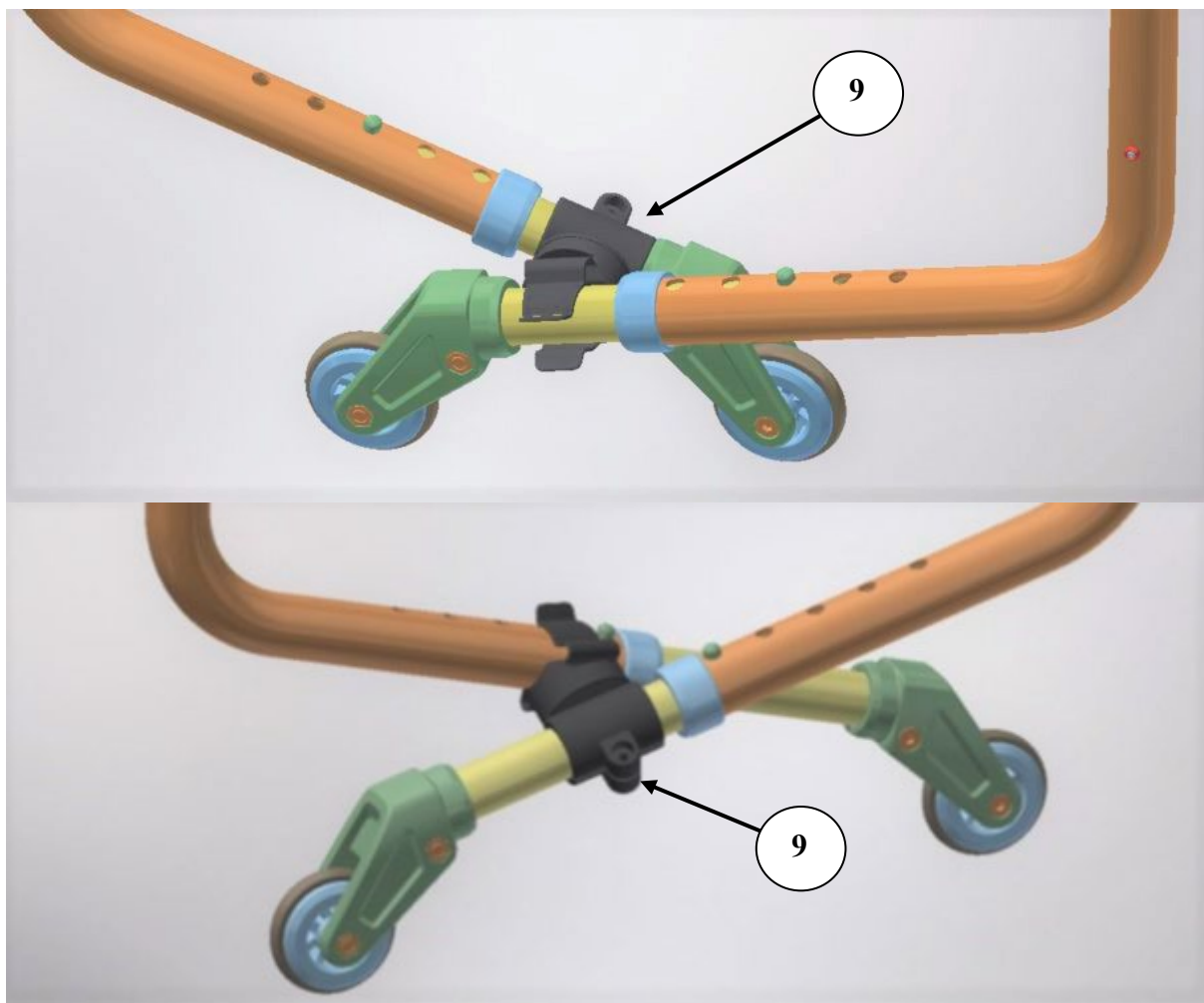

9	350070	1	Klämma tippskydd S3/U3
---	--------	---	------------------------



MEM5014

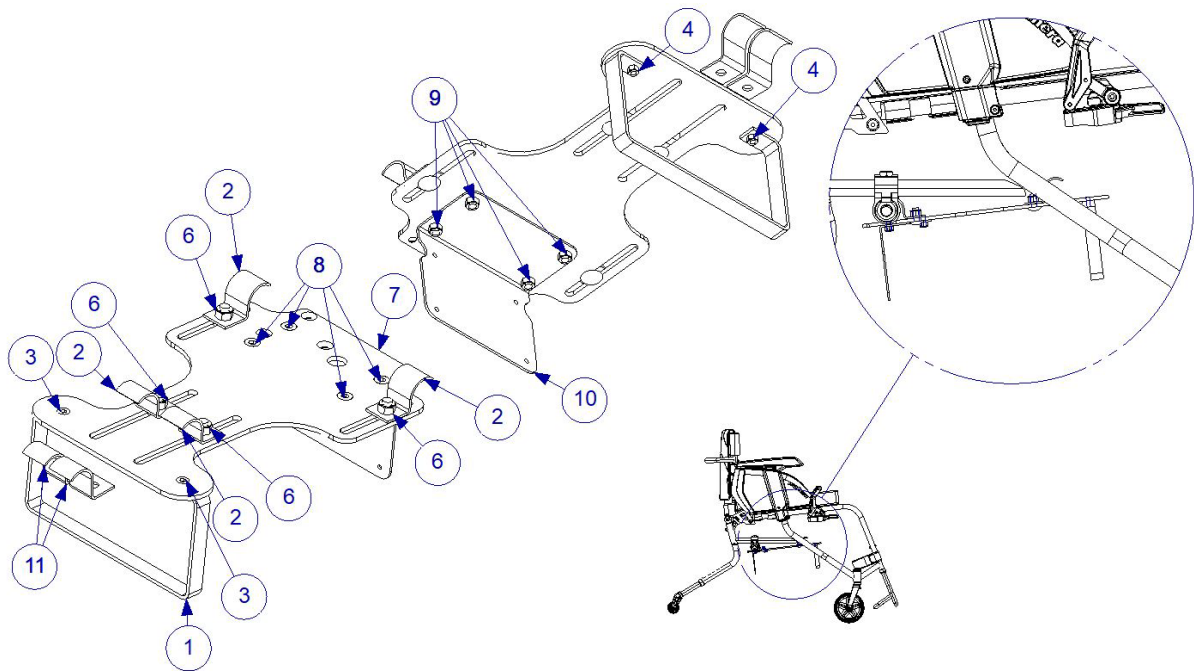

1	MEM5002	1	
2	MEM5003	4	
3	XSFM5X12	2	
4	XSM5ML	2	
5	XSSM8X16	4	
6	XSM8ML	4	
7	MED5001	1	
8	XSFM6X12	4	
9	XSM6ML	4	
10	MEM5011	1	
11	MEM5004	2	

OBS! Bambino inkluderas inte.


300201

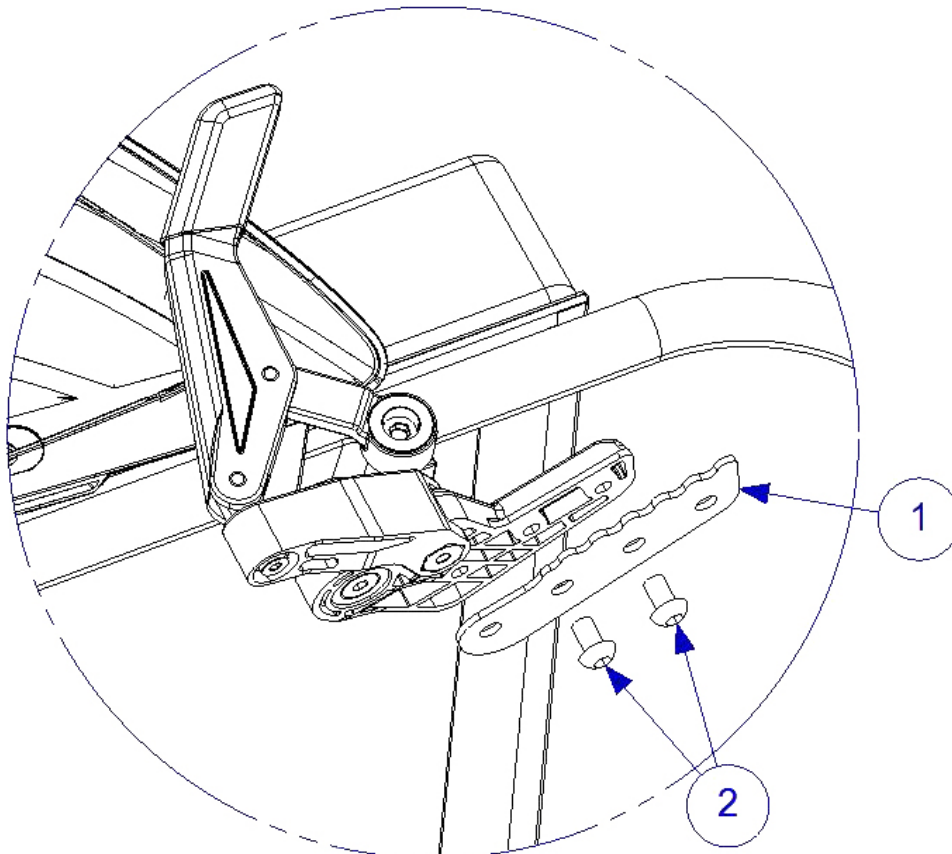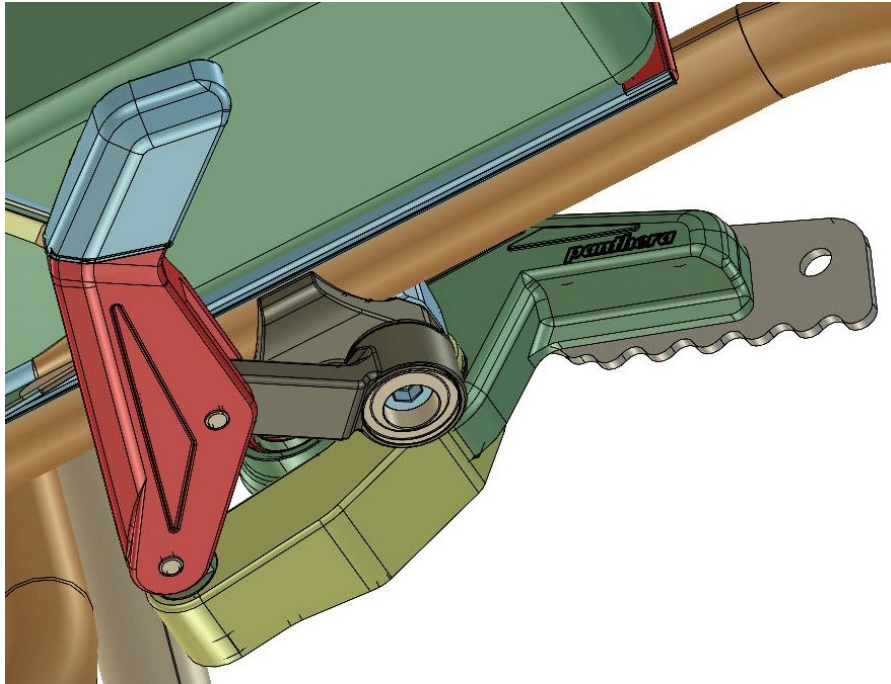

1	300200	1	
2	XSM6X10	2	



M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

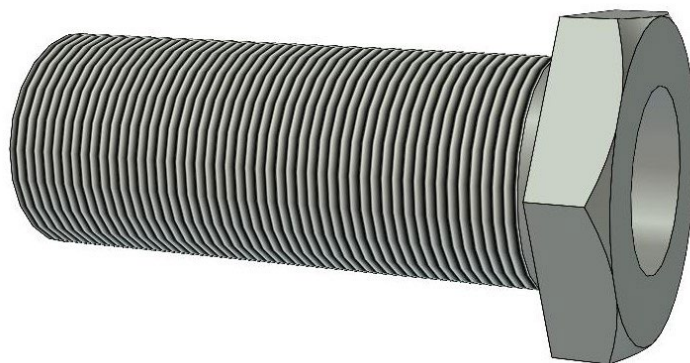

M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm