

decon
mobility



E-MOVE



De E-Move geeft je de extra kracht om actief te blijven en biedt je persoonlijke vrijheid en mobiliteit. E-Move is het eerste aandrijfsysteem op de markt die met een grijpvoel wordt bediend en aan uw behoeften kan worden aangepast.

Met de E-Move elektrische hoepelondersteuning hoef je je niet langer te schikken naar de producten; in plaats daarvan past de E-Move zich aan jou aan. E-Move biedt diverse opties om de functionaliteit van een handbewogen rolstoel uit te breiden en is volledig aanpasbaar aan uw wensen.

Wanneer je de grijpvoel gebruikt, ondersteunt de E-Move je startbeweging op krachtige wijze. Je bespaart energie omdat je hoepelfrequentie aanzienlijk vermindert waardoor je moeiteloos langere afstanden aflegt en komt makkelijk over paden en obstakels die je normaal gesproken vermijdt. Met de nieuwe cruise control-functie kun je lange afstanden afleggen zonder jezelf uit te putten. E-Move biedt persoonlijke vrijheid en mobiliteit!

Specificaties

| | |
|--|---|
| Motor | AC-servomotor, 24V 110W x 2 |
| Accutype | NiMH, 24V x 6,7Ah / Li-ion, 25V x 10,08Ah |
| Gewicht per wiel | 7 kg |
| Totaalgewicht | NiMh 17 kg / Li-ion 18 kg |
| Toename breedte rolstoel na opbouw | Max 1,8 cm/aan elke zijde |
| Wielgrootte | 20", 22", 24", 25" of 26" |
| Luchtdruk | 6 Bar, 600 kPa |
| Snelheid | 0-8,5 km/u |
| Maximale actieradius (met volledig opgeladen accu) | Ca. 18 km met NiMH, ca. 27 km met Li-iON |
| Zekering | 30 A (vlak) |
| Maximaal gebruikersgewicht | 150 kg |
| Maximale helling | 6 graden |
| CE-Keurmerk | Conform MDR 2017/745 klasse 1 |
| Acculader | 100 tot 240V AC, 50/60Hz |
| Vermogensspecificatie | 37V 26A (tijdens het opladen) |
| Oplaadtijd | Ca. 3 u NiMH / ca. 4 u Li-iON |



Scan de QR-code voor meer informatie.

E-move

Accuposities

- Wielplaatsing
- Onder de zitting in een tas
- Aan de rug in een tas

Lithium-ion batterij

- Afneembaar
- 2 jaar garantie
- IATA-goedgekeurd



Gyroscopfunctie en snelheidsregeling

E-Move kan worden geprogrammeerd naar uw unieke wensen: extra kracht (vooruit, achteruit), koersstabiliteit, een hemiplegie rijprogramma (eenhandige bediening), hoepelgevoeligheid, compensatie van krachtsverschil, snelheidsinstellingen en gyroscopfunctie. Met een tweede rijprofiel (optioneel) kunt u eenvoudig schakelen tussen twee verschillende rijprogramma's, zodat je in elke situatie de juiste ondersteuning hebt.

E-Move is compatibel met vrijwel alle standaard rolstoelmodellen en is verkrijgbaar in wielmaten 20", 22", 24", 25" en 26" en in een MTB-versie. E-Move is eenvoudig te demonteren, waardoor het gemakkelijk in een auto kan worden vervoerd. De E-Move-accu is ook goedgekeurd voor luchttransport.



Scan de QR-code voor meer informatie



Samen kunnen we vrijheid creëren!

Volg ons:



deconmobility.nl

