



1. Demontera hjul, nav, och hjulplattor på båda sidorna.

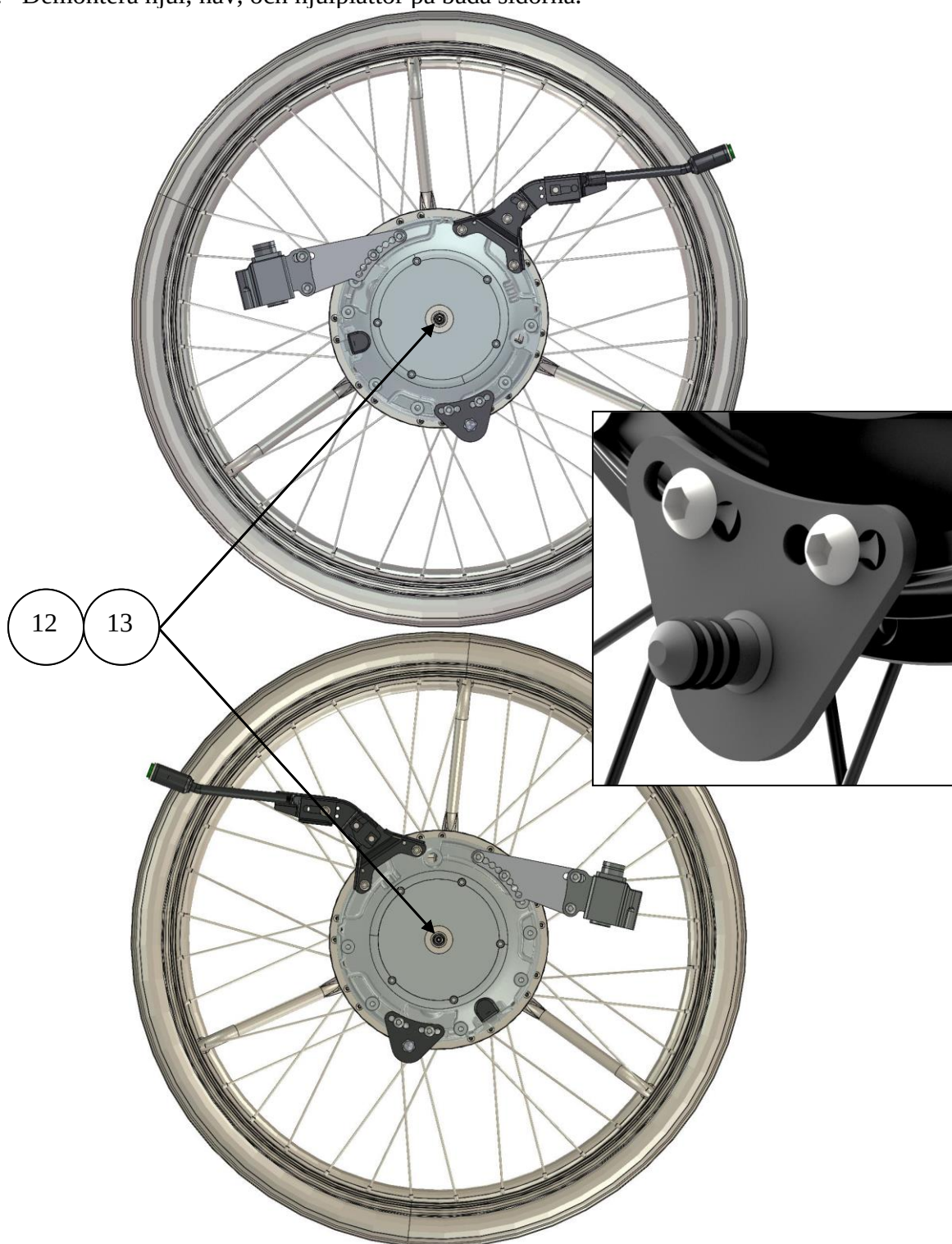

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel Ø12 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.
 - Stopp pinne med Detaljnummer: 320003.

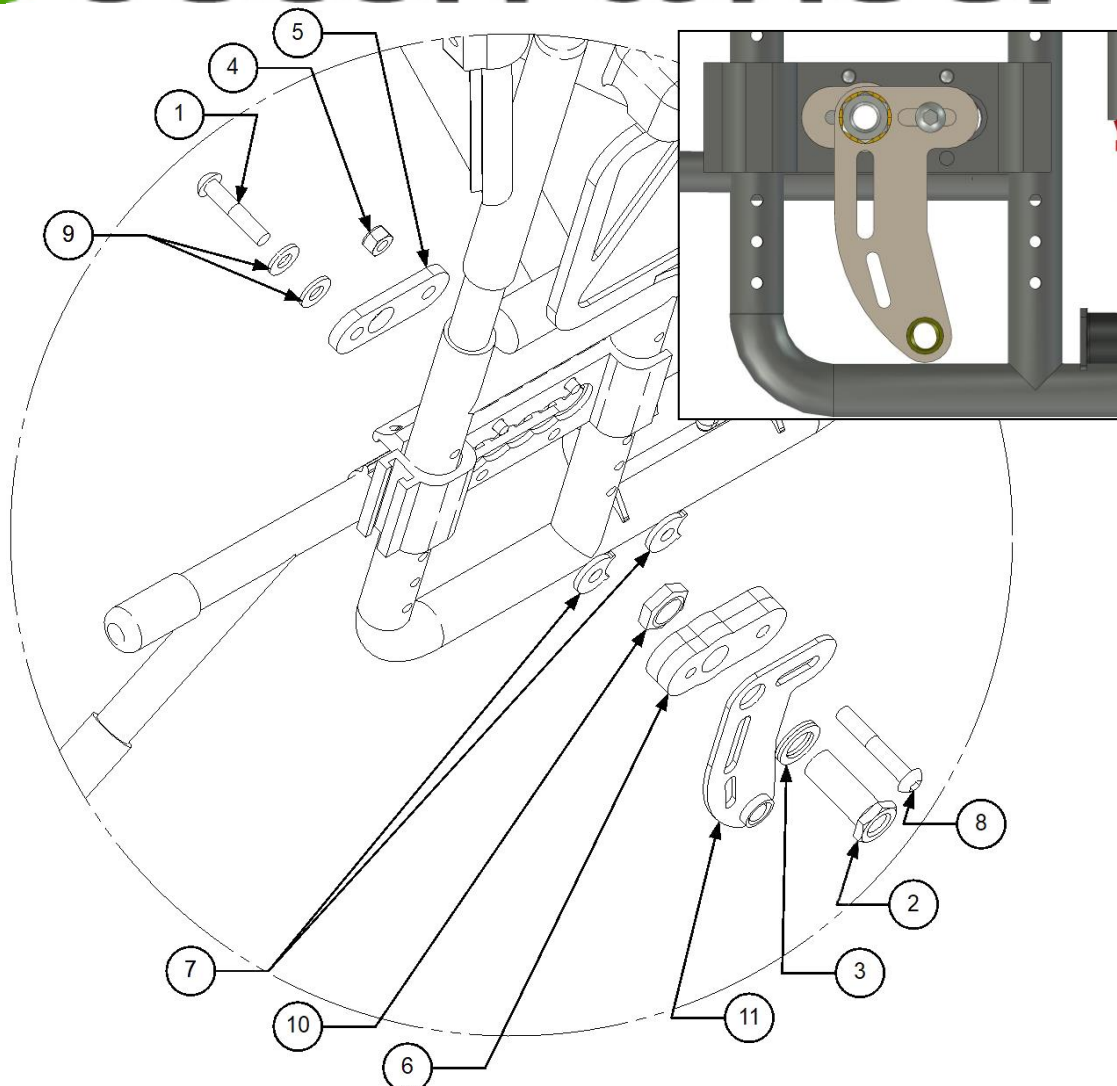

3. Se bild som visar montering av fästet på höger sida.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XSM8X40	1	Skruv M8 x 40
2	HW063	1	Navhylsa
3	405239	1	Nordlock Bricka
4	XSM8ML	1	Låsmutter M8
5	MEM6057-01	1	Fäste del 1
6	MEM6057-02	1	Fäste del 2
7	MEM6057-05	2	Centrerings platta
8	XSM8X50	1	Skruv M8 x 50
9	XSM8BR	2	Planbricka M8
10	XSM16M	1	Mutter M16X1 Låg
11	310022	1	Fäste
12	XOE-25383-00	1	Distans 12
13	93440-120520	1	Spårring

4. **OBS!** Vid separat köp av monteringssats medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.
5. Montera nu den rygghängda batteri väskan.