



Monterings anvisning Caneo B/E/L/S MEM6105 och MEM6106

1. Demontera hjulen och navhylsan på båda sidorna.

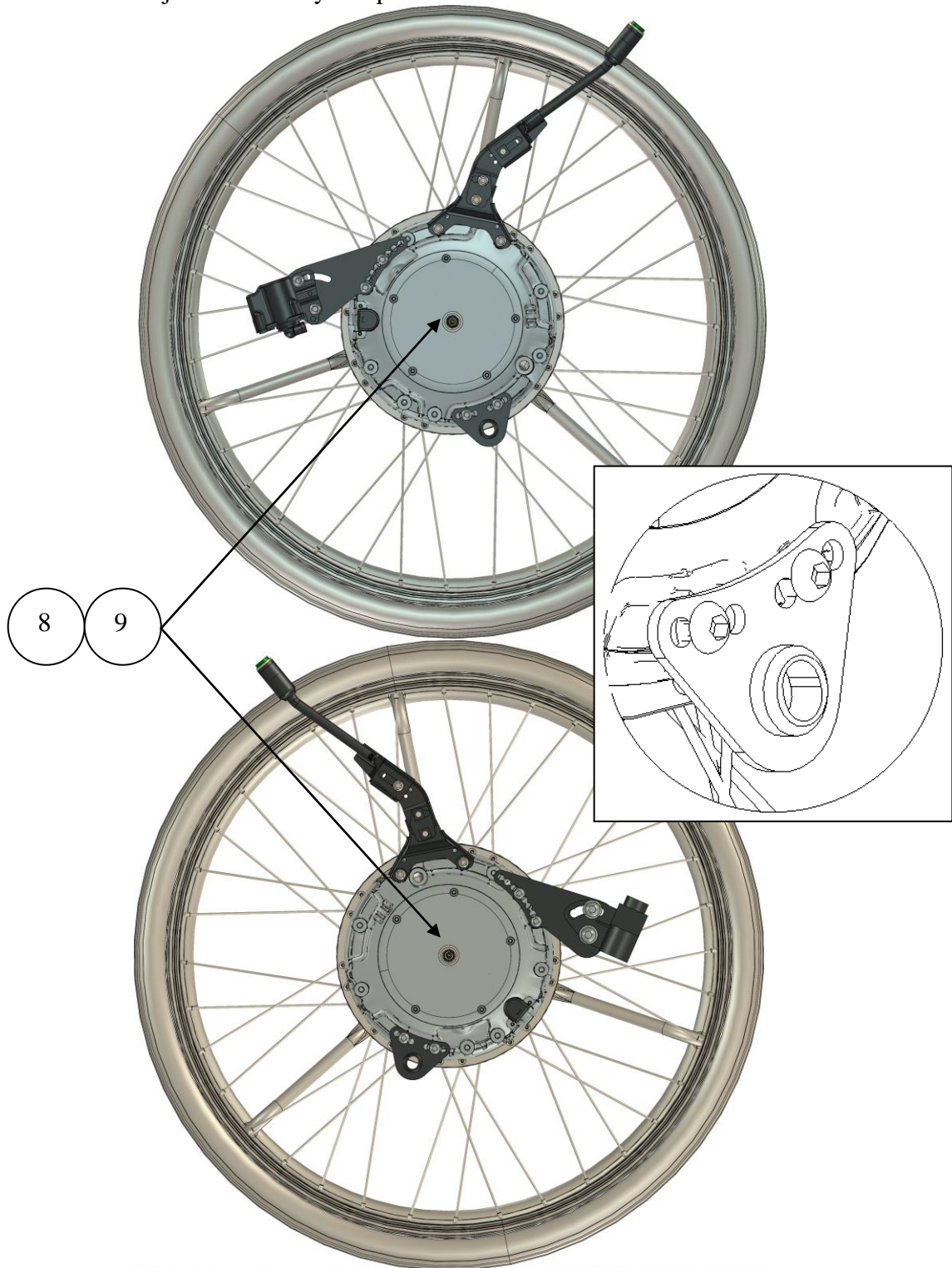

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel $\text{Ø}12,7 \times 51$ med Detalj Nummer: XOE-2530E-C0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.

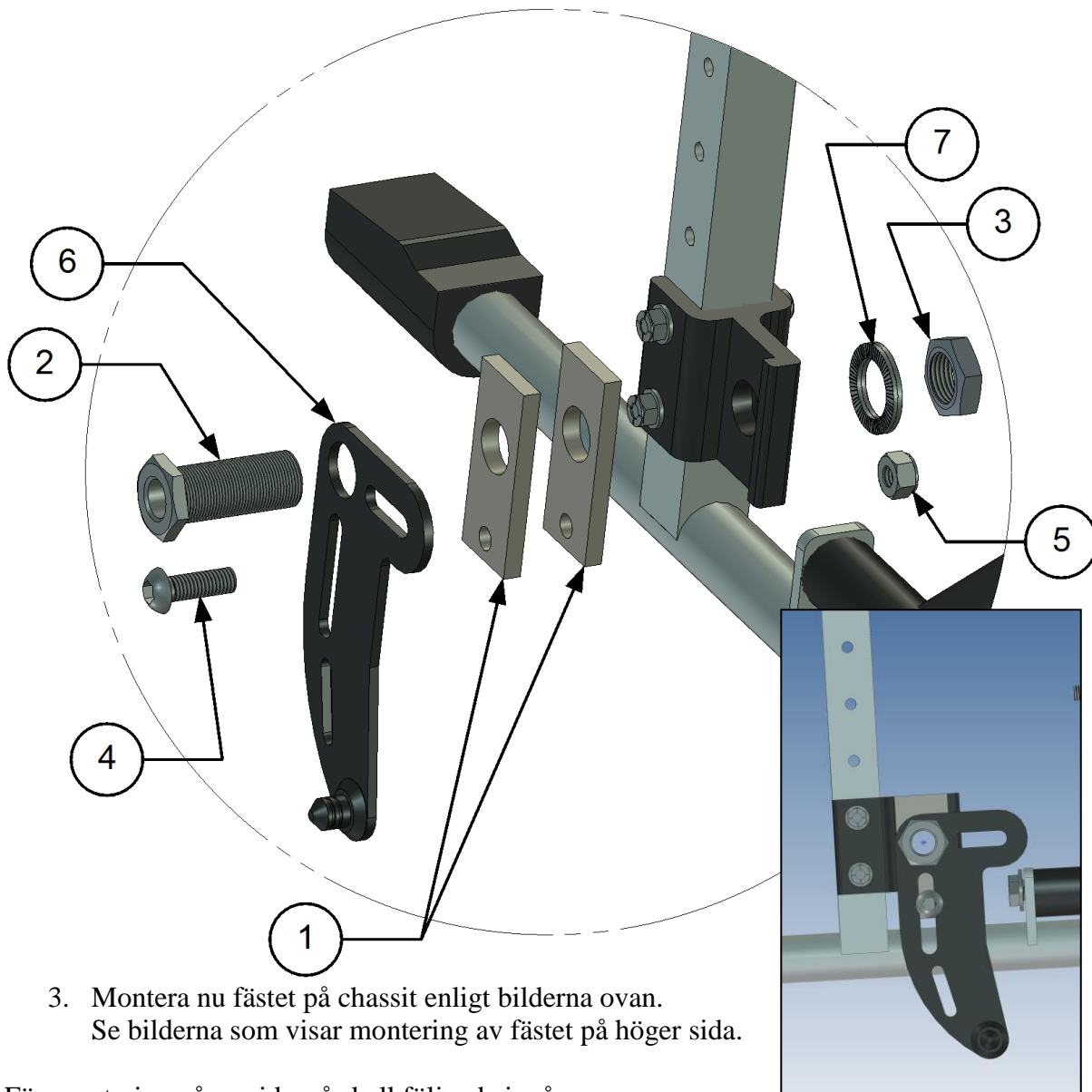

3. Montera nu fästet på chassit enligt bilderna ovan.
Se bilderna som visar montering av fästet på höger sida.

För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj nummer	Antal	Beskrivning
1	300043	2	Adapter Platta
2	HW084	1	Navhylsa M18X1
3	XSM18M	1	Mutter M18 x1
4	XSM8X25	1	Skruv M8 x 25
5	XSM8ML	1	Låsmutter M8
6	XOE-22294-10	1	Höger Fäste Hål 18
7	405241	1	Nordlock Bricka
8	XOE-25383-00	1	Distans 12,7
9	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringsset medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.

4. Montera nu den rygghängda batteriväskan.