



**Monteringsanvisning HD 24" Balance
MEM6125 och MEM6126**

1. Demontera hjulen och navhus på båda sidorna.

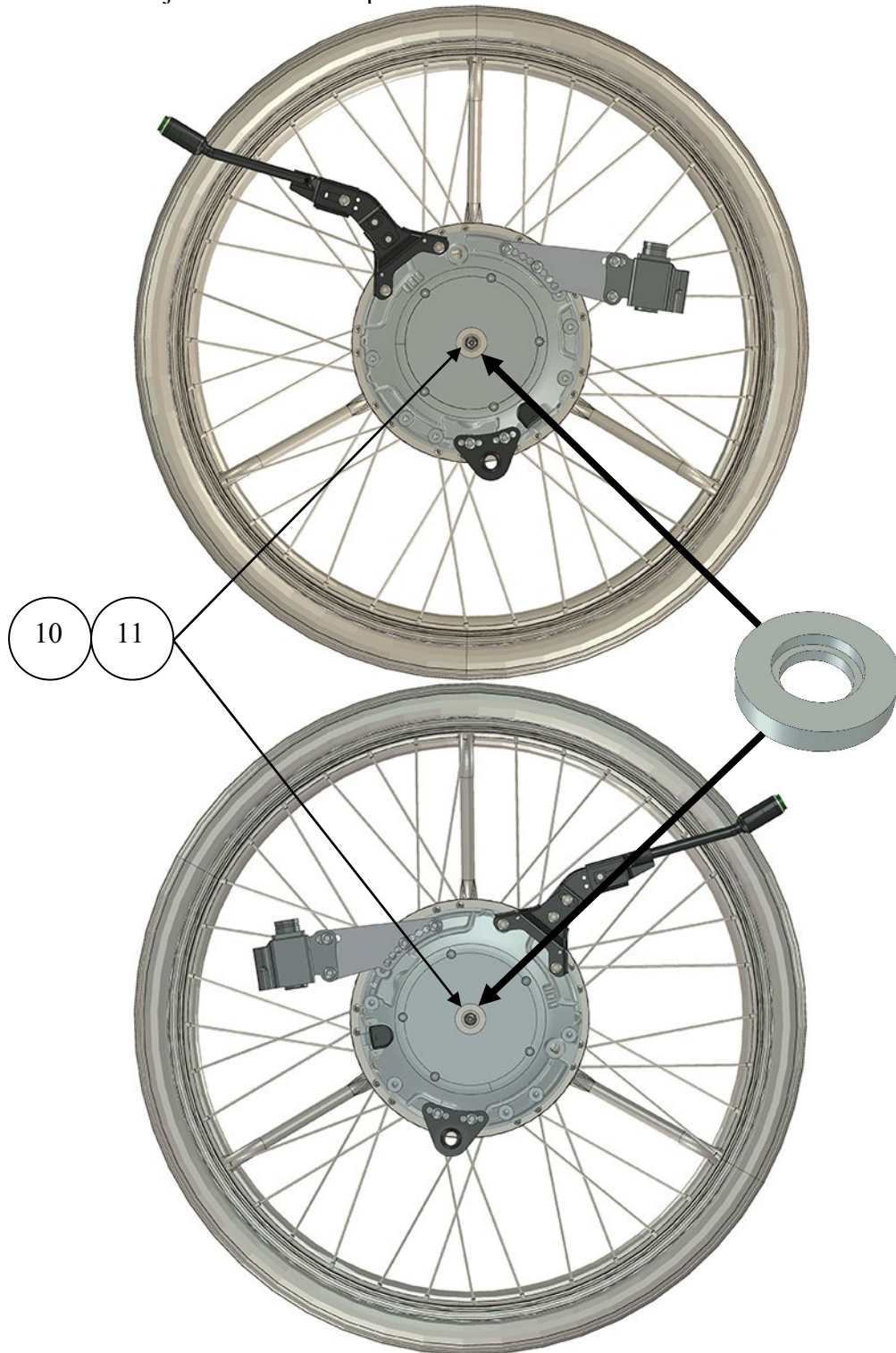

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande: - Axel Ø12 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.

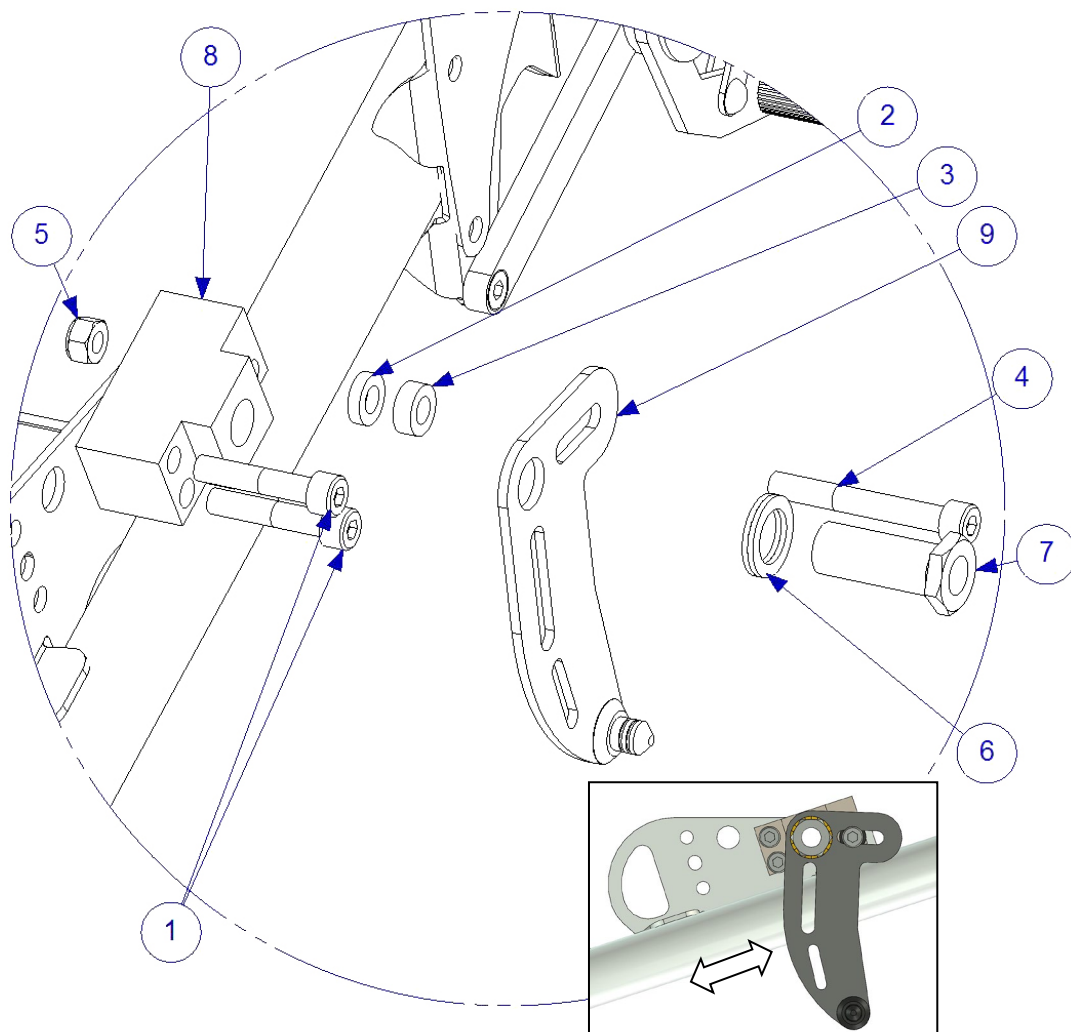

3. Se bild som visar montering av fästet på höger sida.


Detaljer som ingår för montering av fästet.

Placering	Art.Nr.	Antal	Beskrivning
1	XSM8X50	2	Skruv M8 x 50
2	100 400 001	1	Distans
3	100 400 002	1	Distans
4	XSM8X60	1	Skruv M8 x 60
5	XSM8LM	1	Låsmutter M8
6	405239	1	Nordlock Bricka
7	HW063	1	Navhylsa
8	MED3072-02	1	Navhylse fäste höger
9	XOE-22294-BO	1	Höger fäste
10	XOE-25383-00	1	Distans 12
11	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringsset medföljer ej axel, axeldistans eller spårring, för byte se servicebok.

Placeringsalternativ:

Det går att montera i både främre och bakre position.

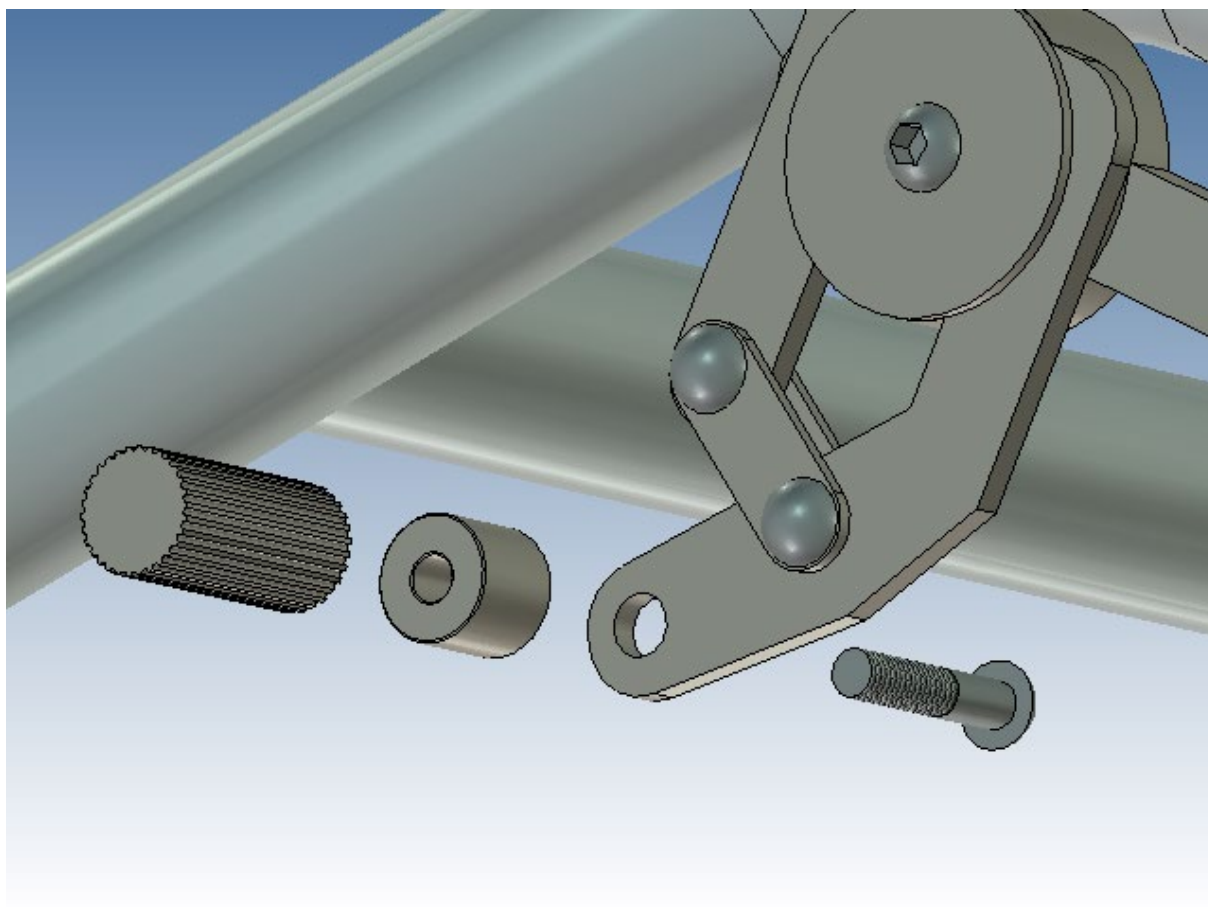

4. Detaljer för förlängning av bromspinnen

Placering	Art.Nr.	Antal	Beskrivning
1	100 400 044	2	Distans
2	XSM6X30	2	Skruv rundad M6 x 30

5. Montera nu den rygghängda batteriväskan.

Kom ihåg att stolens totala bredd ökar med 30 mm.



Åtdragningsmoment / Tightening torque

Metrisk grovgångor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsa.
Sleeve.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm