



Monteringsanvisning för Rotec Drive MED3325

1. Demontera hjul, navhylsor och skruven för fästet (se bild nedan) på båda sidorna.

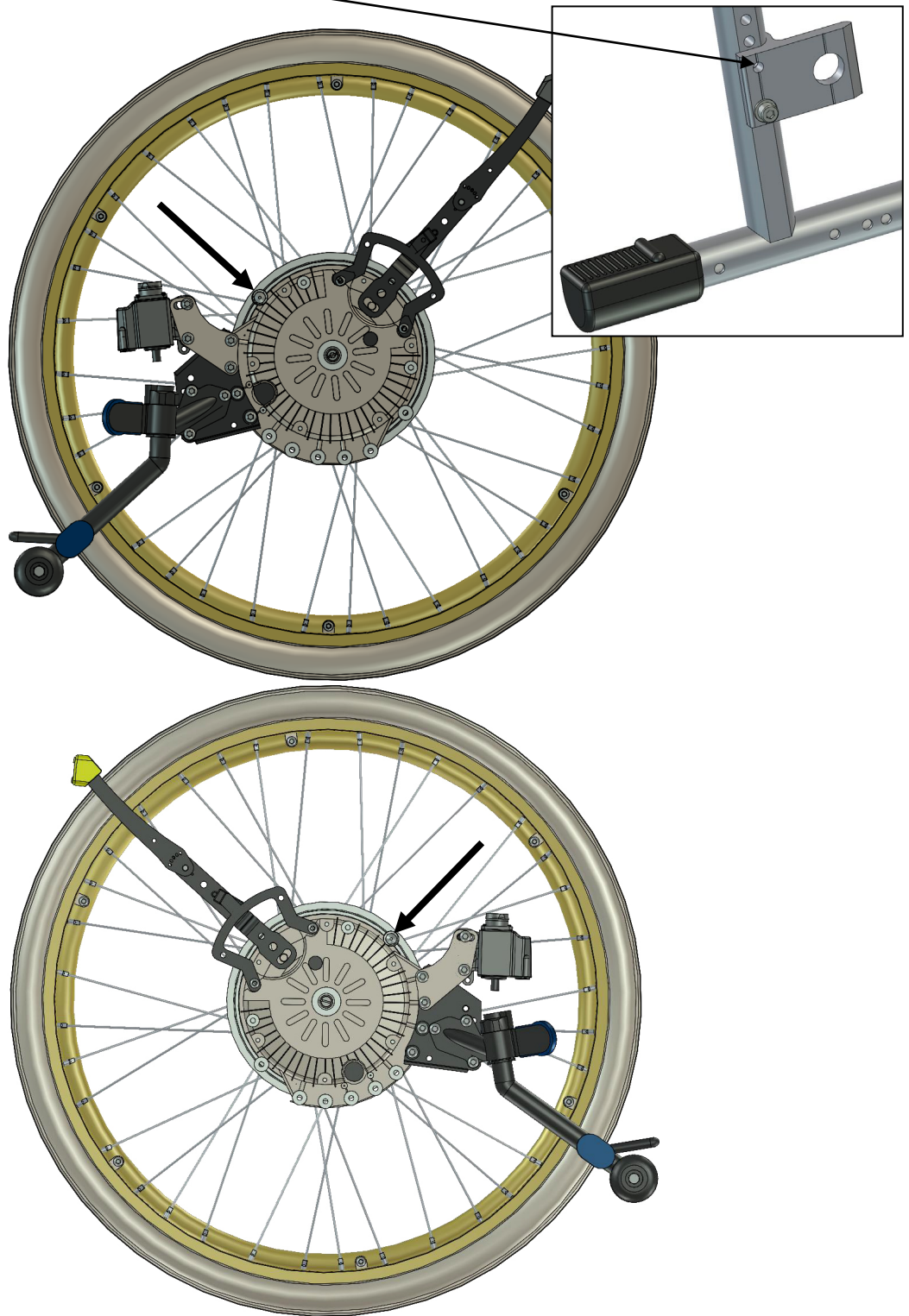

2. Kontrollera att stopp pinnen sitter enligt bilderna ovan.

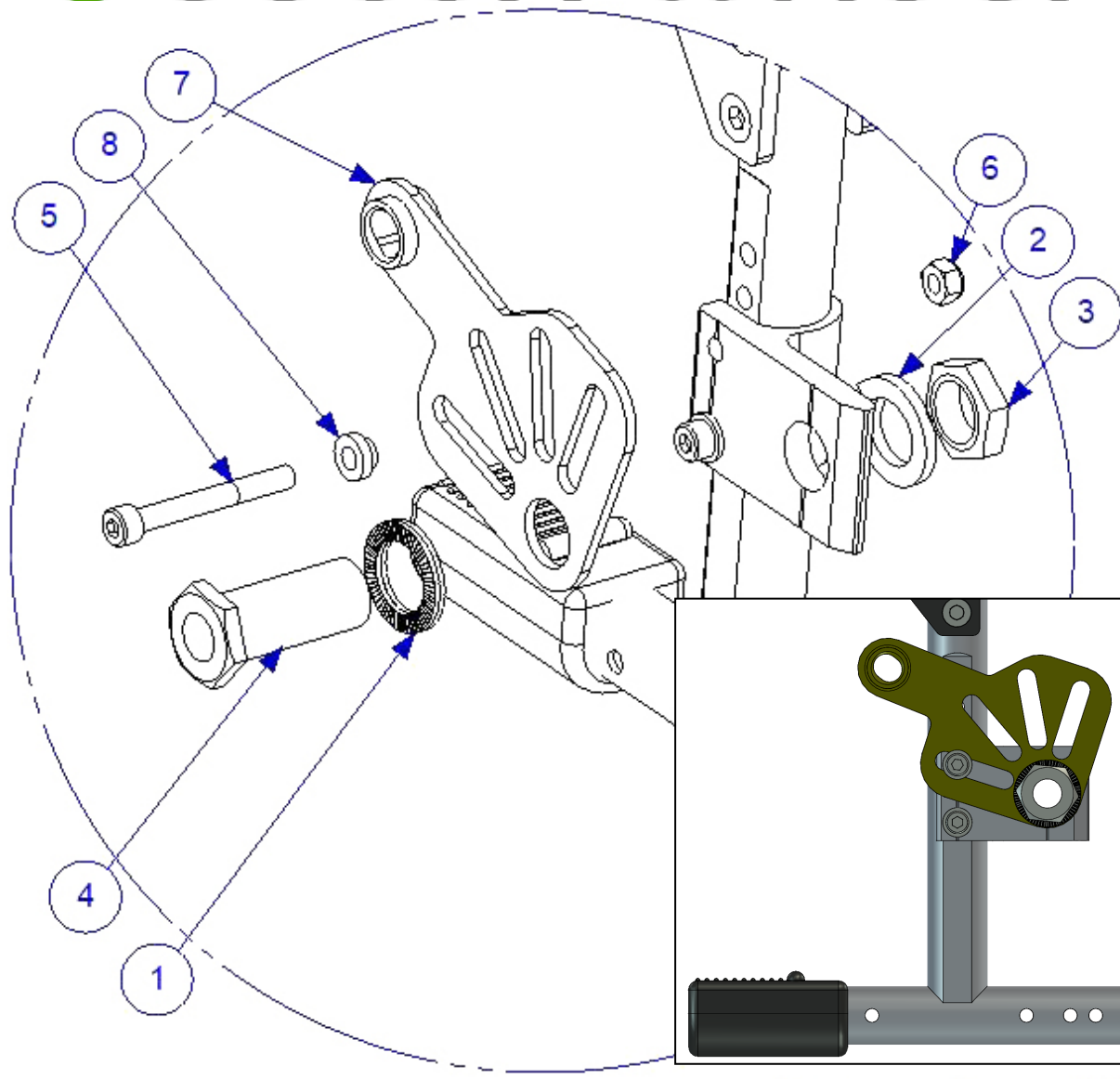


3. Montera nu fästet se bilderna ovan som visar montering av fästet på höger sida.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	405241	1	Nordlock M18 bricka
2	XSM18FJ	1	Fjäderbricka M18
3	XSM18M	1	Mutter M18 x1 låg
4	HW084	1	Navhylsa M18X1
5	MC6SM6X50	1	Insex skruv cylindriskt huvud M6 x 50
6	XSM6ML	1	Låsmutter M6
7	MED 2004	1	Fäste
8	100 400 020	1	Distans

4. Montera nu den rygghängda batteriväskan.


Montering av Joystick

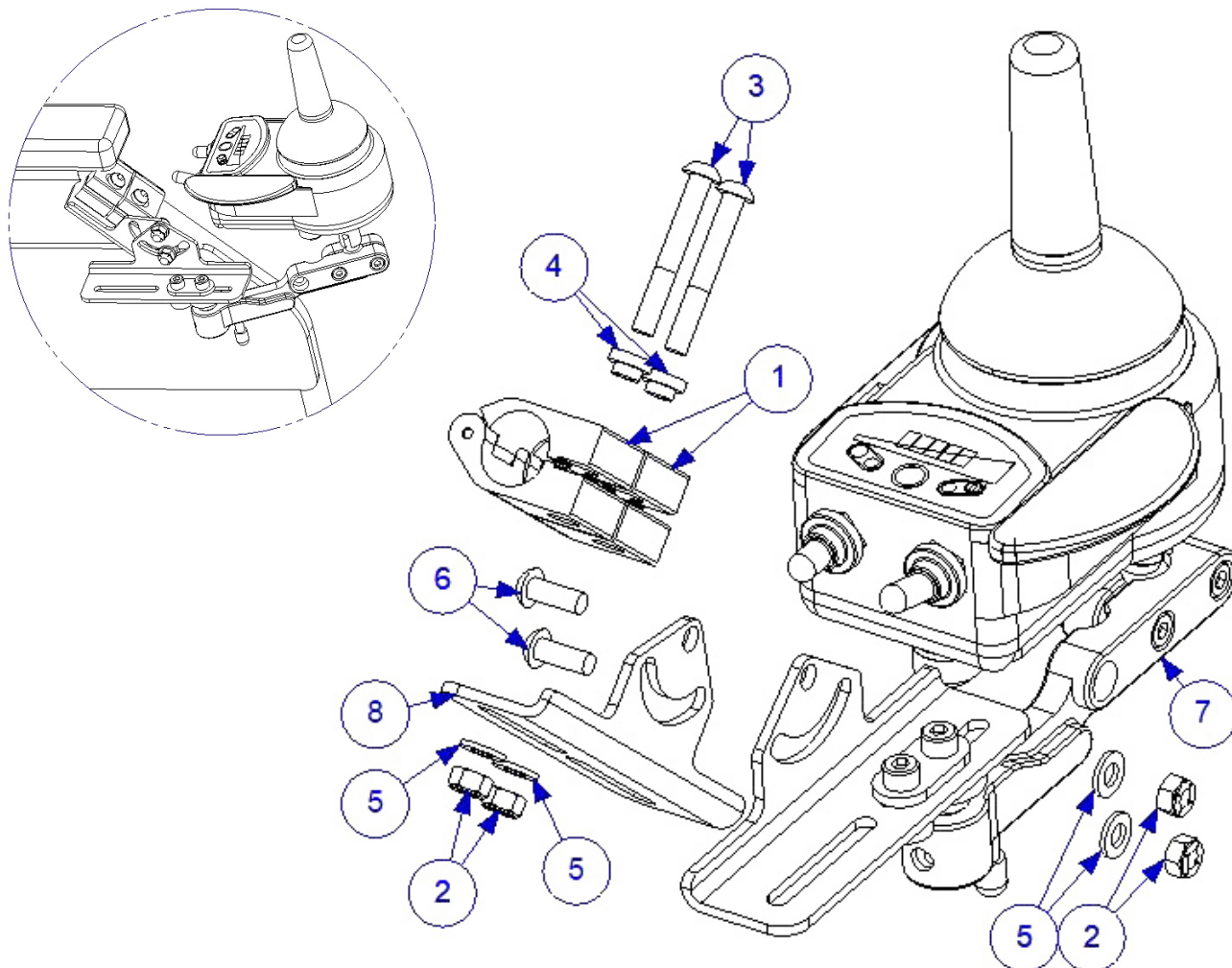

5. Montera på joystickens sideskyddet. Se bilden ovan.

Placering.	Detalj nummer	Antal	Beskrivning
1	290010	2	Klamma
2	XSM6ML	4	Låsmutter M6
3	XSM6X45	2	Skruv Rundad M6 x 45
4	100 400 020	2	Distans
5	XSM6BR	4	Planbricka M6
6	XSM6X16	2	Skruv Rundad M6 x 16
7	XOC-48160-B0	1	Övre hållare set 2
8	XOC-46295-00	1	Vinklat fäste

MED1491

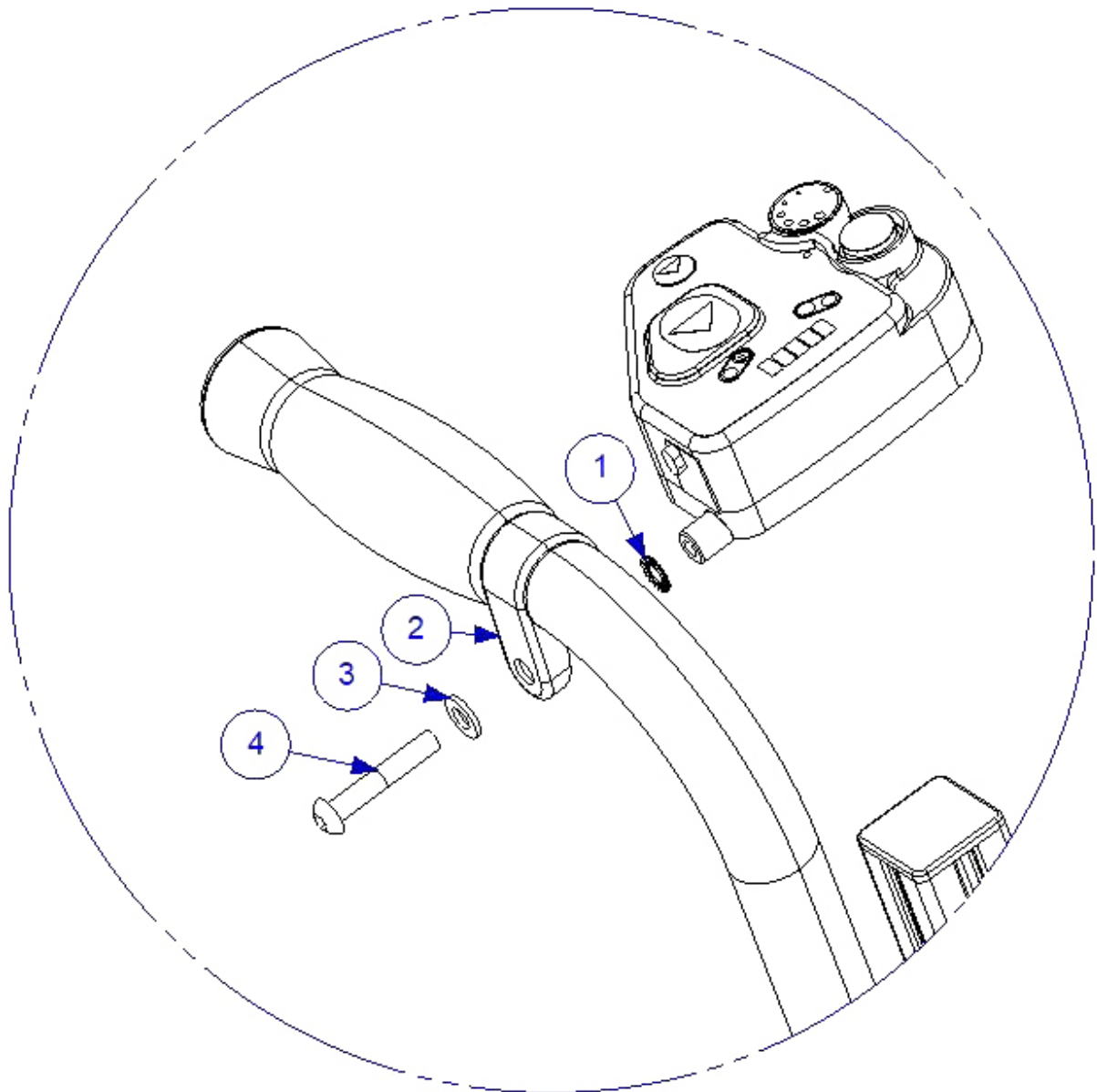

Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	XSM6BRTG	1	Taggbricka M6
2	X-Klamma1	1	Klamma Dia.25 mm
3	XSM6BR	1	Planbricka M6
4	XSM6X35	1	Skruv Rundad M6 x 35



Åtdragningsmoment / Tightening torque

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Sleeves.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm