



**Monteringsanvisning Panthera Typ 30+ med förhöjd bakaxel
MEM6003-30+ och MEM6004-30+**

1. Demontera hjulen på båda sidorna.

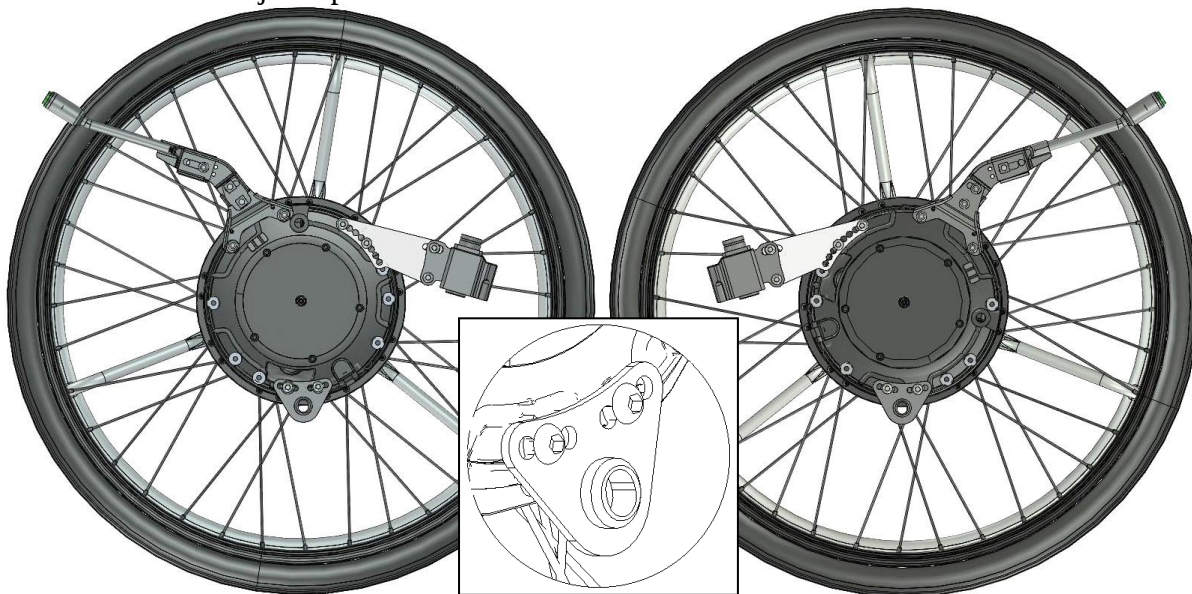


2. Förbereda eMove med förhöjd bakaxel +10, +20, +30 och +40 enligt bilderna ovan, samt att det är Ø12,7 x 46 axlar med Artikel Nr: XOE-2530E-00 monterat.

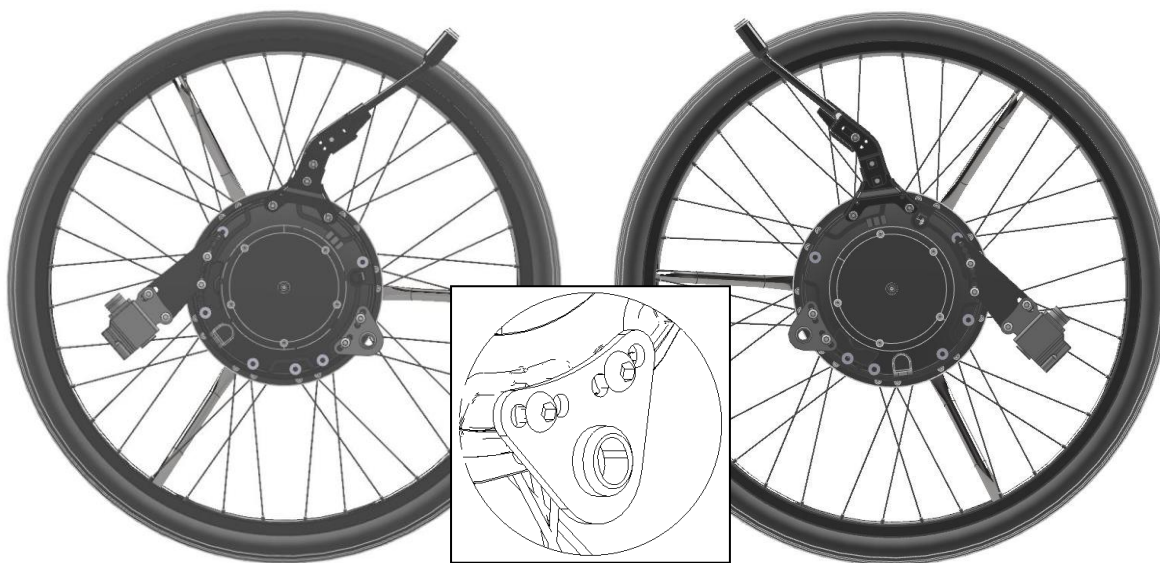

3. Förbereda eMove med förhöjd bakaxel +50 och +60 enligt bilderna ovan, samt att det är Ø12,7 x 46 axlar med Artikel Nr: XOE-2530E-00 monterat.

4. Montera fästet enligt vilken bakaxel du har.

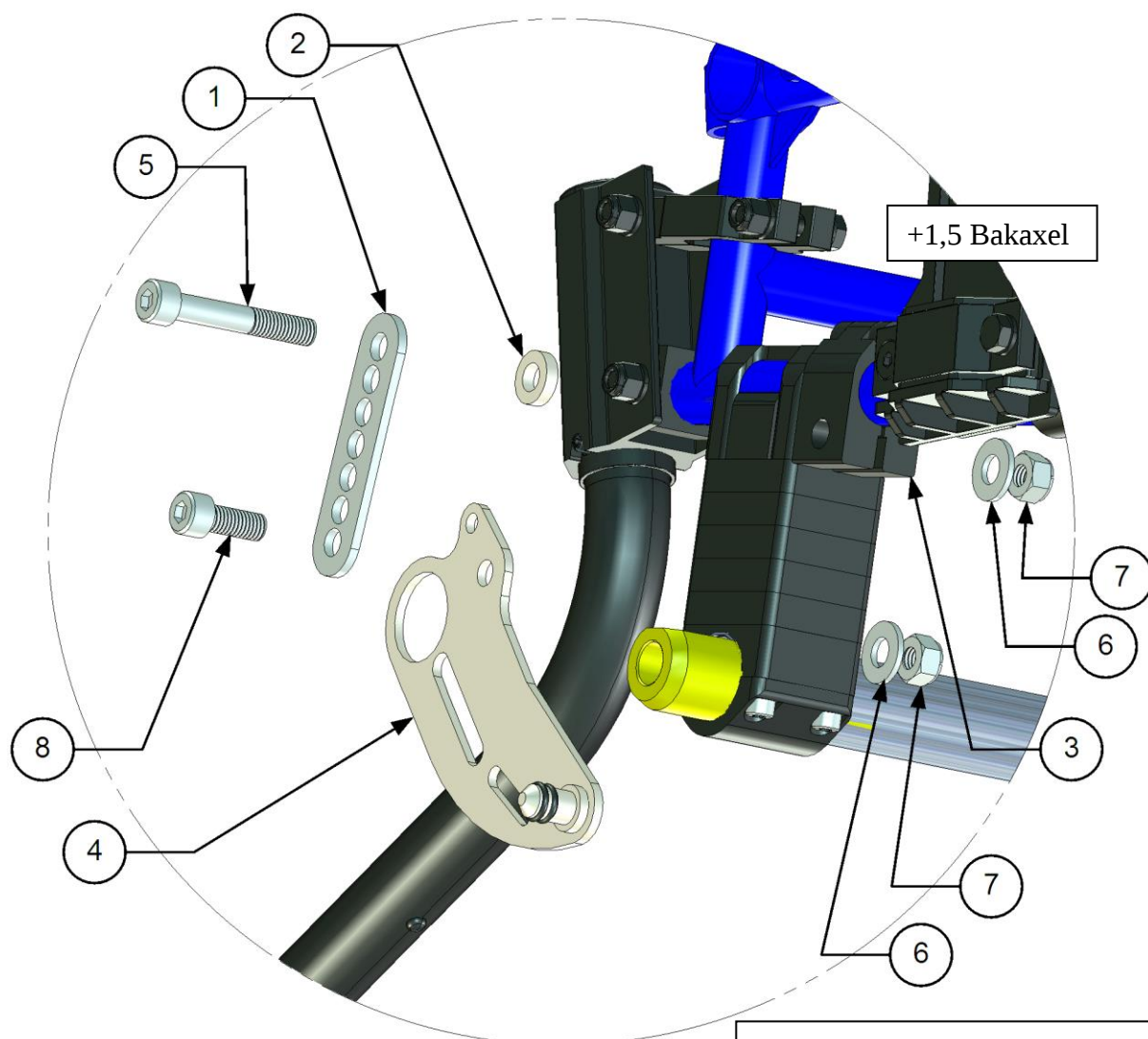





OBS!



Om ni EJ har en +1,5 Bakaxel så utgår distansposition 2.

Detaljer som ingår för montering på Höger sida.

Placering	Artikel Nummer	Antal	Beskrivning
1	300020	1	Fäste
2	100 400 001	1	Distans
3	290010	1	Klamma
4	300036	1	Höger Fäste
5	XSM8X50	1	Skruv M8 x 50
6	XSM8BR	2	Planbricka M8
7	XSM8ML	2	Låsmutter M8
8	XSM8X20	1	Skruv M8 x 20
9	350070	1	Klämma tippskydd S3/U3

Vid separat köp av monteringsats **medföljer ej** axel, för byte se servicebok.

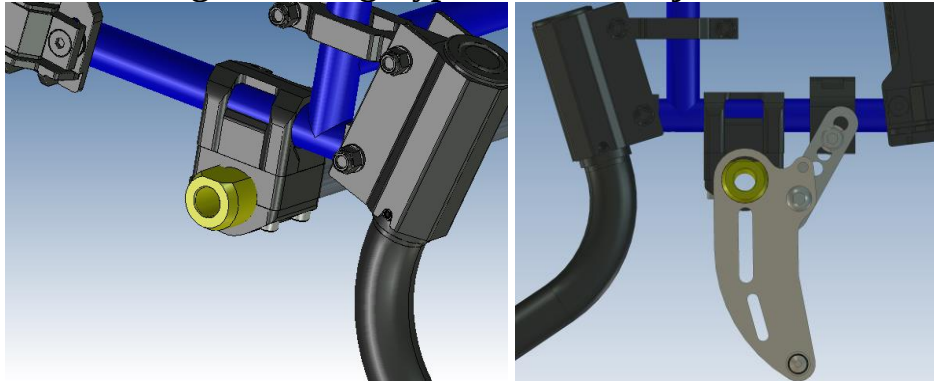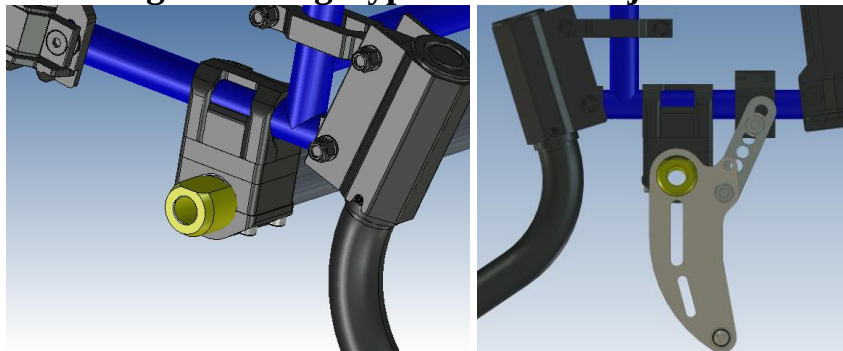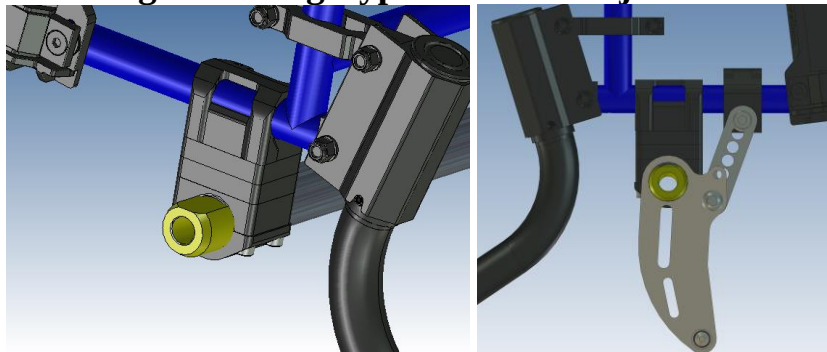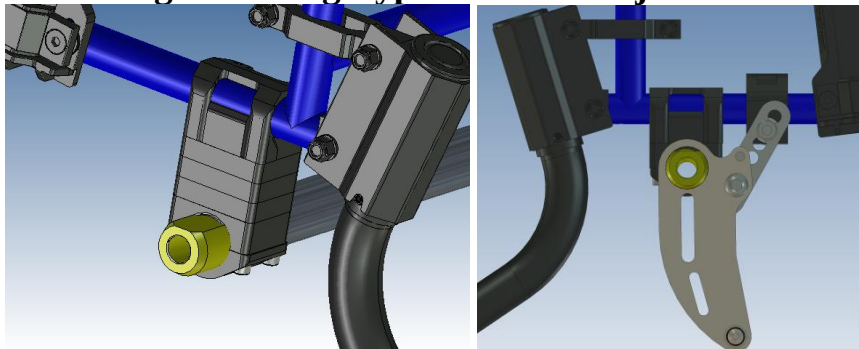
Monteringsanvisning Typ 30 med förhöjd bakaxel +10**Monteringsanvisning Typ 30 med förhöjd bakaxel +20****Monteringsanvisning Typ 30 med förhöjd bakaxel +30****Monteringsanvisning Typ 30 med förhöjd bakaxel +40**

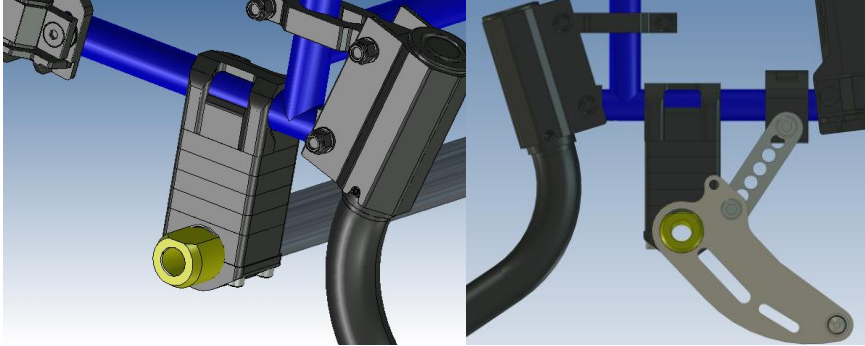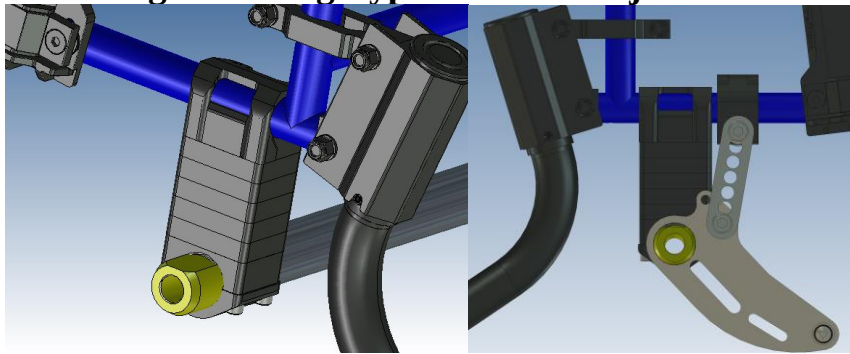Monteringsanvisning Typ 30 med förhöjd bakaxel +50**Monteringsanvisning Typ 30 med förhöjd bakaxel +60**

5. Montera den underhängda batteri väskan eller om du har beställt Litium batteri så monterar du batteri hållaren. Se bilden nedan.


OBS!

Tänk på att den under hängda batteriväskan och batteriboxen är i vägen för tippskydden när dessa skall fällas in. Detta går att komma ifrån genom att beställa en rygghängd batteriväska istället för standardväskan eller så används den medföljande plastklämman till att fästa ihop tippskydden med varandra, se bilden nedan. Monteringen av klämman kan behöva anpassas till aktuell stolsbredd. Nedan följer två monteringsexempel.

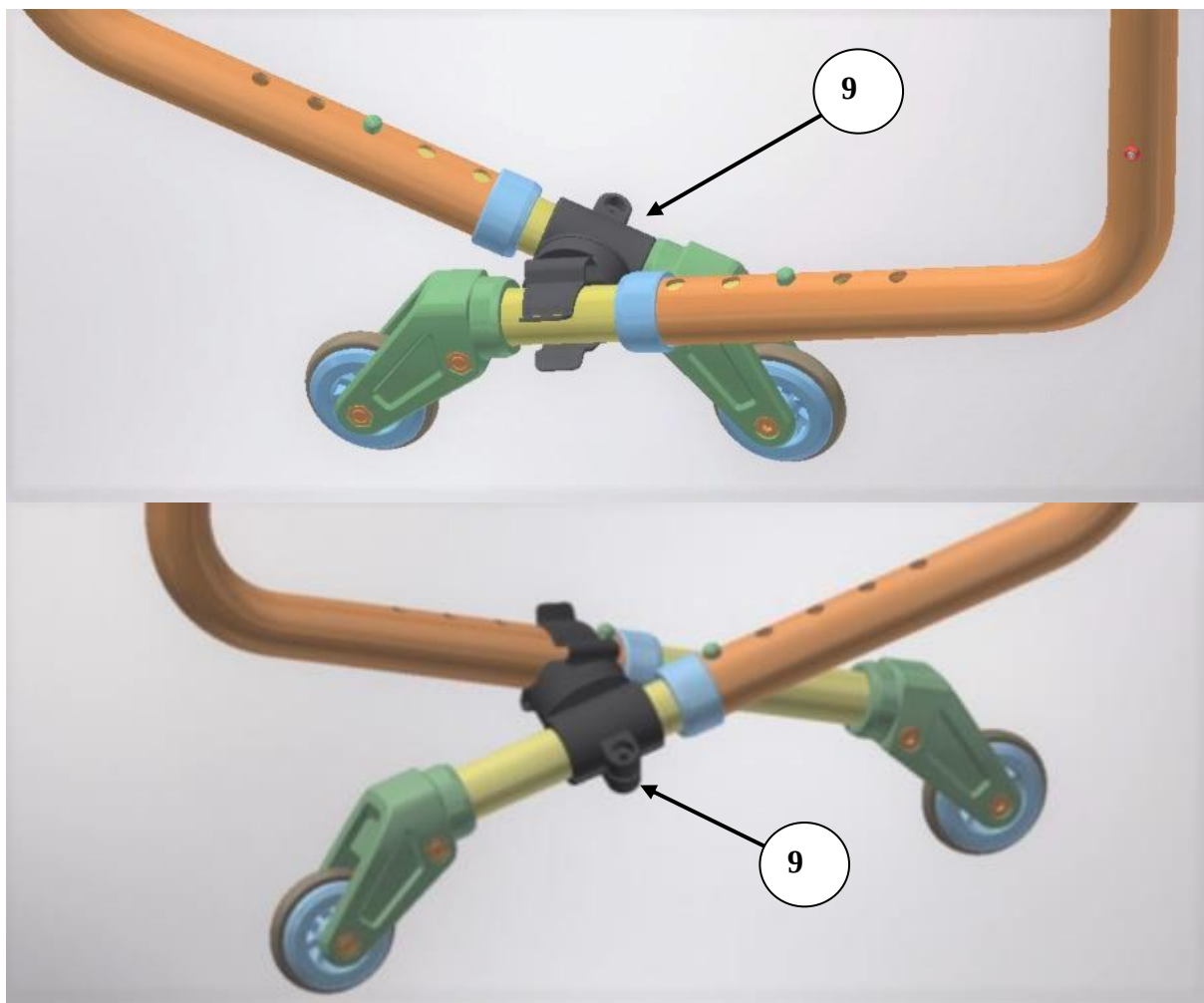

9	350070	1	Klämman tippskydd S3/U3
---	--------	---	-------------------------



MEM5014

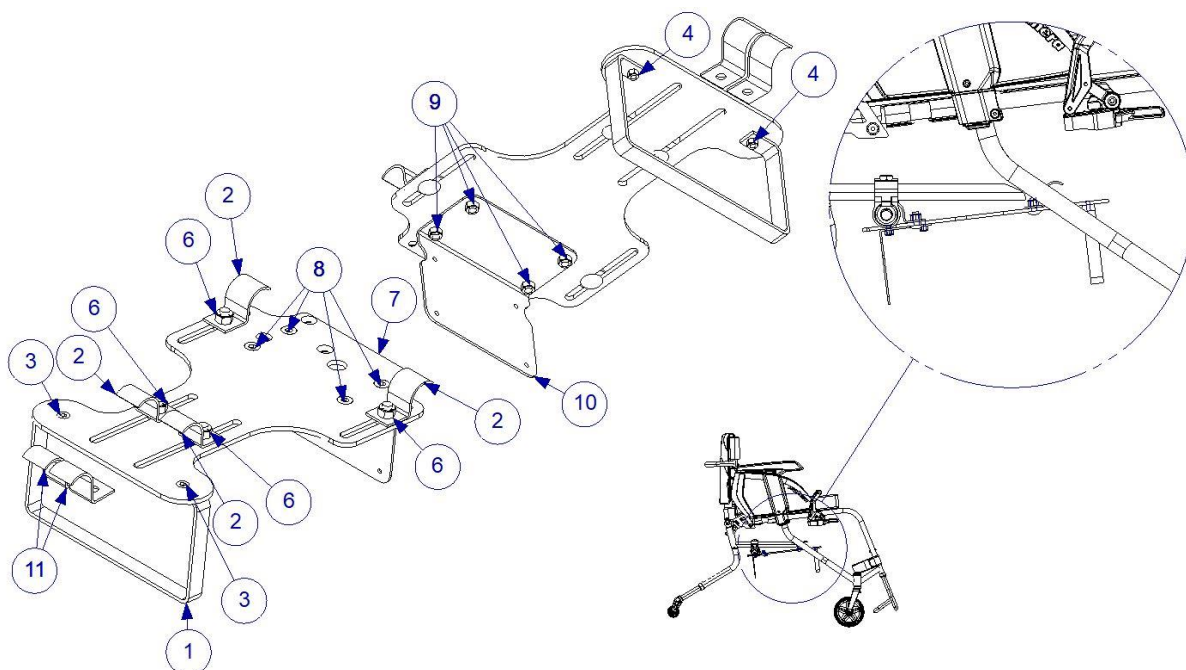

1	MEM5002	1	
2	MEM5003	4	
3	XSFM5X12	2	
4	XSM5ML	2	
5	XSSM8X16	4	
6	XSM8ML	4	
7	MED5001	1	
8	XSFM6X12	4	
9	XSM6ML	4	
10	MEM5011	1	
11	MEM5004	2	

OBS! Bambino inkluderas inte.


300201

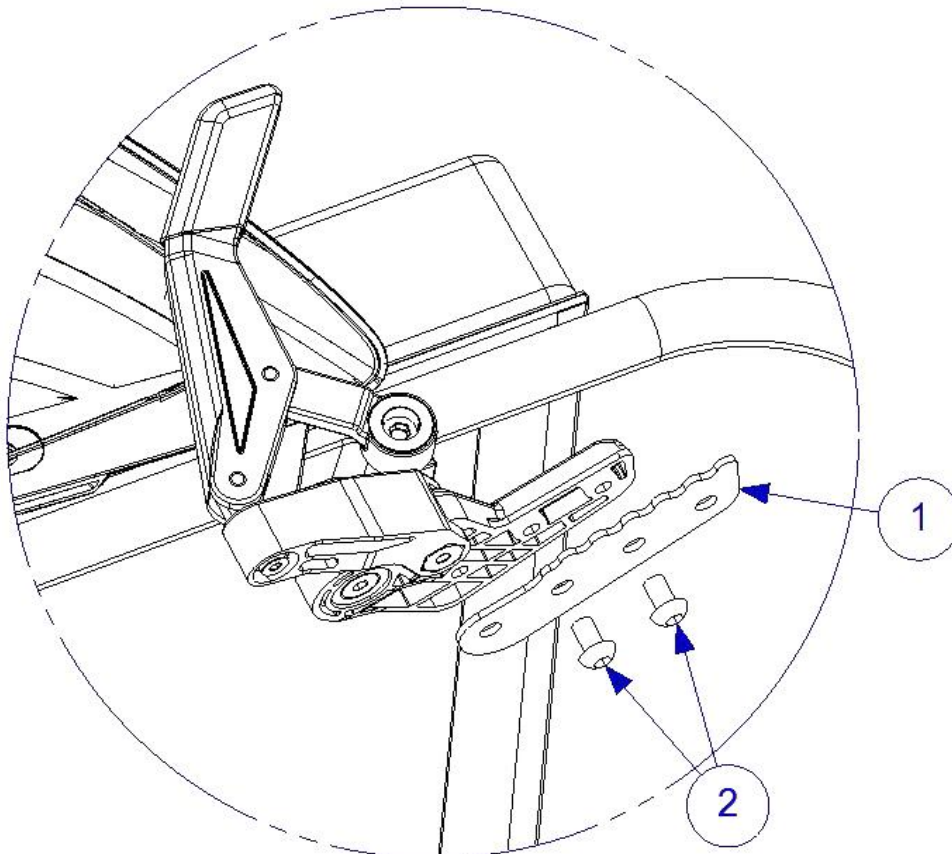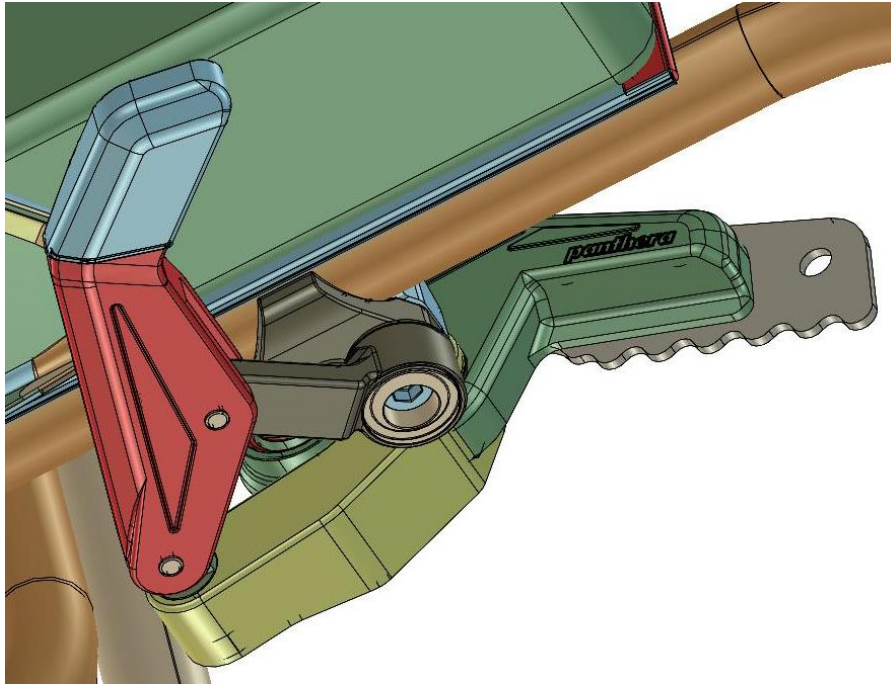

1	300200	1	
2	XSM6X10	2	



M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

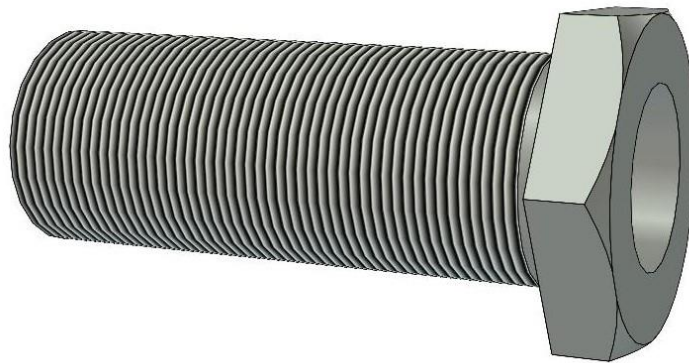

M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm