


Monteringsanvisning E-Walk för Etac Prio

MCG1195

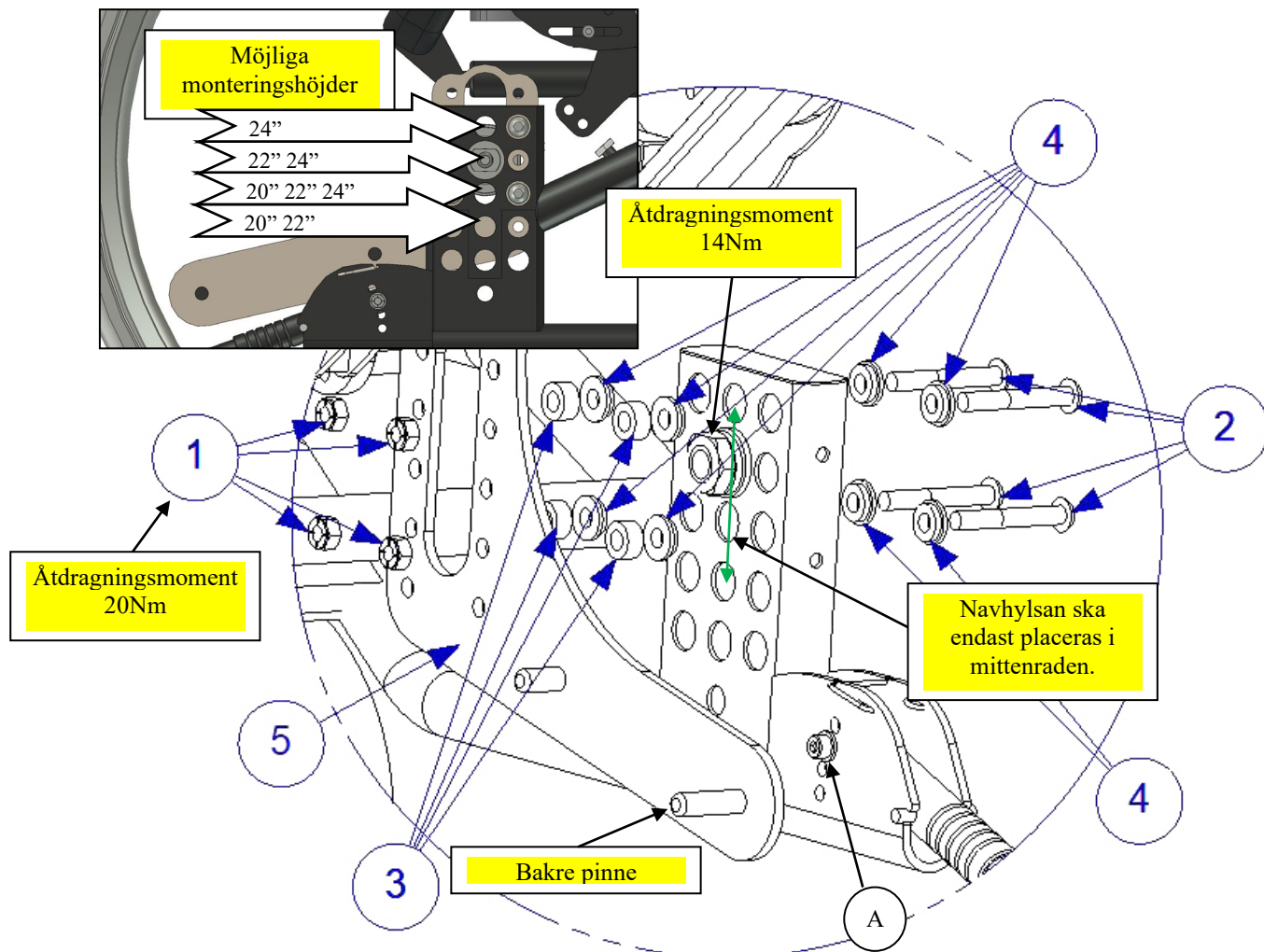

1. Börja med att vända tippskydds skruvarna A så att muttern kommer på insidan, detta måste göras för att tippskydden skall bli möjligt att efterjustera.
2. För montering av fästet på höger sida så skall följande ingå.

Placering.	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XSM8ML	4	Låsmutter M8
2	XSM8X55	4	Skruv Rundad M8 x 55
3	100 400 003	4	Distans
4	100 400 007	8	Distans
5	MCG1195R	1	Höger Fäste Prio

3. Börja med att montera de fyra M8 skruvarna med korrekt åtdragningsmoment. Verifiera därefter navhylsans åtdragningsmoment.
4. Optimal placering för eWalk fästet är att bakre pinne har en cirka höjd på 195 mm över marken, den främre bör vara 30mm högre.

VARNING!

Tilttningsgraden för sitsen blir begränsad, hur mycket beror på monteringshöjden för eWalk-fästet.