



Monterings anvisning Impera, Impera Short, Kid, S, VR MEM6251P och MEM6252P

1. Demontera hjulen på båda sidorna.

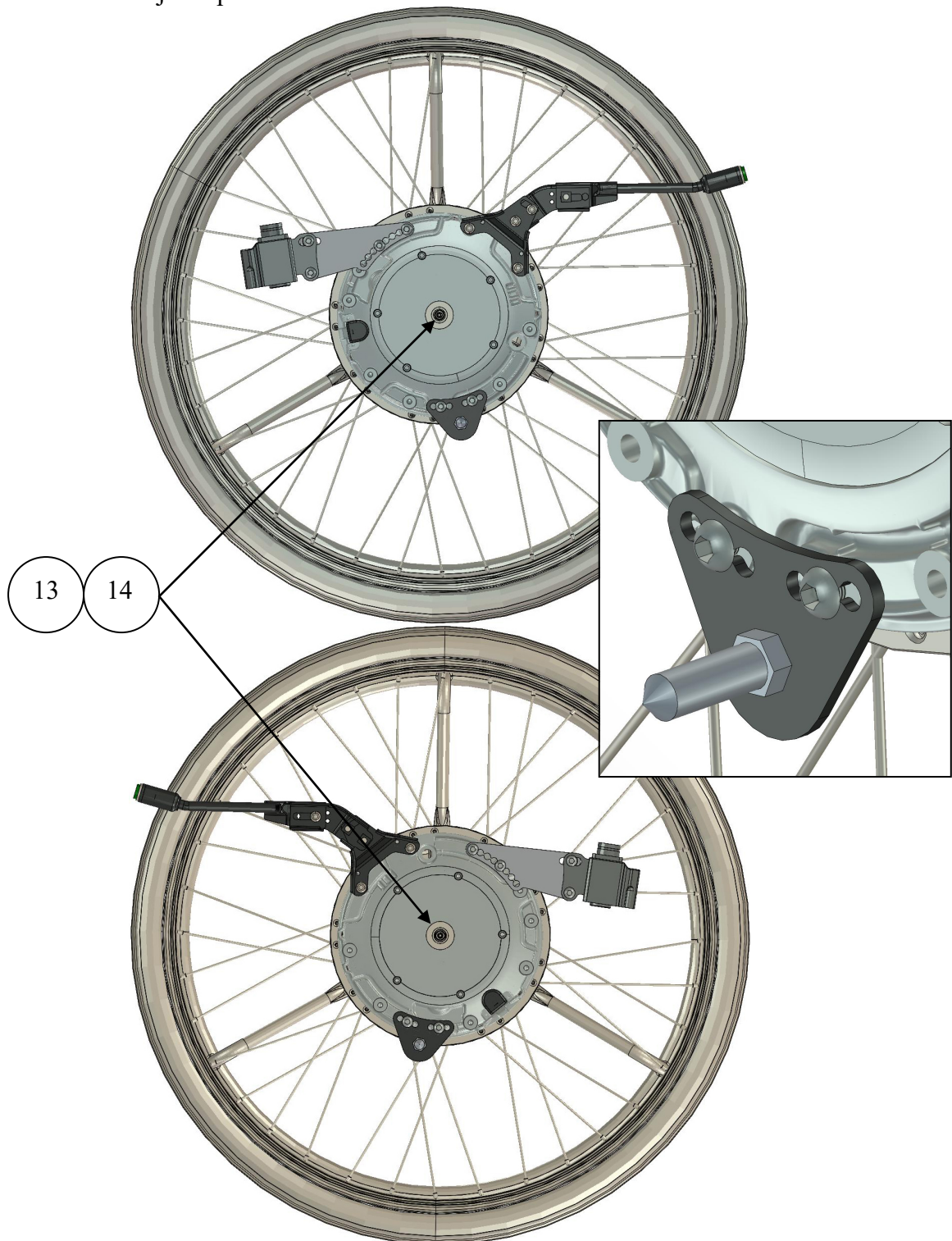

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
Axel Ø12,0 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0, Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00 och Stopp pinne är monterat med Detalj nummer: 290000, 300001 och XSM8ML.

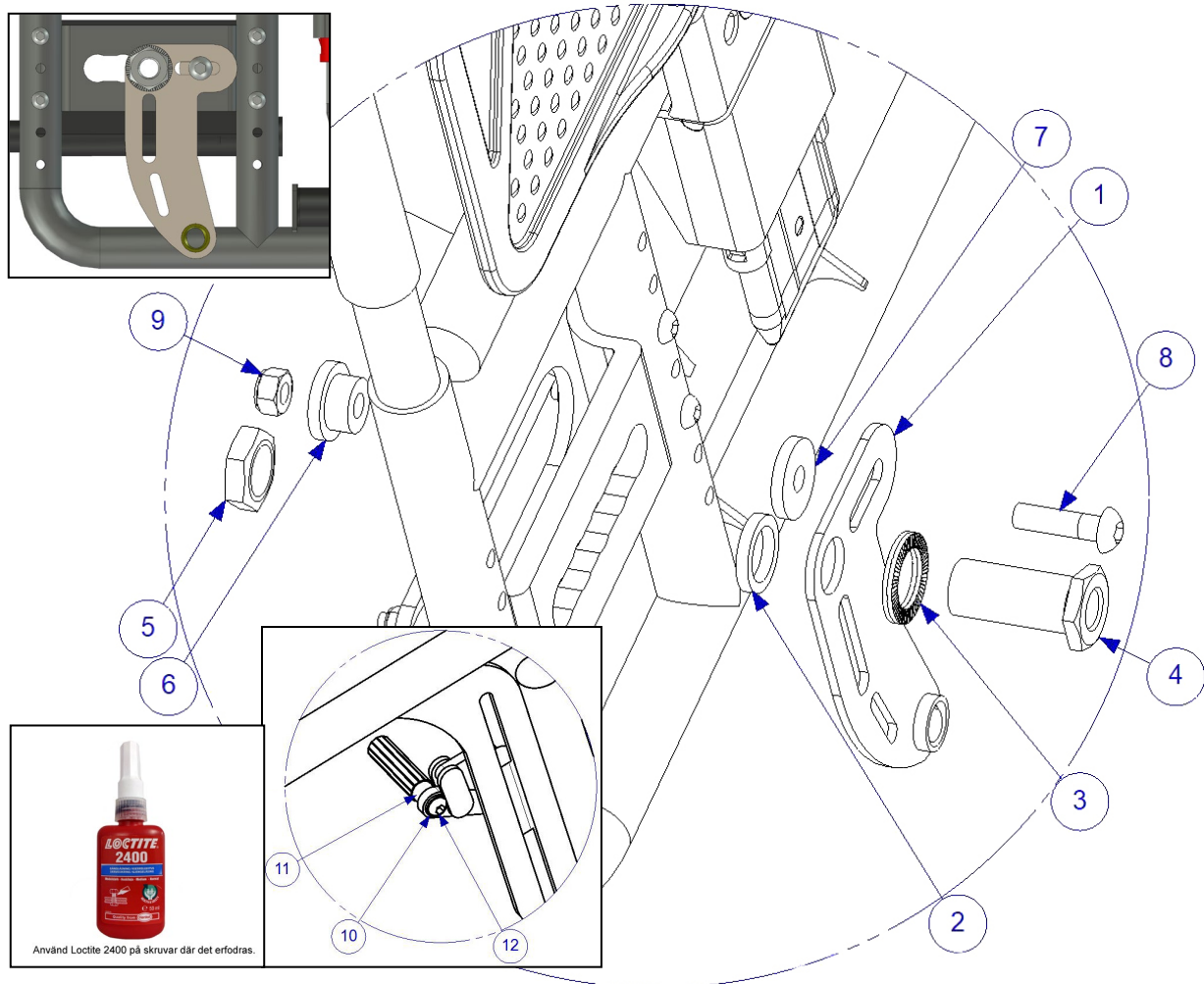

3. Detaljer som ingår för montering av fästet och broms förlängning på en sida.

Placering	Art.Nr.	Antal	Beskrivning
1	310031	1	Fäste
2	100 400 014	1	Distans
3	405241	1	Nordlock M18 bricka
4	HW090	1	Navhylsa
5	XSM18M	1	Mutter M18 x1 låg
6	100 400 079	1	Distans
7	100 400 011	1	Distans
8	XSM8X30	1	Skruv Rundad M8 x 30
9	XSM8ML	1	Låsmutter M8
10	XSM6BR	1	Planbricka M6
11	100 400 039	1	Distans för parkeringsbroms
12	XSM6X30	1	Skruv Rundad M6 x 30
13	XOE-25383-00	1	Distans 12,0
14	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringsset medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.

4. Montera den rygghängda batteri väskan.