



Monteringsanvisning LBM7013, LBM7113, LBM7213

Liberty Adaptersats Etac Cross 6 / Cross 6 Lång

1. Säkerhet och föreskrifter

Symboler



Risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till skador på operatören eller andra personer.



Risk för materiella skador.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till materiella skador.



Extra viktig eller förklarande information.

Allmänna föreskrifter


Denna monteringsanvisning skall alltid följas vid montering av adaptersats LBM7013, LBM7113, LBM7213. För att sedan kunna koppla Liberty på rullstolen krävs att Liberty ställs in enligt separat monteringsanvisning.

Varningar



Monteringsarbeten och ändringsarbeten som beskrivs i detta dokument får endast utföras av utbildad servicetekniker, återförsäljare eller annan av Decon Wheel utsedd representant.

2. Översikt

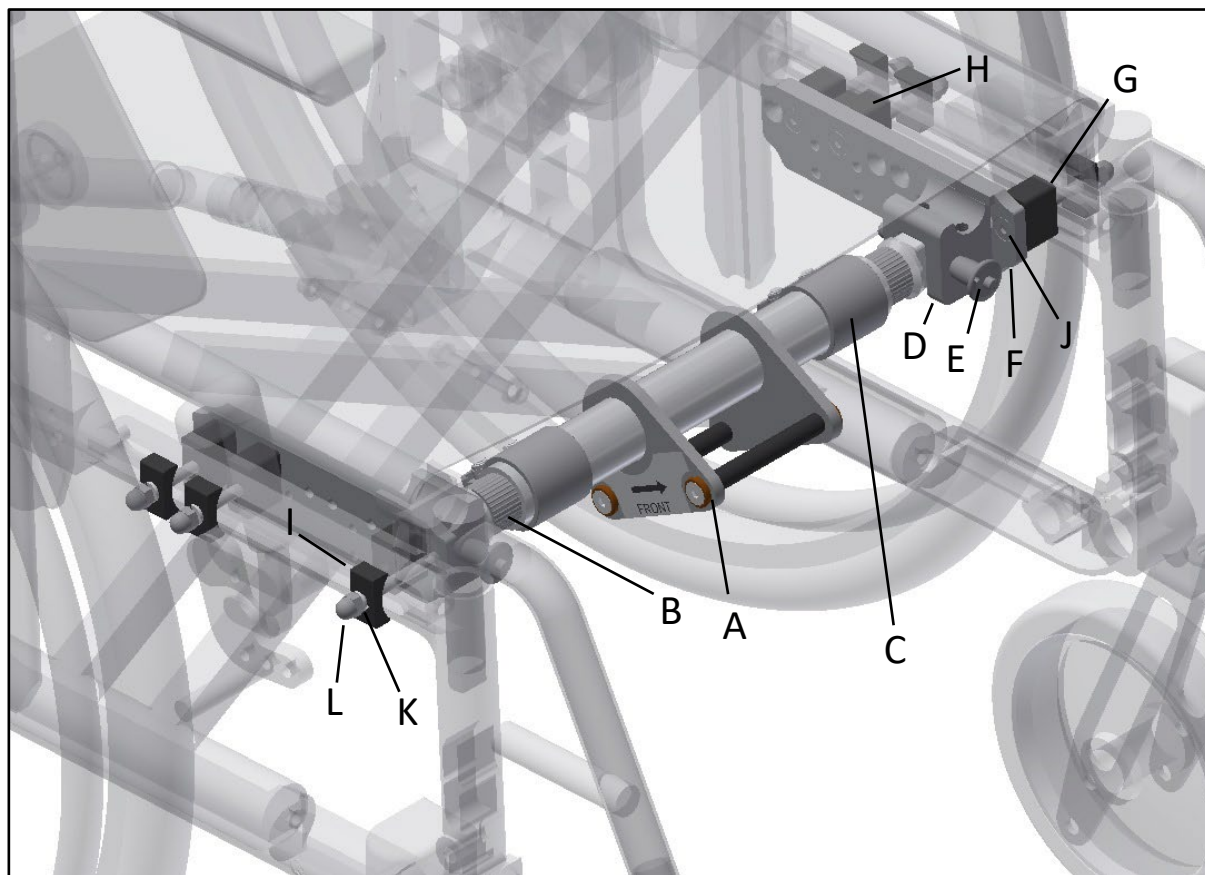


Placering	Antal	Beskrivning
A	1	Centrumrör adapterbalk
B	2	Ytterrör adapterbalk
C	2	Klämma
D	2	Fäste adapterbalk
E	2	QR-Pinne
F	2	Adapterplatta
G	4	Distans adapterplatta främre
H	4	Distans adapterplatta bakre
I	6	Bricka adapterplatta
J	6	Skruv M6x55 försänkt
K	6	Fjäderbricka M6
L	6	Kupolmutter M6
M	4	Skruv M6x14 försänkt

3. Montering och inställning

Montera först adapterplattan (F), distans adapterplatta (G & H) Samt yttre brickor (I). Det ingår 2st av respektive typ av distans adapterplattor/sida, främre och bakre typ. Detta för att möjliggöra korrekt placering av adapterplattorna (F). Använd totalt 3st/sida.

Detta görs med hjälp av skruvarna (J) som låses på utsidan av ramen med fjäderbricka (K) och kupolmutter (L).

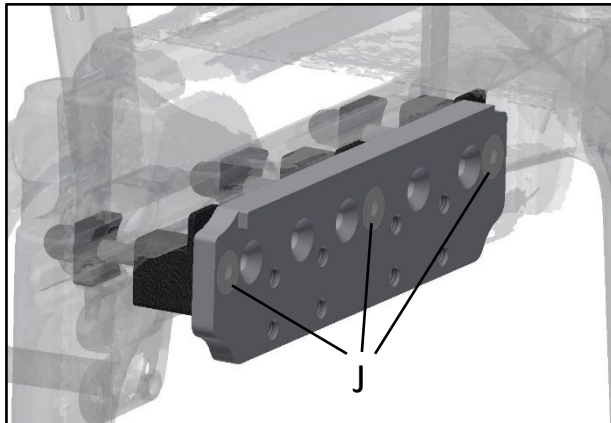

Dra i detta läge åt kupolmutter (L) löst så att adapterplattan (F) fortfarande kan flyttas i längdled längs rullstolens ram.


Montera nu fäste adapterbalk (D) i adapterplattan (F) med hjälp av skruvarna (M).

Montera båda sidor



VARNING!

Vid montering måste alltid en infästningspunkt hamna framför rullstolens broms.

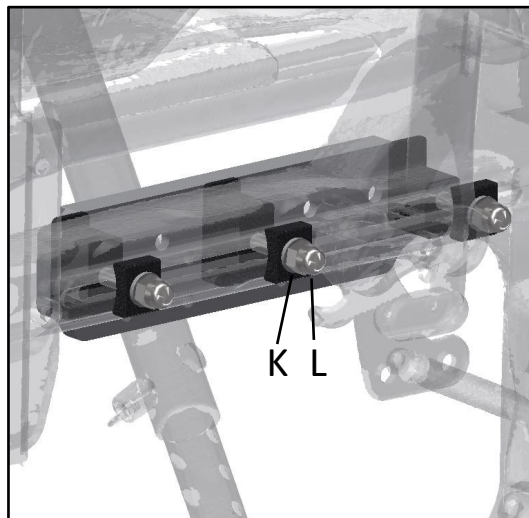




INFO


Positionen för bakre hjulen på rullstolen är monterade i kan påverka placeringen av skruvarna (J) samt placeringen av fäste adapterbalk (D). Det som visas på bilden ovan kan skilja mellan olika rullstolar beroende av vilket läge rullstolens bakre hjul är monterade.

På den långa versionen av Cross 6 kommer troligen samtliga infästning punkter hamnar framför rullstolens broms.

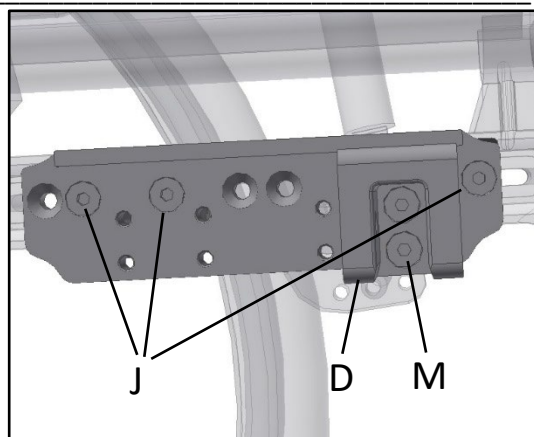

Montera den kompletta adapterbalken bestående av centrumrör (A), ytterrör (B) och klamma (C). Denna fästs in i fäste adapterbalk (D) med hjälp av QR-Pinnarna (E).

Se till att ändarna på det yttre röret (B) är parallella så att adapterbalken passar in i sina hållare. Centrumröret (A) skall kunna flyttas i sidled samt roteras.

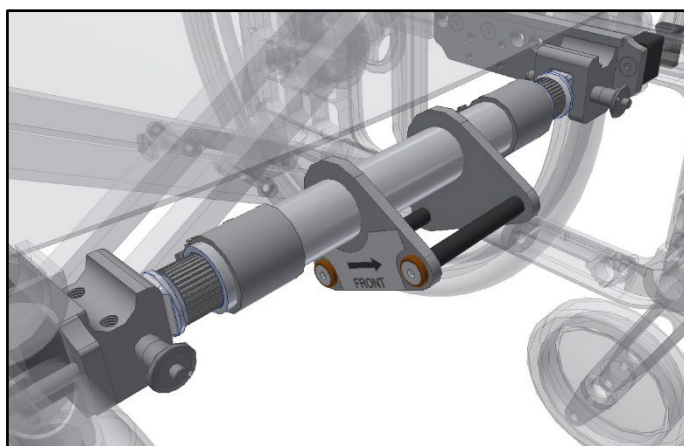

Dra ut åt alla skruvar (J) som håller adapterplattan på plats.




Kontrollera så att pilen på klistermärket monterat på centrumröret (A) pekar framåt i körriktningen. Om detta är vänt fel kommer det ej gå att koppla Liberty mot adapterbalken.






Det finns två typer av nivåverktyg som används vid inställning av adapterbalken. Ett äldre där hela vattenpasset visas och ett nyare där den främre delen av vattenpasset inte visas. Vid användning av det äldre vattenpasset så skall den bakre sträcken på vattenpasset användas vid inställning (markerat med en rektangel på bilden nedan). Då adapterbalken har splines inuti sig kommer vattenpasset ej att hamna i våg utan man får välja det hack som är närmst.

Äldre variant

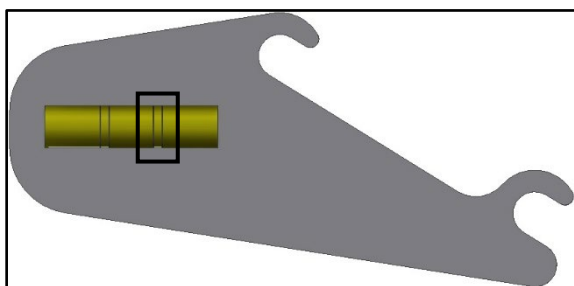


Ny variant

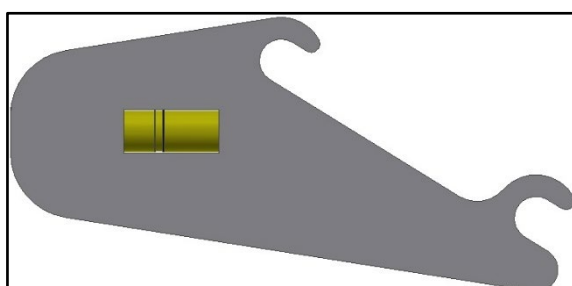

Inställning av rätt vinkel för centrumröret kan ske på två sätt beroende på hur långt den yttre rören är instuckna i centrumröret. Båda sätten beskrivs nedan.


Alt.1

Med hjälp av det nivåverktyg som följer med leveransen av Liberty (inte adapter set) ställ in rätt vinkel på centrumröret genom att vrida detta tills det hamnar i våg. Röret har splines innuti sig, det kommer kännas ett litet klick för varje steg som röret roteras. När rätt vinkel har uppnåtts, kontrollera att centrumröret är centrerat i rullstolen. Dra nu åt skruvarna i samtliga klammor (C).

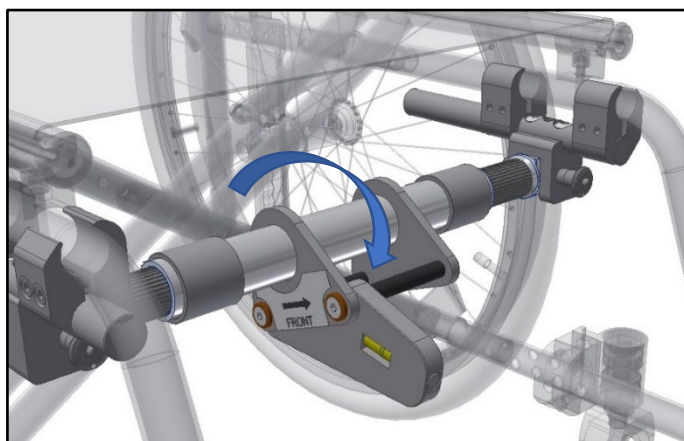


VARNING!

Skruvarna i klammorna (C) skall dras åt med ett moment om 7-9Nm.

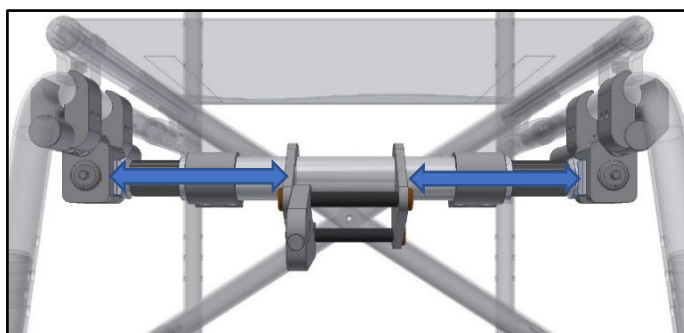


Alt.2

Med hjälp av det nivåverktyg som följer med leveransen av Liberty (inte adapter set) ställ in rätt vinkel på centrumsröret. Montera endast ett innerrör i centrumsröret och vrida detta tills det hamnar i våg. När rätt vinkel har uppnåtts, montera den andra innerröret i samma position/vinkel som det första. Kontrollera att centrumsröret är centrerat i rullstolen. Dra nu åt skruvarna i samtliga klammor (C).

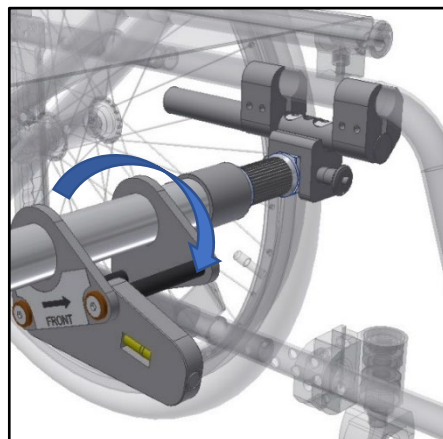


VARNING!

Skruvorna i klammorna (C) skall dras åt med ett moment om 7-9Nm.

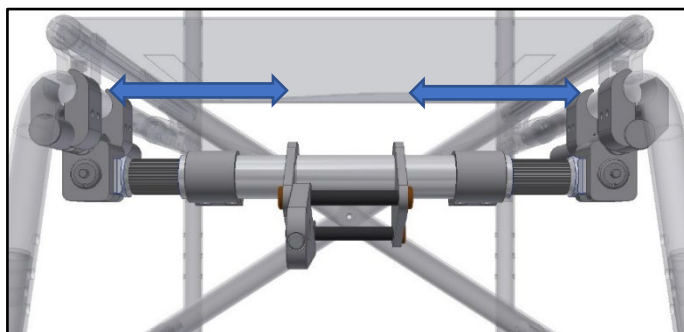

Med hjälp av ett måttband, mät höjden från centrum på den främre pinnen på adapterbalken ned till marken. Detta mått behövs senare när höjden på Liberty skall ställas in.

Läs nu igenom monteringsanvisningen för Liberty som följde med leveransen av denna. Montera och ställ in Liberty enligt de anvisningar som anges i denna.

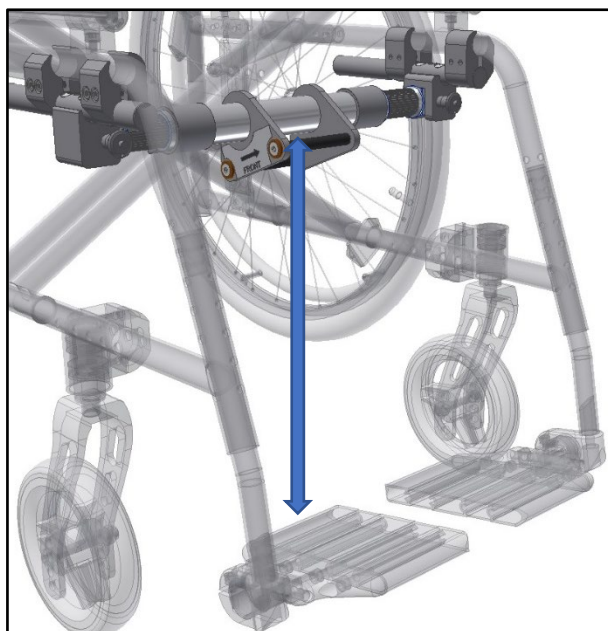

I det fall rullstolens bromsar monterats bort vid montage av adapterbalken glöm ej att återmontera dessa. Om sittklädseln har lossats glöm ej heller att återmontera denna.

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 119, SE-314 93 Hyltebruk, Sweden
Tel: +46 (0)345 40880
Fax: +46 (0)345 40895
E-mail: info@decon.se

