



**Monterings anvisning Meyra ZX1 1,360, ZX3 1,370
MEM6279 och MEM6280**

1. Demontera hjul och navhysan båda sidorna.

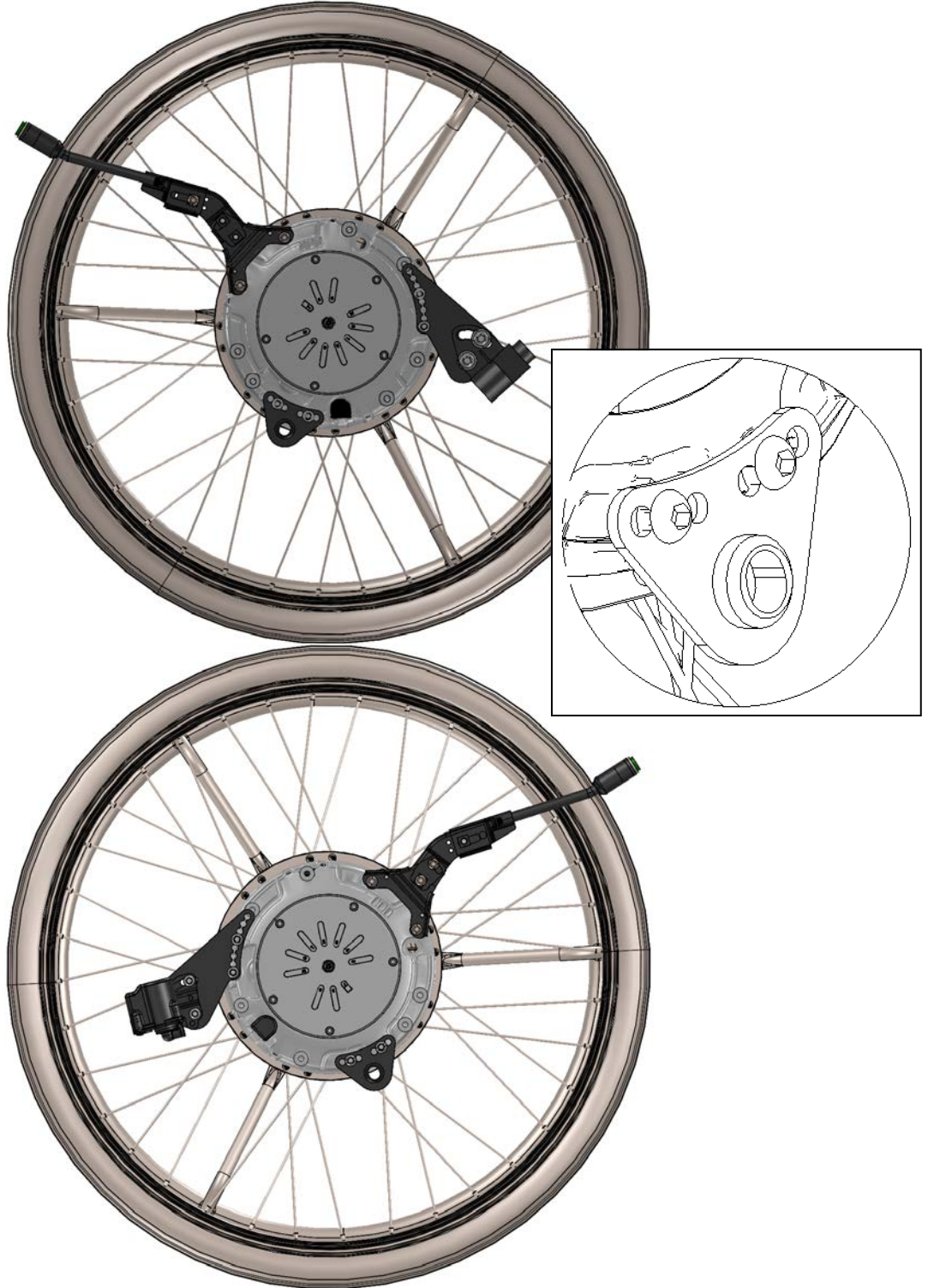

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel Ø12.0 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0.

Alternativ 1

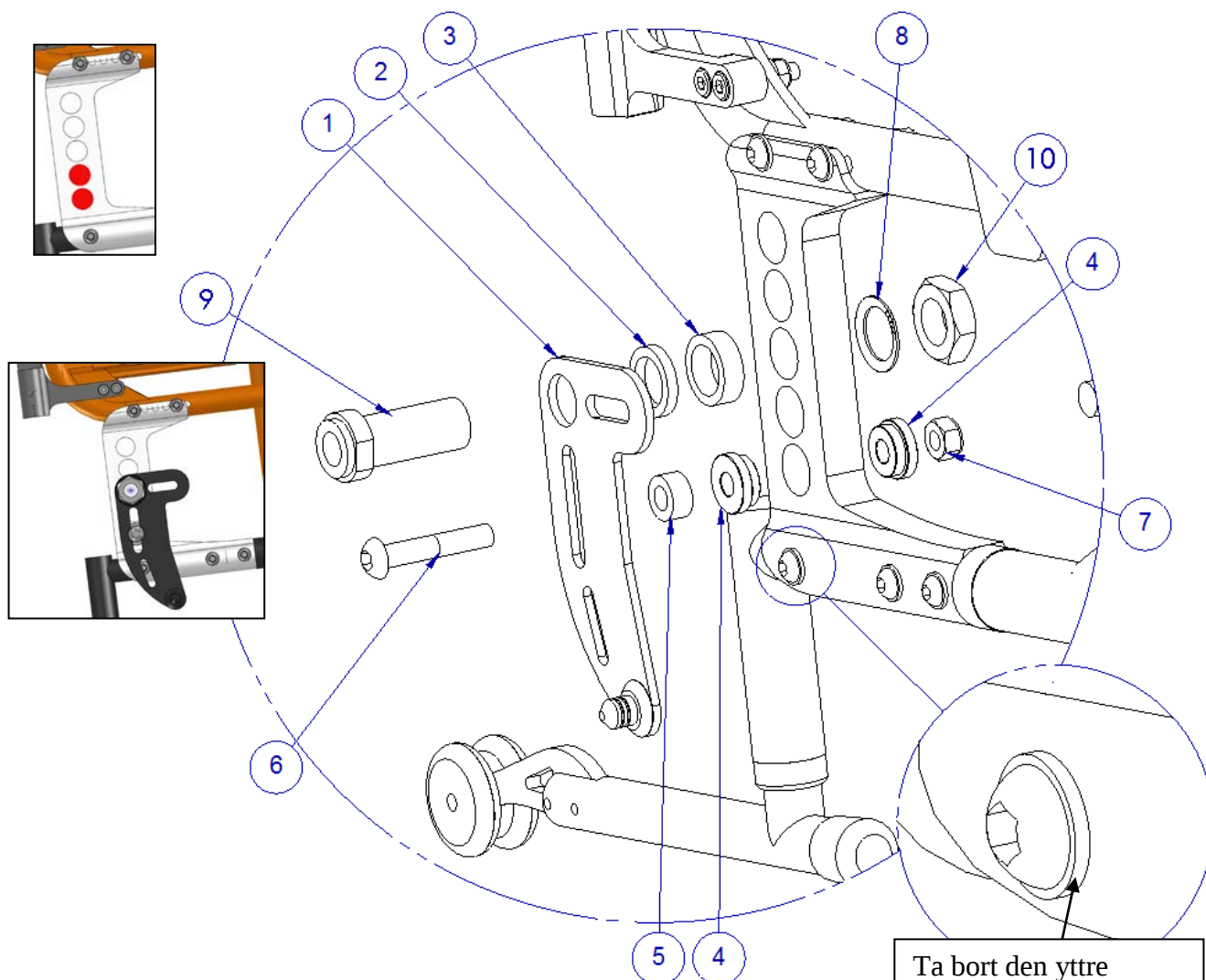

3. Se bild som visar montering av fästet.

Glöm inte att ta bort brickorna innan ni monterar fästet.


Ta bort den yttre brickan på båda sidor av rullstolen.

Detaljer som ingår för montering på en sida.

Placering	Detalj nummer	Antal	Beskrivning
1	XOE-22294-10	1	Höger Fäste 18 hål
2	100 400 014	1	Distans
3	100 400 016	1	Distans
4	100 400 008	2	Distans
5	100 400 003	1	Distans (Endast Alt. 1)
6	XSM8X45	1	Skruv Rundad M8 x 45
7	XSM8ML	1	Låsmutter M8
8	405240	1	Låsbricka Schnorr VS MZB 18
9	Original Navhylsa	1	Original Navhylsa <u>medföljer ej</u>
10	Original Mutter M18	1	Original Mutter M18 <u>medföljer ej</u>

OBS! Vid separat köp av monteringssats medföljer ej hjulaxel, för byte se servicebok.

Alternativ 2

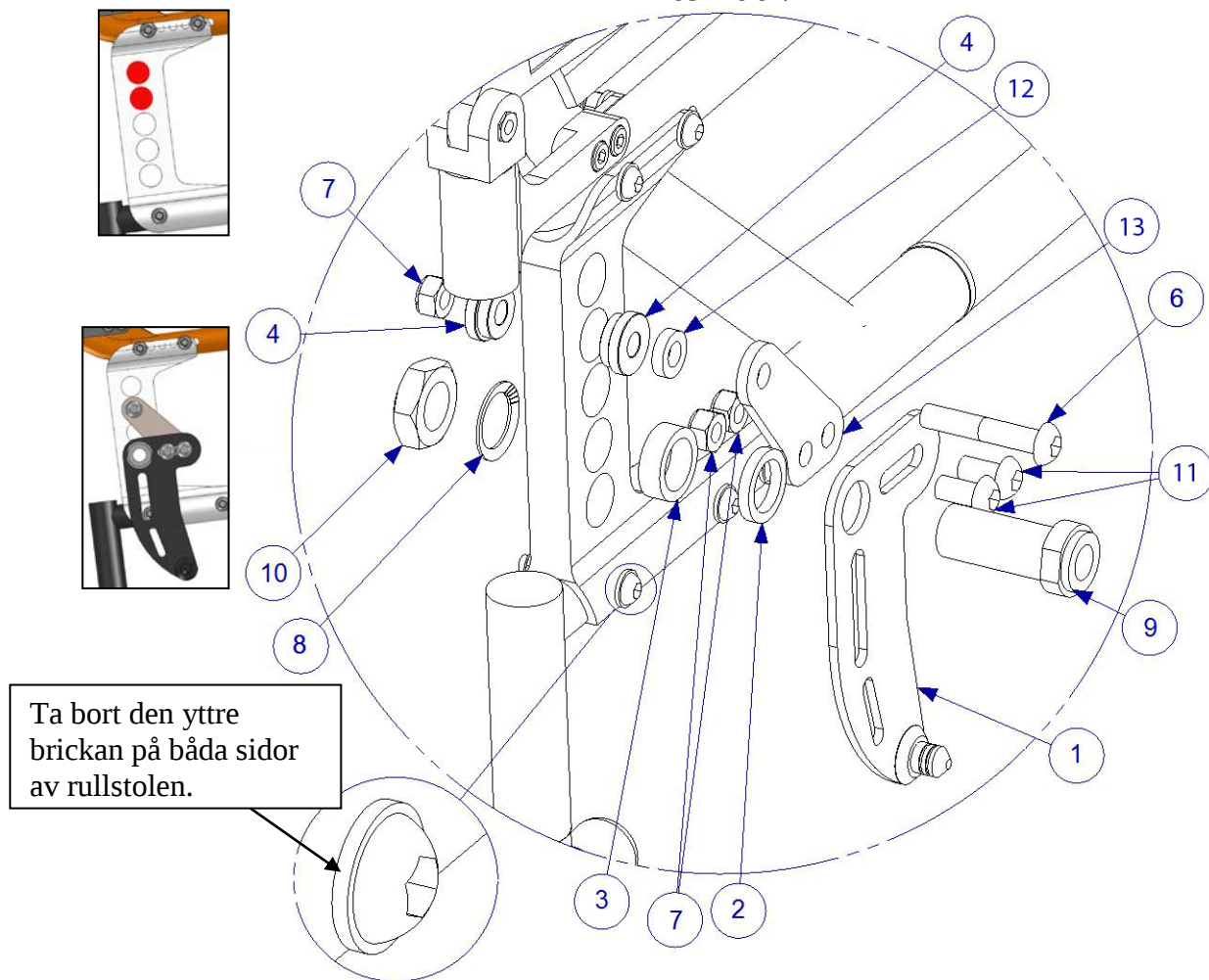

4. Se bild som visar montering av fästet.

Glöm inte att ta bort brickorna innan ni monterar fästet.

Detaljer som ingår för montering på en sida.

Placering	Detalj nummer	Antal	Beskrivning
1	XOE-22294-10	1	Höger Fäste 18 hål
2	100 400 014	1	Distans
3	100 400 016	1	Distans
4	100 400 008	2	Distans
6	XSM8X45	1	Skruv Rundad M8 x 45
7	XSM8ML	3	Låsmutter M8
8	405240	1	Låsbricka Schnorr VS MZB 18
9	Original Navhylsa	1	Original Navhylsa <u>medföljer ej</u>
10	Original Mutter M18	1	Original Mutter M18 <u>medföljer ej</u>
11	XSM8X16	2	Skruv Rundad M8 x 16 (Endast Alt. 2)
12	100 400 001	1	Distans (Endast Alt. 2)
13	300084	1	Fäste (Endast Alt. 2)

OBS! Vid separat köp av monteringssats medföljer ej hjulaxel, för byte se servicebok.

5. Montera den rygghängda batteri väskan.