



Monteringsanvisning för E-Move, Etac Cross 5 och Cross 5 XL MEM6153 och MEM6154

1. Demontera originalhjulen och navhylsorna på båda sidorna.

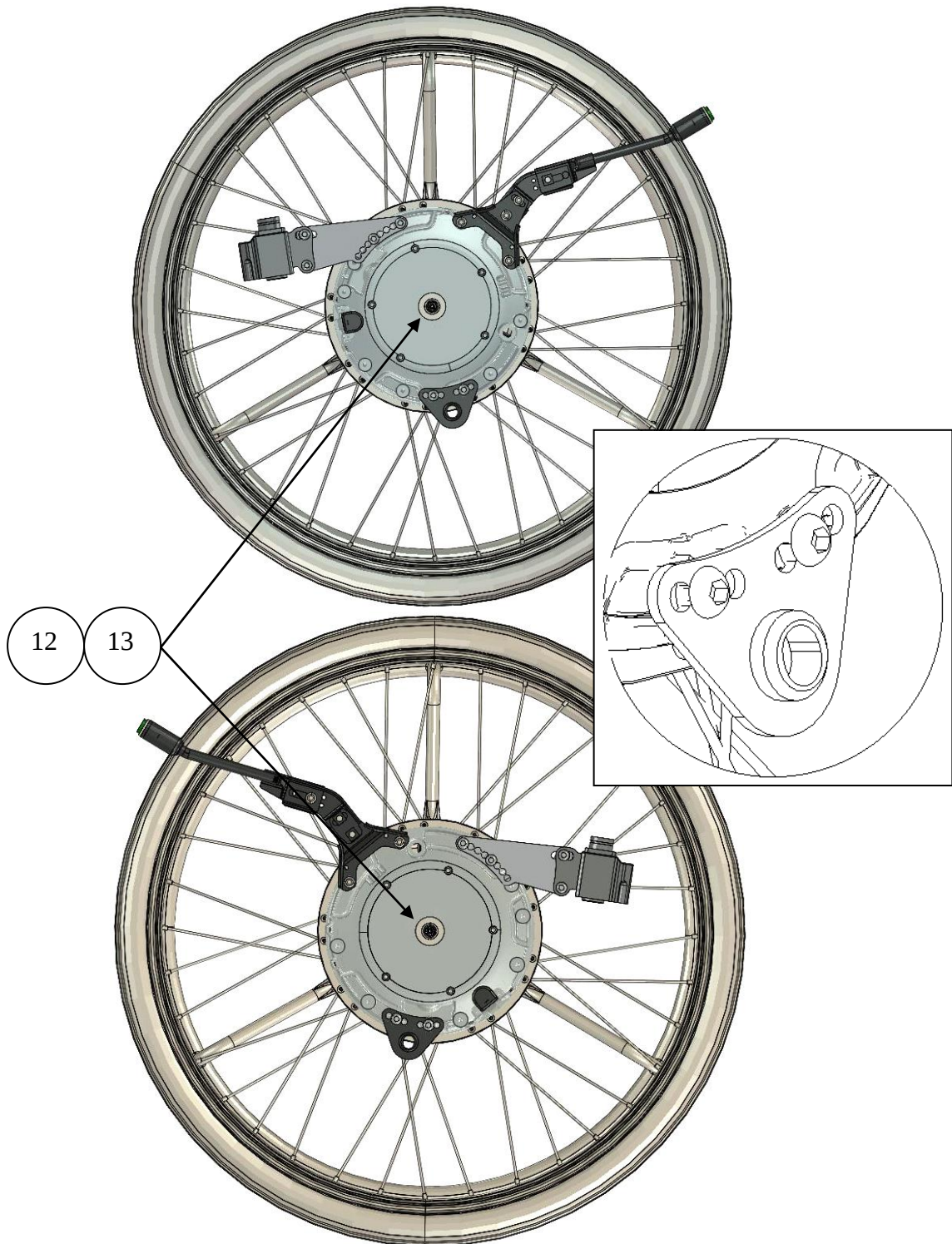

2. Förbered hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel Ø12 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.

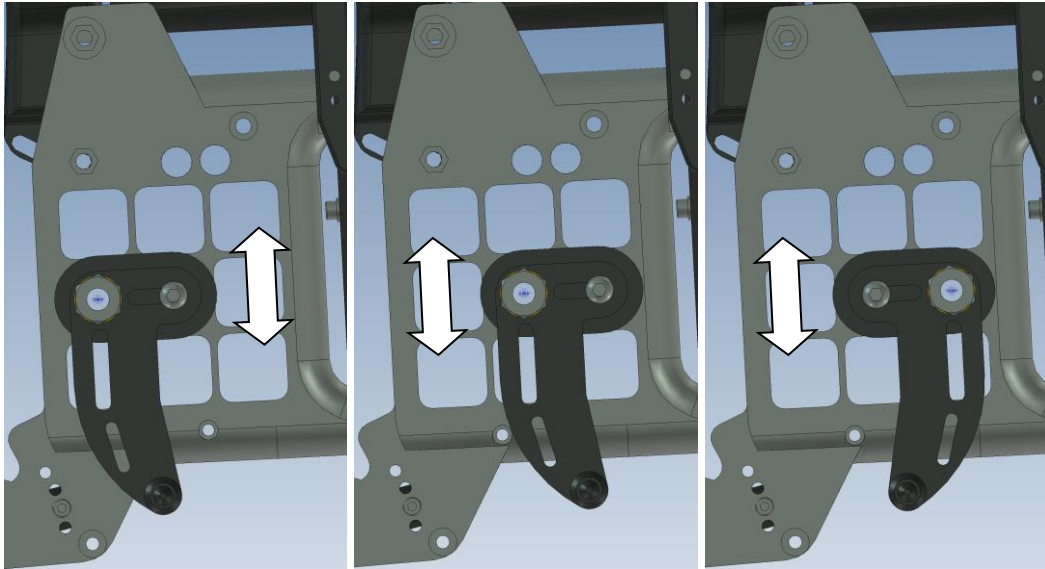


3. Montera nu fästet enligt bilden ovan.

Placeringsalternativ:

Navhylsan går att montera i alla positioner, dock enbart i centrum av respektive hål.

OBS! Vid montering av fästet i den främre kolumnen skall vänster fäste monteras på höger sid. Tvärt om på andra sidan.

4. Verifiera att bromsarna fungerar, eventuellt behöver dessa justeras. För mer information se Etac:s manual.

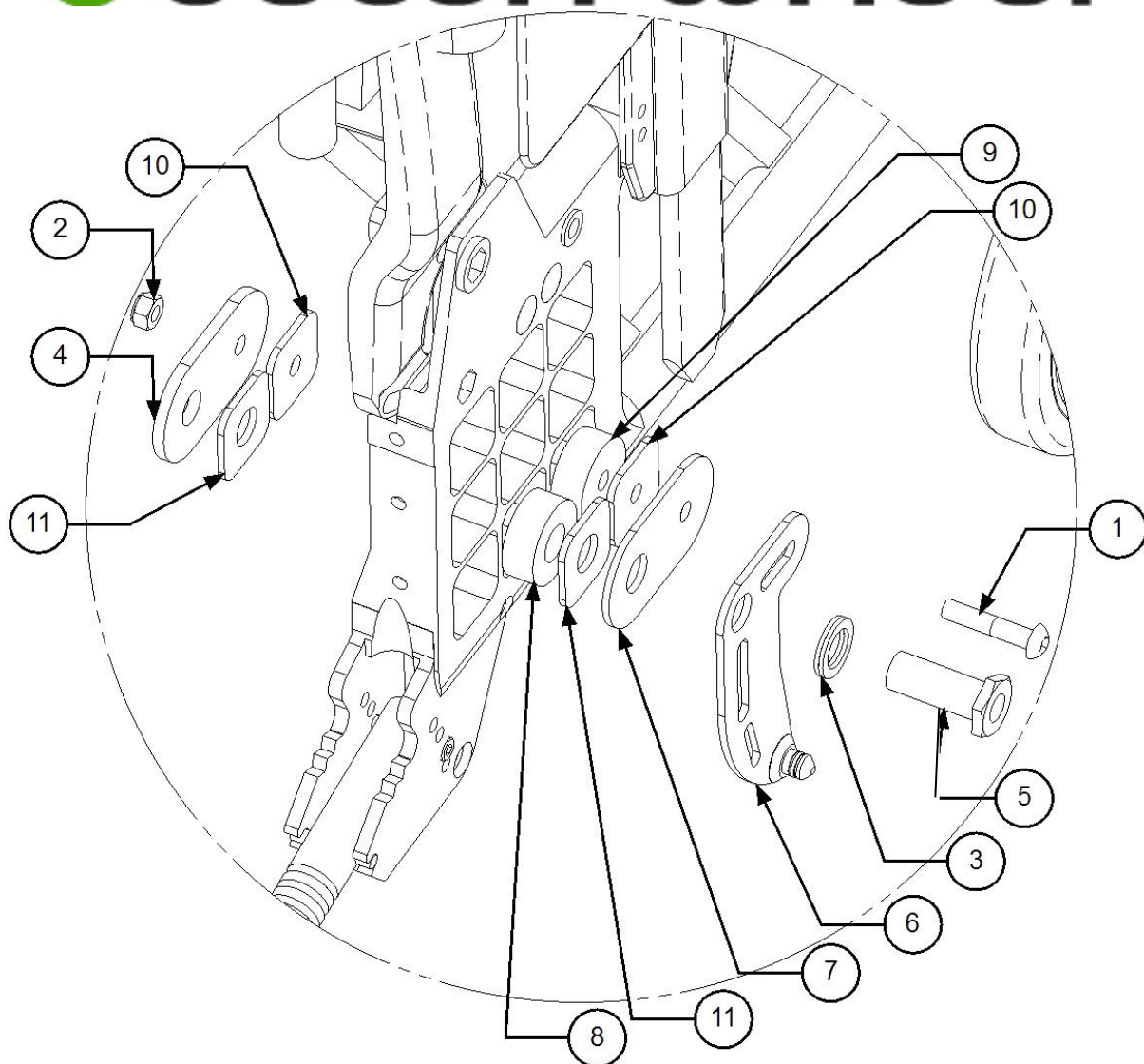


5. Bild visar montering av fästet på höger sida.
För montering på en sida skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XSM8X40	1	Skruv Rundad M8 x 40
2	XSM8ML	1	Låsmutter M8
3	405239	1	Nordlock Bricka
4	MED3100-02	1	Platta Cross5
5	HW063	1	Navhylsa
6	XOE-22294-BO	1	Höger Fäste
7	MED3100-01	1	Platta Cross5
8	100 400 084	1	Distans Cross5
9	100 400 083	1	Distans Cross5
10	MED3100-03	2	Distans Platta
11	MED3100-04	2	Distans Platta
12	XOE-25383-00	1	Distans 12
13	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringsset medföljer ej axel, axeldistans eller spårring, för byte se servicebok.

6. Montera nu den rygghängda batteriväskan på ryggen eller som alternativ enligt bilderna nedan.

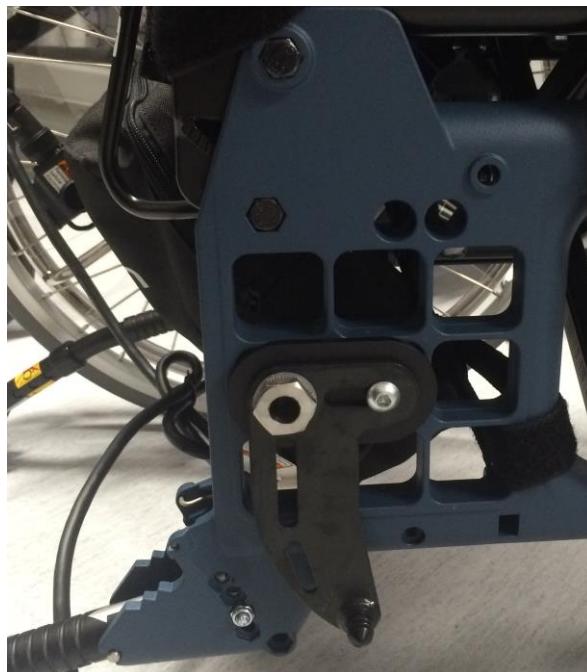

OBS!

Läs brukarmanualen innan ni använder produkten. Detta skall göras för att ni skall få all information om produktens handhavande, varningar samt säkerhetsföreskrifter.



**Om inget annat specificeras, använd följande åtdragningsmoment.
Unless otherwise specified, use the following tightening torque.**

Metrisk grovgångor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Hubsleevers.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm