


# Gebruiksaanwijzing

*DREEFT van Eppur*

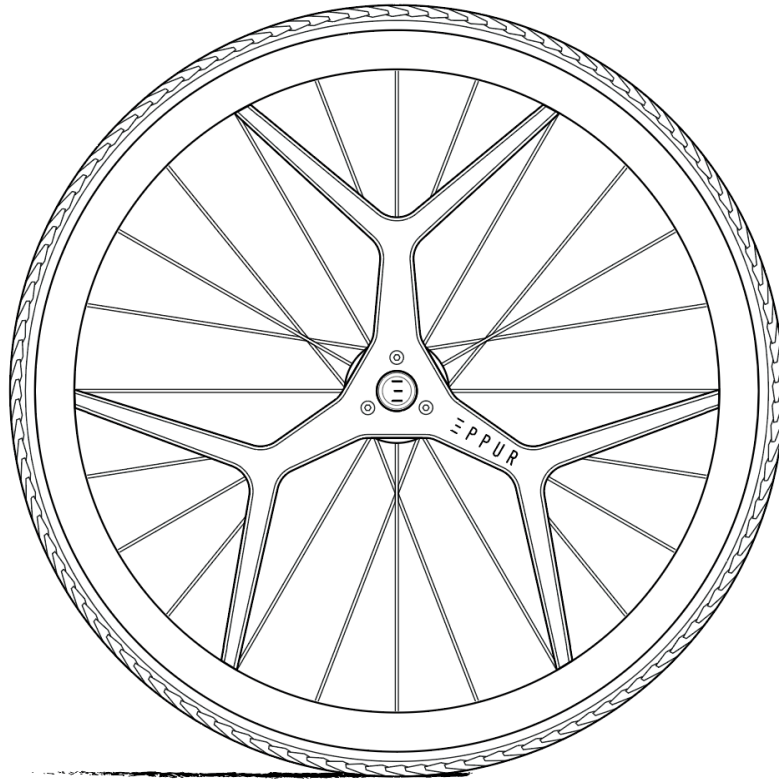

CE

*Dit product voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. De EG-conformiteitsverklaring vermeldt de datum waarop het hulpmiddel in de handel is gebracht.*






*Fabrikant: Eppur SAS, 4 rue professeur Langevin, 59000 Lille*

*Bedrijfsregistratienummer: 88178940800021*

*BTW-nummer: FR47881789408*

*E-mailadres: [hello@eppur.eu](mailto:hello@eppur.eu)*

**INHOUD** 

<b>I. ALGEMENE INFORMATIE</b> 	<b>3</b>
1) Informatie over de gebruikershandleiding	3
2) CE-conformiteit	3
3) Garantie en beperking van aansprakelijkheid	3
4) Beoogd gebruik	4
<b>II. PRODUCTBESCHRIJVING</b> 	<b>4</b>
1) Werking	4
2) Algemene informatie	4
3) Technische gegevens	5
1. Afmetingen en gewicht van Dreeft-wielen	5
2. Omgevingsomstandigheden	5
3. Materialen	5
4. Identificatielabel	6
4) Wielonderdelen	6
1. Overzicht	6
2. Onderdelen	7
<b>III. GEBRUIK VAN DREEFT-WIELEN</b> 	<b>7</b>
1) Wielen monteren en demonteren	7
1. Compatibiliteit van Dreeft-wielen met rolstoelen	7
2. Gebruiksstappen	8
3. Dreeft-wielen monteren en verwijderen	8
4. Andere wielmodellen monteren nadat de rolstoel is uitgerust met adapters A, B of C	9
2) Gebruik van de wielen	10
1. Veiligheidsinformatie	10
2. Eerste bewegingen met een rolstoel voorzien van Dreeft-wielen	10
3) Onderhoud van de wielen	10
4) De wielen vervoeren	10
<b>IV. VEILIGHEID</b> 	<b>11</b>
1) Betekenis van waarschuwingssymbolen	11
2) Algemene veiligheidsinformatie vóór het gebruik van Dreeft-wielen	11
3) Veiligheidsinformatie tijdens het gebruik van Dreeft-wielen	11
4) Algemene veiligheidsinformatie tijdens de montage van Dreeft-wielen	12
<b>V. ONDERHOUD</b> 	<b>13</b>
1) Veiligheidsinformatie	13
2) Onderhoudsschema	14
3) Storingen opsporen en verhelpen	14
<b>VI. NA GEBRUIK</b> 	<b>15</b>
1) Afvoer	15
2) Herstellen van de goede werking	

## I. ALGEMEEN

### 1) Informatie over de gebruikershandleiding

Lees deze handleiding voordat u de Dreeft-wielen gebruikt en bewaar deze gedurende de gehele gebruiksduur van de wielen, zodat u deze later indien nodig kunt raadplegen. Volg alle veiligheidsinstructies om letsel en schade aan het product te voorkomen.

Deze handleiding **MOET** aan de gebruiker van het product worden verstrekt.

Het is ten strengste verboden om de wielnaven zelf te demonteren zonder de specifieke toestemming van het merk Eppur, anders vervalt de garantie.

Bij demontage loopt de gebruiker het risico de controle over de rolstoel te verliezen en te vallen.

U vindt het PDF-bestand van dit document op de website: [eppur.eu](http://eppur.eu), in **de Dealer Area**. Het PDF-bestand kan ook in een vergroot formaat worden weergegeven.

Voor meer informatie over deze gebruiksaanwijzing kunt u contact opnemen met het gespecialiseerde personeel dat u het product heeft geleverd of met de fabrikant via het volgende e-mailadres: [help@eppur.eu](mailto:help@eppur.eu).

### 2) CE-conformiteit

Dreeft-wielen voldoen aan de eisen van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. Overeenkomstig bijlage VIII van deze verordening is het paar Dreeft-wielen ingedeeld in klasse I op basis van de indelingscriteria van de verordening. De conformiteitsverklaring is door de fabrikant op eigen verantwoordelijkheid opgesteld.

### 3) Garantie en beperking van aansprakelijkheid

De wettelijke garantie van de fabrikant voor non-conformiteit geldt gedurende 2 jaar vanaf de factuurdatum van het product, mits het hulpmiddel normaal wordt gebruikt.

Slijtageonderdelen vallen niet onder de wettelijke garantie voor non-conformiteit, aangezien deze bij normaal gebruik van het product slijten:

- Banden
- Binnenbanden
- Velgbodems
- Gripcoatings op handranden (light grip/tetra-uitrusting/carbolife)

De fabrikant is aansprakelijk voor gebreken indien het product wordt gebruikt in overeenstemming met de beschrijvingen en instructies in deze handleiding. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in dit document.

Garantieaanspraken mogen uitsluitend worden gericht aan de leverancier bij wie het product is verkregen.

### 4) Beoogd gebruik

Maak uzelf, voordat u dit product gebruikt, vertrouwd met de hantering, bediening en het gebruik ervan om ongelukken en letsel te voorkomen.

Houd rekening met de volgende punten:

- Gebruikers en hun verzorgers moeten door gespecialiseerd personeel worden getraind in het gebruik van Dreeft-wielen aan de hand van deze gebruiksaanwijzing.
- Onderhoud en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel. Neem bij problemen contact op met de leverancier die u het product heeft geleverd.
- Alle updates van de gebruikers- en montagehandleiding zijn beschikbaar op de website [eppur.eu](http://eppur.eu) in het dealergedeelte.

## II. PRODUCTBESCHRIJVING

### 1) Functie

Dreeft is een paar handbewogen rolstoelwielen met een ingebouwde rem. De naaf van elk wiel bevat een remsysteem dat kan worden bediend via de handring van het wiel, waardoor de gebruiker kan remmen zonder risico op letsel aan de handen. Om de rem te bedienen, trekt u de handring naar achteren. De remkracht is evenredig aan de kracht die op de handring wordt uitgeoefend. Het paar wielen kan op de rolstoel worden gemonteerd met behulp van een interface die aan het rolstoelframe wordt bevestigd, of direct op de wielen. Dreeft-wielen zijn ontworpen voor zelfstandige of begeleide mobiliteit voor mensen met een gedeeltelijke of totale beperking aan de onderste ledematen.

Dreeft-wielen kunnen zowel buiten als binnen op een stabiele ondergrond worden gebruikt.

### 2) Algemene informatie

<i>Beschrijving van Dreeft-wielen</i>	Dreeft is een paar wielen voor handbewogen rolstoelen met een remsysteem dat werkt door achteruit te trappen. De naaf van elk wiel bevat een remsysteem dat kan worden bediend via de handring. Dreeft stelt gebruikers van handbewogen rolstoelen in staat om te remmen, te draaien en te vertragen met minder inspanning van de bovenste ledematen en zonder dat hun handen schuren.
<i>Beoogd gebruik</i>	Het elimineren van wrijving en het verminderen van de kracht die nodig is om de wielen van een handbewogen rolstoel af te remmen.
<i>Indicaties</i>	Gebruikers van handbewogen rolstoelen wier cognitieve vermogens hen in staat stellen het remsysteem veilig te gebruiken en die, om medische redenen en/of vanwege hun omgeving, behoefte hebben aan intermitterende of permanente remondersteuning. Het onvermogen om kracht uit te oefenen kan het gevolg zijn van coronaire en/of respiratoire insufficiëntie en/of musculoskeletale, neurologische of spieraandoeningen van de bovenste ledematen.
<i>Contra-indicaties</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebruikers die zich niet zelfstandig in een handbewogen rolstoel kunnen voortbewegen.</li> <li>- Gebruikers met hemiplegie</li> <li>- Gebruikers die meer dan 120 kg wegen.</li> </ul>

### 3) Technische gegevens

#### 1. Afmetingen en gewicht van Dreeft-wielen

Het gewicht van het wiel is afhankelijk van de onderdelen die zijn geselecteerd op het meetblad dat beschikbaar is op de website [eppur.eu](http://eppur.eu) in **de Dealer Area**.

<i>Totale afmetingen</i>	Totale diameter: 600 mm. Breedte (van as tot handring): 87 of 87 mm (80 mm in compacte handringpositie)
<i>Afmetingen velg</i>	ETRTO: 25/540 mm
<i>Spaakwerk</i>	24 zwarte, gegalvaniseerde stalen spaken
<i>Type handring en bevestiging</i>	Handring met 6 M5-inzetstukken (D = 513 mm)
<i>Gewicht</i>	2700 g* per wiel Configuratie*: RTD-adapter, Schwalbe Marathon+ band, "klassieke" aluminium velg + afneembare handgreep Raadpleeg het bestelformulier* voor een andere configuratie
<i>Verwachte levensduur</i>	5 jaar
<i>Maximaal gebruikersgewicht</i>	120 kg

#### 2. Omgevingsomstandigheden

Dreeft-wielen moeten:

- uit de buurt van vocht worden bewaard;
- niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen (onder -20 °C of boven 40 °C);
- niet in zout water worden gebruikt;
- beschermd worden tegen zand of andere stof-/vuildeeltjes die het gebruik van de wielen en de remfunctie kunnen beïnvloeden.

Dreeft-wielen kunnen in de regen worden gebruikt. De onderdelen van Dreeft-wielen zijn ontworpen om corrosiebestendig te zijn: alle onderdelen die in contact komen met de buitenlucht worden beschermd door een oppervlaktebehandeling, zoals anodiseren of lak. De binnenkant van de naaf is gevuld met vet en beschermd door spatwaterdichte afdichtingen.

#### 3. Materialen


De materialen zijn afhankelijk van de onderdelen die zijn geselecteerd op het maatblad dat beschikbaar is op de website [eppur.eu](http://eppur.eu) in het dealergedeelte.

De onderstaande onderdelen zijn gemeenschappelijk voor alle Dreeft-wielen.

<i>Velg</i>	Aluminium
<i>Staal</i>	Staal
<i>Naaf</i>	Staal
<i>Handringflens</i>	Aluminium
<i>Banden</i>	Rubber
<i>Snelkoppelingsas</i>	Staal en aluminium

#### 4. Identificatielabel


an de binnenkant van de aluminium flenzen is een identificatielabel voor medische hulpmiddel  
ingebracht.

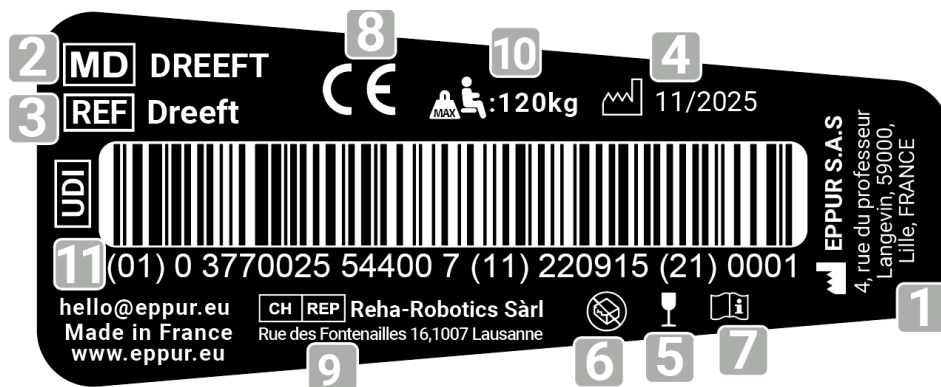

1. Adres van de fabrikant
2. Handelsnaam
3. Productreferentie
4. Productcode
5. Breekbaar
6. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
7. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik
8. Product met CE-markering
9. Adres van de Zwitserse vertegenwoordiger
10. Maximaal gebruikersgewicht
11. UDI-traceerbaarheidsnummer, dat als volgt luidt:  
(01) FABRIKANTCODE  
(11) PRODUCTIEDATUM JJMMDD  
(21) SERIENUMMER


#### 4) Wielonderdelen

##### 1. Overzicht

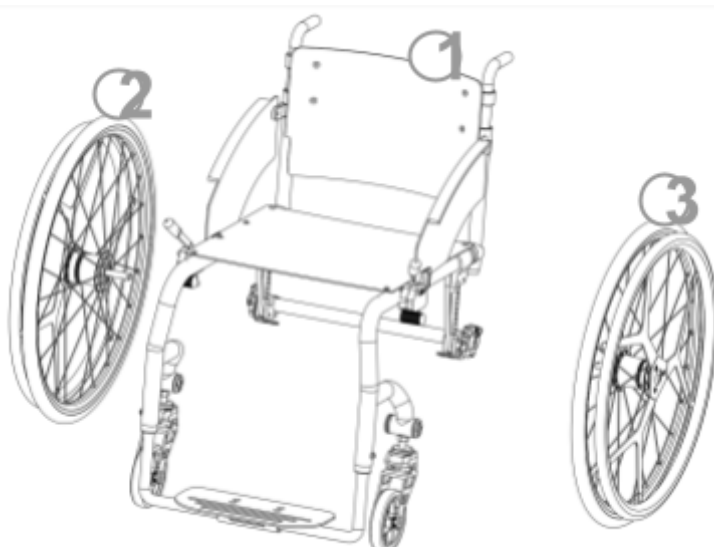

1. Wielstoelframe
2. Rechterwiel
3. Linkswiel

## 2. Onderdelen

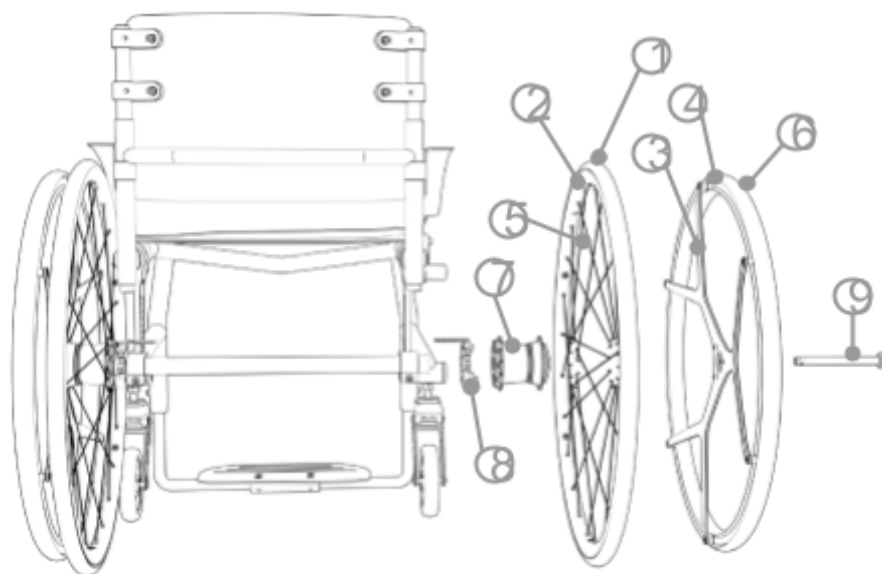

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1. Banden    | 6. Gripcoating voor handring |
| 2. Velg      | 7. Naaf                      |
| 3. Wielflens | 8. Adapter                   |
| 4. Handring  | 9. Snelkoppelingsas          |
| 5. Spaak     |                              |

### III. GEBRUIK VAN DREEFT-WIELEN

#### 1) Montage en demontage van wielen

##### 1. Compatibiliteit van Dreeft-wielen met rolstoelen

De adapter en de as moeten geschikt zijn voor de rolstoel waarop de wielen worden gemonteerd.

**⚠ Als een as of adapter niet geschikt is voor het rolstoelmodel, stop dan met het gebruik ervan en neem contact op met de leverancier die het product heeft geleverd.**

De distributeur die de wielen levert, moet ervoor zorgen dat het referentienummer van de adapter compatibel is met uw rolstoel. Vraag bij twijfel of als u van rolstoel verandert om bevestiging bij uw distributeur. U kunt het compatibiliteitsformulier invullen dat beschikbaar is op de website [eppur.eu](http://eppur.eu).

##### 2. Gebruiksaanwijzing

###### • Voorwaartse beweging

De Dreeft-wielen worden voorwaarts aangedreven door de handring naar voren te duwen. Bij voorwaartse beweging is de aandrijving direct, d.w.z. vergelijkbaar met een conventioneel wiel.

###### • Vrijloop

Tijdens voorwaartse beweging kan de handring stil blijven staan ten opzichte van de rolstoel, zonder dat dit de rolstoel belet vooruit te gaan. De vrijloopstand van de handring biedt enkele centimeters "speling" die noch de voorwaartse beweging, noch de rem activeert.

###### • Remmen


Tijdens voorwaartse beweging activeert druk op de handring in de tegenovergestelde richting het wielremstelsel. De vertraging is evenredig aan de kracht die de gebruiker naar achteren uitoefent.

###### • Achteruit


Zodra de rolstoel tot stilstand is gekomen, worden de achterwielen geactiveerd door achteruit te duwen.

De twee wielen kunnen onafhankelijk van elkaar worden bediend om de rolstoel te sturen.

##### 3. Montage en demontage van Dreeft-wielen

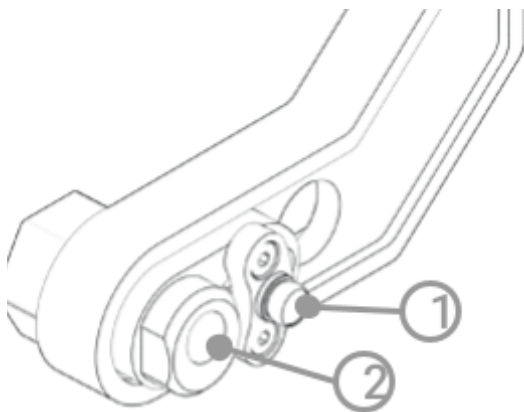

1. Centreerpen adapter

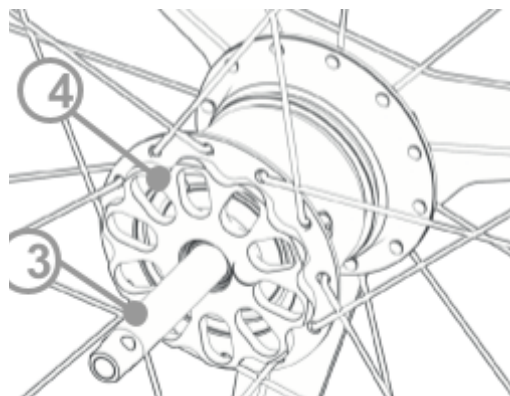


3. Snelkoppelingsas voor aandrijf wiel  
4. Naafbloem

## 2. Asbus

Om de wielen op uw rolstoel te monteren:

1. Zorg ervoor dat u het rechterwiel (**gele stip**) en het linkerwiel (**blauwe stip**) niet omdraait
2. Druk op de drukknop op de snelkoppelingsas (3).
3. Steek de as van het aandrijfwiel (3) in de asbus van de rolstoel;
4. Draai het wiel totdat de centreerpen (1) op de adapter in een van de gaten in de naafkap (4) valt (alleen voor adapters A, B of C).
5. Controleer of de drukknop goed is uitgeklapt;
6. Trek aan het wiel om te controleren of het stevig in het frame is vergrendeld.

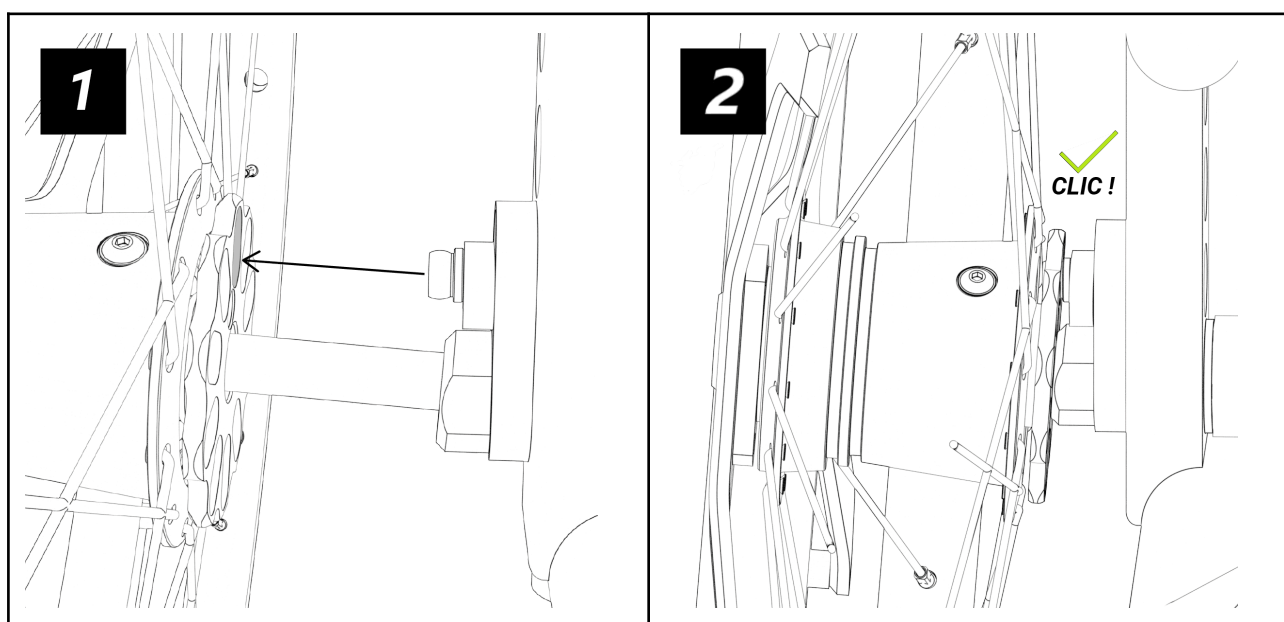

**⚠ Controleer altijd of het wiel vergrendeld is door het na elke montage naar buiten te trekken.**

**⚠ Zorg ervoor dat het rechterwiel rechts zit (**gele stip**) en het linkerwiel links (**blauwe stip**). Als de twee wielen omgedraaid zijn, werkt het remsysteem niet.**

### 4. Andere wielmodellen monteren als de rolstoel is uitgerust met adapters A, B of C

**⚠ Zodra de rolstoel is uitgerust met Drift-adapters A, B of C, zijn andere wielmodellen mogelijk niet meer compatibel met de rolstoel. Om andere wielen te blijven gebruiken (zoals de originele wielen van de rolstoel of MTB-wielen), gebruikt u de RTD-adapter.**

## 2) Gebruik van de wielen

### 1. Veiligheidsinformatie

De wielen worden niet rechtstreeks bediend via de handring, zoals bij een conventioneel wiel. De besturing van de handbewogen rolstoel is daarom totaal anders en het is noodzakelijk om onder veilige omstandigheden te oefenen voordat u naar buiten gaat.

## 2. Eerste ritten met een rolstoel uitgerust met Dreeft-wielen

Voer bij het eerste gebruik van de wielen de volgende oefeningen uit op een vlakke ondergrond, samen met een begeleider, om ervoor te zorgen dat u vertrouwd raakt met het hulpmiddel. De begeleider moet achter de rolstoel blijven staan om de gebruiker op te vangen mocht deze vallen terwijl hij of zij aan het hulpmiddel went.

- **Voorwaartse beweging:** duw de handringen naar voren om vooruit te gaan.
- **Remmen:** Duw de handringen naar achteren tot ze de aanslag bereiken en trek eraan tot de rolstoel volledig tot stilstand komt.
- **Achteruitrijden:** Duw de handringen naar achteren tot ze de aanslag bereiken, en blijf vervolgens trekken om achteruit te rijden.
- **Obstakels passeren:** Til de voorwielen op om het obstakel te passeren. Let op de speling, die het moeilijker kan maken om het statische evenwicht te bewaren.

 **Oefen om aan de speling te wennen en te voorkomen dat u te abrupt remt.**

 **Oefen nooit het rijden op twee wielen of het nemen van obstakels zonder anti-kantelwielen of zonder dat er iemand achter je staat om je op te vangen als je valt.**

## 3) Onderhoud van de wielen

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of harde borstels voor het schoonmaken.

Reinig de wielen met een mild reinigingsmiddel en water. Droog alles snel en grondig af. Om het product te desinfecteren, veeg je het wiel af met een doek gedrenkt in een oplosmiddelvrije bacteriedodende oplossing. Veeg de naaf, velg en remhendel zorgvuldig af.

 **Als vet uit de kogellagers of de naaf wordt gewassen of met perslucht wordt geblazen, kan dit schade veroorzaken.**

 **De bandenspanning moet overeenkomen met de op de band aangegeven druk.**




## 4) De wielen vervoeren

De wielen kunnen worden verwijderd, zodat de rolstoel in een voertuig kan worden vervoerd.

 **Zorg ervoor dat de wielen tijdens het transport zo min mogelijk worden blootgesteld aan schokken.**

# IV. VEILIGHEID

## 1) Betekenis van waarschuwingssymbolen

-  Waarschuwing voor mogelijke risico's op ongevallen en ernstig letsel.
-  Waarschuwing voor mogelijke risico's op ongevallen en letsel.
-  Waarschuwing voor mogelijke technische schade.

## 2) Algemene veiligheidsinformatie voor gebruik van Dreeft-wielen

### ● Risico's bij onjuist gebruik van het product (verlies van remfunctie, vallen, kantelen, enz.)

#### Situatie:

- **Overschrijding van de gebruiksduur**
- **Defecte banden**

#### Advies:

- Gebruik van het product na de aanbevolen levensduur (5 jaar) verhoogt de resterende risico's. Stop in de volgende gevallen met het gebruik van het apparaat en neem contact op met uw gespecialiseerde dealer:
  - Slechte remwerking
  - Breuk of probleem met de adapters
  - Verkromde wielen
  - Gebroken spaken
  - Lekke of leeggelopen band
  - Ongewoon gedrag van de handring of de remfunctie
- Wanneer het einde van de levensduur is bereikt, wordt de gebruiker of begeleider geadviseerd contact op te nemen met het gespecialiseerde personeel dat de wielen heeft afgesteld of met de klantenservice van het bedrijf. De gebruiker kan informatie krijgen over bekende risico's en de huidige mogelijkheden voor het opknappen van het product.
- Zorg ervoor dat de banden niet versleten of beschadigd zijn.
- Vervang de banden als ze beschadigd zijn, of neem contact op met uw gespecialiseerde dealer om de wielen te laten repareren.

## 3) Veiligheidsinformatie voor het gebruik van Dreeft-wielen

### ● Risico op beknelling van vingers

- **Vingers kunnen bekneld raken tussen de spaken en de velgflens bij het gebruik van de wielen**
- **Vingers kunnen bekneld raken tussen de handring en de velg bij een zijdelingse botsing**

#### Advies:

- Steek uw vingers niet tussen de spaken en de flens van de handring wanneer u het wiel gebruikt en wanneer het draait.
- Bevestig een plastic flens aan de wielspeuken om het risico op beknelling te voorkomen.

### ● Risico op oververhitting van de wielnaaf

#### Situatie:

- **Bij het afdalen van een lange, steile helling kan het remsysteem van het Dreeft-wiel oververhit raken en niet meer goed functioneren. Remfalen brengt het risico met zich mee dat de gebruiker valt, wat kan leiden tot kneuzingen of breuken.**

#### Advies

- Gebruik geen wegen met lange, steile hellingen. Neem op lange hellingen regelmatig een pauze om te voorkomen dat het remsysteem oververhit raakt.

### ● Risico's tijdens het rijden (kantelen, vallen, botsen)

#### Situatie:

- **te abrupt remmen**
- **slechte reflexen door remgewoonten**

- onervaren of onervaren gebruiker
- plotselinge versnelling
- gevaarlijk rijgedrag

Tips:

- Voer de trainingsoefeningen voor het gebruik van Dreeft-wielen uit die in deze handleiding staan (pagina 10).
- Gebruik het apparaat nooit zonder anti-kantelwielen, tenzij u het rijden op twee wielen volledig onder de knie hebt. Om te leren rijden op twee wielen: oefen in veilige omstandigheden met een steunriem die wordt vastgehouden door een getrainde derde persoon of met iemand achter u.
- Leer hoe u de wielen op uw rolstoel gebruikt met behulp van de zelftrainingsgids die in de handleiding staat beschreven.
- Probeer geen hellingen van meer dan 7° en/of de door de rolstoelfabrikant aanbevolen limieten te nemen. Het systeem voorkomt geen verlies van tractie, wat leidt tot verlies van remfunctie.

#### 4) Algemene veiligheidsinformatie voor het monteren van Dreeft-wielen

##### ● Het niet controleren van de montage vóór gebruik

Situatie:

- Omvallen,
- Vallen,
- Verlies van remfunctie

Advies:

- Controleer bij het eerste gebruik of de wielen goed in het frame zijn geklikt en of de as stevig is vergrendeld.
- Controleer of de rechter- en linkerwielen niet omgedraaid zijn.
- Controleer of de handremmen op het wiel nog goed werken.
- Zorg ervoor dat de bandenspanning tussen 6 en 10 bar ligt (marathon +).

##### ● Risico's bij onjuiste montage (rem werkt niet)

Situatie:

- onjuiste montage van de adapter op het frame / omgekeerde plaatsing van de adapters
- onjuiste afstelling van de parkeerrem tijdens de montage,
- fout bij het verwijderen/monteren van de wielen
- verkeerde keuze van adapter (bijv. bij het wisselen van rolstoelen)

Advies:

- Controleer na de montage of het wiel goed werkt door het wiel vrij te draaien en de handrem naar achteren te trekken om de rem te activeren en het wiel tot stilstand te brengen.
- Controleer of de wielen volledig vastzitten wanneer de parkeerremmen zijn ingeschakeld.
- Lees de montagehandleiding waarin de montage-instructies gedetailleerd worden uitgelegd.

## V. ONDERHOUD

### 1) Veiligheidsinformatie

Controleer voor elk gebruik of de Dreeft-wielen in goede staat verkeren.

Als er een defect is, mogen de wielen niet worden gebruikt. Dit geldt in geval van instabiliteit, verlies van de remfunctie of een technisch defect waardoor de gebruiker de controle verliest. Gespecialiseerd personeel moet zo snel mogelijk worden geïnformeerd om eventuele defecten te verhelpen.

Neem contact op met gespecialiseerd personeel (dealer of fabrikant) als u slijtage, vervorming, geluid, schade of loszittende onderdelen opmerkt.

De fabrikant raadt aan om de wielen om de 12 maanden door gespecialiseerd personeel te laten controleren. Dit onderhoud kan tegelijkertijd met dat van uw handbewogen rolstoel worden uitgevoerd.

Het nalaten van onderhoud kan leiden tot ernstig letsel en/of het leven van de gebruiker in gevaar brengen. Alleen bevoegd personeel of de fabrikant is bevoegd om het product te repareren en te onderhouden. Indien een reparatie noodzakelijk is, wordt deze indien mogelijk door de verkoper uitgevoerd; anders worden de wielen naar de fabrikant gestuurd.

## 2) Onderhoudsschema

<i>Controle</i>	<i>Te ondernemen actie</i>	<i>Voor gebruik</i>	<i>Elke maand</i>	<i>Elke 12 maanden</i>
Werking van de parkeerremmen van de rolstoel	Controleer of ze correct zijn afgesteld om de wielen te blokkeren.	X		
Controle van de bandenspanning	Controleer of de bandenspanning overeenkomt met de voor het bandenmodel opgegeven waarde.		X	
Werking van de wielrem	Controleer of er veranderingen zijn in speling en remwerking.		X	
Controle van de adapters	Controleer of de adapters nog stevig zijn geïnstalleerd en niet vervormd zijn.			X

## 3) Storingen opsporen en verhelpen

Met een beetje handigheid kunt u (of een verzorger) bepaalde onderdelen van uw product onderhouden om ervoor te zorgen dat het perfect werkt:

- Controleer of de schroeven goed vastzitten, vooral wanneer u de rolstoel met Dreeft-wielen voor het eerst gebruikt of nadat u aanpassingen aan de rolstoel met de wielen en adapters hebt uitgevoerd. Als er een probleem optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de rolstoel en neem zo snel mogelijk contact op met uw gespecialiseerde dealer.

- Het aandrijfwielsysteem moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat er zich geen vuil of stof heeft opgehoopt op de wielas of in de asbus. Smeer de snelkoppelingsas van tijd tot tijd licht in met een dunne, harsvrije olie (bijv. naaimachineolie).
- Als de Dreeft-wielen nat worden, moeten ze worden gedroogd door ze af te vegen.

## VI. NA GEBRUIK

### 1) Afvalverwerking

Voor afvoer moet het product worden teruggebracht naar een gespecialiseerde dealer. Alle onderdelen van het product moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de milieubeschermingsvoorschriften die in het betreffende land van kracht zijn.

Houd er rekening mee dat alle onderdelen, met uitzondering van de band en de binnenband, recyclebare materialen zijn.

### 2) Terugbrengen in goede staat

In overeenstemming met de vereisten van de fabrikant krachtens Verordening (EU) 2017/745 kan revisie noodzakelijk zijn om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, de beoogde prestaties te behouden en defecten te voorkomen ter voorbereiding op een nieuw leven.

Revisie mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en erkende vakman. Let op de volgende punten voordat u de wielen opnieuw gebruikt:

#### 1. Visuele inspectie


Controleer de algemene staat van de wielen:

Metalen onderdelen mogen geen deuken of krassen vertonen die het onderdeel scherp kunnen maken en letsel aan de handen van de gebruiker kunnen veroorzaken. Indien nodig kunnen standaardonderdelen zoals spaken, velgen of hendels worden besteld bij Eppur of een erkende distributeur.

#### 2. Controle van de remfunctie

Controleer op de originele rolstoel, voordat u de wielen verwijdert, de staat van het remsysteem. Het systeem moet ervoor zorgen dat de rolstoel soepel tot stilstand komt, zonder wrijving of overmatige inspanning.

- Controleer of beide wielen identiek functioneren: de rolstoel moet in een rechte lijn remmen wanneer dezelfde kracht op de rechter- en linkerkant wordt uitgeoefend.
- Het remmen moet soepel verlopen, zonder schokken, en mag geen geluid produceren. Neem contact op met Eppur als u verdacht gedrag opmerkt, zodat het remsysteem weer in orde kan worden gebracht.

 **De binnenkant van de naaf mag alleen door de fabrikant worden gedemonteerd en gerepareerd,**

tenzij dit specifiek is goedgekeurd door Eppur.

### **3. Inspectie van de spaken**

Controleer de spaken: er mogen geen spaken ontbreken, verbogen of beschadigd zijn. Draai het wiel rond en controleer of het niet kromgetrokken is. Een zijdelingse kromming van minder dan 3 mm is acceptabel voor gebruik. Een getrainde gespecialiseerde distributeur kan lichte wielvervorming corrigeren. Neem bij aanzienlijke vervorming of enig ander probleem contact op met Eppur voor een volledige revisie van de wielspeuken.

### **4. Vervanging van verbruiksartikelen**

Monteer een nieuwe set banden, velglinten en binnenbanden op elk wiel. Bij gebruik van handringen met coating (rubberlaag) is het raadzaam om ook de handringen te vervangen.

### **5. Desinfectie**

Reinig het product en desinfecteer het vervolgens volgens de instructies op pagina 10.

### **6. Montage op een nieuwe rolstoel**

Raadpleeg voor de montage van de wielen op een nieuwe rolstoel de compatibiliteitstabel op de website [eppur.eu](http://eppur.eu) en controleer of de adapter en de snelkoppelingsas geschikt zijn voor de nieuwe rolstoel.

Als de aanpassing niet compatibel is, neem dan contact op met Eppur of een erkende distributeur om de benodigde onderdelen aan te schaffen om de wielen aan de nieuwe rolstoel aan te passen. Zorg ervoor dat u bij het monteren van de wielen op een nieuwe rolstoel de montage-instructies bij de hand hebt (te downloaden via [eppur.eu](http://eppur.eu)).

E P P U R

# USER WARRANTY ACTIVATION



**SCAN HERE !**

**+ QUICK START GUIDE**