



**Monterings anvisning Impera, Impera Short, Kid, S, VR
MEM6251 och MEM6252**

1. Demontera hjulen på båda sidorna.

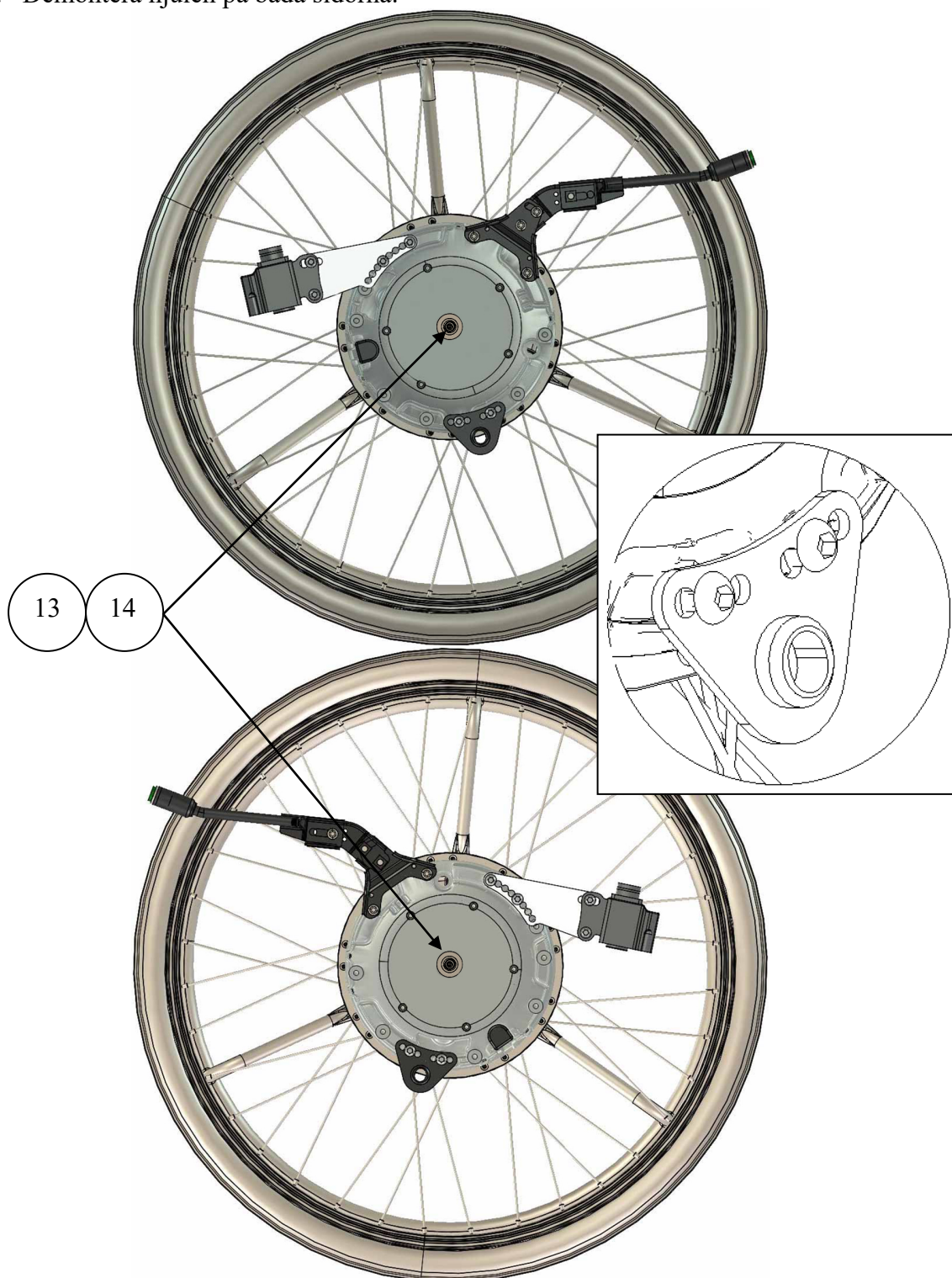

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
- Axel Ø12,0 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.

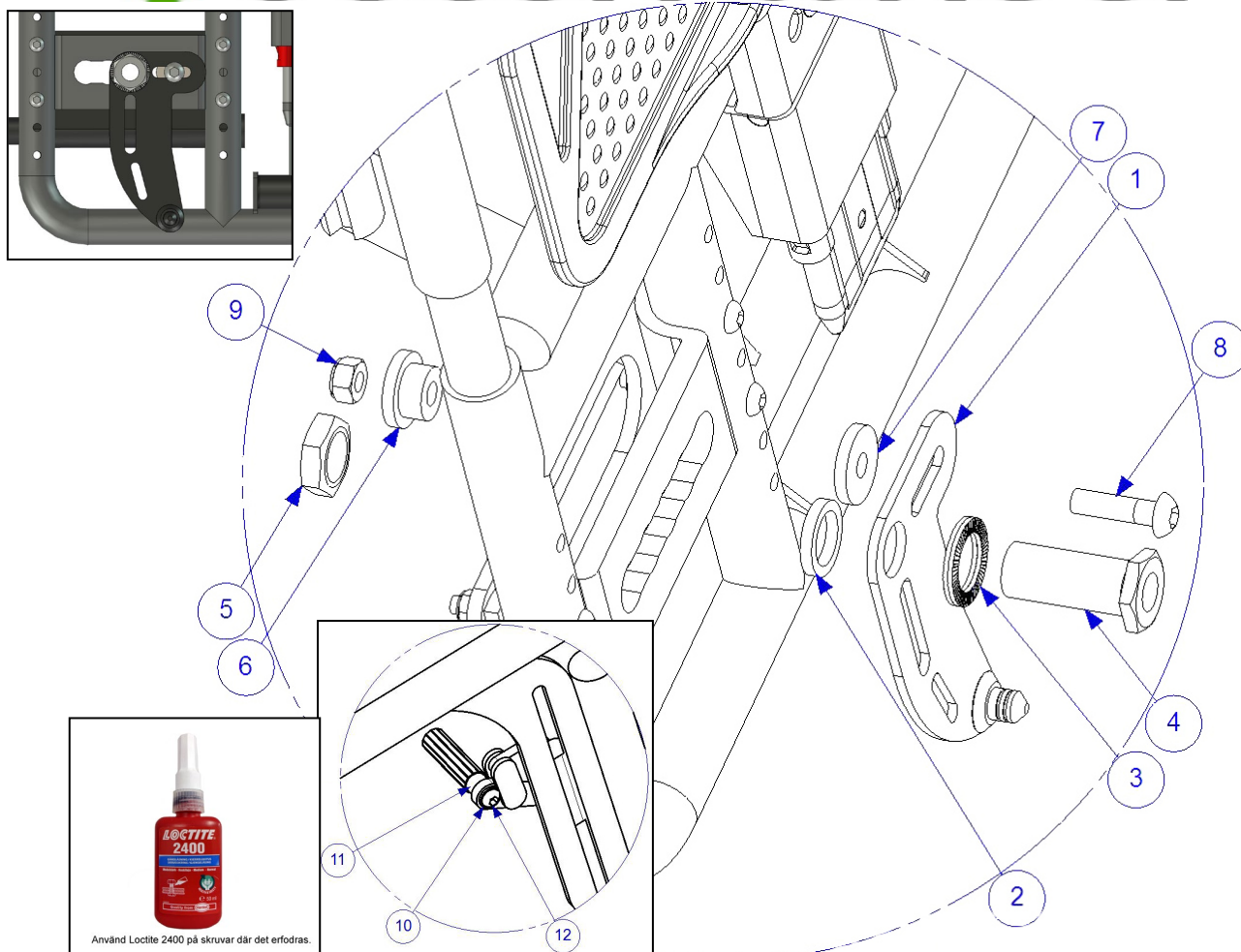

3. Detaljer som ingår för montering av fästet och broms förlängning på en sida.

Placering	Art.Nr.	Antal	Beskrivning
1	XOE-22294-10	1	Höger Fäste med 18 hål
2	100 400 014	1	Distans
3	405241	1	Nordlock M18 bricka
4	HW090	1	Navhylsa
5	XSM18M	1	Mutter M18 x1 låg
6	100 400 079	1	Distans
7	100 400 011	1	Distans
8	XSM8X30	1	Skruv Rundad M8 x 30
9	XSM8ML	1	Låsmutter M8
10	XSM6BR	1	Planbricka M6
11	100 400 039	1	Distans för parkeringsbroms
12	XSM6X30	1	Skruv Rundad M6 x 30
13	XOE-25383-00	1	Distans 12,0
14	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringsats medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.

4. Montera den rygghängda batteri väskan.

Åtdragningsmoment / Tightening torque

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Hubsleevers.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm