

Monteringsanvisning E-Walk på Mixx

MCG1191




1. Demontera tramp pedal för det går inte att kombinera med eWalk.

Placering av fäste och framhjul



2. För optimal placering av fästet för 22", så skall fram hjulen vara placerade enligt bilden ovan.

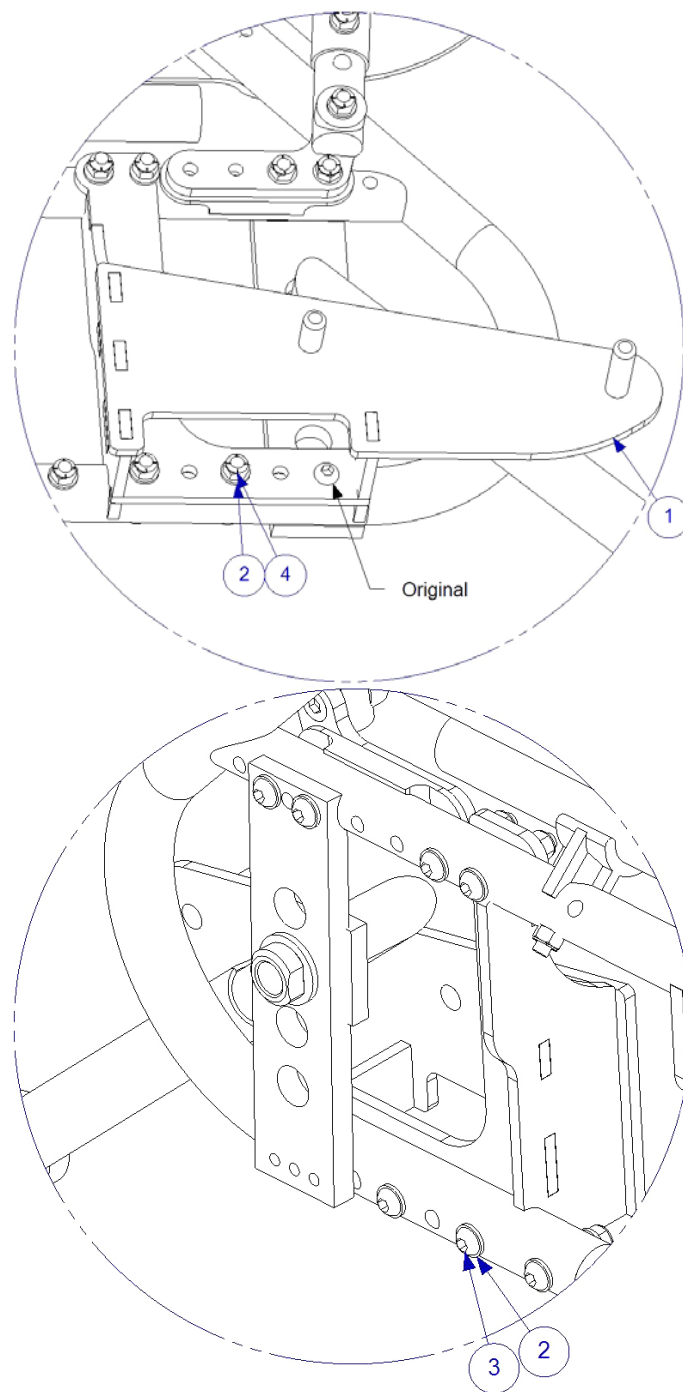


3. Se bilder ovan som visar montering av fästet på höger sida.

För montering skall följande ingå per sida.


Placering	Detalj nummer	Antal	Beskrivning
1	MCG1191R	1	Höger fäste Mixx
2	XSM6BR	8	Planbricka M6
3	XSM6X40	4	Skruv Rundad M6 x 40
4	XSM6ML	4	Låsmutter M6

Center placerad styrkontroll

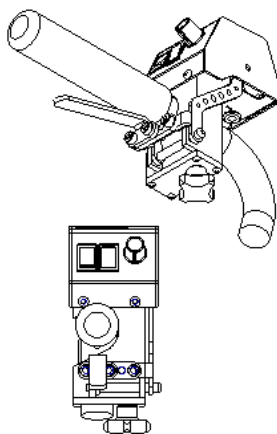

När det ej är monterat broms på körhandtaget, bör denna placering användas.

Sidoplacerad styrkontroll

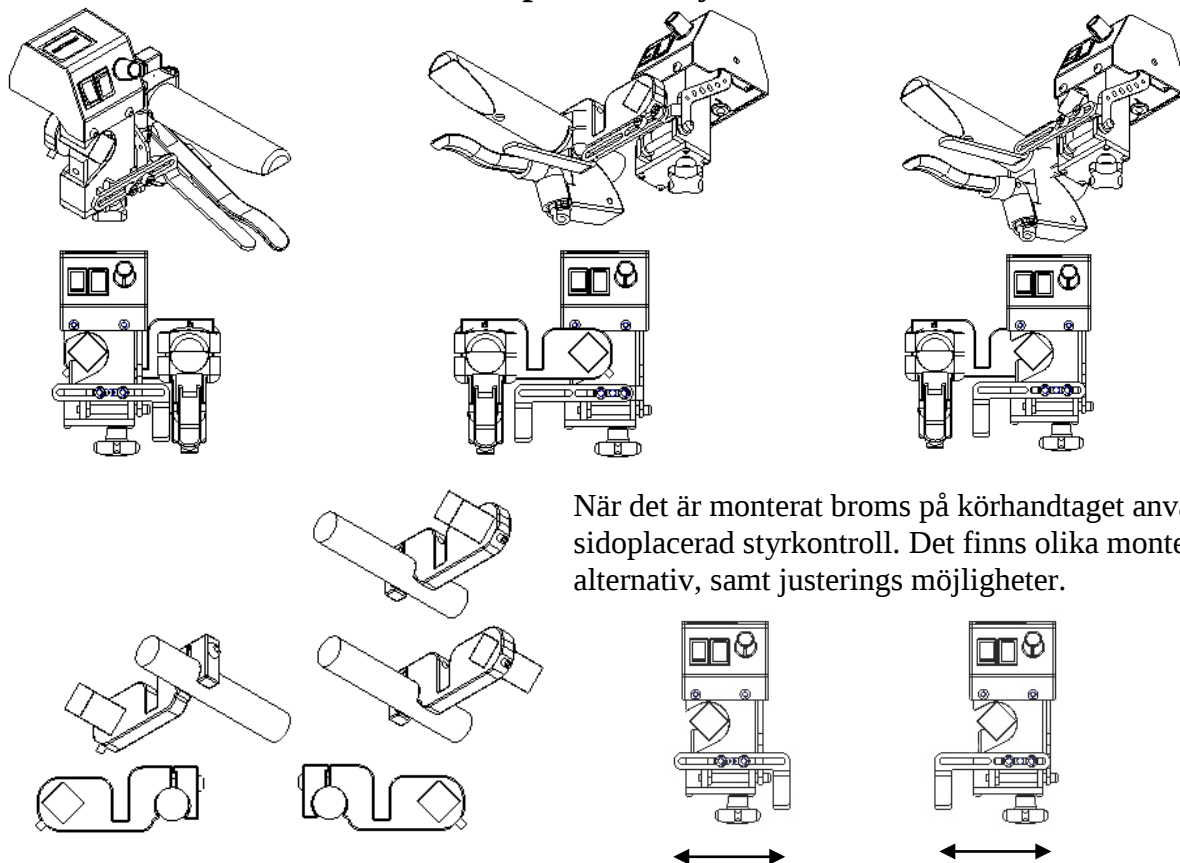

När det är monterat broms på körhandtaget användes sidoplacerad styrkontroll. Det finns olika monterings alternativ, samt justerings möjligheter.

OBS! Använd Loctite på alla skruvar vid montering och justering.

VARNING!

När man monterar styrkontrollen så skall man alltid kontrollera att styrkontrollens gashandtag eller dess övriga leder inte tar i eller ligger emot någonstans. Om reglage tar i eller ligger emot så kan detta leda till att gasen hänger sig och en olycka kan inträffa.

4. Montera nu Styrkontrollen på valfri plats.