

decon mobility



2025-03 Revision 3

E•WALK

Brugervejledning



The undersigned, representing the following manufacturer

Decon Wheel AB
Org. No. 556618-9006
SRN SE-MF-000046289
Södra Ekeryd 119, 314 91 Hyltebruk
Sweden,

hereby declares that the product **E-Walk**

with the basic UDI-DI 735001014MCGB3

and the following references MCG4055
MCG4755

is in conformity with the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 as a class I medical device based on Annex VIII; and the Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Intended purpose: E-Walk is a caregiver controlled electric drive unit for wheelchairs with the intended purpose to enable caregivers to push manually operated wheelchairs with powered support. The device is intended for indoor and outdoor use.

This EU declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Hyltebruk, 2025-09-24

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Benny Andersson".

Benny Andersson
COO



Indhold

Sikkerhed	4
Generelle bestemmelser	4
Formål og tiltænkt anvendelse	
Mærkninger	5
Symboler	6
Advarsler	6
Garanti	9
Produktsikkerhed og tilbagekaldelsesinformation	9
Produktinformation	10
Tekniske data	10
Medfølgende dele / Leveringsomfang	11
Oversigt over E-Walk	12
Anvendelse af E-Walk	13
Monteringssæt	13
Breddejustering	14
Montering af basisenheden på kørestolen	15
Fjernelse af basisenheden fra kørestolen	16
Montering af styreenheden	17
Kørsel med E-Walk	18
Transport og opbevaring af E-Walk	20
Batteri og batterioplader	22
Vedligeholdelse	24
Rengøring	24
Korrosion	24
Reparationer	24
Udskiftning af sikring	24
Genbrug	25
Affaldshåndtering	25
Brugercheck	25
Fejlfinding	25
Fejlkoder	26

Sikkerhed

Generelle bestemmelser

Denne brugervejledning gælder for E-Walk. Brugervejledningen er skrevet til brugere af E-Walk. Læs brugervejledningen igennem og gør dig bekendt med E-Walk, inden du begynder at bruge den.

Manualer til synshandicappede

Kontakt din lokale forhandler, hvis du har problemer med at læse denne brugervejledning. Din forhandler kan levere en digital version af manualen. Den digitale version kan forstørres eller oplæses af din skærm læser.

Formål og tiltænkt anvendelse


E-Walk er en elektrisk drivsenhed til manuelle kørestole, der er beregnet til brug både udendørs og indendørs. E-Walk er kun beregnet til transport med hjælp fra en ledsager. E-Walk hjælper ledsageren med at skubbe og bremse kørestolen. Med E-Walk kan du tage på længere udflugter. Den er velegnet at bruge, når kørestolsbrugeren ikke selv kan flytte sig, og ledsageren ikke er stærk nok til at skubbe kørestolen. Ledsageren skal både være intellektuelt og fysisk i stand til at håndtere E-Walk sikkert i alle situationer. Oplysninger om, hvilke kørestolsmodeller E-Walk kan monteres på, findes på Decons hjemmeside: www.decon.dk

Ikke tiltænkt anvendelse

Enhver anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen i denne brugervejledning. Dette omfatter også de tekniske specifikationer, f.eks. maksimal brugervægt, maksimal hældningskapacitet osv.

Mærkninger

Modelpladerne er placeret oven på basisenheden under dækslet.

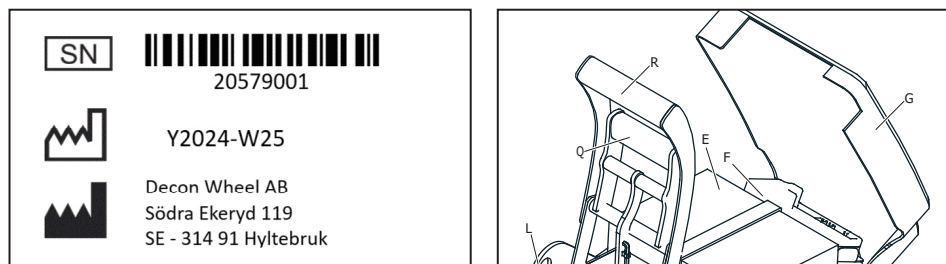

Symbolerne, der anvendes på etiketten til E-Walk, forklares nedenfor:



Følg instruktionerne!



Maksimal brugervægt: 150 kg



Maksimal hastighed for enheden: 6 km/t



Medicinsk udstyr



Enhedens serienummer



Fremstillingsdato



Producentens navn og adresse



Enhedens katalognummer



Genanvend som elektronisk affald. E-Walk og dets tilbehør er omfattet af det europæiske WEEE-direktiv.



ISO 7010-M002 Instruktioner/manual skal læses!

Symboler



ADVARSEL! Risiko for alvorlig personskade eller død. En procedure, som, hvis den ikke udføres korrekt, kan medføre skade på brugeren eller andre personer.



BEMÆRK! Risiko for materiel skade. En procedure, som, hvis den ikke udføres korrekt, kan forårsage skade på ejendom.



INFO Meget vigtig eller forklarende information.

Advarsler

Før du bruger E-Walk



ADVARSEL! Brugeren skal have læst og forstået brugervejledningen og være bekendt med de forskellige betjeningsgreb og brugerflader, som E-Walk er udstyret med.



ADVARSEL!

Anti-tippere skal altid være monteret på kørestolen, når der køres med E-Walk, og disse skal være slået ned.



ADVARSEL! For at montere E-Walk på en kørestol kræves et monteringssæt, som bestilles separat og er ikke medfølgende ved levering af E-Walk. Monteringssættet skal installeres af en uddannet tekniker.



ADVARSEL! Pas på ikke at klemme hænder eller fingre, når du bruger håndtaget til at sænke eller hæve drivhjulet. Hold i håndtaget under hele bevægelsen.



ADVARSEL!

Kørestolens svinghjul skal have en diameter på mindst 150 mm for at minimere belastningen af dem ved brug af E-Walk.



ADVARSEL! Inden personen i kørestolen sætter sig i eller forlader kørestolen, skal kørestolens bremses være aktiveret, og E-Walk skal være slukket for at forhindre, at kørestolen ruller væk.



ADVARSEL! Under ingen omstændigheder må E-Walk styres af personen, der sidder i kørestolen.



ADVARSEL! Øv dig i at køre E-Walk sikkert på jævnt underlag, før du kører op eller ned ad bakke.



BEMÆRK! Mere avancerede kørestole med vippefunktioner til sæde og ryglæn kan til tider ikke udnyttes fuldt ud, fordi vippefunktionerne kan blive blokeret af E-Walk. Vær forsigtig, når du benytter disse funktioner, for at undgå skader på E-Walk.

Under brug



ADVARSEL!! Start med en lav hastighed, der føles sikker for både dig som bruger og for personen i kørestolen. Øg derefter gradvist hastigheden til den ønskede ganghastighed.



ADVARSEL! Det er ikke tilladt at køre E-Walk på skråninger eller ramper med en stigning på mere end 6 grader (11,5 %) ved en brugervægt på 150 kg.



ADVARSEL!

Undgå at køre, hvor underlaget er blødt eller ujævnt (f.eks. sand, mudder, sne, is eller gennem dybe vandpytter). Vi anbefaler, at E-Walk kun bruges på jævnt og fast underlag.



ADVARSEL! Ved kørsel eller parkering på glatte overflader eller på skråt terræn kan E-Walks hjul glide.



ADVARSEL! Hæng ikke genstande (tasker, rygsække osv.) i nærheden af styreenheden! Hvis disse genstande kommer i kontakt med gashåndtaget, kan E-Walk utilsigtet begynde at bevæge sig.



ADVARSEL! Brug ikke E-Walk i nærheden af enheder, der udsender stærke radiobølger. Hvis E-Walk er i nærheden af en radiobølgekilde og begynder at fungere unormalt, skal du straks slukke for strømmen og flytte dig væk fra stedet. Hvis en mobiltelefon skal bruges i direkte forbindelse med kørestolen, skal E-Walk være slukket. De svage elektromagnetiske bølger, som E-Walk udsender, kan påvirke andre elektroniske enheder, såsom automatiske døre og tyverisikringssystemer af den type, der bruges i butikker. I sådanne tilfælde skal du slukke for E-Walk og betjene kørestolen manuelt.



BEMÆRK! Ved kanter og høje trin (>8 cm) skal E-Walk slås fra og foldes op. Ved lavere trin eller kanter skal du sænke hastigheden og vippe kørestolen bagud, før du kører op.

Opbevaring og transport



ADVARSEL! Opbevar ikke E-Walk, hvor den kan blive våd af regn eller på steder med høj luftfugtighed.



ADVARSEL! Undgå opbevaring i direkte sollys eller ved høje temperaturer.



ADVARSEL! E-Walk kan transporteres, mens den er tilkoblet kørestolen. Brug de markerede fastgørelsespunkter til at sikre E-Walk under transport. Kørestolen skal fastgøres under transport ved sine egne fastgørelsespunkter i henhold til kørestol-sproducentens anvisninger.

Rengøring



FORSIGTIG! Skyl aldrig E-Walk med en vandslange eller højtryksrenser. Brug ikke damprensere til at rengøre E-Walk. De elektroniske komponenter kan blive beskadiget, hvilket kan føre til alvorlige funktionsfejl.



FORSIGTIG! Rengør ikke med opløsningsmidler såsom benzin eller mineralsk terpentin. Dette kan beskadige lakken og plastdelene på E-Walk.



INFO En klud og alkoholbaseret desinfektionsmiddel er velegnet til desinficering af E-Walk.

Garanti

Garantiperioden for E-Walk er 2 (to) år fra købsdatoen. Hvis der opstår en materialefejl eller fabrikationsfejl på din E-Walk i garantiperioden, vil de defekte dele blive udskiftet eller repareret uden beregning. Garantien dækker basisenheden, styreenheden og opladeren. Forbrugsdele, herunder batterier og dæk, er ikke omfattet af garantien. Denne garanti dækker ikke fejl forårsaget af bevidst misbrug eller uforsigtig håndtering, såsom fejl opstået ved brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning. Garantien dækker heller ikke fejl, der opstår som følge af ændring af enheden eller vedvarende brug under andre forhold end de specificerede, for eksempel overskridelse af den maksimale brugervægt. Ridser, mathed eller snavs på produktets overflade, der opstår under normal brug, er ikke dækket af garantien. Hvis der er behov for garantireparation, skal du kontakte forhandleren, hvor du har købt produktet. Den forventede levetid for hele produktet (eksklusiv sliddele) er 5 år fra salgsdatoen.

Produktsikkerhed og tilbagekaldelsesinformation

Kontakt forhandleren, hvor enheden blev købt, eller producenten af E-Walk for information om produktsikkerhed og eventuelle tilbagekaldelser.

Produktinformation

Tekniske data

Motor		200W
Batteritype		Blybatteri (gel) 24V, 12Ah LiFePO 24V, 15Ah
Samlede dimensioner (B x L x H)		316x474x362mm
Vægt		Basisenhed 15,4 kg Batteri LiFePO4 3,95 kg Blybatteri (gel) 8 kg
Dæk		200x50, Massiv
Hastighed		0-6 km/t ¹⁾
Maksimal rækkevidde med fuldt opladede batterier		22 km ²⁾
Maksimal brugervægt		150 kg
Maksimal hældning		6 grader
CE-mærkning		I henhold til EU-forordning 2017/745 (MDR)
Batterioplader		100-240 V AC, 50/60Hz
Opladningstid		Normal opladning ca. 3 timer (LiFePO4)
Driftsbetingelser	Miljø	Indendørs og udendørs
	Temperatur	-15°C til 40°C
	Luftfugtighed	Ingen kondens

1. Maksimal hastighed indstilles via styreenheden


2. Med LiFePO4-batteri. Kørestil, underlag og brugerens vægt påvirker den maksimale køreafstand.

3. Den maksimale stigning kan påvirkes af det underlag, som E-Walk køres på.

Medfølgende dele / Leveringsomfang


Leveringen af E-Walk indeholder følgende:

- A E-Walk basisenhed
- B E-Walk styring
- C Brugervejledning
- D Batterioplader med kabler

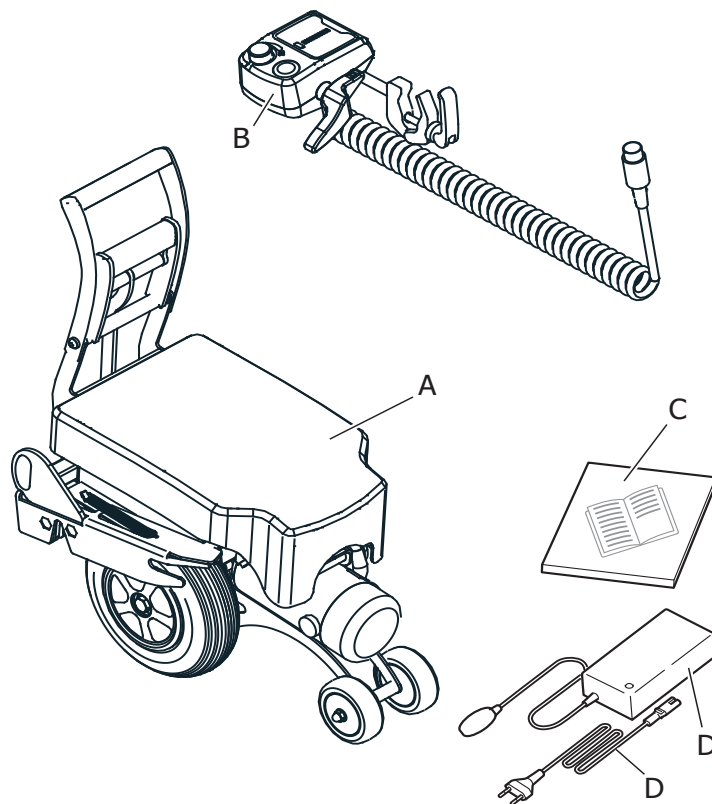

INFO For at montere E-Walk på en kørestol kræves et monteringsæt, som bestilles separat og ikke er inkluderet i leveringen af E-Walk.

Oversigt over E-Walk

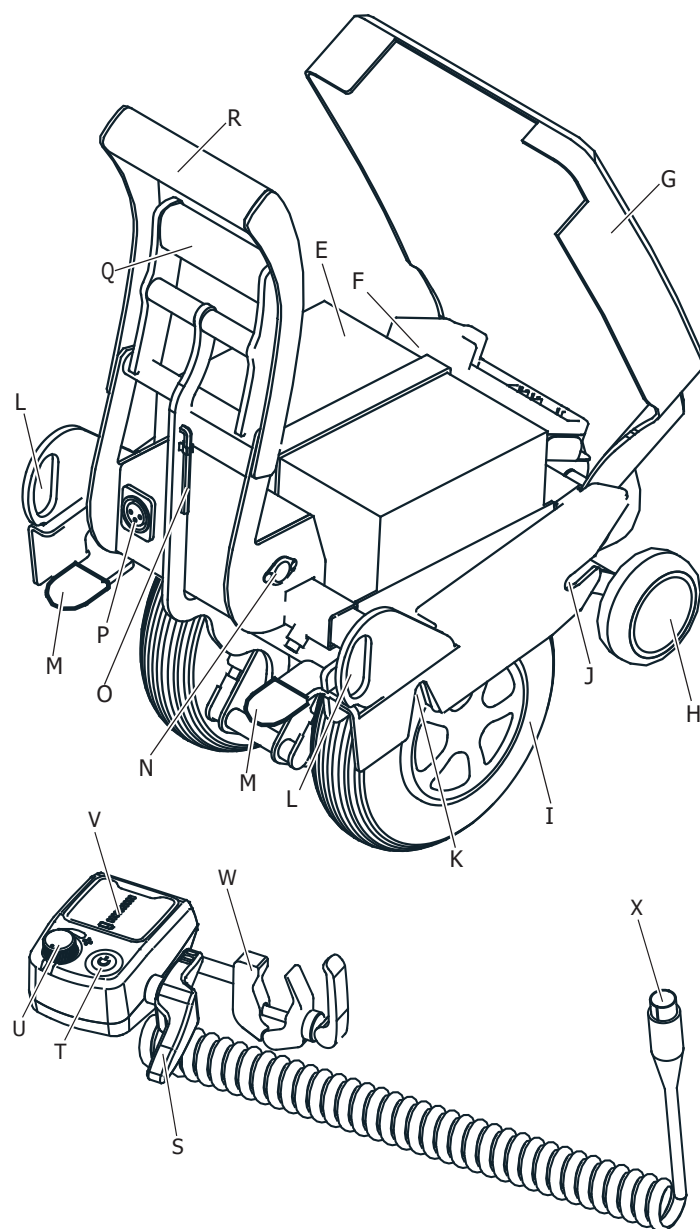

E	Batteri	O	Unbrakonøgle
F	S-Drive motorstyring	P	Opladningsstik
G	Batteridæksel	Q	Nedre håndtag
H	Forhjulssæt	R	Øvre håndtag
I	Drivhjul	S	Gashåndtag
J	Frontmontering	T	Hovedafbryder
K	Bagmontering	U	Hastighedsregulering
L	Fastgørelsespunkt under transport	V	Batteriindikator
M	Frigørelsespedal	W	Klemme til fastgørelse
N	Kontrolstik	X	Stik til styring

Brug af E-Walk



ADVARSEL! Kørestolens svinghjul skal have en diameter på mindst 150 mm for at minimere belastningen på dem, når E-Walk bruges.




ADVARSEL! Anti-tippere skal altid være monteret på kørestolen, når der køres med E-Walk, og disse skal være slået ned.



BEMÆRK! Mere avancerede kørestole med vippefunktioner til sæde og ryglæn kan til tider ikke udnyttes fuldt ud, fordi vippefunktionerne kan blive blokeret af E-Walk. Vær forsigtig, når du benytter disse funktioner, for at undgå skader på E-Walk.

Monteringssæt


Kørestolen skal være udstyret med et monteringsæt til E-Walk for at E-Walk kan monteres på kørestolen. Monteringsættet består af to sideplader med tilhørende fastgørelseselementer. På sidepladerne er der tapper [AA & AB], hvor basisenheden fastgøres. Monteringsvejledningen for hvert monteringsæt skal følges. Oplysninger om, hvilke kørestolsmodeller E-Walk kan monteres på, findes på Decons hjemmeside: www.decon.dk.

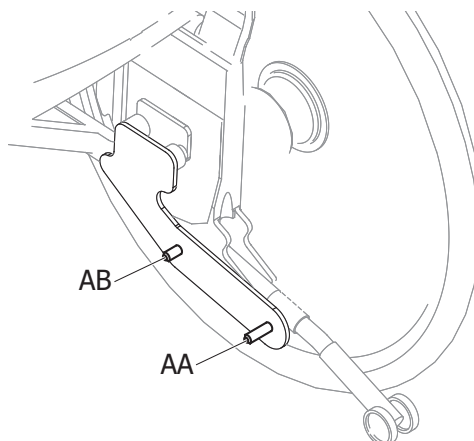

ADVARSEL! For at montere E-Walk på en kørestol kræves et monteringsæt, som bestilles separat og er ikke medfølgende ved levering af E-Walk. Monteringsættet skal installeres af en uddannet tekniker.

Breddejustering

E-Walk basisenheden kan tilpasses forskellige kørestolsbredder. Unbrakonøgle [O] til breddejustering er monteret på basisenheden. Justering til forskellige kørestolsbredder foretages ved at løsne fastgørelsesskruerne [Y] med unbrakonøglen [O] og derefter justere sidepanelerne [Z]. Under justeringen placeres E-Walk basisenheden mellem kørestolens sideplader, og derefter justeres sidepanelerne [Z], så de hviler mod kørestolens sideplader. Kontroller, at E-Walk basisenheden er centreret mellem sidepladerne, og spænd derefter alle fastgørelsesskruer [Y].

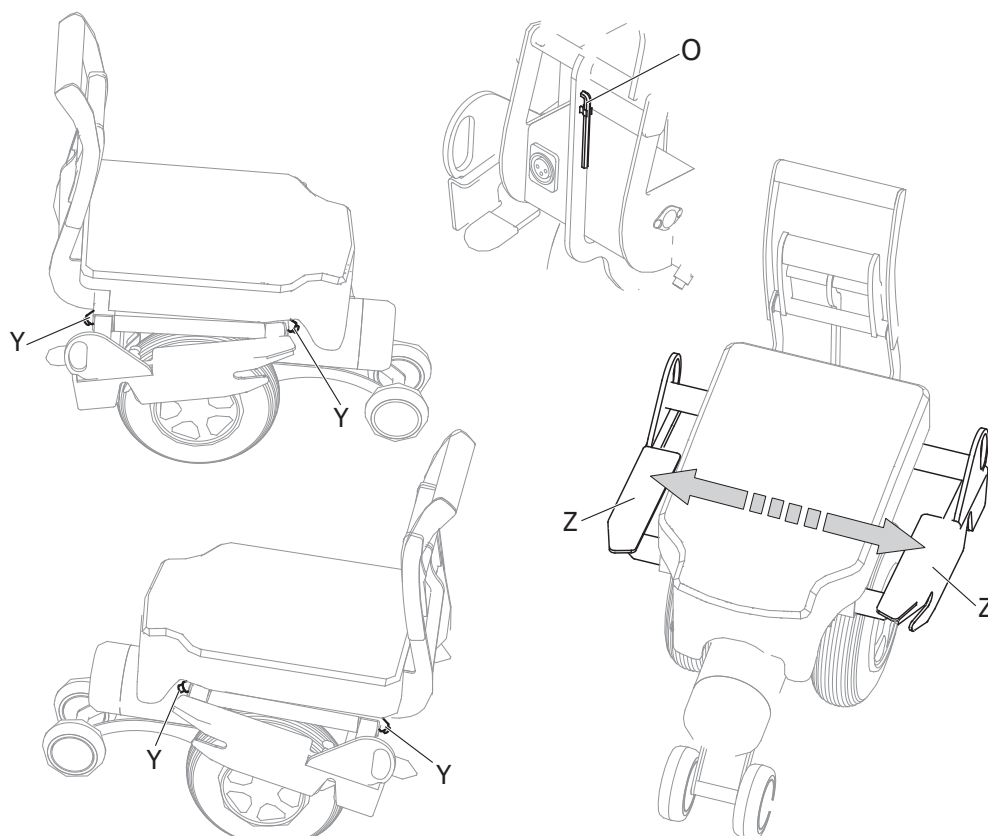

Sidepanelerne [Z] fås i følgende versioner:

Monteringsmål: 292–440 mm

Artikelnummer: 350165A

Monteringsmål: 407–560 mm

Artikelnummer: 350165B

Monteringsmål: 527–680 mm

Artikelnummer: 350165C

Monteringsmål: 256,5–416 mm

Artikelnummer: 391165


Monteringsmål: 254–416 mm*

Artikelnummer: 391165

*For at opnå et monteringsmål på 254 mm må den forreste monteringsstift [AB] ikke være længere end 9 mm.



INFO!
Monteringsmålet beregnes ved at tage kørestolens sædebredde minus 90 mm.

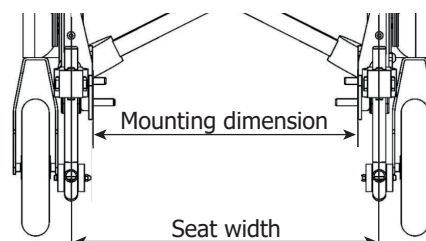


Montering af basisenheden på kørestolen


Basisenheden kan monteres på kørestolen med få enkle trin uden brug af værktøj. Dette gøres således:

1. Aktivér kørestolens parkeringsbremse

2. Tag fat i det øverste håndtag [R] og rul basisenheden med forhjulet [H] ind under kørestolen, så det forreste monteringspunkt [J] passerer de bageste låsepinde [AA] på monteringspladerne.

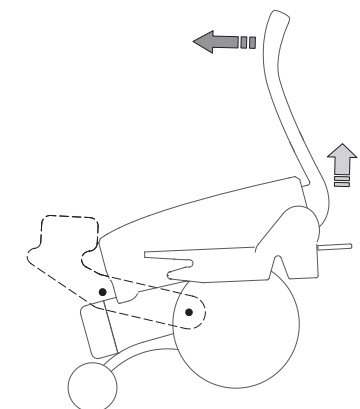


3. Sørg for, at basisenhedens forreste beslag [J] griber om de forreste stifter [AB] på monteringspladerne, og sænk basisenheden ned over de bageste låsepinde [AA], så basisenhedens bageste beslag [K] griber om de bageste låsepinde [AA], og der høres et klik.

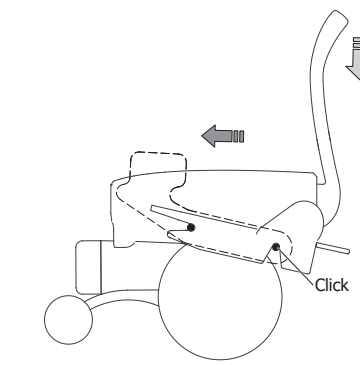

4. Sænk drivhjulet på basisenheden [I] ved at tage fat i det nederste håndtag [Q] og folde det ned.



ADVARSEL! Pas på ikke at klemme hænder eller fingre, når du bruger håndtaget til at sænke eller hæve drivhjulet. Hold i håndtaget under hele bevægelsen.

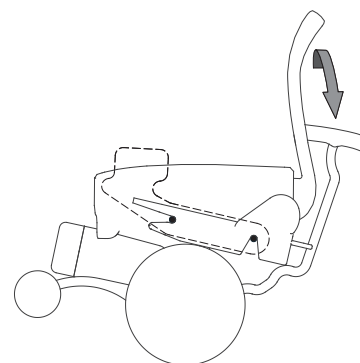

Fjernelse af basisenheden fra kørestolen


Basisenheden kan fjernes fra kørestolen i nogle få enkle trin uden brug af værktøj. Sådan gør du:

1. Aktivér kørestolens parkeringsbremse


2. Hæv drivhjulet på basisenheden [I] ved at tage fat i det nederste håndtag [Q] og løfte det op.




ADVARSEL! Vær forsigtig, så du ikke klemmer hånden eller fingrene, når du bruger håndtaget til at hæve eller sænke drivhjulet. Hold i håndtaget under hele bevægelsen.

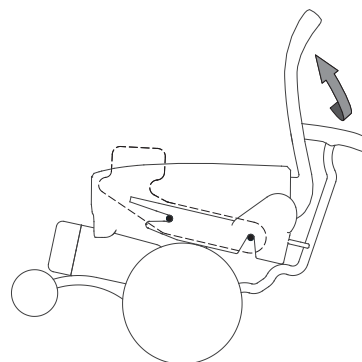

3. Tryk ned på en af udløserpedalerne [M], og løft basisenheden med det øverste håndtag [R], så den løsnes fra den bageste låsepind [AA] på monteringspladen.

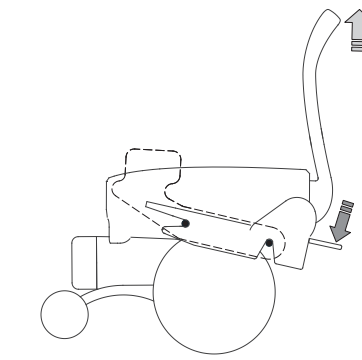


4. Træk nu basisenheden ud af dens beslag på kørestolen.

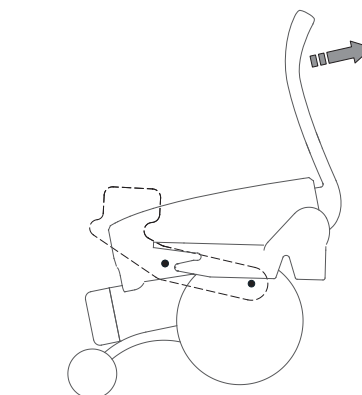

Montering af styreenheden

Basisenheden kan fjernes fra kørestolen i nogle få enkle trin uden brug af værktøj. Sådan gør du:

Generelt kan styreenheden monteres på kørestolens håndtag eller stel i nogle få enkle trin uden brug af værktøj. Klemmen [W] åbnes og lukkes ved at dreje håndtaget [AC]. For at spænde klemmen [W] på kørestolens drivhåndtag drejes håndtaget [AC] med uret og afsluttes ved at trække håndtaget [AC] udad og placere det i den ønskede position. Klemmen [W] kan monteres både opad og nedad, afhængigt af om kørestolen f.eks. er udstyret med bremsehåndtag. Se billedet for eksempler på forskellige monteringsmuligheder. Som standard er styreenheden monteret til at sidde på kørestolens højre sidehåndtag.

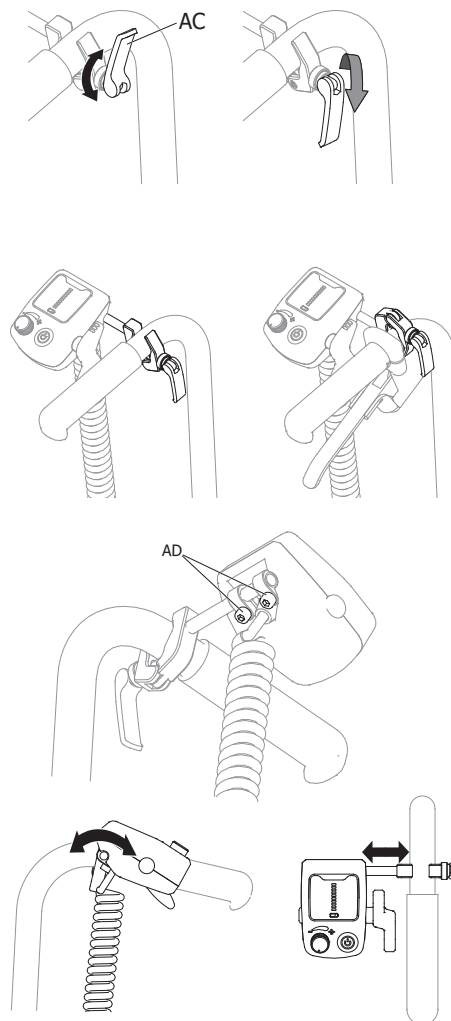

Juster styreenhedens position både i vinkel og til siden, så den passer til den aktuelle kørestolsmodel og bruger. Begge justeringer foretages ved at løsne skruerne [AD], der sidder på undersiden af styreenheden, med unbrakonøglen [O]. Når justeringen er færdig, spændes skruerne igen.



ADVARSEL! Ved montering af styrehåndtaget skal du kontrollere, at gashåndtaget bevæger sig frit og ikke rører ved eller hviler mod nogen del af kørestolen. Hvis gashåndtaget sætter sig fast eller hviler mod en del, kan det medføre, at gashåndtaget sætter sig fast, og der kan opstå en ulykke.

Kørsel med E-Walk



ADVARSEL! Brugeren skal have læst og forstået brugervejledningen og være bekendt med de forskellige betjeningsgreb og brugerflader, som E-Walk er udstyret med.



ADVARSEL! Inden personen i kørestolen sætter sig i eller forlader kørestolen, skal kørestolens bremses aktiveres, og E-Walk skal slukkes for at forhindre, at kørestolen ruller væk.



ADVARSEL! Under ingen omstændigheder må E-Walk styres af personen, der sidder i kørestolen.

For at kunne betjene E-Walk skal du først have tilsluttet basisenheden til kørestolen i henhold til afsnittet "Montering af basisenheden på kørestolen" og have monteret styreenheden i henhold til afsnittet "Montering af styreenheden".

1. Aktivér kørestolens parkeringsbremse
2. Tilslut styreenheden til stikket [N] på basisenheden.





INFO I stikket på styreenheden er der en fordybning [AE], denne skal vende nedad.

3. Tryk på tænd/sluk-knappen [T] på styreenheden. Lampen i tænd/sluk-knappen og batteriindikatoren [V] lyser nu.

4. Den maksimale hastighed reguleres med hastighedsreguleringen [U]. Drej mod "+" for at øge den maksimale hastighed og mod "-" for at mindske den maksimale hastighed.




ADVARSEL! Start med en lav hastighed, der føles sikker for både dig som bruger og for personen i kørestolen. Øg derefter gradvist hastigheden til den ønskede ganghastighed.

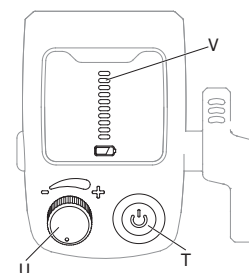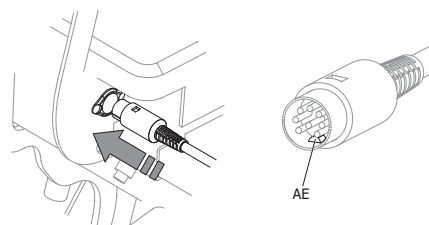


5. Frigør kørestolens parkeringsbremse.

6. Kørsel fremad sker ved at dreje/trykke på gashåndtaget [S] med uret. Gashåndtaget har to punkter, der kan bruges enten hver for sig eller samtidigt til fremadkørsel.

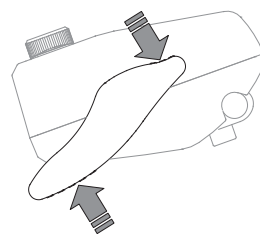

7. Bakning sker ved at dreje/trykke gashåndtaget [S] mod uret på den bagerste del af betjeningen.

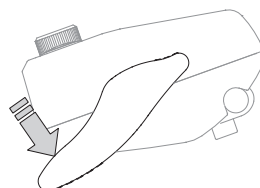

ADVARSEL! Hæng ikke genstande (tasker, rygsække osv.) i nærheden af styreenheden! Hvis disse genstande kommer i kontakt med gashåndtaget, kan E-Walk utilsigtet begynde at bevæge sig.



ADVARSEL! Det er ikke tilladt at betjene E-Walk på skråninger eller ramper med en hældning stejlere end 6 grader (11,5 %) ved en brugervægt på 150 kg.



ADVARSEL! Undgå at køre, hvor underlaget er blødt eller ujævnt (f.eks. sand, mudder, sne, is eller gennem dybe vandpytter). Vi anbefaler, at E-Walk kun bruges på jævne og faste overflader.



ADVARSEL! Ved kørsel eller parkering på glatte overflader eller på skråt terræn kan E-Walks hjul glide.



ADVARSEL! Brug ikke E-Walk i nærheden af enheder, der udsender stærke radiobølger. Hvis E-Walk er i nærheden af en radiobølgekilde og begynder at fungere unormalt, skal du straks slukke for strømmen og flytte dig væk fra stedet. Hvis en mobiltelefon skal bruges i direkte forbindelse med kørestolen, skal E-Walk være slukket. De svage elektromagnetiske bølger, som E-Walk udsender, kan påvirke andre elektroniske enheder, såsom automatiske døre og tyverisikringssystemer af den type, der bruges i butikker. I sådanne tilfælde skal du slukke for E-Walk og betjene kørestolen manuelt.

Transport og opbevaring af E-Walk




ADVARSEL! E-Walk kan transporteres, mens den er tilkoblet kørestolen. Brug de markerede fastgørelsespunkter til at sikre E-Walk under transport. Kørestolen skal fastgøres under transport ved hjælp af sine egne fastgørelsespunkter, se kørestolsproducentens anvisninger.

Transport af E-Walk

1. Sluk for strømmen til E-Walk.
2. Fjern batteriet fra E-Walk for at forhindre pludselig opstart under opbevaring eller transport.
Løft E-Walk ind i bilen.
 - Løft E-Walk i det øverste håndtag [R] og forhjul [H] ved pålæsning.
3.
 - Vær forsigtig, så du ikke beskadiger basisenheden under pålæsning.
4. **Sikr E-Walk.** Fastgør E-Walk til dens transportbeslag [L] for at forhindre, at den bevæger sig under transport og rammer omkringstående genstande.

Transporttips Produktet indeholder følsomme elektroniske komponenter. Udsæt ikke produktet for kraftige, direkte stød eller slag. Pålæs så opretstående som muligt. Hvis du pålæsser E-Walk liggende, skal du sikre, at delene på basisenheden ikke kan blive beskadiget, før den er fastgjort.

Tips til fastgørelse af E-Walk Fastgør E-Walk med fastspændsremme og læg stødabsorberende materiale under og omkring E-Walk.

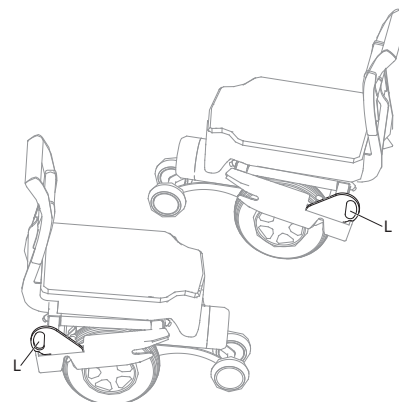

Transport af E-Walk med fly

Ved bestilling af flyrejse skal du altid informere flyselskabet på forhånd om, at du medbringer en elektrisk motorenhed til en kørestol og følge deres anvisninger. Giv flyselskabet detaljerede oplysninger om dette ved booking. Ved flyvning skal blybatteriet (gel) anvendes i henhold til følgende specifikationer:

Navn:	Blybatteri E-Walk
Artikelnummer:	MCG201-1
Spænding:	24 V (2X12V)
Kapacitet:	12 Ah (288 Wh)
Type:	Gel

Opbevaring af E-Walk

1. Sluk for strømmen til E-Walk.
2. Opbevar E-Walk et sted med normal indendørstemperatur og lav luftfugtighed.
3. For at tørre snavs eller pletter af før opbevaring, brug et grundigt opvredet håndklæde.

Hvis E-Walk ikke skal bruges i en længere periode, skal du kontrollere, at E-Walk fungerer som den skal hver måned. Efter opbevaring af E-Walk skal følgende kontrolleres og udføres, før den tages i brug igen:

- Batteristatus, oplad om nødvendigt.



ADVARSEL! Opbevar ikke E-Walk, hvor den kan blive våd af regn eller på steder med høj luftfugtighed.



ADVARSEL! Undgå opbevaring i direkte sollys eller ved høje temperaturer.

Batteri og batterioplader

Som standard er E-Walk udstyret med et LiFePO4-batteri 24V/15Ah. Alternativt kan E-Walk købes med vedligeholdelsesfrie gel-blybatterier 24V/12Ah (2x12V). Omgivelsestemperaturer for batteriet:

Ved brug på E-Walk	-15°C – 40°C
Til opbevaring, fjernet fra E-Walk	10°C – 25°C
Under opladning	5°C – 30°C

Opladning af batteriet til E-Walk sker med batteriet placeret i basisenheden. Opladeren til E-Walk er udstyret med en lampe, der viser opladningsstatus. Når opladeren er sat i stikkontakten, og indikationslampen lyser grønt, kan den tilsluttes ladeporten. Når opladeren er tilsluttet ladeporten, og batteriet oplades, viser opladeren et rødt lys. Når batteriet er fuldt opladet, lyser lampen grønt. Et helt afladet batteri kan tage op til 4 timer at oplade til fuld kapacitet. **Batteriindikator** E-Walk-styringen er udstyret med en batteriindikator [V], der viser den aktuelle batteristatus. Før E-Walk bruges i længere tid, anbefales det altid, at batteriet er fuldt opladet.

LiFePO4-batteri (MCG4755)

Fuldt opladet batteri



Batteriet er næsten tomt, ca. 1 km rækkevidde tilbage.



Blybatteri (MCG4055)

Fuldt opladet batteri



Batteri delvist opladet




Batteriet er næsten tomt, ca. 1 km rækkevidde tilbage.



Opladning af batteriet

1. Tilslut opladeren til en stikkontakt.
2. Kontroller, at lyset på opladeren er grønt.

3. Åbn beskyttelsesdækslet til ladeudtaget på basisenheden, og tilslut opladeren til udtaget. Kontroller, at tappen på kabelstikket [AF] passer ind i rillen på udtaget.

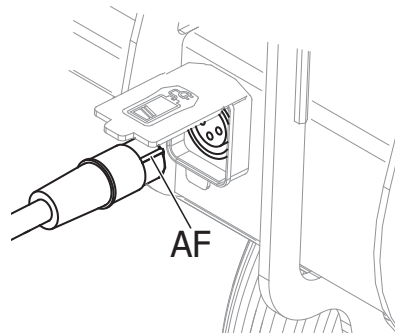

INFO Kontroller, at lyset på opladeren er rødt. Dette indikerer, at opladning er i gang.

4. Når opladningen er færdig, frakobl opladeren fra E-Walk og fra stikkontakten.

Batteriopbevaring Opbevar batterierne et køligt og tørt sted (en temperatur mellem 10–25 °C er optimal). Hvis du ikke planlægger at bruge E-Walk i en længere periode (en måned eller mere), skal du oplade batteriet, indtil seks streger vises på styringens batteriindikator [V], før det opbevares. Kontroller hver tredje måned, at batterispændingen ikke er faldet til et for lavt niveau. Hvis én eller ingen streg vises, skal du oplade batteriet igen, indtil seks streger vises.



ADVARSEL! Undgå opbevaring i direkte sollys eller ved høje temperaturer.

Vedligeholdelse

Rengøring

Hvis E-Walk bliver snavset under normal brug, rengør den med et fugtigt, godt opvredet håndklæde. Ved kraftig tilsmudsning bruges et håndklæde eller en klud og et neutralt rengøringsmiddel. Sørg for, at der ikke er rester af rengøringsmiddel på E-Walk efter rengøring.



BEMÆRK! Skyl aldrig E-Walk med en vandslange eller højtryksrenser. Brug ikke damp til at rengøre E-Walk. Elektronikken kan blive beskadiget, hvilket kan føre til alvorlige funktionsfejl.



BEMÆRK! Rengør ikke med opløsningsmidler som benzin eller fortynder. Dette kan beskadige lakeringen og plastdelene på E-Walk



INFO En klud og alkoholbaseret desinfektionsmiddel er velegnet til desinficering af E-Walk.

Korrosion

Alle dele af E-Walk, der kan udsættes for korrosion, er lavet af aluminium, rustfrit stål eller stål. Materialerne og overgangen mellem materialerne er overfladebehandlet, hvilket betyder, at risikoen for korrosion ikke er øget. Uanset dette bør du altid tørre våde eller fugtige overflader på E-Walk af med en klud efter brug.

Reparationer

- Brugeren må ikke selv reparere eller vedligeholde E-Walk.
- Brugeren må ikke selv fjerne dele fra E-Walk og sende dem til forhandleren for reparation.
- Hvis reparation er nødvendig, skal du altid kontakte din forhandler, selv ved mindre fejl.
- Hvis dele er beskadigede eller mangler, skal du straks kontakte din forhandler. Returnér E-Walk til forhandleren for at få dele udskiftet eller repareret.
- Ved almindelig vedligeholdelse, reparation eller service bør du altid kontakte forhandleren. Hvis E-Walk ikke bliver repareret, eller hvis ikke alle dele bruges under samlingen, kan brugeren, omgivelserne eller ejendom blive beskadiget.
- For at udføre reparationer og service bruger forhandleren servicemanualen, reservedelskataloget og anden dokumentation. Denne dokumentation er ikke tilgængelig for brugeren eller offentligheden.

Udskiftning af sikring

Der er to udskiftelige sikringer på E-Walk. Den ene er en hovedsikring på 25A, placeret nær batteristikket under batteridækslet [G]. Den anden sikring til styringen er placeret oven på S-drive motorstyringen [F] og er på 2A.

Genbrug

Når E-Walk overdrages til en ny bruger, skal al teknisk dokumentation også overdrages. Produktet skal rengøres, desinficeres og serviceres professionelt.

Affaldshåndtering

Når E-Walk har nået slutningen af sin levetid og skal bortskaffes, skal du kontakte dine lokale myndigheder for information om genbrug og følge deres anvisninger. Alternativt kan du kontakte din forhandler for genbrug af din brugte E-Walk med batteri.

Brugercheck

Kontroller, at dækkene er ubeskadigede før hver kørsel; mønsterdybden skal være mindst 1 mm. Defekte eller slidte dæk skal udskiftes af forhandleren. Kontroller basisenheden mindst én gang om måneden for slør eller slid i det nederste håndtag [Q] og dets mekanisme. Slidte dele skal udskiftes af forhandleren. Kontroller skruer og møtrikker på basisenheden mindst én gang om året eller efter behov, og stram dem, hvis de er løse. Smør led og hjulaksler med egnet fedt mindst én gang om året eller efter behov.

Fejlfinding

Hvis systemet ikke reagerer:

1. Kontroller, at stikket til styreenheden er korrekt monteret i basisenheden.
2. Kontroller tænd/sluk-knappen.
3. Kontroller, at batteriet er opladet.
4. Kontroller sikringerne.

Fejlkoder



Batteriet skal oplades, eller forbindelsen til batteriet er dårlig. Kontroller forbindelsen til batteriet. Er forbindelsen god, kan du prøve at oplade batteriet.



Forbindelsen til motoren er dårlig. Kontroller alle forbindelser mellem motoren og styreenheden.



Der er opstået en kortslutning mellem motoren og batteriet. Kontakt en servicetekniker.



Ikke i brug



Ikke i brug



Styreenheden forhindres i at køre E-Walk. Dette kan skyldes, at batteriopladeren er tilsluttet.



Der er noget galt med gashåndtagets signal. Sørg for, at gashåndtaget er slukket, før du starter E-Walk.



Der er noget galt med gashåndtaget. Kontroller, at alle forbindelser er korrekt på plads.



Parkeringsbremsen er dårligt forbundet. Kontroller forbindelsen mellem parkeringsbremsen og motoren, og sørg for, at forbindelserne til styreenheden er korrekt på plads.



Styreenheden har været udsat for overspænding. Dette skyldes normalt en dårlig batteriforbindelse. Kontroller batteriforbindelserne. Styreenheden er ikke i sin "nulposition", når tænd/sluk-knappen aktiveres.



Kontakt venligst Decon Mobility, hvis du har spørgsmål eller oplever problemer med dette produkt.

Decon Mobility
Scandiasporet 37
8930 Randers
0345-408 80

Følg os på:



decon.dk



Henviser til:
PL001-8002 Brugsanvisning
AO KD/QS 7.5.1-03-09