



**Monterings anvisning Quickie 2 Classic
MEM6145 och MEM6146**

1. Demontera hjul och navhylsa båda sidorna.

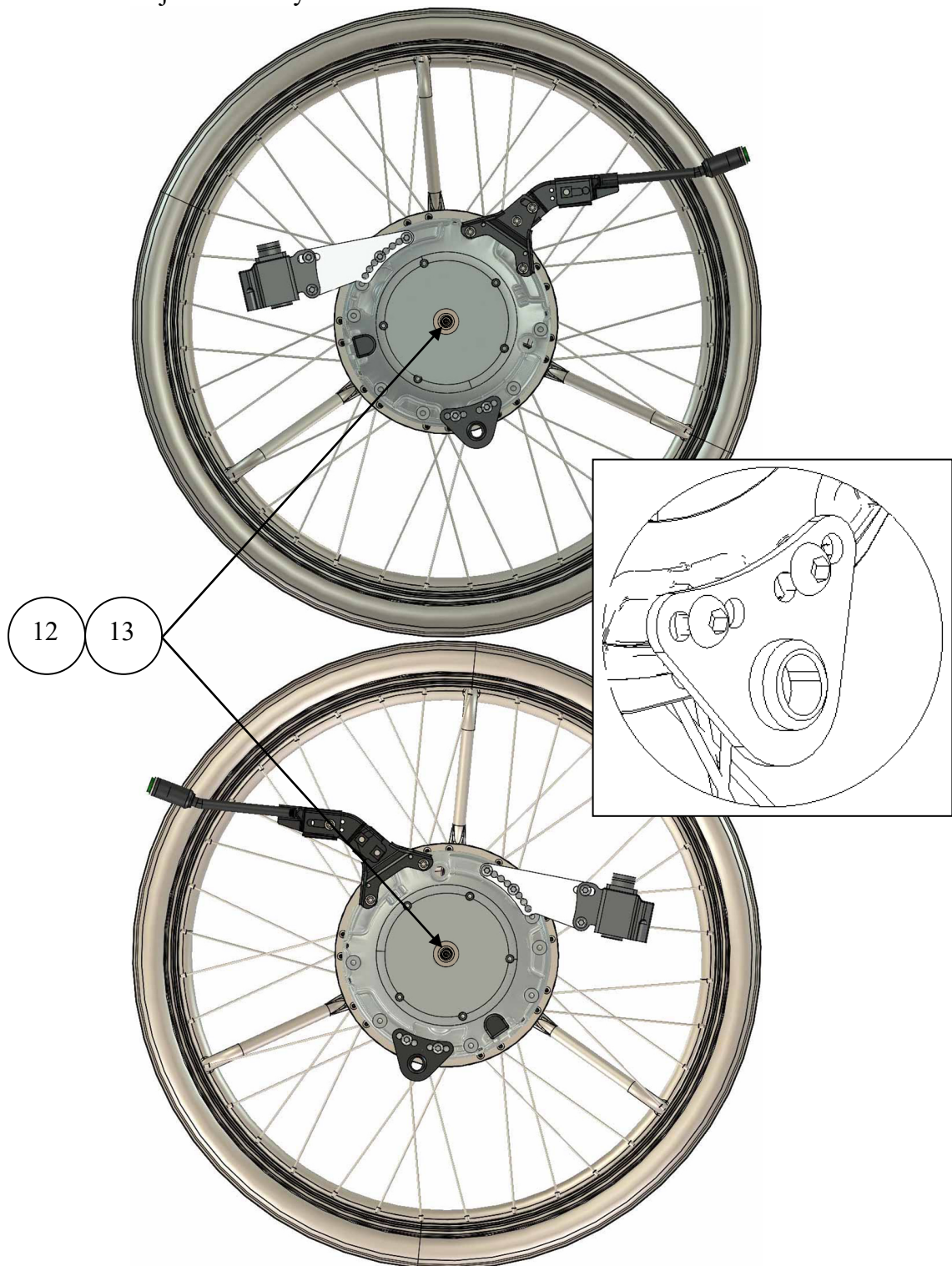

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
- Axel Ø12 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.

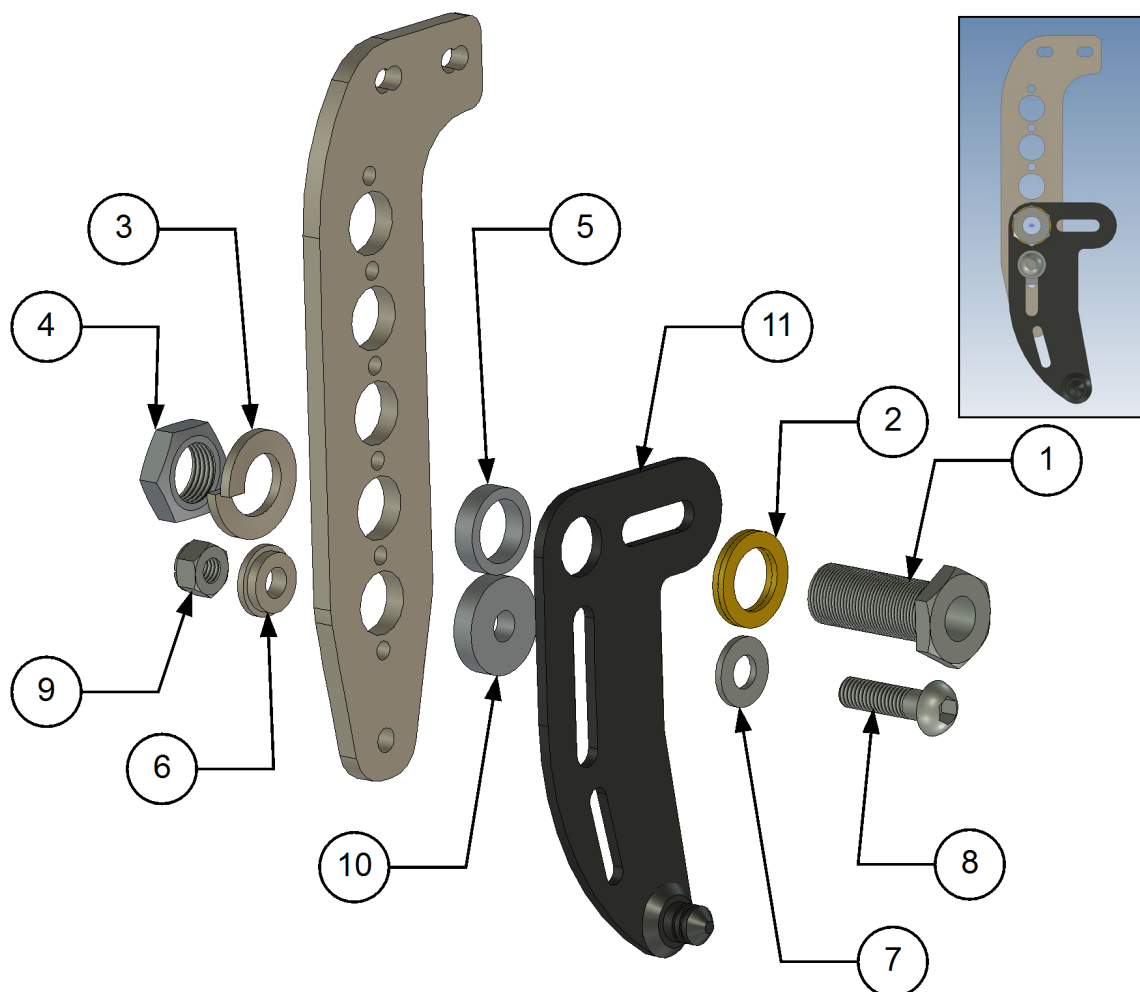

3. Montera nu fästet som bilden visar ovan (höger sida).

4. För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering.	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	HW063	1	Navhylsa
2	405239	1	Nordlock Bricka
3	XSM16FJ	1	Fjäder Bricka M16
4	XSM16M	1	Mutter M16 låg
5	100 400 005	1	Distans
6	100 400 007	1	Distans
7	XSM8BR	1	Plan Bricka M8
8	XSM8X30	1	Skruv M8 x 30
9	XSM8ML	1	Lås Mutter M8
10	100 400 012	1	Distans
11	XOE-22294-BO	1	Höger Fäste
12	XOE-25383-00	1	Distans 12,0
13	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringssats medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.

5. Montera nu den rygghängda batteriväskan.



Åtdragningsmoment / Tightening torque

Metrisk grovgångor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Hubsleevers.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm