

decon
mobility



EASYWHEEL

Brukarmanual



The undersigned, representing the following manufacturer

Decon Wheel AB
Org. No. 556618-9006
SRN SE-MF-000046289
Södra Ekeryd 119, 314 91 Hyltebruk
Sweden,

hereby declares that the product **Easywheel**

with the basic UDI-DI 735001014VHNG

and the following references
VH2100
VH2130
VH2140

is in conformity with the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 as a class I medical device based on Annex VIII.

Intended purpose: The device is a mechanical drive unit for manual wheelchairs with the intention to provide mobility and flexibility to persons who are unable to walk or have restrictions on walking. The device is intended for indoor and outdoor use.

This EU declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Hyltebruk, 2025-10-24

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mattias Lundin", is written over the printed name.

Mattias Lundin
CEO



INNEHÅLL

1. EASYWHEEL	5
2. MÄRKNING	6
CE-märkning	6
3. LEVERANSKONTROLL	7
4. INGÅENDE KOMPONENTER	7
5. VIKTIG SÄKERHETSANVISNING INNAN ANVÄNDNING AV EASYWHEEL	8
6. OLIKA MODELLER AV EASYWHEEL	8
7. MONTERING AV EASYWHEEL	9
8. TIPPSKYDD	9
9. VIKTIG INFORMATION	10
10. GUIDE FÖR SÄKER KÖRNING	10
Passage av trösklar och kanter	10
Lutningar	10
Övergångsställen och trottoarer	10
11. TRANSPORT OCH DEMONTERING AV EASYWHEEL	11
12. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	11
13. GARANTI OCH SKÖTSELRÅD	12
14. ÅTERANVÄNDNING AV EASYWHEEL	12
15. KORROSIONSINFORMATION	12
16. SERVICE OCH REPARATION	13
17. FELSÖKNING AV EASYWHEEL	13
18. TEKNISKA DATA	13
19. VARNING	13
20. LEVERANTÖR	14

1. EASYWHEEL

Du har nu mottagit en ny rullstol med Easywheel. För att Du ska få mesta möjliga nytta av den, och för att den skall passa dig bäst, hoppas vi att Du har fått den utprovad av en behörig ordinator. Detta innebär att rullstolen med Easywheel ställts in efter Dina önskemål samtidigt som man tagit hänsyn till Din vikt och Dina behov. Vi förutsätter att detta har skett, och att Du även har fått instruktioner och råd om hur Du kan använda Din rullstol i Ditt dagliga liv.

Easywheel är ett mekaniskt nav med en växel som drivs med drivringarna. Easywheel är testad och godkänd på TÜV i Tyskland.

Vi hoppas att Du ska bli nöjd med Easywheel.

Läs igenom hela bruksanvisningen. Där finns ett antal punkter som berör din egen personliga säkerhet. Decon Wheel ansvarar endast för produktförändringar gjorda av behörig personal. Vi reserverar oss för eventuella förändringar på utrustning och specifikationer.



2. MÄRKNING



På etiketten på insidan av navet kan du se CE-märkningen samt produktionsår och månad, du kan också läsa vilken version det är på navet.



Följ bruksanvisningen!



Unik produktidentifierare



Medicinteknisk produkt



Modellnummer



Produktens artikelnummer



Tillverkningsdatum



Produktens serienummer



Tillverkarens namn och adress



ISO 7010-M002, Se brukarmanual/broschyr!




CE-märkning

3. LEVERANSKONTROLL

Kontrollera att samtliga delar överensstämmer med följesedeln. En eventuell transportskada ska du genast anmäla till transportbolaget. Tänk på att behålla förpackningen tills dess att transportbolaget kontrollerat godset och en uppgörelse kommit till stånd

4. INGÅENDE KOMPONENTER

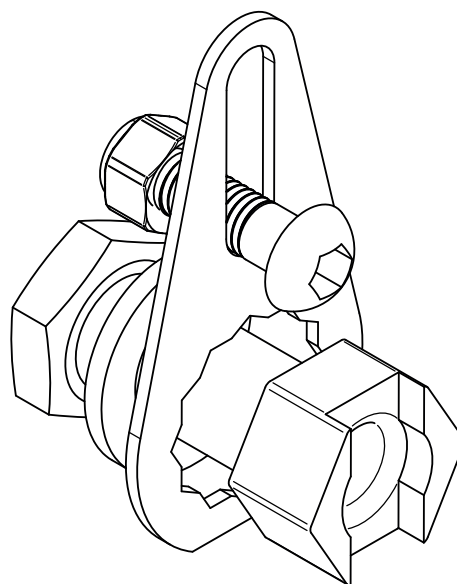

5. VIKTIG SÄKERHETSANVISNING INNAN ANVÄNDNING AV EASYWHEEL

- Easywheel får av säkerhetsskäl endast betjänas av personer som:
- Genomgått instruktioner om användning av Easywheel.
- Är i god fysisk och psykisk kondition för att kunna styra Easywheel säkert i alla driftsituationer.
- Instruktioner att betjäna Easywheel ingår i leveransens omfattning och sker på överenskommen tid genom din fackhandlare eller medarbetare från Decon Wheel. Denna service är helt kostnadsfri.
- Om du fortfarande inte känner dig säker på användningen av Easywheel vänd dig då till din fackhandlare.
- Beakta alla värden som rullstolstillverkaren specificerat i bruksanvisningen, framför allt angående maximal hindertagning. Följ dessutom noggrant drifts- och säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen till rullstolen.
- Easywheel har ingen separat broms. Därför måste du montera parkeringsbromsar på rullstolen och anpassa dem till Easywheel. Är rullstolen utrustad med trumbromsar måste du ta bort dem för att kunna driva rullstolen med Easywheel. I detta fall är det absolut nödvändigt att rusta om rullstolen med parkeringsbromsar.
- Easywheel är dimensionerad för inom- och utomhusbruk. Unvik att köra där underlaget är mjukt eller ojämnt (t.ex. sand, lera, snö, is eller genom djupa vattenpölar). Vi rekommenderar att E-Walk används endast på slätt och fast underlag.

6. OLIKA MODELLER AV EASYWHEEL

Easywheel levereras i tre olika storlekar, 20", 22" eller 24".

Easywheel kan även utrustas med olika typer av drivringar, personligt anpassade.

Drivringarna är av metall eller olika plastbeläggningar.

7. MONTERING AV EASYWHEEL

Se till att adaptern är monterad på din rullstol enligt bifogade monteringsanvisningar.

1. Börja med att montera Easywheel på din rullstol. Hjulen är snabbkopplande (QR-axel). Fäll ut handtaget till snabbkopplingen vid montering. (se bild. 1.).
2. Sätt sedan in QR-axeln. Det är av största vikt att axeln trycks in tillräckligt långt, annars kan QR-axeln gå av eller lossna från rullstolen (se bild. 2.).
3. När Easywheel sitter korrekt i adaptern, fäll tillbaka handtaget för att säkra QR-axeln i adaptern (se bild. 3.).



BILD 1



BILD 2



BILD 3

8. TIPPSKYDD

- Innan du börjar köra med Easywheel för första gången måste du kontrollera att tippskydden är monterade på din rullstol.

Av säkerhetstekniska skäl bör man endast ta bort tippskydden för att komma över ett hinder t ex höga trottoarkanter el dyl. I sådana fall behövs en ytterligare person till din hjälp. Monteringsanvisningen som levereras med din rullstol ska följas vid av – och påmontering av tippskydd.

9. VIKTIG INFORMATION

Om du kör din Easywheel stol med samma kraft som en vanlig manuell rullstol, kommer du att märka att du tack vare Easywheel kommer att klara hinder som du tidigare inte har klarat. Drivringarna kan bli hala, vilket kan göra det svårt att manövrera rullstolen om händerna är våta eller om rullstolen används i regn. Var aktsam när ni kör i en nedförs backe, därför att plast belagda drivringar kan få mycket hög friktion, som kan bränna i händerna, för att drivringarna kommer att ha en dubbelt så hög hastighet som hjulet.

Viktigt att du som användare är medveten om hur rullstolen fungerar innan du börjar köra (se över rullstolstillverkarens säkerhetsanvisningar i bruksanvisningen).

Lås bromsarna vid ur- och nerstigning i rullstolen.

Kontrollera att däcken på dina easywheelhjul har rätt lufttryck vid körning.

Lufttrycket ska hållas på 6 bar.


10. GUIDE FÖR SÄKER KÖRNING

Passage av trösklar och kanter

Vid passage av låga trösklar och kanter rekommenderas att de passeras genom att köra baklänges.


Lutningar

Öva på att köra på underlag som lutar. Kör mycket försiktigt.

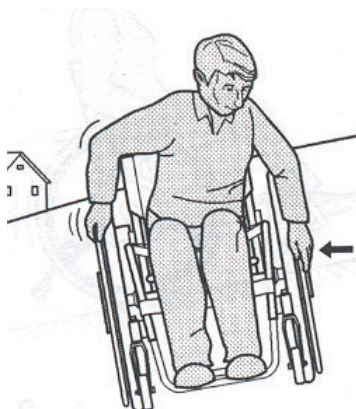

Övergångsställen och trottoarer

Ta god tid på dig om du ska över ett övergångsställe. Kör försiktigt så att du inte kör in i några trottoarkanter.

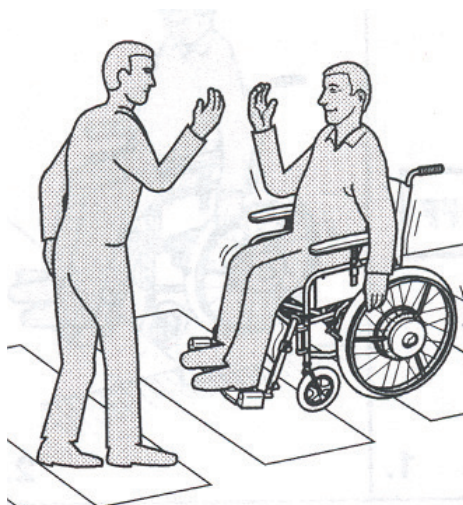

11. TRANSPORT OCH DEMONTERING AV EASYWHEEL

Fäll ut handtaget (bild 1 se sidan 5) och dra försiktigt ut hjulen.
För att se hur du fäller ihop själva rullstolen, se rullstolsmanualen.

12. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Easywheel är ett mekaniskt nav med utväxling som drivs med drivringarna. Växeln i navet är ansluten till drivringarna. När drivringarna förs framåt drivs växeln och hjälper brukaren att köra stolen. Easywheel är lämplig för alla brukare som kör en drivringsmanövrerad manuell rullstol. Under körning så omvandlar Easywheel ca 50 % av den kraft som krävs för att köra stolen, för att hjälpa brukaren att lättare ta sig fram. Easywheel fungerar både vid inomhus- och utomhuskörning. Maximal brukarvikt är 125 kg inkl. rullstol.

Det är inte tillåtet att använda Easywheel om inte rullstolens tippskydd är monterade. För att CE-märkningen av Easywheel ska gälla måste följande punkter följas:

- Tippskydd ska vara monterade.
- Montering, reparation eller andra arbeten får endast utföras av behörig personal eller medarbetare från Decon Wheel.
- Tippskydd ska vara inställda så att de kan svänga fritt på horisontell nivå.
- Användaren ska instrueras om följande punkter:
 1. Att säkerställa att tippskyddet kan röra sig fritt.
 2. Försiktighet när man kör över hinder högre än 4 cm.
 3. Rullstol med Easywheel ska alltid testas tillsammans med användaren angående rullstolens maximala hindertagningsförmåga.
 4. Varje rullstol utrustad med Easywheel måste testas tillsammans med användaren avseende tipprörelsen vid bakaxeln. Den kritiska tippunkten är den punkt där rullstolen, när den lutar bakåt, förlorar balansen och tippas bakåt.

13. GARANTI OCH SKÖTSELRÅD

- Easywheel är en produkt som kräver mycket lite underhåll och sköts den på rätt sätt kommer den inte att förorsaka några problem.

Garanti

- Hela produkten har en garanti på 2 år.

Skötselråd

- Hjulaxlar ska torkas rena och smörjas med en droppe olja.
- Ekrarna skall kontrolleras och spännas vid behov två gånger om året.
- Skruvar och muttrar skall kontrolleras regelbundet och dras åt när det behövs (gäller alla lösa delar).
- Hjulen torkas av med mjuk trasa fuktad med lättare rengöringsmedel utspätt med vatten.
- Gå igenom Easywheel två gånger om året och kontrollera att inga sprickor eller övriga skador uppkommit. Om skada uppkommer ber vi Er omgående meddela Decon Wheel.
- All teknisk service ska utföras av behörig personal eller Decon Wheel.
- Enbart originaldelar eller delar som godkänts och uppfyller Decon Wheels specifikation får användas.

14. ÅTERANVÄNDNING AV EASYWHEEL

När Easywheel skall övertagas av en annan brukare skall hjul demonteras från rullstolen. Muttrarna ska rengöras med ett mildt rengöringsmedel. På Easywheel demonteras däck och slang, drivring och ekerskydd demonteras, hela hjulet skall rengöras med ett lättare rengöringsmedel. Hjulet funktionstestas, kärvar hjulet skall det skickas in för översyn till Decon Wheel eller anvisad serviceinrättning, QR-axeln ska kontrolleras och testas. Drivring och ekerskydd monteras eller byts vid kraftig förslitning, nya däck monteras. Förpackas i emballage och etiketteras.

15. KORROSIONSFÖREBYGGANDE

Alla Easywheel delar är tillverkade av aluminium respektive rostfritt stål. Materialens övergångar har dessutom ytbehandlats, där för finns ingen ökad risk för korrosion. Oavsett detta bör du alltid torka av våta eller fuktiga Easywheel hjul med trasa efter användning.

16. SERVICE OCH REPARATIONER

Easywheel kräver minimalt underhåll vid normal användning. Av säkerhetsskäl bör man ändå lämna hjulen till kontroll vartannat år, även om man inte kan konstatera skador eller funktionsproblem med blotta ögat. När det gäller service- och underhållsarbeten kontakta Decon Wheel eller din fackhandlare.

17. FELSÖKNING AV EASYWHEEL

Fel	Kontrollera	Åtgärd
Drivringen driver inte hjulet framåt.	Kontrollera att hjul sitter fast i adaptern.	Säkerställ att hjuldrivaren ansluter till adapter och att hjulet kan sättas in helt tills det är säkert låst på plats i adapter.
Easywheel går tungt vid framdrift.	Kontrollera att lufttrycket är korrekt minst 6 bar.	Fyll i mer luft om lufttrycket är för lågt.

18. TEKNISKA DATA

Easywheel vikt:	4 kg/hjul
Däckdimension:	20", 22" eller 24"
Lufttryck:	6 bar, 600 kPa eller PU-däck
Rullstolsbreddsökning:	ca 1 cm
Maximal brukarvikt:	125 kg (kontrollera rullstolstillverkarens specifikationer)
Maximal hindertagning:	se rullstolstillverkarens specifikationer

19. VARNING

- Om anvisningarna ej följs, kan det orsaka skada på person och/eller rullstol.
- Använd alltid tippskydd.

20. LEVERANTÖR

För att beställa Easywheel och reservdelar, kontakta Decon Wheel eller din återförsäljare.



LEVERANTÖR

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 115
314 93 Hyltebruk
Sverige

E-post: info@decon.se
Tel. +46 (0) 345 - 408 80



Vänligen kontakta Decon om du har några frågor eller stöter på några problem med denna produkt.

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 119
314 91 Hyltebruk
0345-408 80

Följ oss på:



decon.se

