

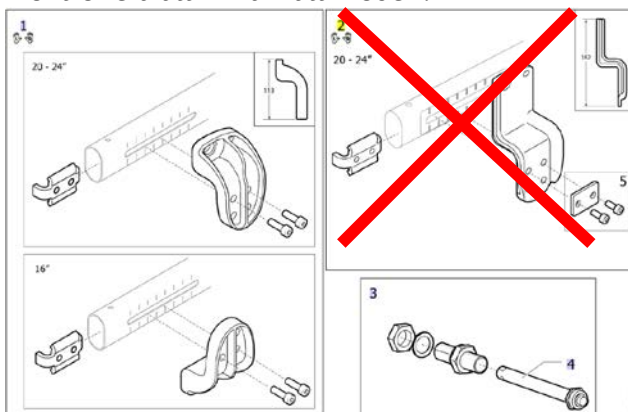


Monterings anvisning Rea Dahlia MEM6273 och MEM6274


1. Kontrollera att ni har rätt modell.

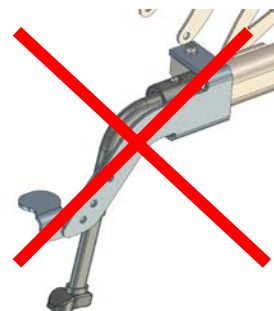


2. Montera rygghängd batteri väska, om det ej är möjligt på grund av annan medicin teknisk utrustning, måste ni ha följande Tillbehörs Korg med Artikel Nummer: 1574433 från Invacare. Denna detalj måste användas för montering av batteri boxen. Tänk på att det inte går att använda en tilt pedal om detta monteras.

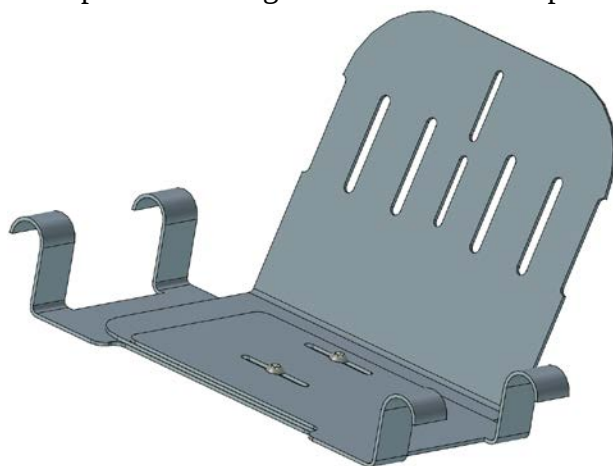

3. Demontering av hjul, broms, adapter fäste samt broms handtag på båda sidor.

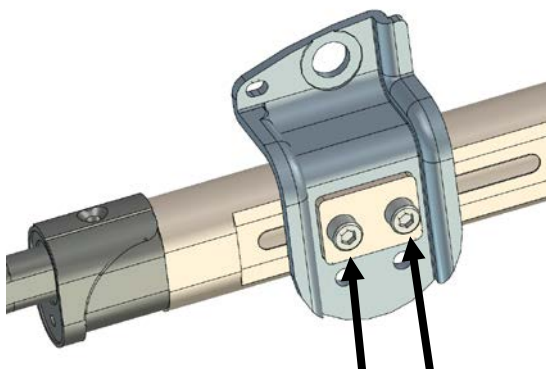


4. Det lättaste sättet att demontera dessa detaljer är genom att lossa skruvarna för adapter fästet på båda sidorna, därefter lyftes hela rullstolen rakt upp. Lossa därefter broms hantagen. Kom ihåg att ta vara på skruvarna och plattan som kommer att åter användas för montering av dem nya fästena.

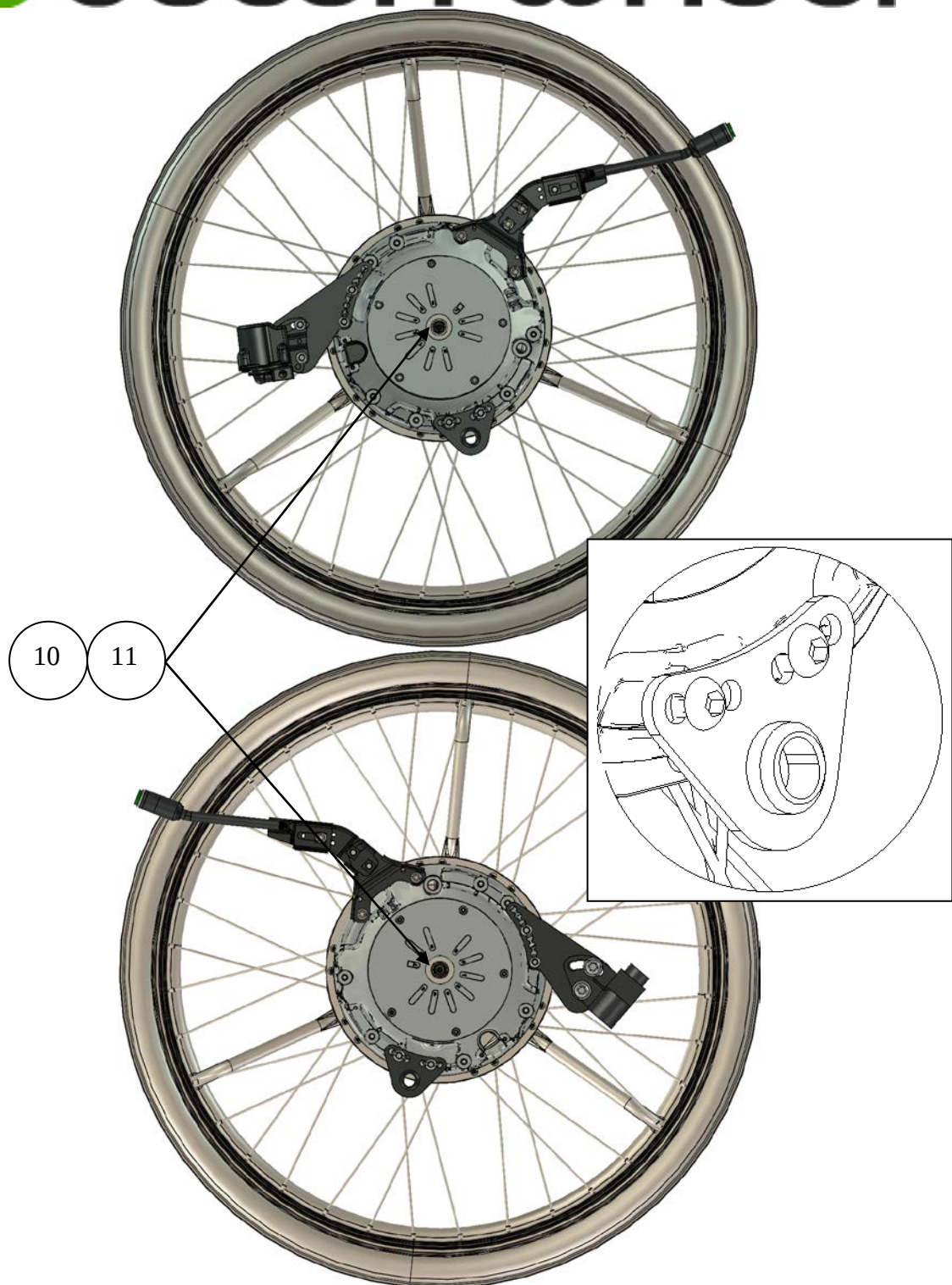


5. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
- Axel Ø12,7 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-C0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.


Montering av Batteri placerat på Tillbehörs Korgen

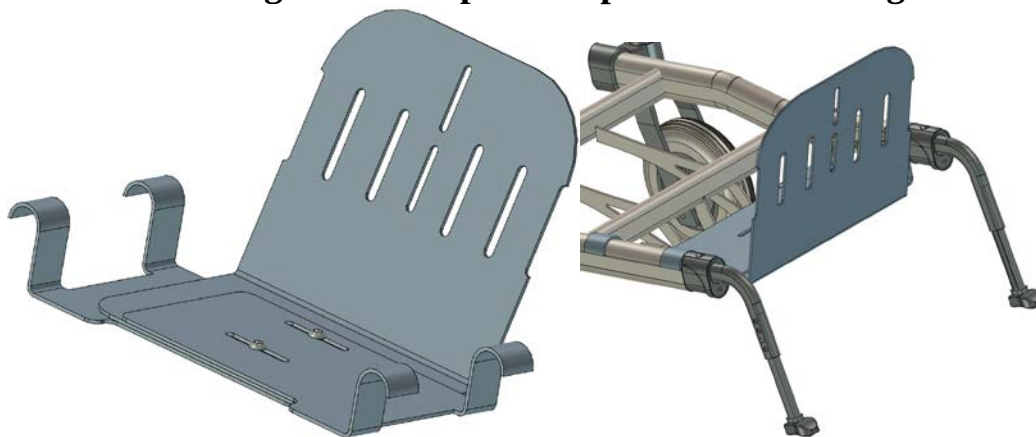

6. Följ monterings instruktion av Tillbehörs Korgen från Invacare.

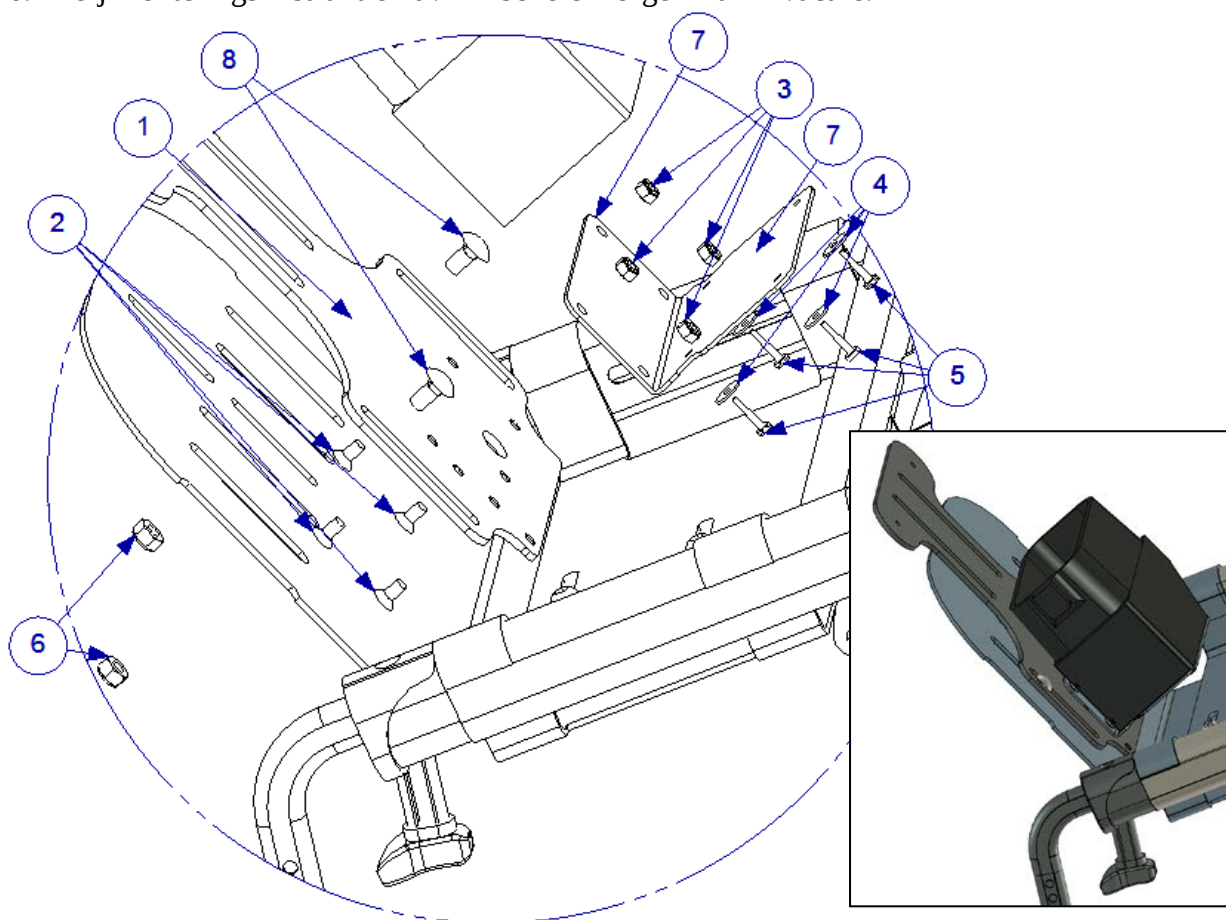

Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	MED5001 Rev3	1	Batteri Platta eDrive/ eMove
2	XSFM6X16	4	Försänkt Skruv M6 x16
3	XSM6ML	4	Låsmutter M6
4	90201-043H5	4	Planbricka
5	97707-40520	4	Plåtskruv 3,85 x 19,5
6	XSM8ML	2	Låsmutter M8
7	MEM5011	1	Fäste
8	XSSM8X16	2	Vagnsbult M8 x 16

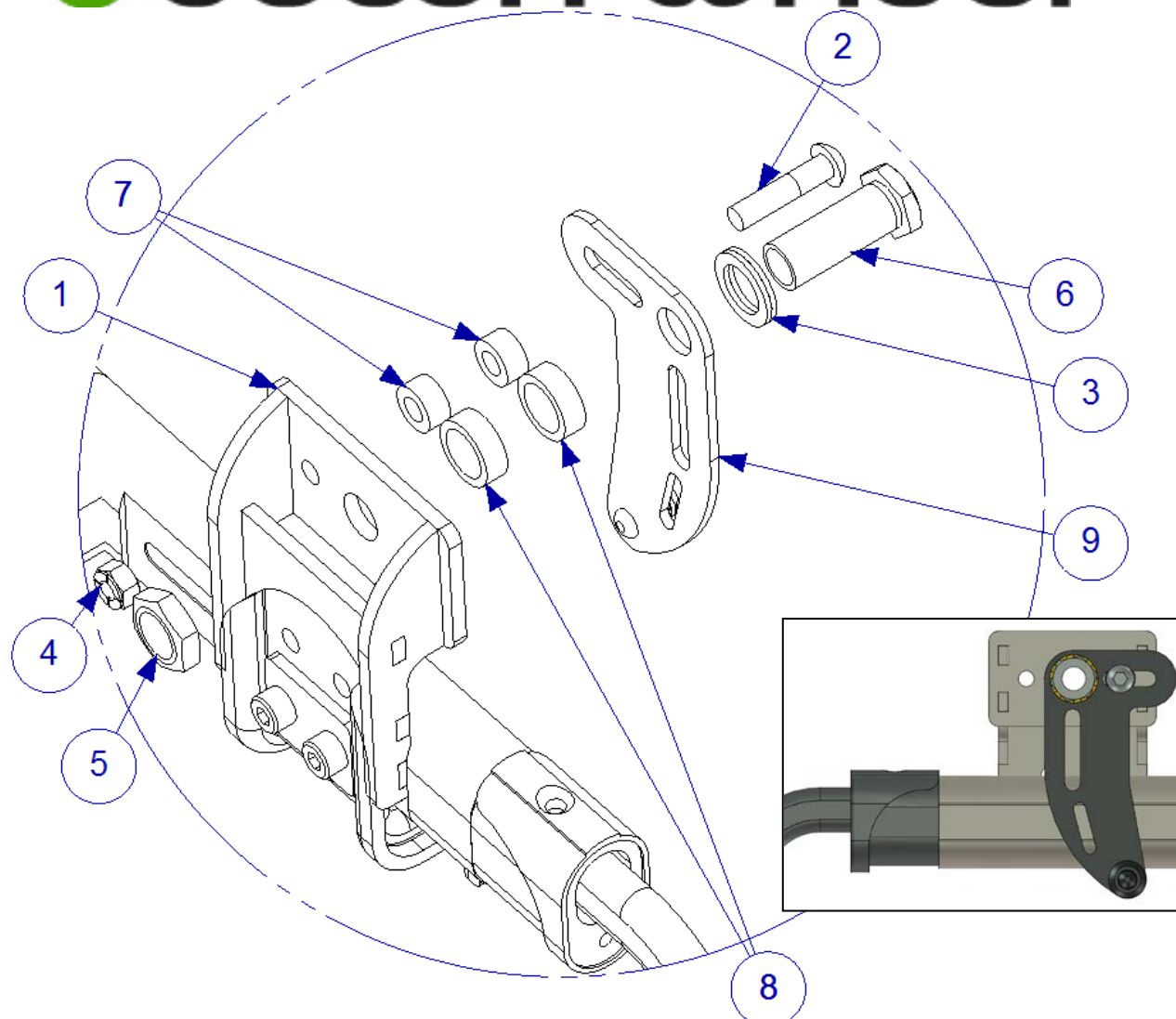

7. Se bild som visar montering av fästet och inflyttning av tippskyddet på höger sida.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	MED3123-01	1	Fäste Dahlia
2	XSM8X35	1	Skruv Rundad M8 x 35
3	405239	1	Nordlock Bricka M16
4	XSM8ML	1	Låsmutter M8
5	XSM16M	1	Mutter M16X1 Låg
6	HW069	1	Navhylsa M16x1/12,7
7	100 400 003	2	Distans
8	100 400 006	2	Distans
9	XOE-22294-BO	1	Höger Fäste
10	XOE-25383-00	1	Distans 12
11	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringssats medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.