



Monteringsanvisning E-Walk på modell HD 16" och 24" Balance

MCG1190


1. Demontera hjulen på båda sidorna.

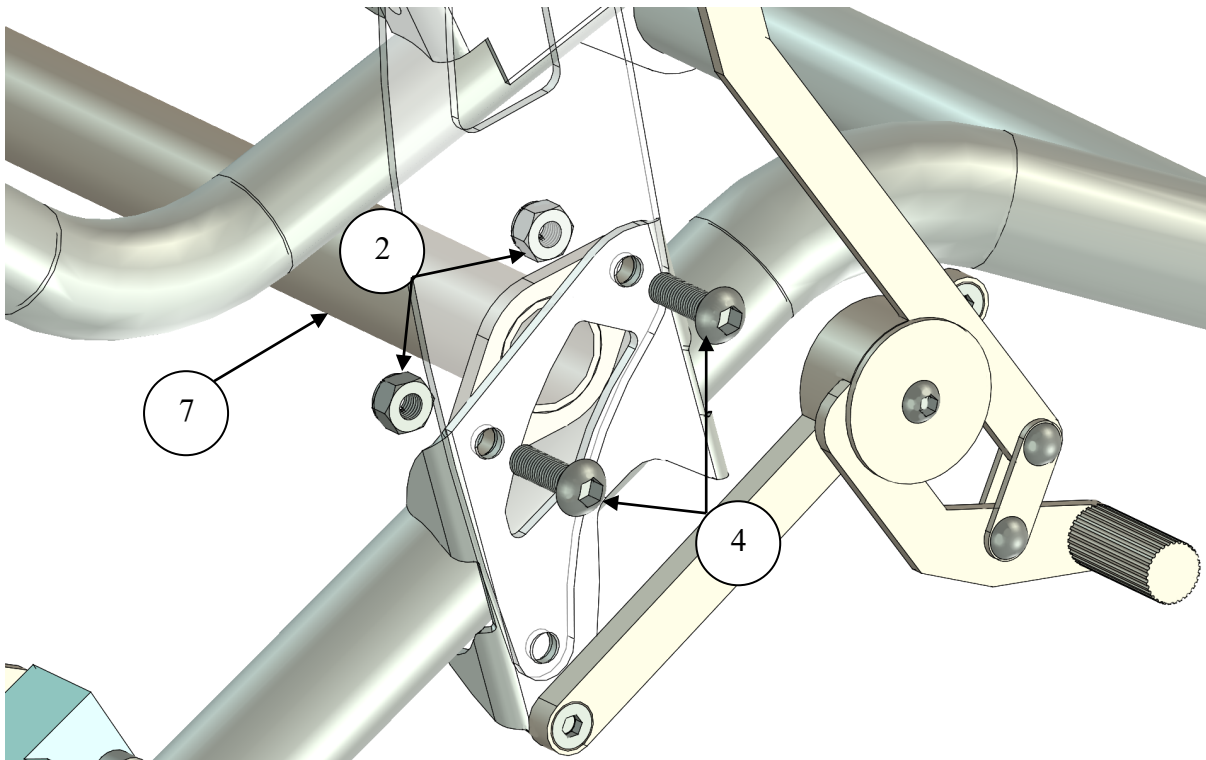


2. Montera förstärknings rör MCG1190SB mellan sitsens plattor i ramen.
Se bild ovan för montering på höger sida.
Förstärknings röret är justerbart i olika sittbredder från SB 38, 42, 46, 50 och 52.
3. Demontera nu tvärstaget som sitter mellan hjulens infästnings plåtar, **vilket skall åter användas och monteras.**

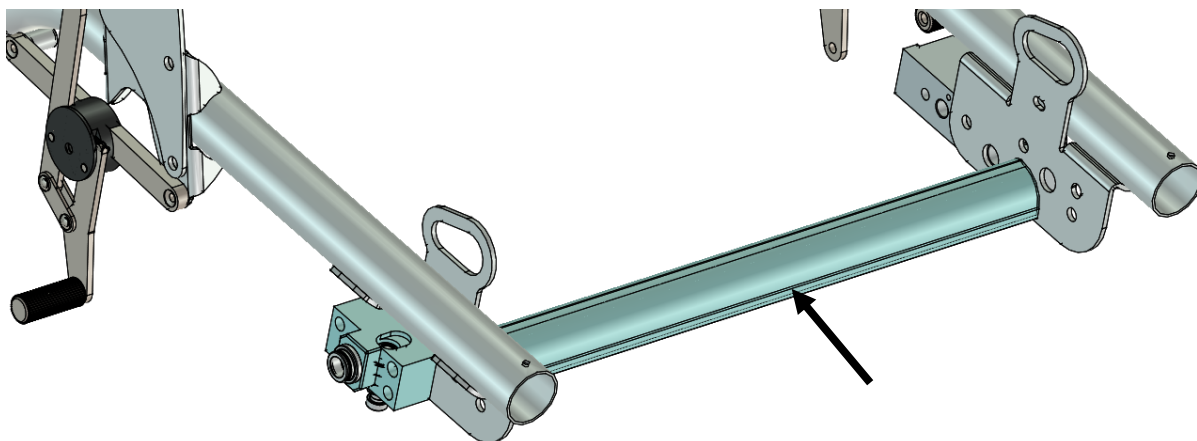


4. Montera nu sidoplattorna, enligt bilder nedan.

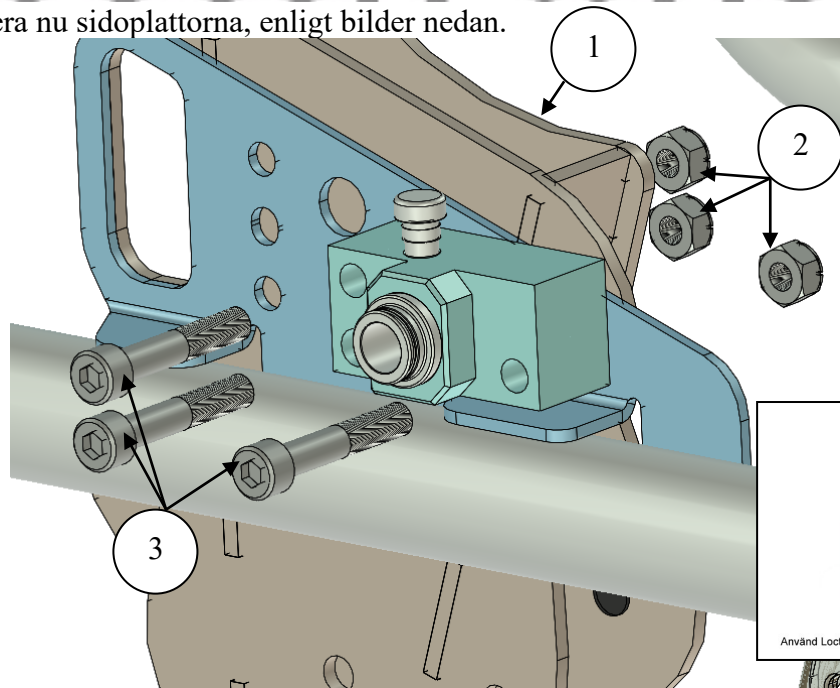

HD 24"

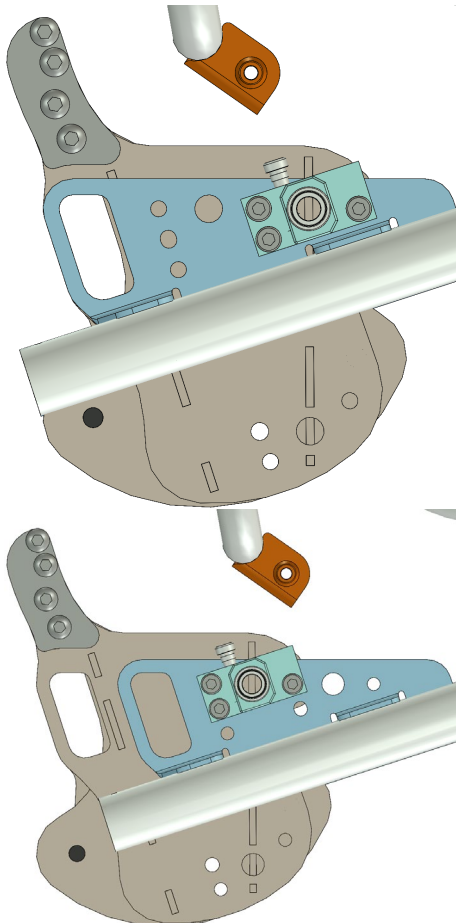


HD16"

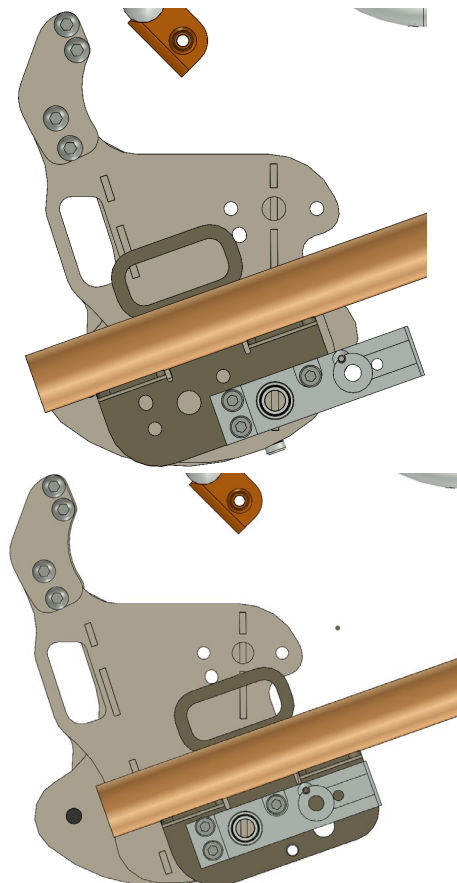


För montering på en sida så skall följande ingå. Se även bilder på föregående sida.

Placering.	Artikel nummer	Antal	Beskrivning
1	MCG1189R	1	Fäste Höger
2	XSM8ML	7	Låsmutter M8
3	MC6SM8X45	3	Skruv - M8 x 45
4	XSM8X25	6	Skruv rundad M8 x 25
5	MCG1153-06	1	Platta Bly Batteri
6	MCG1189-02	1	Platta LiFePO4/NiMh Batteri
7	MCG1190SB	1	Förstärknings rör
8	XSM8BR	2	Planbricka M8

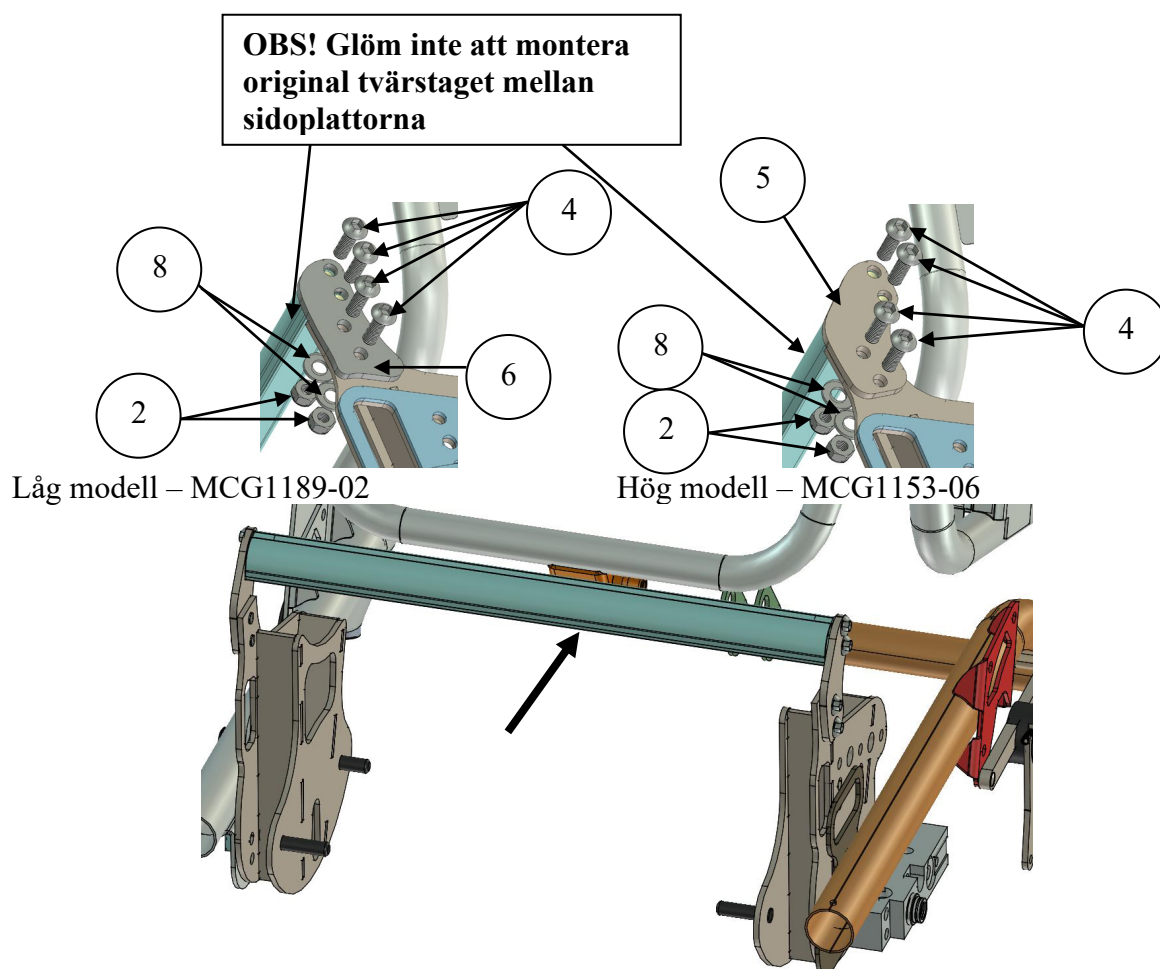


5. **Montera tillbaka original tvärstaget mellan de nya sidoplattorna.**
Tänk på vilken typ av eWalk som skall vara monterad. Se bilder ovan.

Center placerad styrkontroll



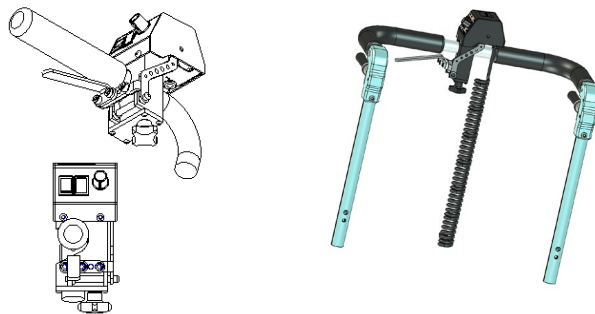


När det ej är monterat broms på körhandtaget, bör denna placering användas.

Sidoplacerad styrkontroll

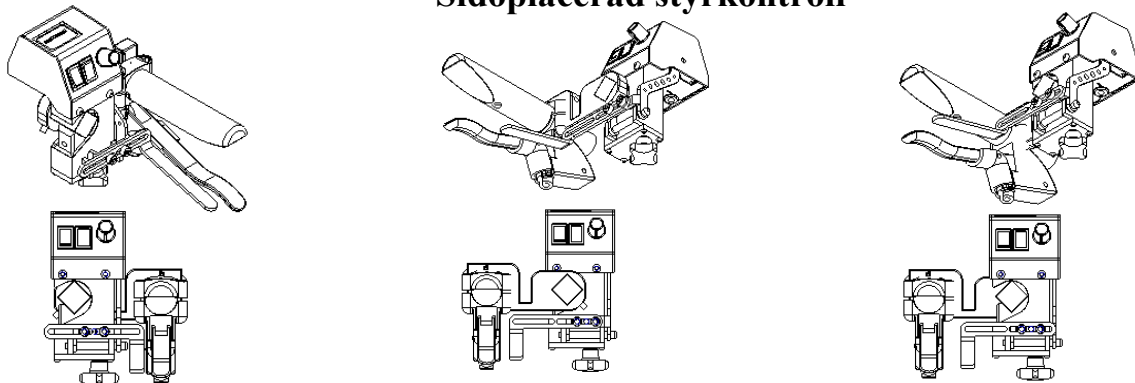

När det är monterat broms på körhandtaget användes sidoplacerad styrkontroll. Det finns olika monterings alternativ, samt justerings möjligheter.

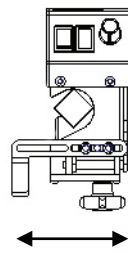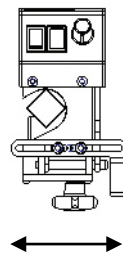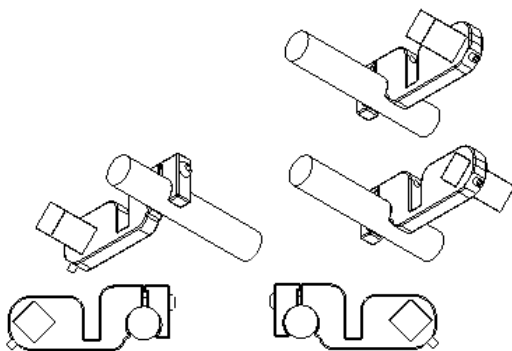


OBS! Använd Loctite på alla skruvar vid montering och justering.

Använd Loctite 2400 på alla skruvar


VARNING!

När man monterar styrkontrollen så skall man alltid kontrollera att styrkontrollens gashandtag eller dess övriga leder inte tar i eller ligger emot någonstans. Om reglage tar i eller ligger emot så kan detta leda till att gasen hänger sig och en olycka kan inträffa.

6. Montera nu Styrkontrollen på valfri plats.

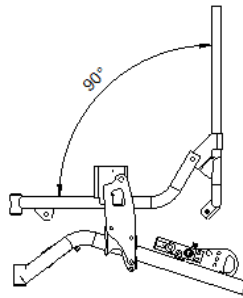

OBS! Tänk på att vid in/ur montering av aggregatet skall ni resa sätet till vågrätt positionsläge, samt rygg i positionsläge 90°. Se bilden ovan.

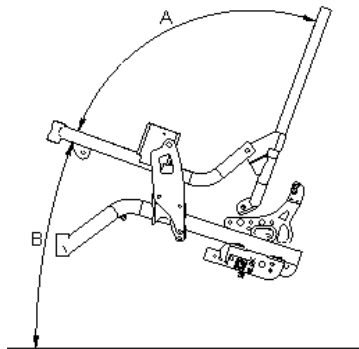

HD 24" Balance

- **Tiltnings möjligheter med hög modell (Blybatteri)** av e-walk: Man kan tilta sätet (B) till Max 10°. Rygg tiltning (A) fungerar helt när (B) är i positionsläge 0-10°. Vid större sits tiltning än 10° finns risk att skada skyddskåpan, batterierna eller att någon vajer skadas.
- **Tiltnings möjligheter med låg modell (LiFePO₄ Batteri)** av e-walk: Man kan tilta utan några begränsningar.

HD 16" Balance

- **Tiltnings möjligheter med hög modell (Blybatteri)** av e-walk: Man kan tilta sätet (B) till Max 7,5°. Rygg tiltning (A) fungerar helt när (B) är i positionsläge 0-7,5°. Vid större sits tiltning än 7,5° finns risk att skada skyddskåpan, batterierna eller att någon vajer skadas.
- **Tiltnings möjligheter med låg modell (LiFePO₄ Batteri)** av e-walk: Man kan tilta utan några begränsningar.



**+Om inget annat specificeras, använd följande åtdragningsmoment.
Unless otherwise specified, use the following tightening torque.**

Metrisk grovgångor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Sleeves.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm