



**Monteringsanvisning för Sorg Mio / Mio Carbon
MEM6371 och MEM6372**

1. Demontera hjulen på båda sidorna samt navhylsan med broms på båda sidorna.

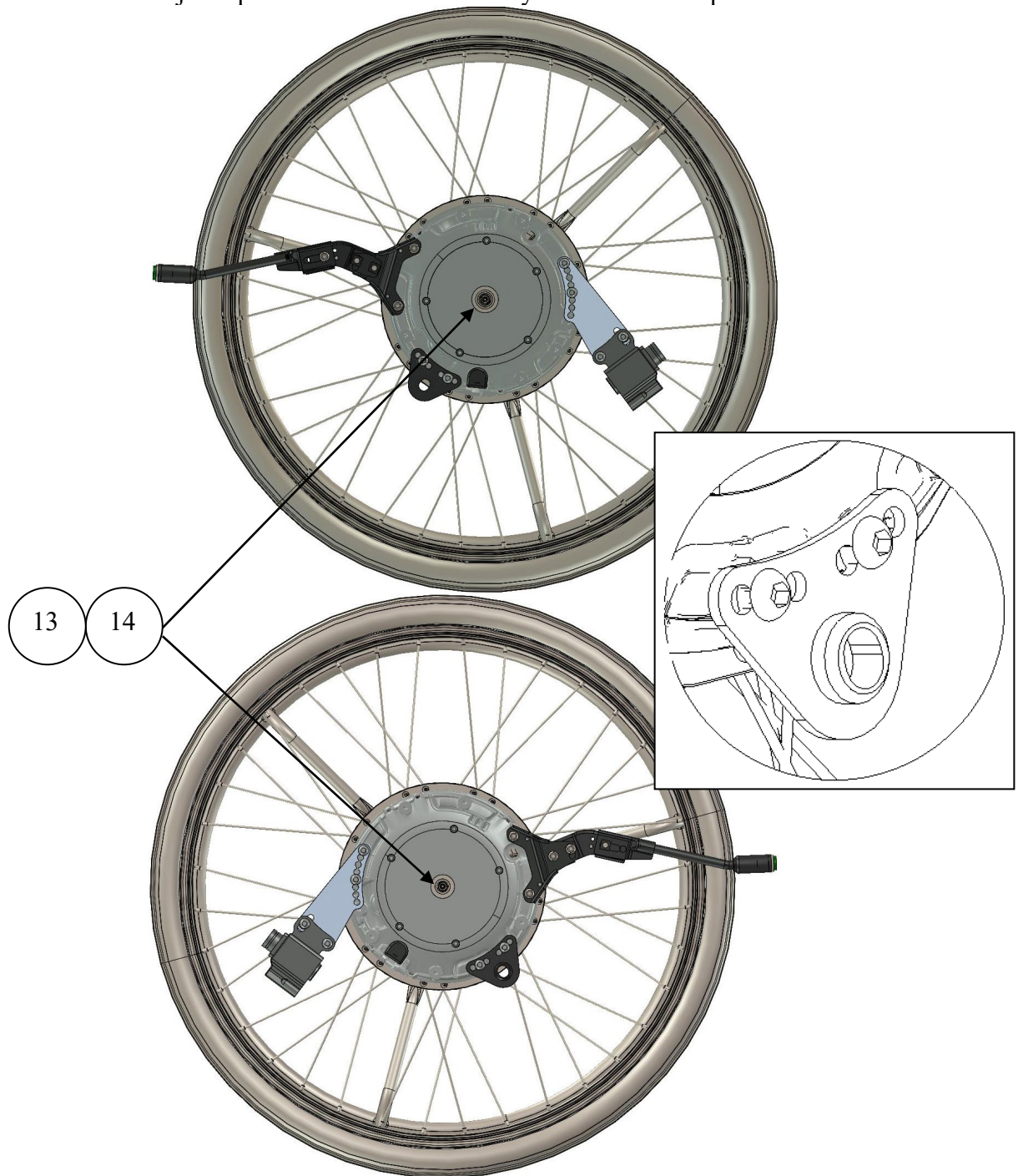

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande: Axel Ø12 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0. Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.

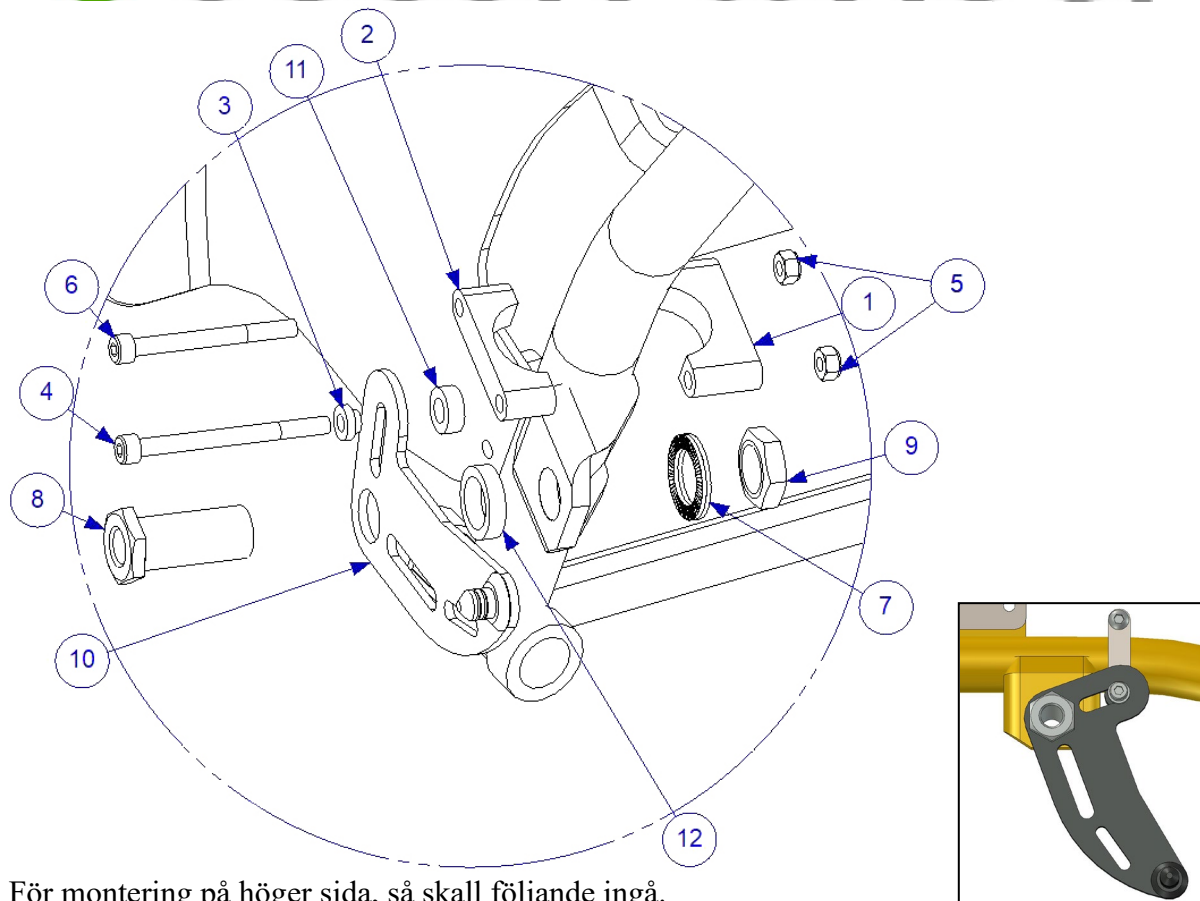

För montering på höger sida, så skall följande ingå.

Nr:	Detalj Nr:	Antal:	Beskrivning:
1	300088	1	Klamma
2	300089	1	Klamma
3	100 400 020	1	Distans
4	MC6SM6X70	1	Skruv Cylindrisk M6 x 70
5	XSM6ML	2	Låsmutter M6
6	MC6SM6X60	1	Skruv Cylindrisk M6 x 60
7	405241	1	Nordlock Bricka M18
8	HW090	1	Navhylsa M18X1
9	XSM18M	1	Mutter M18 x1
10	XOE-22294-1O	1	Höger fäste med 18 hål
11	100 400 002	1	Distans
12	100 400 015	1	Distans
13	XOE-25383-00	1	Distans 12
14	93440-120520	1	Spårring


OBS! Vid separat köp av monteringsatts medföljer ej axel, axeldistans eller spårring, för byte se servicebok.

3. Montera nu den underhängda batteriväskan.

OBS! Om ni vill använda originalhjul, använd en kortare QR axel med Artikelnummer: QR1202-02.



M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

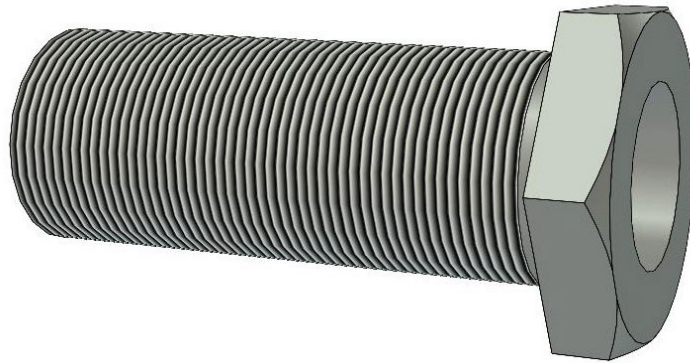

M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm