



Monteringsanvisning för Rotec Drive MEM6445 och MEM6446

1. Demontera hjul, navhylsa samt nedre skruven för fästet (se bild nedan) på båda sidorna.

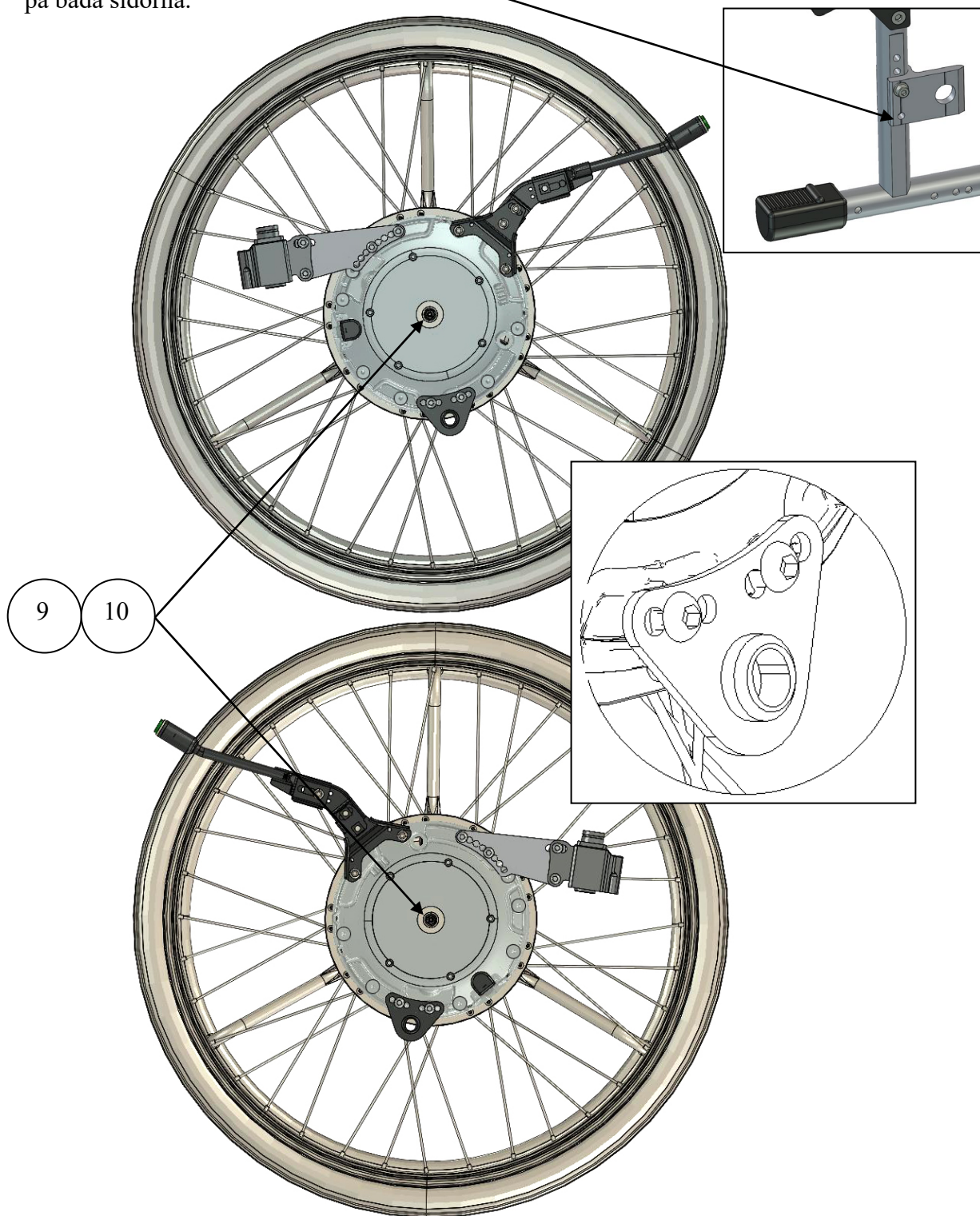

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel Ø12,7 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-C0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOC-25383-00.

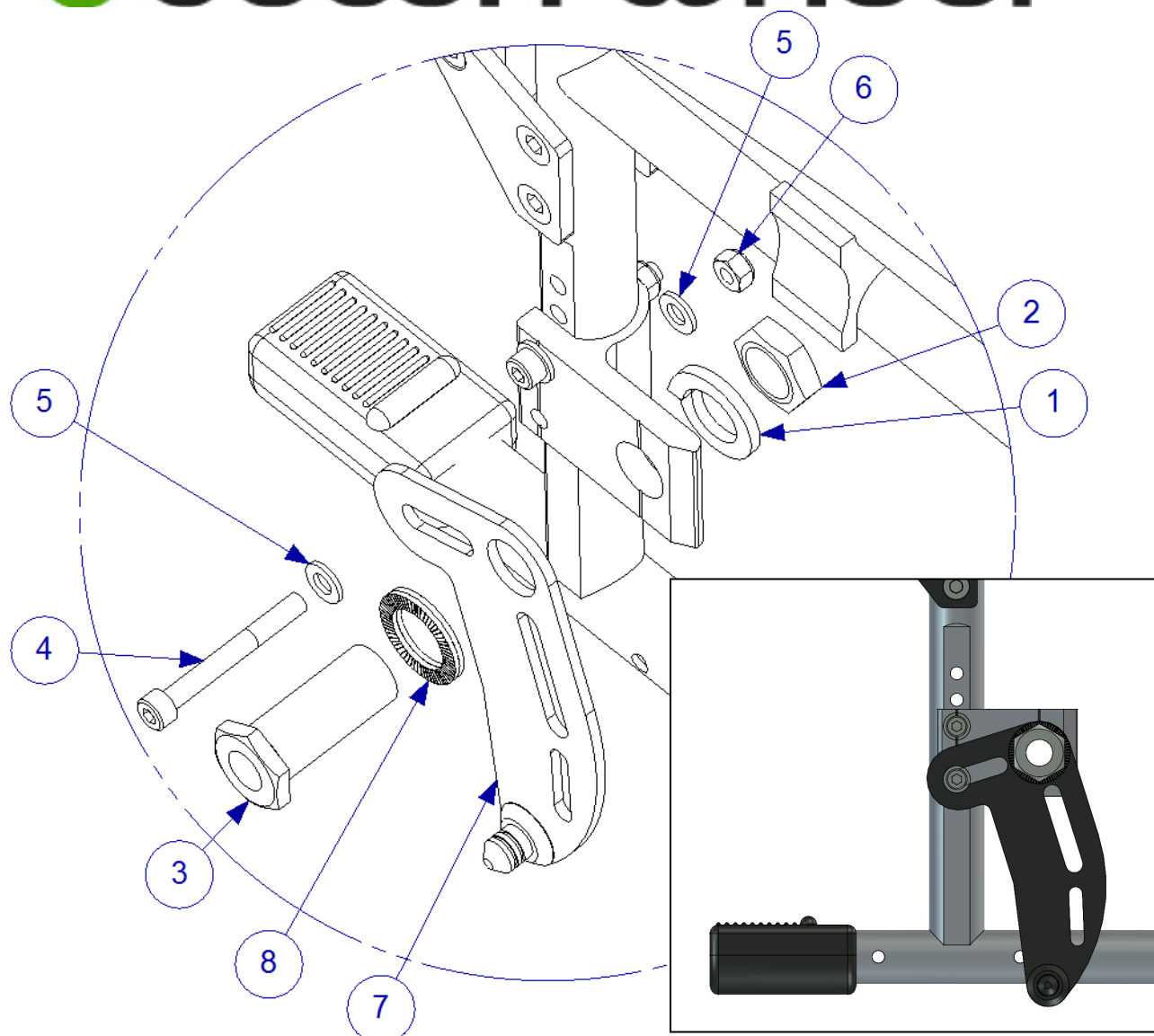

3. Montera nu fästet enligt bilden ovan (Höger sida).
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XSM18FJ	1	Fjäder bricka M18
2	XSM18M	1	Mutter M18 x1 låg
3	HW084	1	Navhylsa M18X1
4	MC6SM6X50	1	Insex - Cylindrisk Huvud M6 x 50
5	XSM6BR	2	Planbricka M6
6	XSM6ML	1	Låsmutter M6
7	XOE-22274-1O	1	Fäste håll18
8	405241	1	Nordlock M18 Bricka
9	XOC-25383-00	1	Distans
10	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringssats medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.

4. Montera nu den rygghängda batteriväskan.



Åtdragningsmoment / Tightening torque

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsa.
Sleeve.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm