



Monterings anvisning Etac Panther

MEM6261 och MEM6262

1. Demontera hjulen och bromsar på båda sidorna.

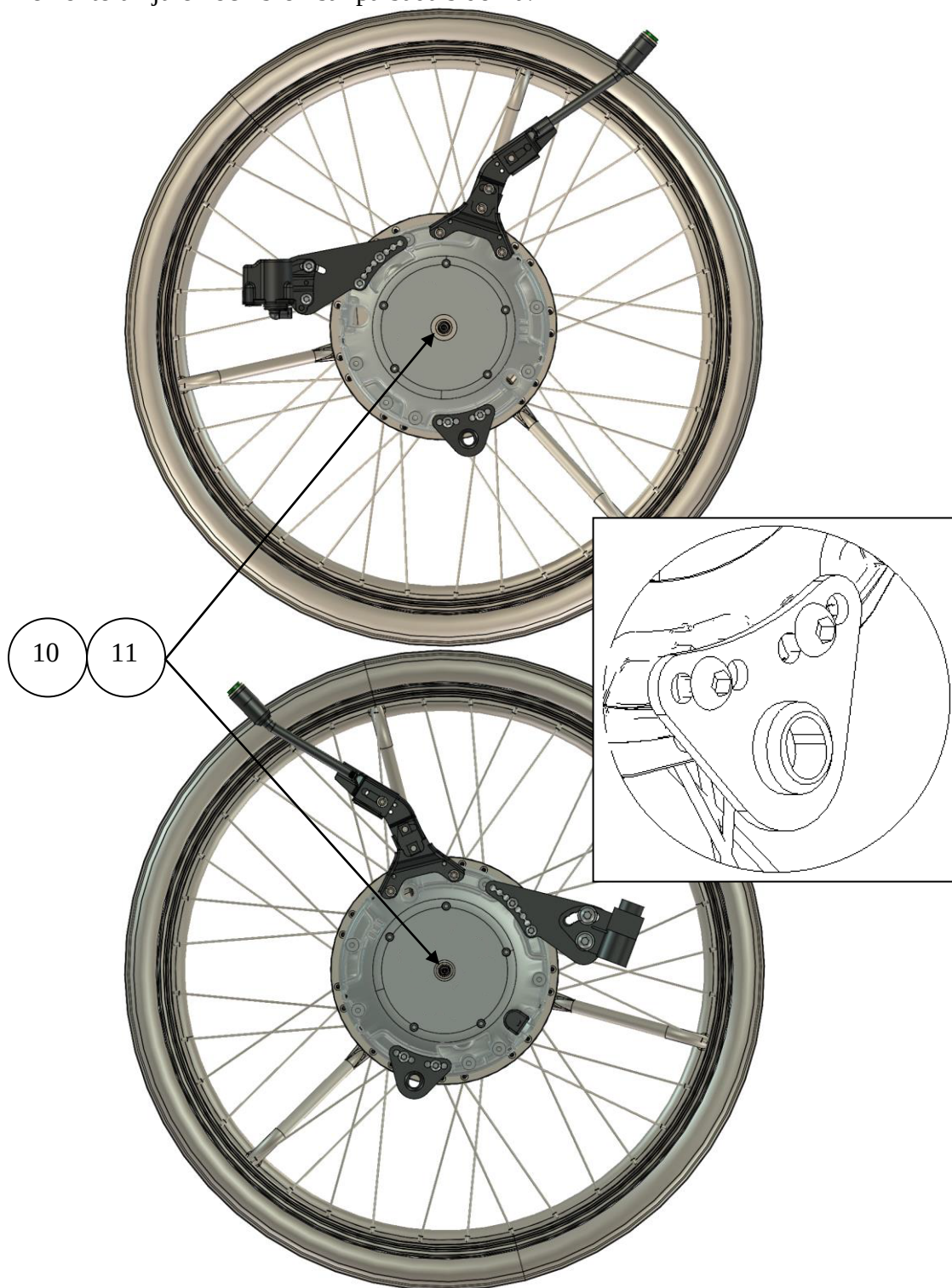

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel Ø12,0 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.

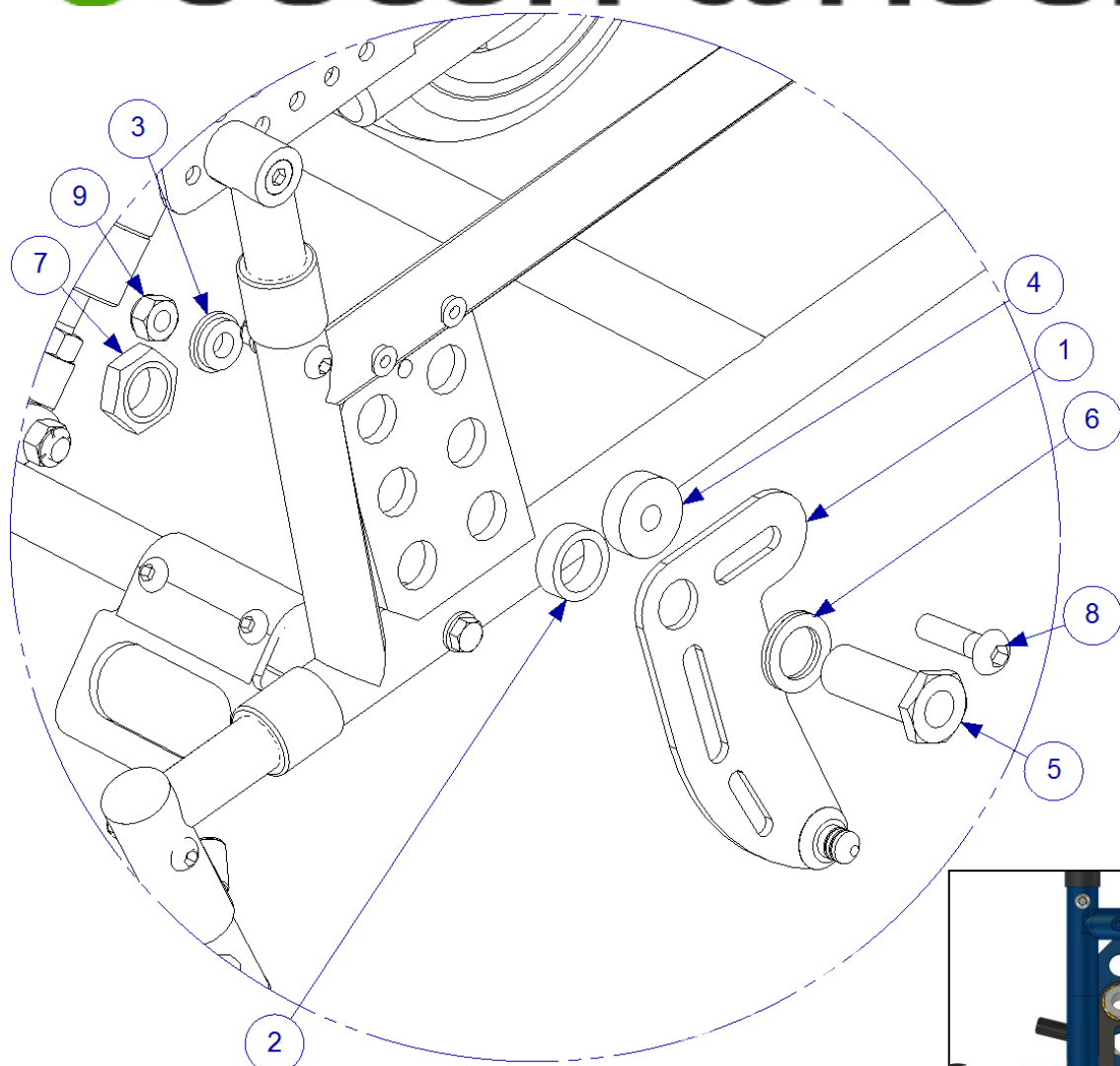

3. Montera nu fästena på chassit enligt bilderna.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XOE-22294-BO	1	Höger Fäste
2	100 400 006	1	Distans
3	100 400 007	1	Distans
4	100 400 013	1	Distans
5	HW063	1	Navhylsa
6	405239	1	Nordlock Bricka M16
7	XSM16M	1	Mutter M16X1 Låg
8	XSM8X30	1	Skruv Rundad M8 x 30
9	XSM8ML	1	Låsmutter M8
10	XOE-25383-00	1	Distans 12
11	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringsats medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.

4. Montera nu den rygghängda batteriväskan