



**Monteringsanvisning för Sorg Loop
MEM6359 och MEM6360**

1. Demontera hjulen på båda sidorna samt navhyslsan med broms på båda sidorna.

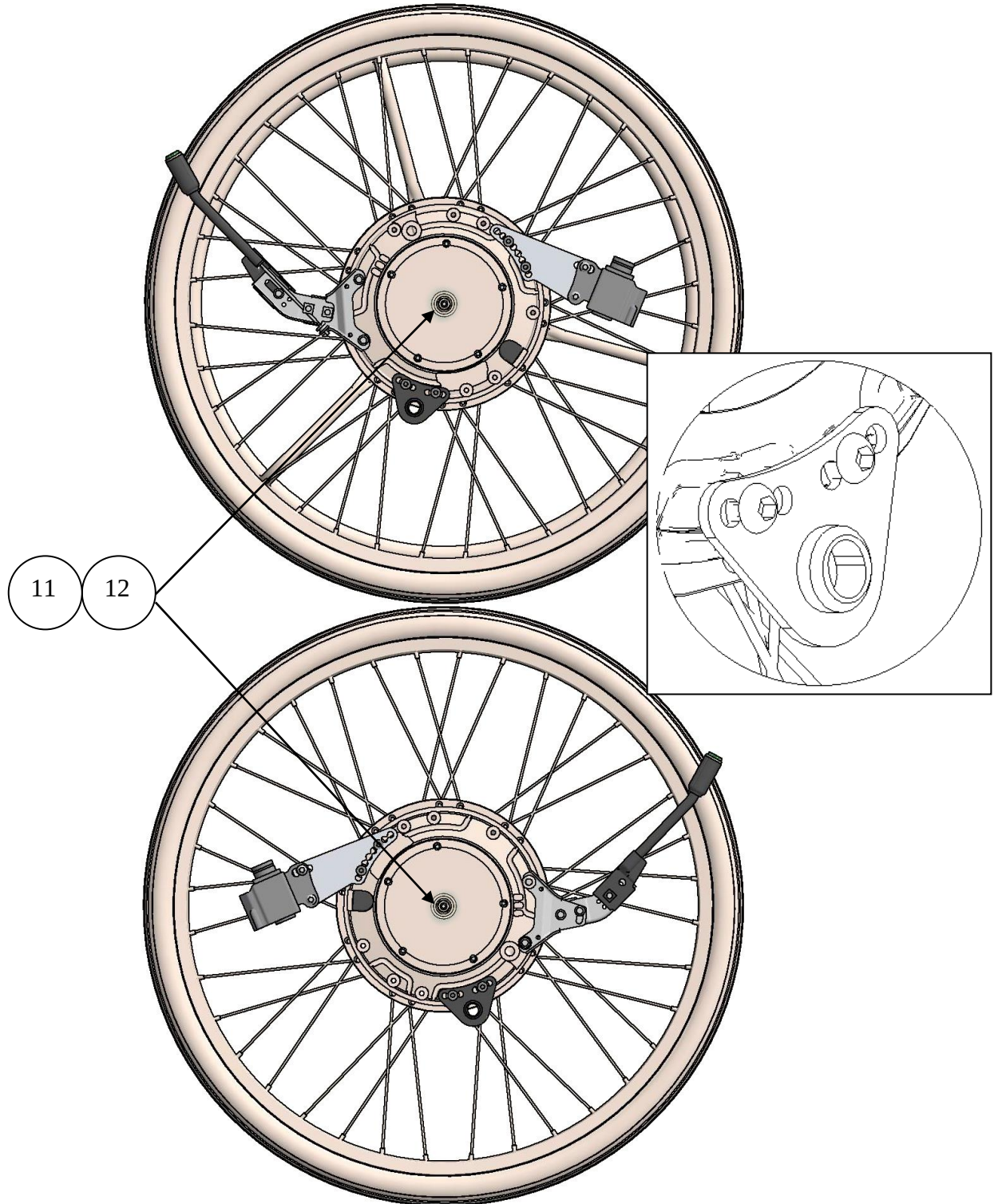

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande: Axel Ø12 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0. Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.

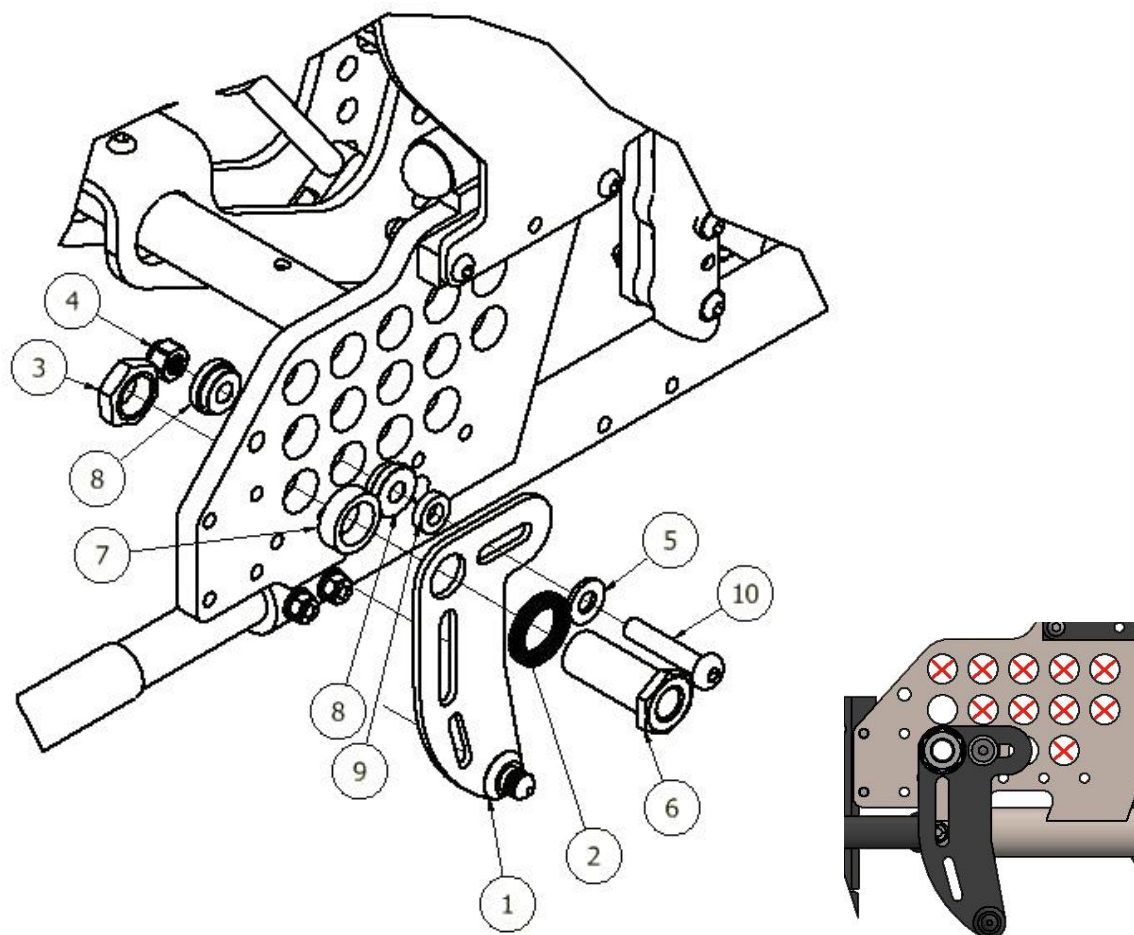

För montering på höger sida, så skall följande ingå.


Nr:	Detalj Nr:	Antal:	Beskrivning:
1	XOE-22294-10	1	Höger fäste med 18 hål
2	405241	1	Nordlock Bricka M18
3	XSM18M	1	Mutter M18 Låg
4	XSM8ML	1	Låsmutter M8
5	XSM8BR	1	Planbricka M8
6	HW090	1	Navhylsa
7	100 400 016	1	Distans
8	100 400 008	2	Distans
9	100 400 001	1	Distans
10	XSM8X40	1	Skruv Rundad M8 x 40
11	XOE-25383-00	1	Distans 12
12	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringssats medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.

3. Montera nu den rygghängda batteriväskan.



M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

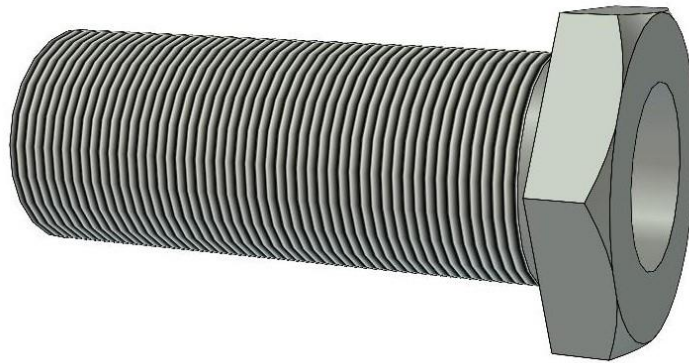

M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm