

Monterings anvisning för Azalea, -Minor, -Max
MED3026

1. Demontera hjulen på båda sidorna.




A



B


2. Kontrollera att stopp pinnen sitter enligt bilden ovan, samt att det inte är monterat några tippskydd på E-drive enheten. Tänk på att använda original tippskydd.

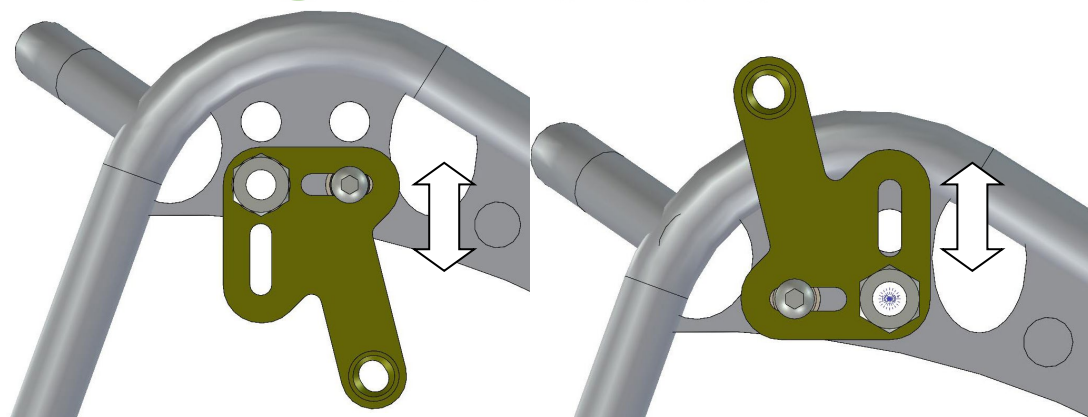

A

B



Det finns 4 stycken olika monterings alternativ.

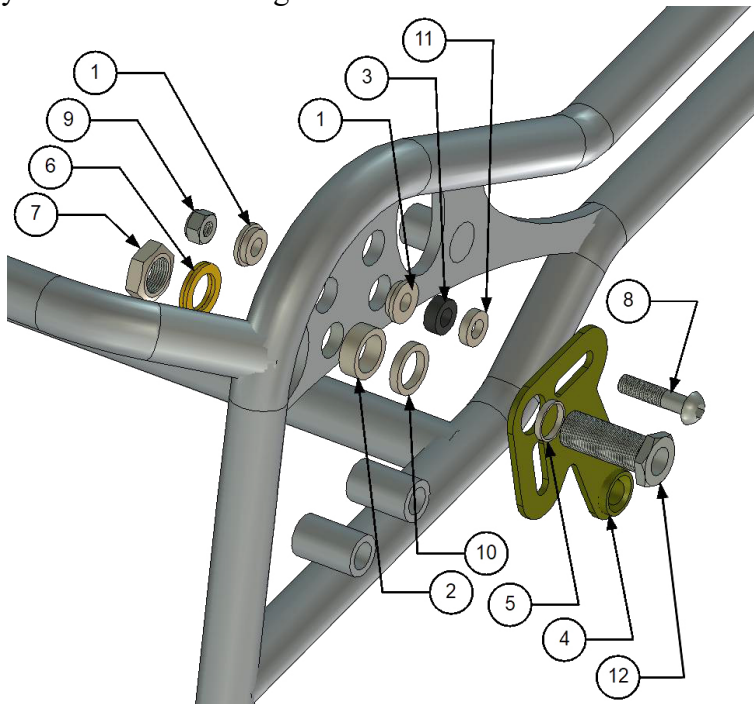


3. Montera nu fästet se bilderna ovan som visar montering av fästet på höger sida.
För montering på en sida, så skall följande ingå.



Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	100 400 007	2	Distans
2	100 400 006	1	Distans
3	100 400 002	1	Distans
4	MED2000	1	Fäste
5	100 400 017	1	Distans
6	405239	1	Nordlock Bricka
7	XSM16M	1	Mutter M16X1 Låg
8	XSM8x35	1	Skruv M8 x 35
9	XSM8LM	1	Låsmutter M8
10	100 400 004	1	Distans (Endast alternativ B)
11	100 400 001	1	Distans (Endast alternativ B)
12	HW069	1	Navhylsa M16x1/12,7


MED4080

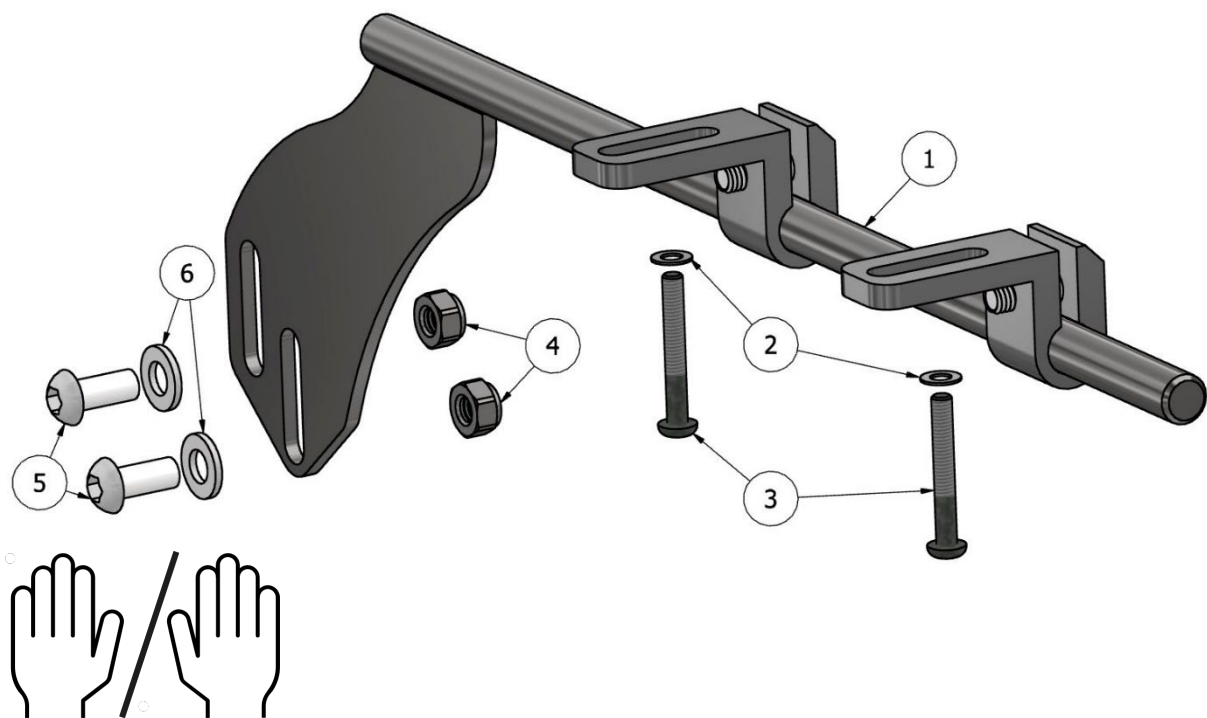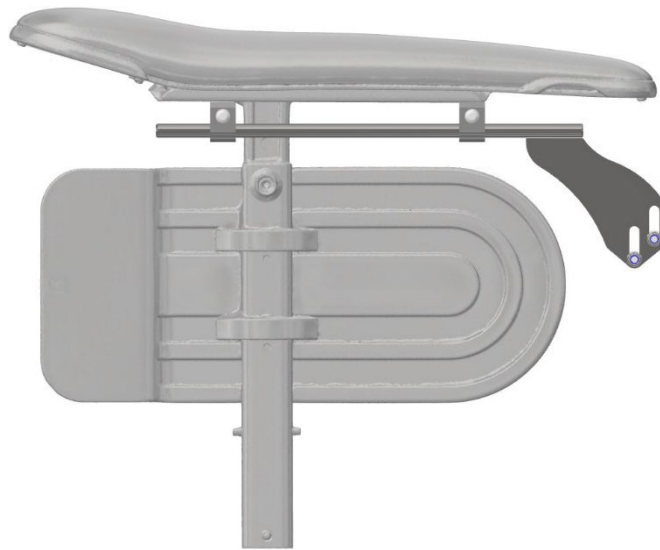

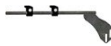
1	MED4046	1	
2	XSM4BR	2	
3	XSM4X30	2	
4	XSM6ML	2	
5	XSM6X14	2	
6	XSM6BR	2	


MED4081

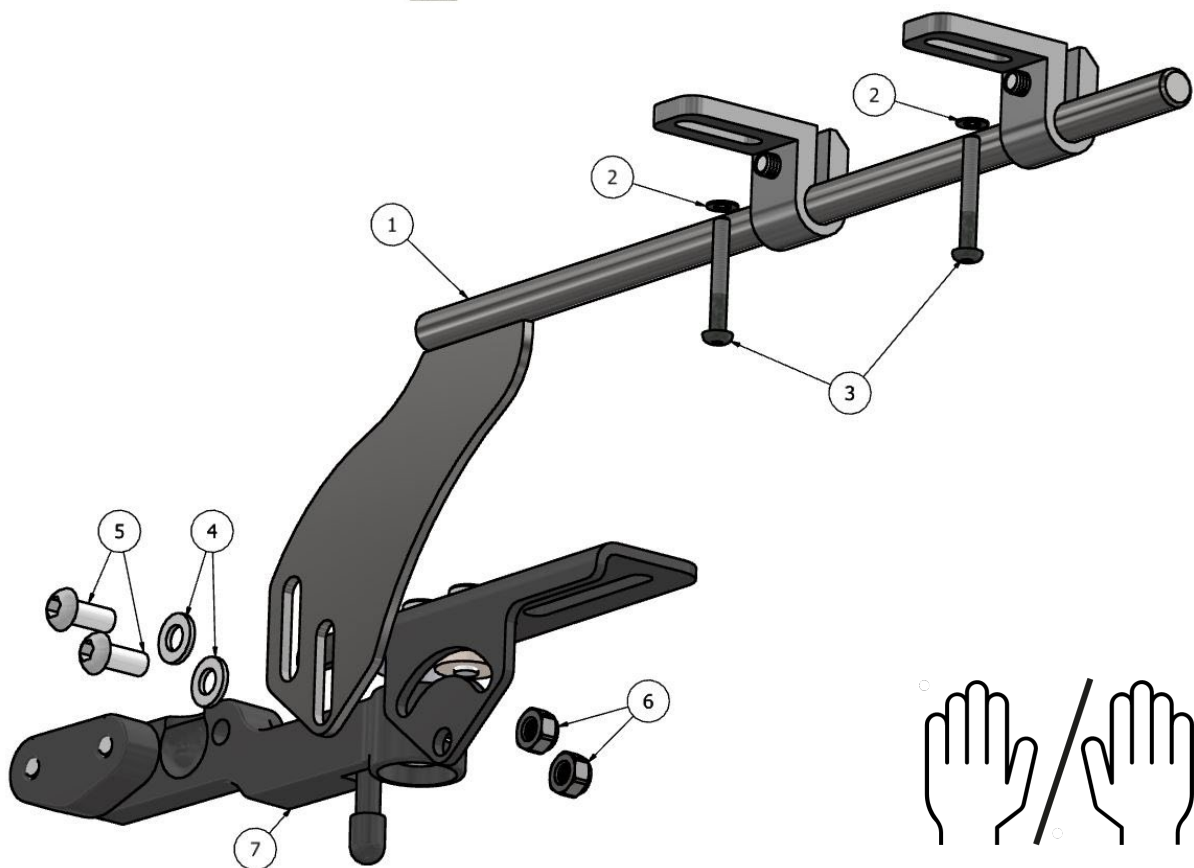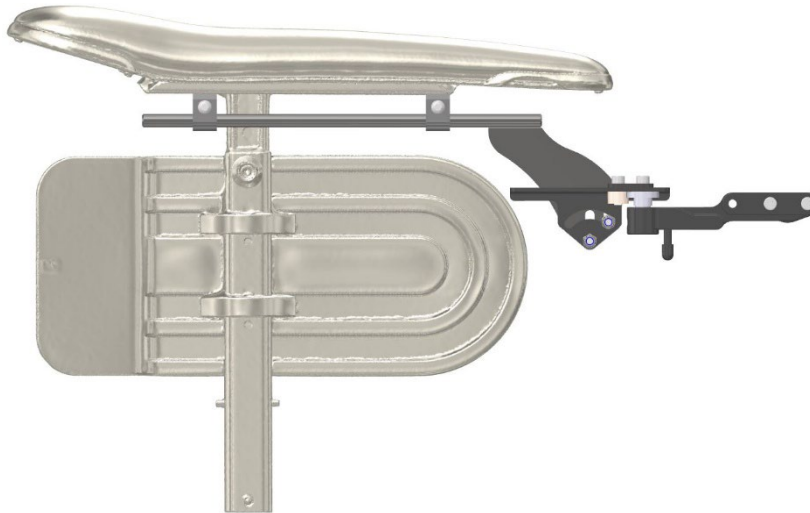

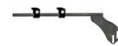
1	MED4046	1	
2	XSM4BR	2	
3	XSM4X30	2	
4	XSM6BR	2	
5	XSM6X14	2	
6	XSM6ML	2	
7	X0C-48160-B0	1	

MED4082

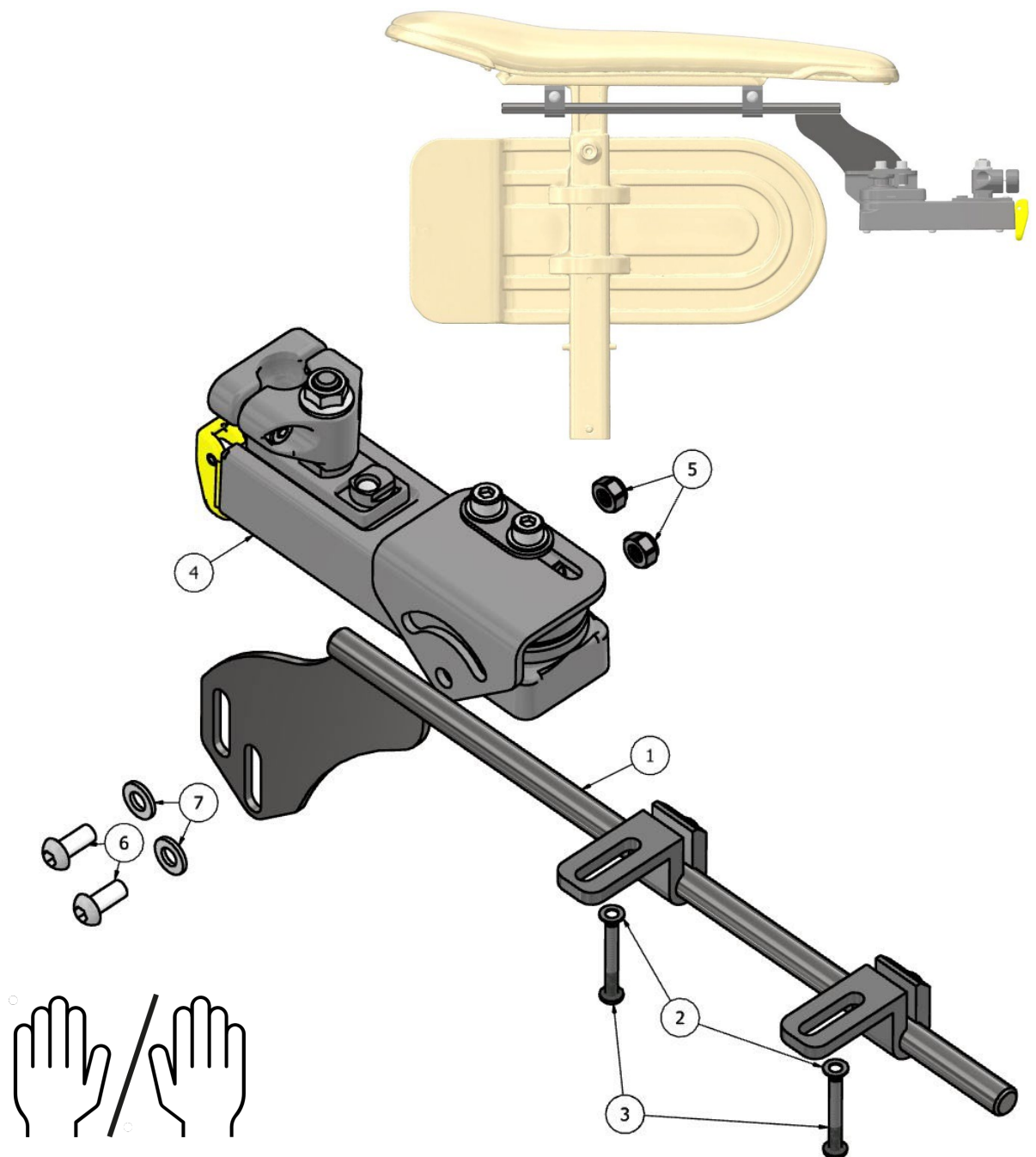


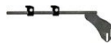1	MED4046	1	
2	XSM4BR	2	
3	XSM4X30	2	
4	X0F-48160-D00	1	
5	XSM6ML	2	
6	XSM6X14	2	
7	XSM6BR	2	

MED1356

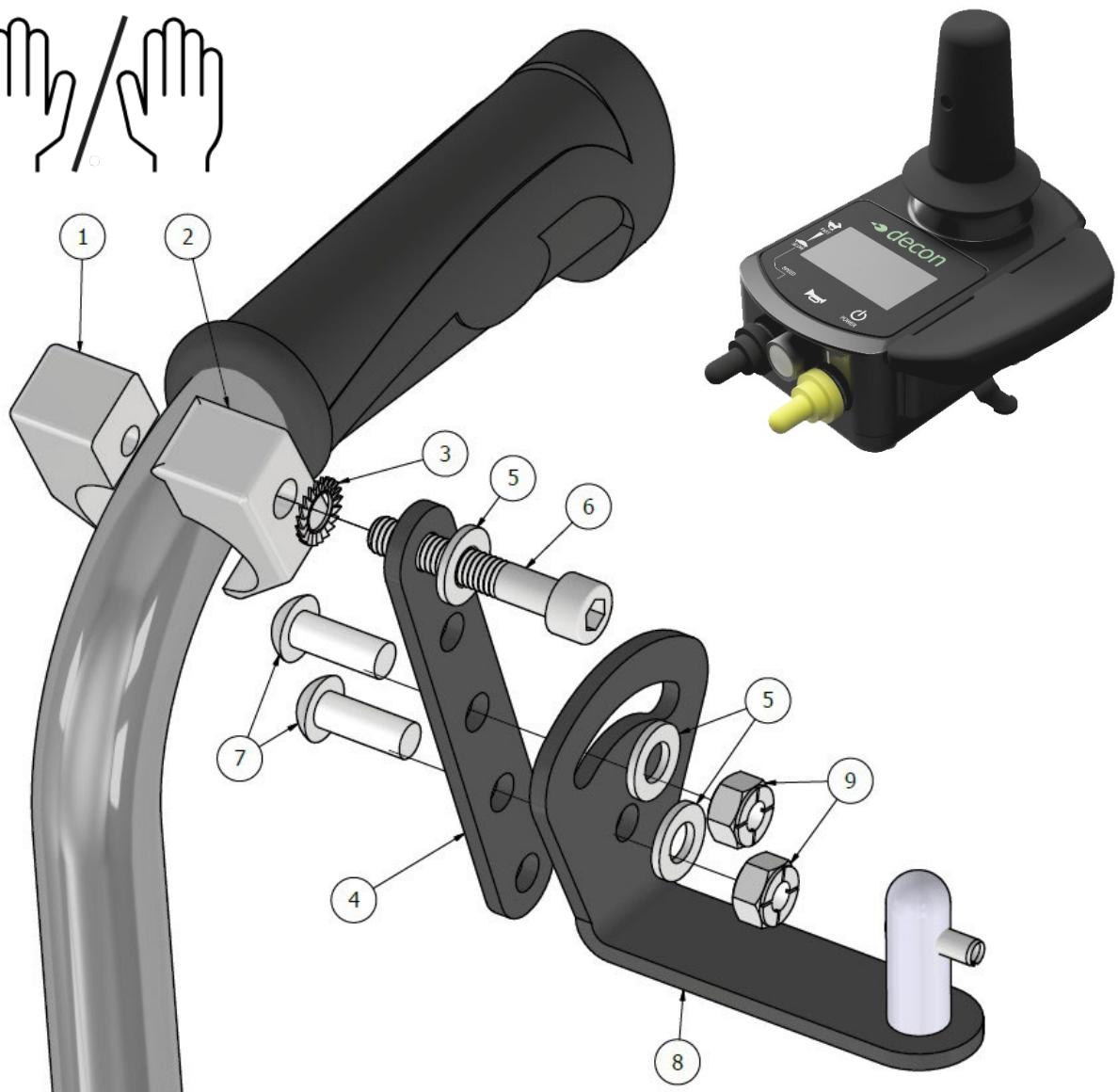

1	XA2-2612K-00	1	
2	XA2-2612E-00	1	
3	XSM6BRTG	1	
4	MED1317	1	
5	XSM6BR	3	
6	MC6SM6X35	1	
7	XSM6X16	2	
8	MED1316	1	
9	XSM6ML	2	

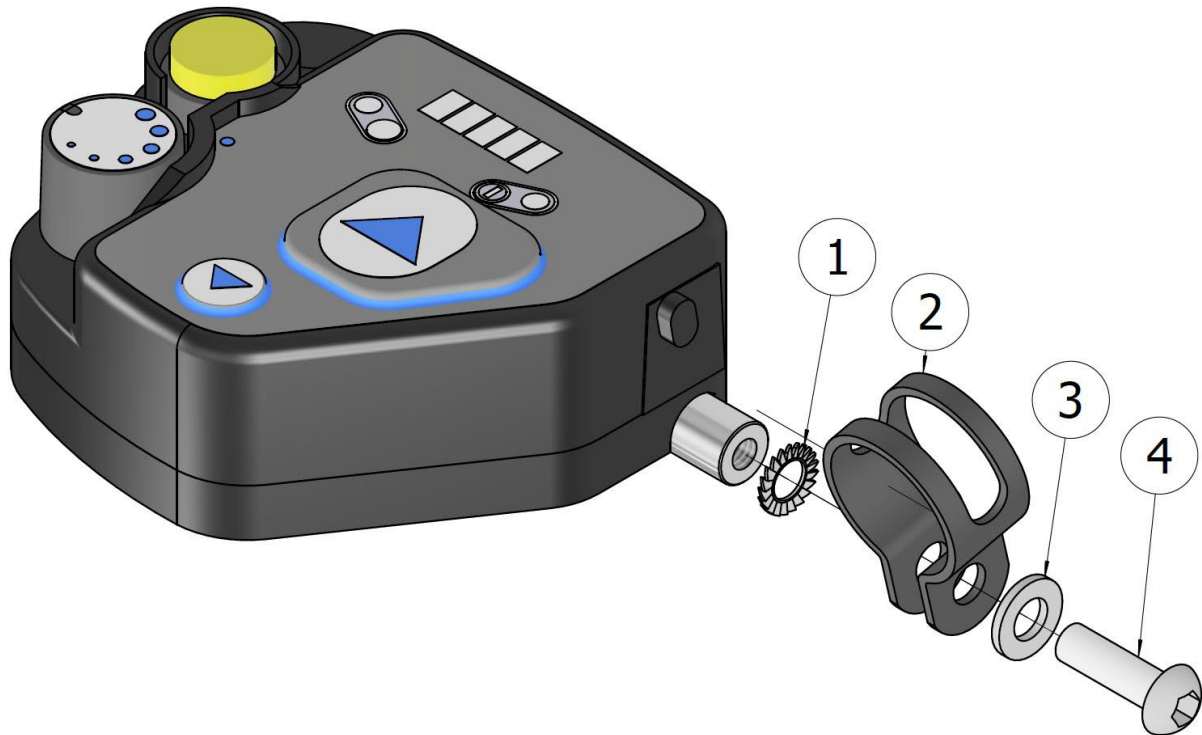


1	XSM6BRTG	1	
2	Xklamma2	1	
3	XSM6BR	1	
4	XSM6X20	1	



MED1252 + MED1643

MED1643

Vårdstyrningen är även möjlig att montera på vänstersida. För detta behöver man komplettera med MED1643, vilken beställs separat.

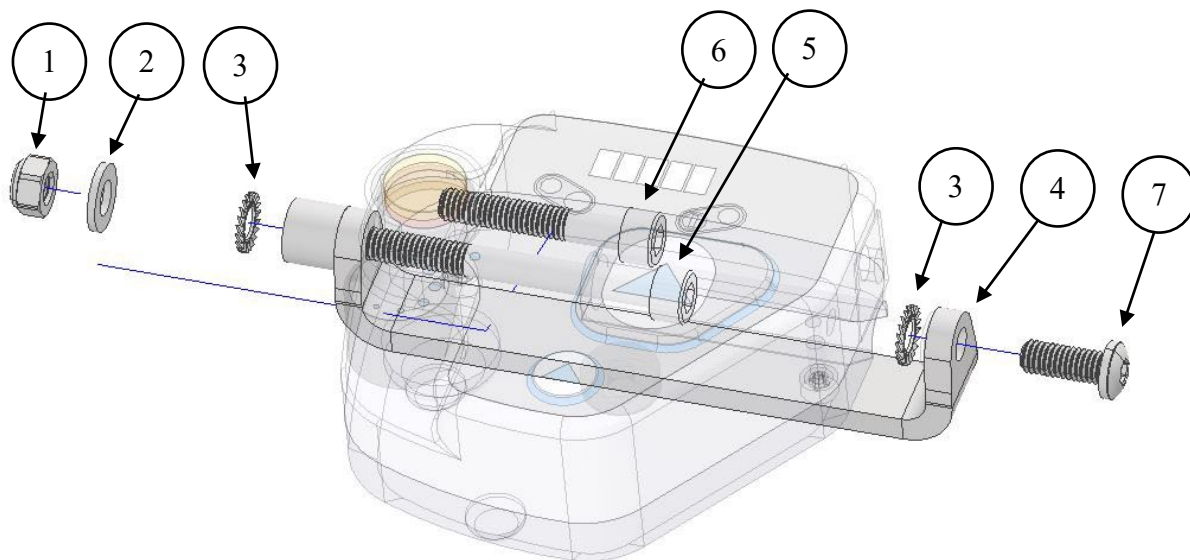

Använd antingen bult med placering 4 eller 5 beroende på vilken klämma som monterats på stolens handtagsrör. Den kortare passar plåtklämman och den gängade aluminiumklämman, den längre aluminiumklämman utan gängor.


1. För montering utav vårdstyrning, så skall följande ingå.

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	XSM6M	1	Låsmutter M6
2	XSM6BR	1	Planbricka M6
3	XSM6BRTG	2	Taggbricka M6
4	MED1640	1	Fäste vårdstyrning vänster sida
5	MC6SM6X60	1	Bult M6x60
6	MC6SM6X35	1	Bult M6x35
7	MC6SM6X16	1	Bult M6x16

2. Montera rygghängd batteriväska.



M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

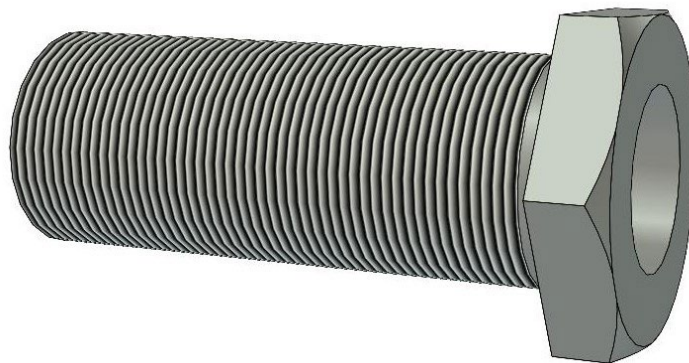

M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm