



**Monteringsanvisning E-Walk på Azalea Tall
Med nya chassit
MCG1203**

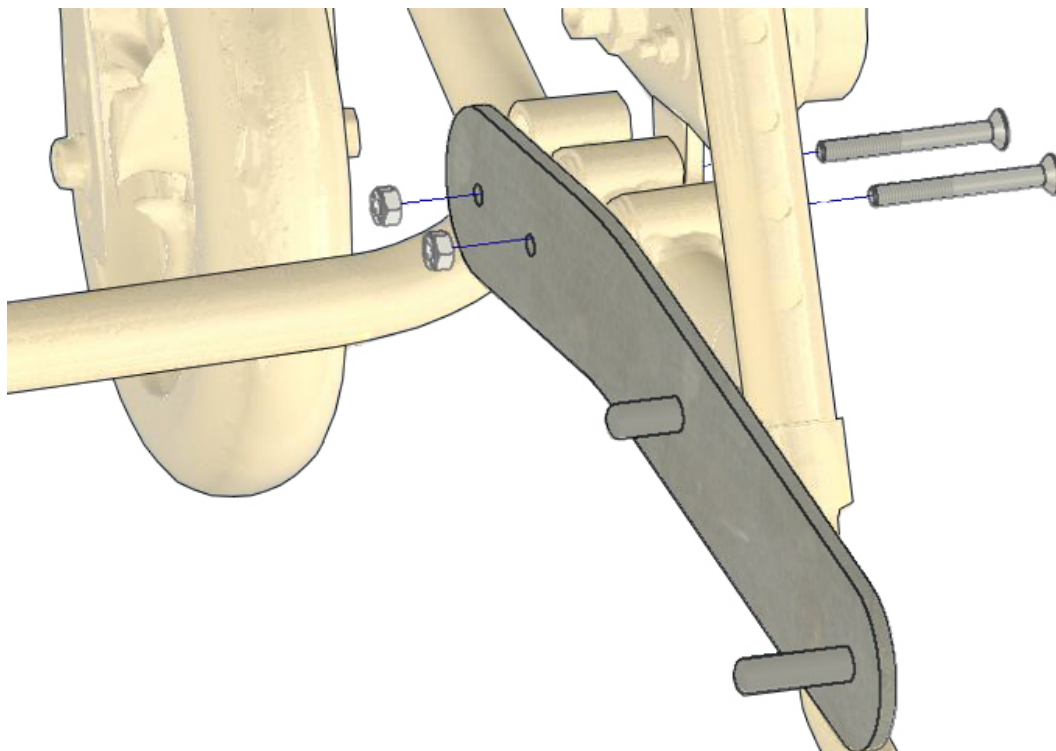

Demontera skruvar och muttrar,
dom kommer att ersättas, men
behåll distanserna.

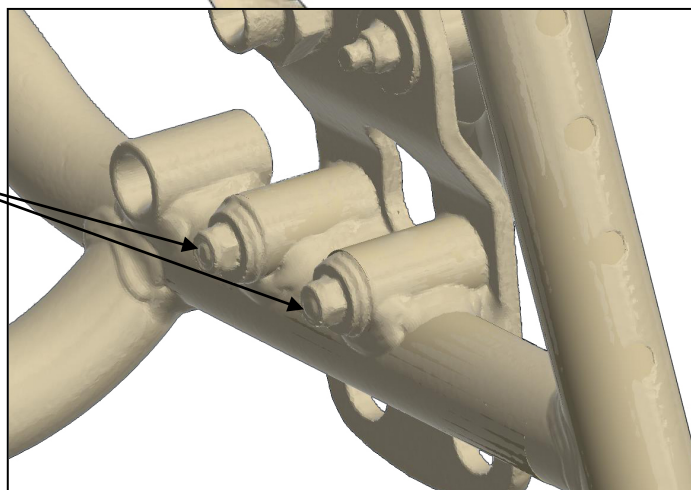


1. Se bild ovan som visar montering av fästet på höger sida.

För montering skall följande ingå per sida.

Placering	Detalj nummer	Antal	Beskrivning
1	XSFM6X55	2	Försänkt Skruv M6 x 55
2	XSM6ML	2	Låsmutter M6
3	MCG1203R	1	Fäste Höger

MCG2004

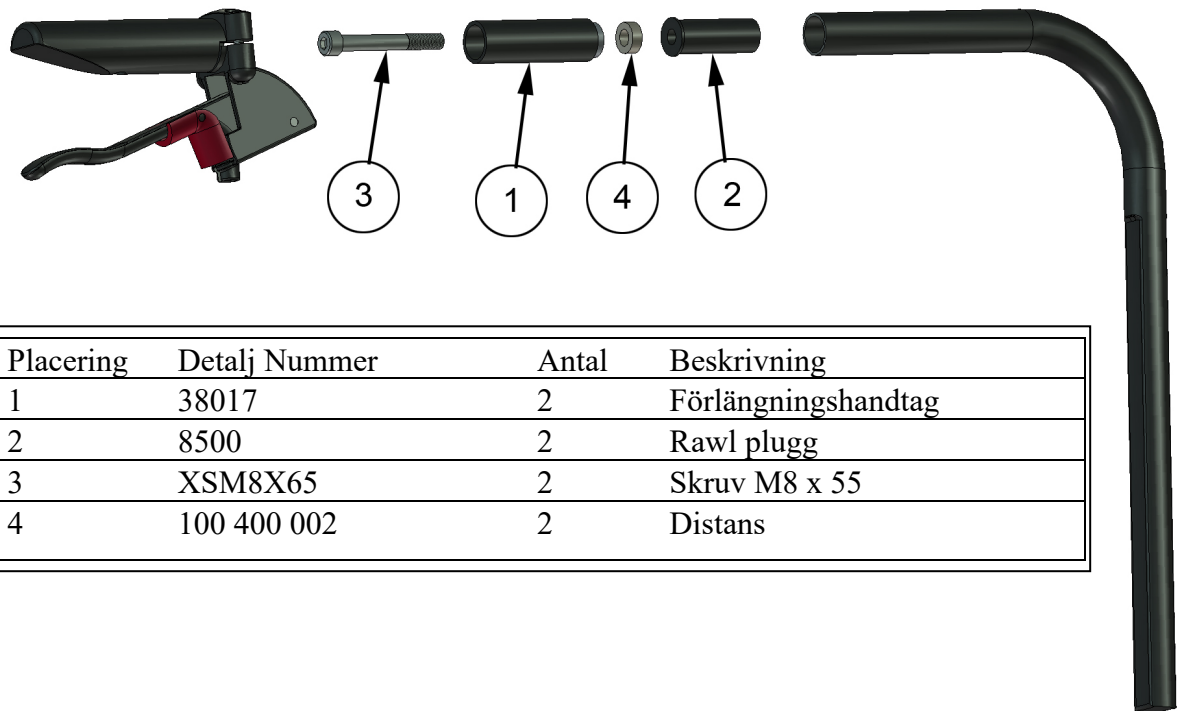


Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	38017	2	Förlängningshandtag
2	8500	2	Rawl plugg
3	XSM8X65	2	Skruv M8 x 55
4	100 400 002	2	Distans

2. Montering av förlängnings handtag.

Montering av styrkontrollen

1. Styrkontrollen monteras på höger eller vänster sida beroende på vad som angetts vid beställning. För montering på höger sidan används 350871R och vänster 350871L.
2. Börja med att demontera de två skruvarna som håller handtaget för tippning/broms.
3. Se nedan illustration för montering av fäste och styrkontroll.
4. I varje monteringsset ingår två gashandtag, skall styrkontrollen monteras på stol med bromshandtag skall utförandet enligt bild nedan användas.

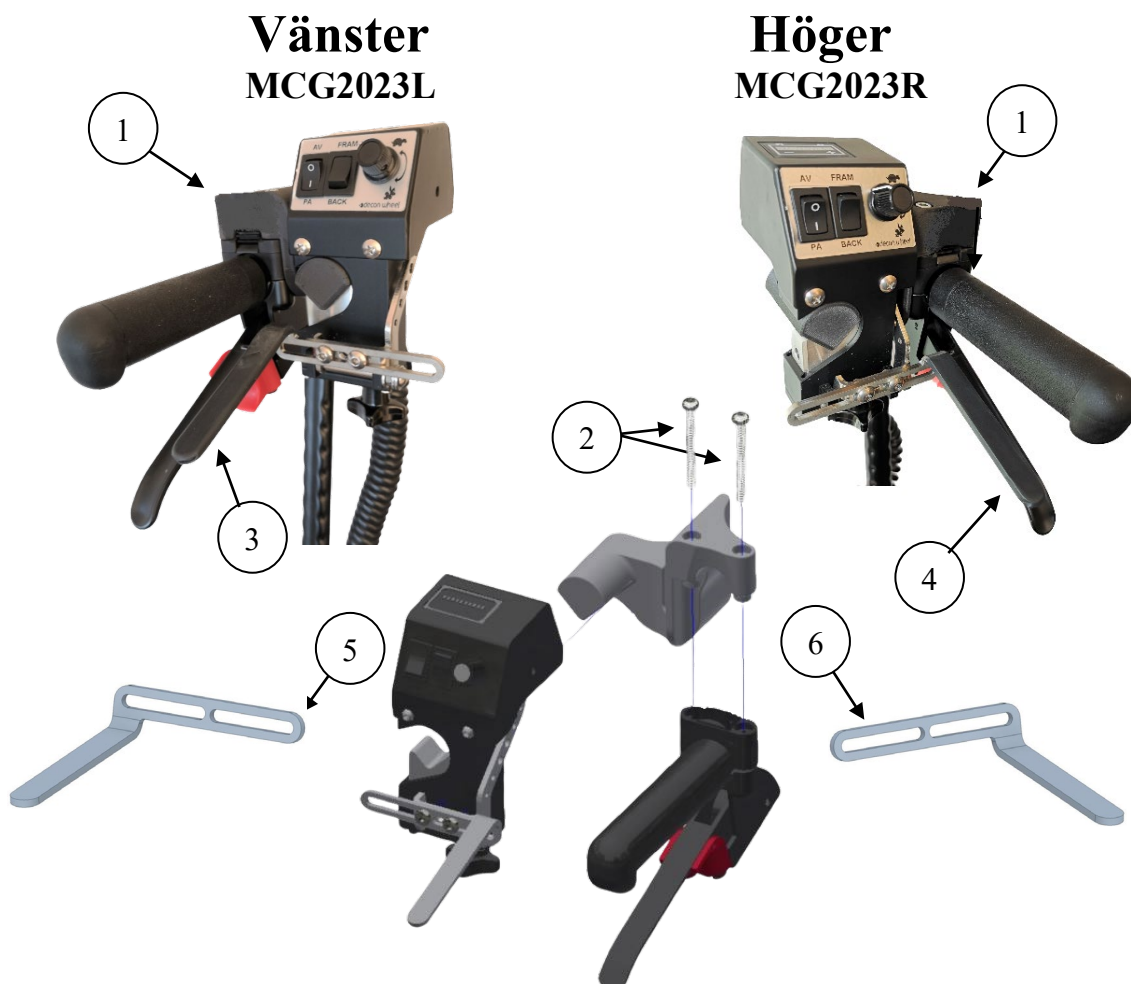

För montering av fästet på höger eller vänster sida skall följande ingå.

Placering.	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	350871L	1	Fäste vänster sida
1	350871R	1	Fäste höger sida
2	DG 5X40 WN 1552	2	Skruv 5x40
3	350868A	1	Gashandtag V för bromshandtag
4	350868B	1	Gashandtag H för bromshandtag
5	350867A	1	Gashandtag V utan bromshandtag
6	350867B	1	Gashandtag H utan bromshandtag

VARNING!

Innan utrustningen tas i bruk skall styrkontrollens gashandtag och dess övriga leder inte tar i eller ligger emot någonstans. Om reglage tar i eller ligger emot så kan detta leda till att gasen hänger sig och en olycka kan inträffa.



**Om inget annat specificeras, använd följande åtdragningsmoment.
Unless otherwise specified, use the following tightening torque.**

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Sleeves.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm