


Monteringsanvisning E-Walk på Etac Cross 6

MCG1201

1. Demontera hjulen på båda sidorna.
2. Demontera nav med bromsar på båda sidorna.

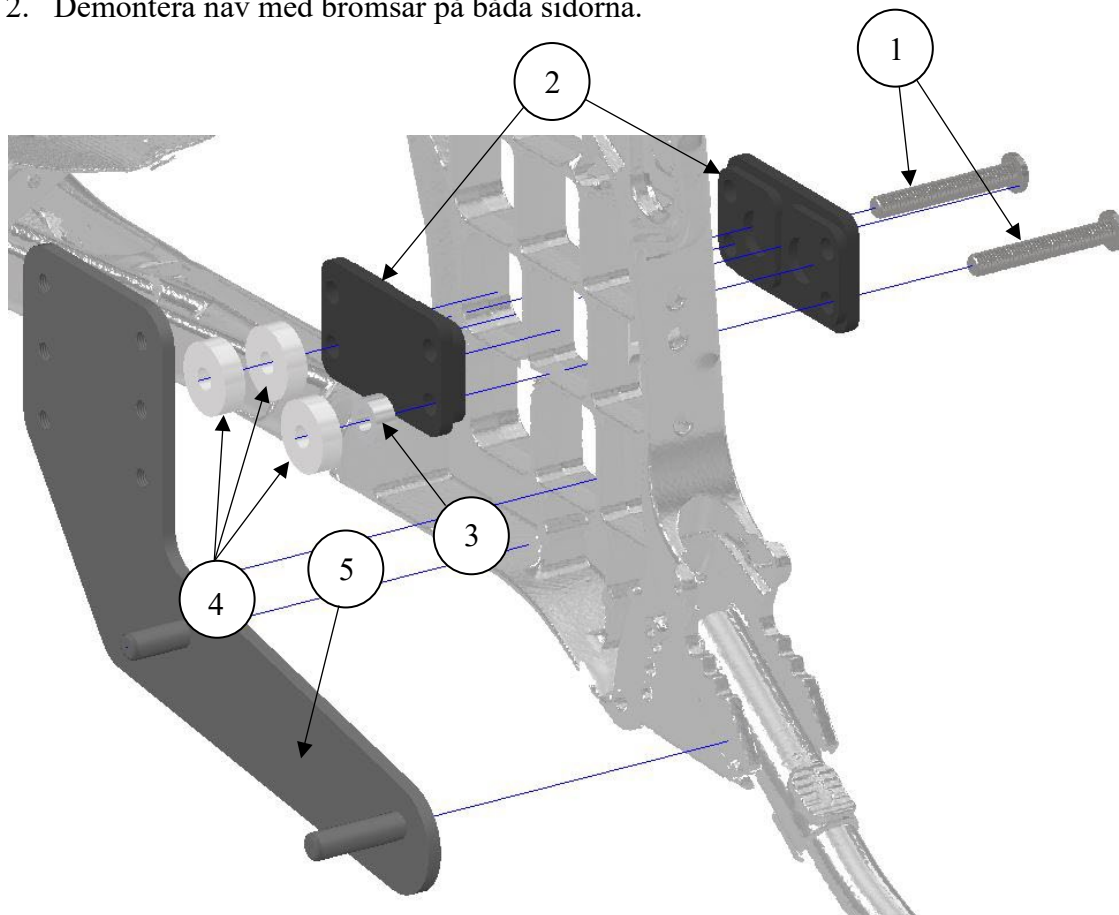


3. Montera nu fästet, bilden ovan visar montering av fästet på höger sida.
För montering på en sida så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XSM8X55	2	Skruv M8x55
2	MCG1171-07	2	Platta
3	100 400 003	1	Distans 8x16mm
4	100 400 013	3	Distans 8x26mm
5	MCG1201R	1	Platta Höger


Platta Vänster = MCG1201L

4. Montera nu fästet på andra sidan.
5. Montera tillbaka bromsnav och hjul.

Det finns möjligheten att använda hjul i storlekarna 22", 24" och 26". Fästet måste placeras rätt för att matcha stolens höjd i förhållande till marken. Nedan bild visar skruvarnas placering för olika hjulstorlekar.

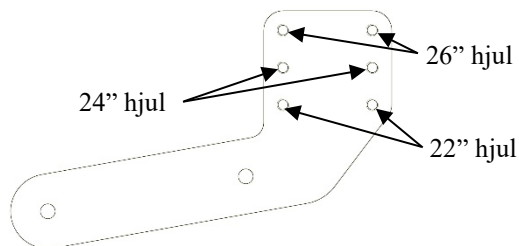


Optimal vinkel för eWalk Cross6

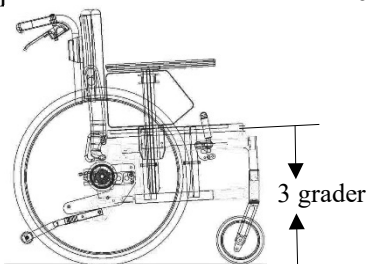


OBS! Tänk på att montera skruvarna i linje med navets centrum. Nedan exempel visar montering med 22", 24" och 26" hjul. Notera att de båda M8 skruvarna som förbinder infästningsplåten till E-walken med stolen alltid skall monteras i horisontal linje med hjulaxeln. Bilderna visar hjulet i mellanläget, både den undre och övre raden kan användas. Se pil till höger om bilderna.


Plåtens placering vid montering med 22" hjul.

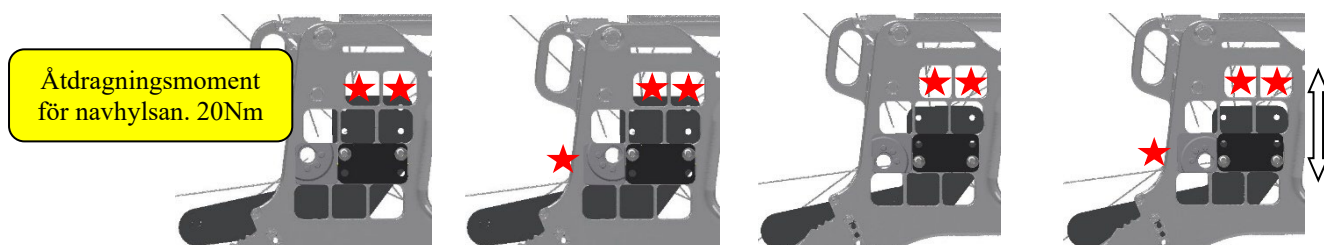

Plåtens placering vid montering med 24" hjul.

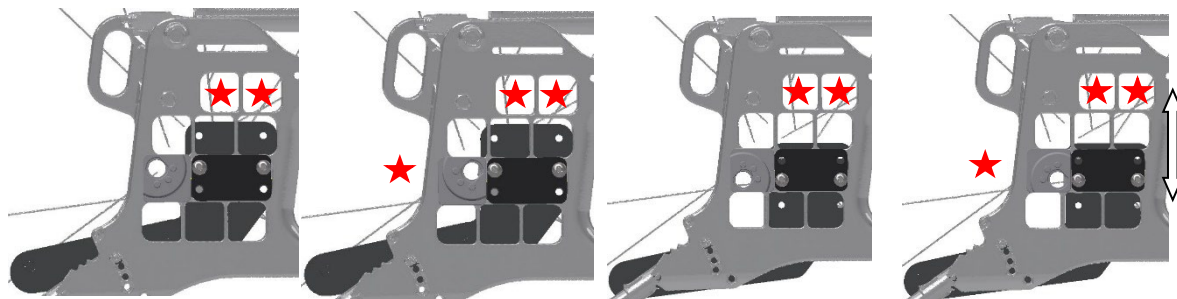

Plåtens placering vid montering med 26" hjul.

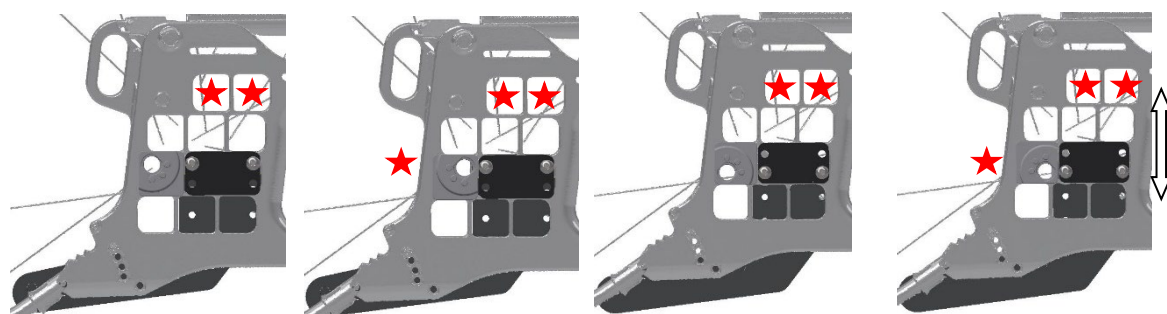

★ Navhylsan är ej möjlig att montera i dessa positioner.

Metrisk grovgångor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Hubsleevers.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm

OBS!

Läs brukarmanualen innan ni använder produkten. Detta skall göras för att ni skall få all information om produktens handhavande, varningar samt säkerhetsföreskrifter.