


## Monteringsanvisning E-Walk på Azalea, Azalea Minor, Azalea Assist

### MCG1145

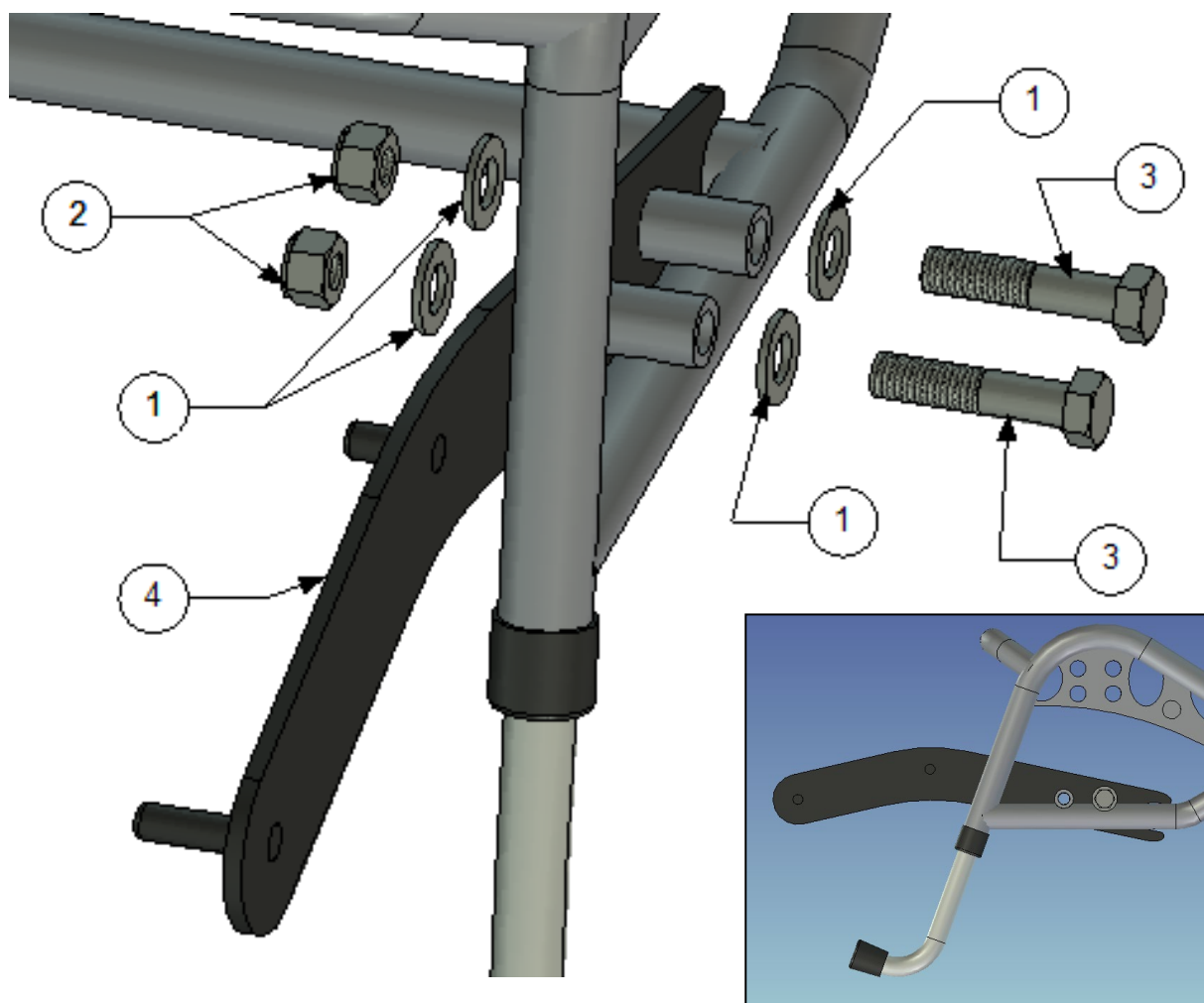

1. Se bild som visar montering av fästet på höger sida.  
För montering skall följande ingå per sida. 20", 22", 24"

| Placering | Detalj nummer | Antal | Beskrivning      |
|-----------|---------------|-------|------------------|
| 1         | XSM12BR       | 4     | Plan bricka 12,5 |
| 2         | XSM12ML       | 2     | Låsmutter M12    |
| 3         | XSM12X55      | 2     | Bult M12 x 55    |
| 4         | MCG1145R      | 1     | Fäste            |

**OBS!** Om du har 16" hjul så använd endast hjulet för att montera fästet.


OBS!

MCG1145 har två olika plattor.

Hög model (Bly) MCG1145-02


Låg model (NiMH/ LiFePo) MCG1145-01

## Center placerad styrkontroll



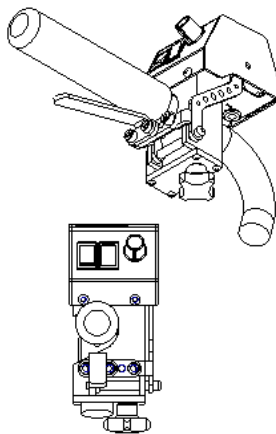


När det ej är monterat broms på körhandtaget, bör denna placering användas.

## Sidoplacerad styrkontroll

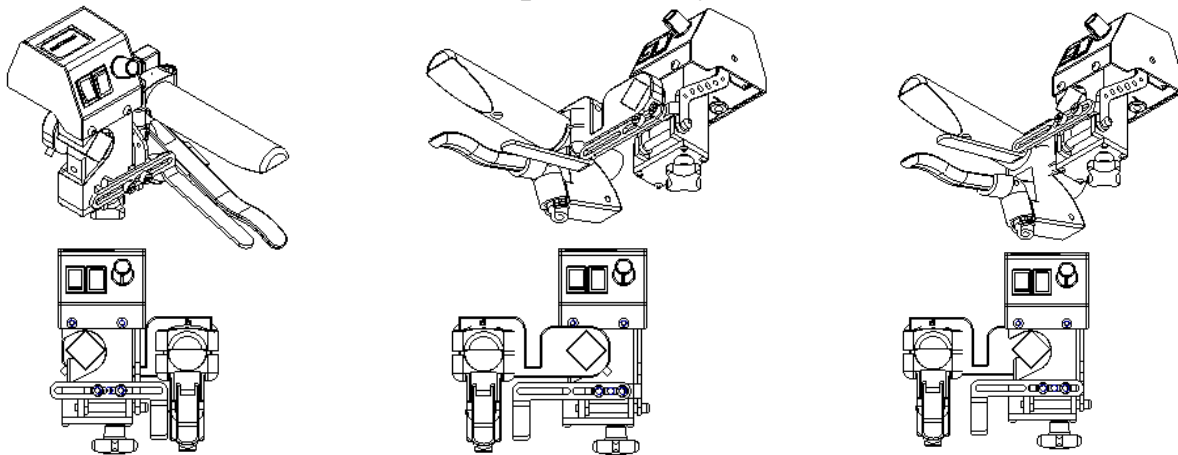

När det är monterat broms på körhandtaget användes sidoplacerad styrkontroll. Det finns olika monterings alternativ, samt justerings möjligheter.

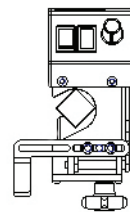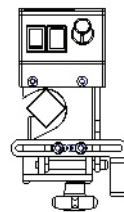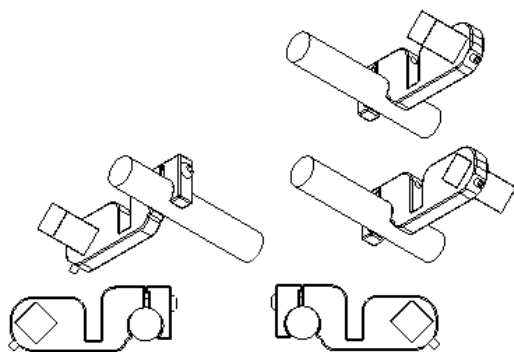

**OBS! Använd Loctite på alla skruvar vid montering och justering.**

Använd Loctite 2400 på alla skruvar

### VARNING!

När man monterar styrkontrollen så skall man alltid kontrollera att styrkontrollens gashandtag eller dess övriga leder inte tar i eller ligger emot någonstans. Om reglage tar i eller ligger emot så kan detta leda till att gasen hänger sig och en olycka kan inträffa.

2. Montera nu Styrkontrollen på valfri plats.