




**Monteringsanvisning E-Walk på
Azalea, Azalea Minor, Azalea Assist, (Ej Azalea Tall)
Med nya chassit
MCG1192**

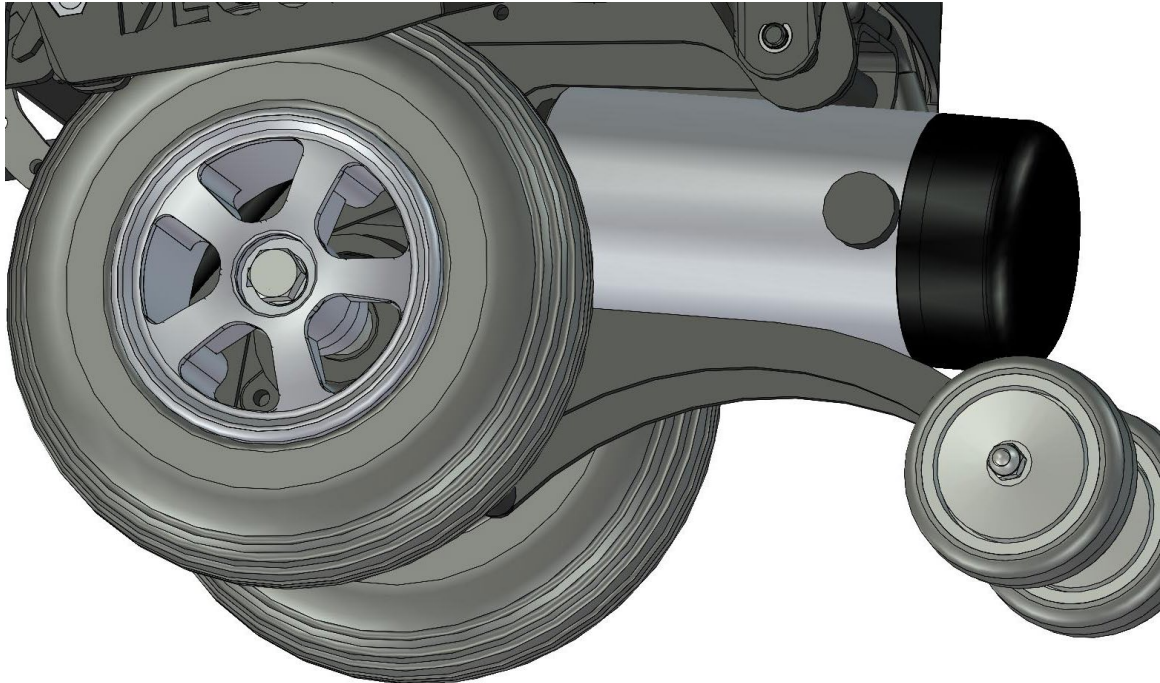

1. Demontera framhjuls plåtar.

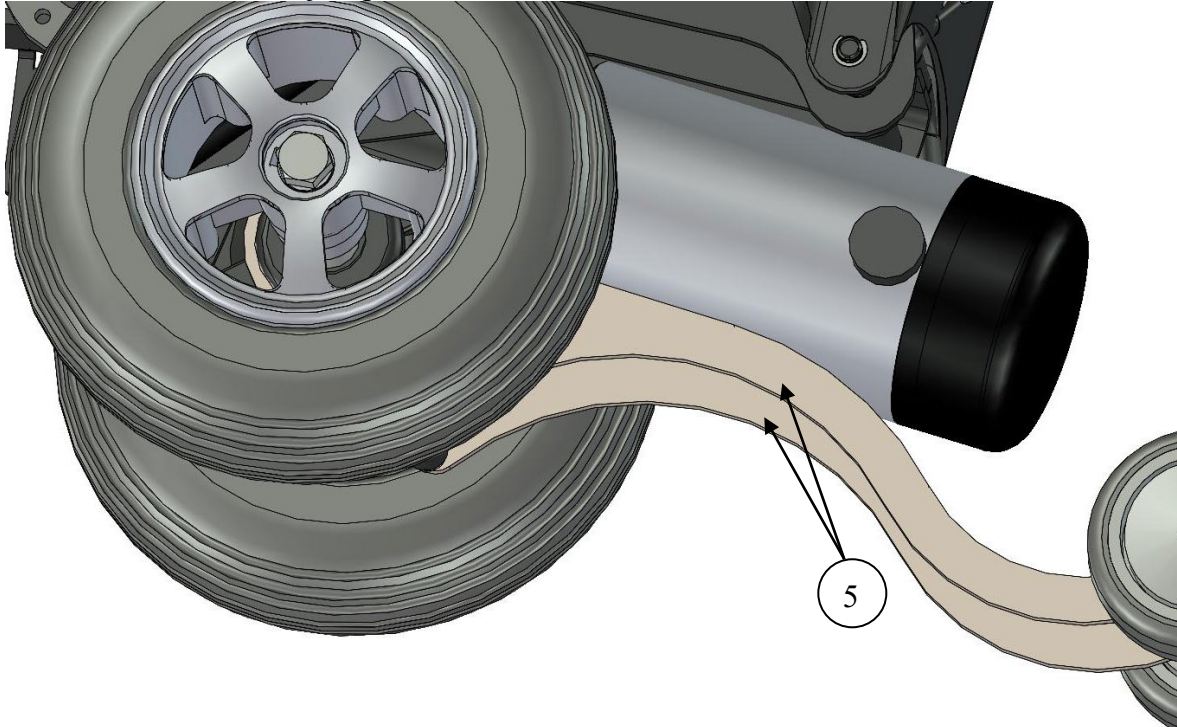

2. Montera nya framhjuls plåtar.

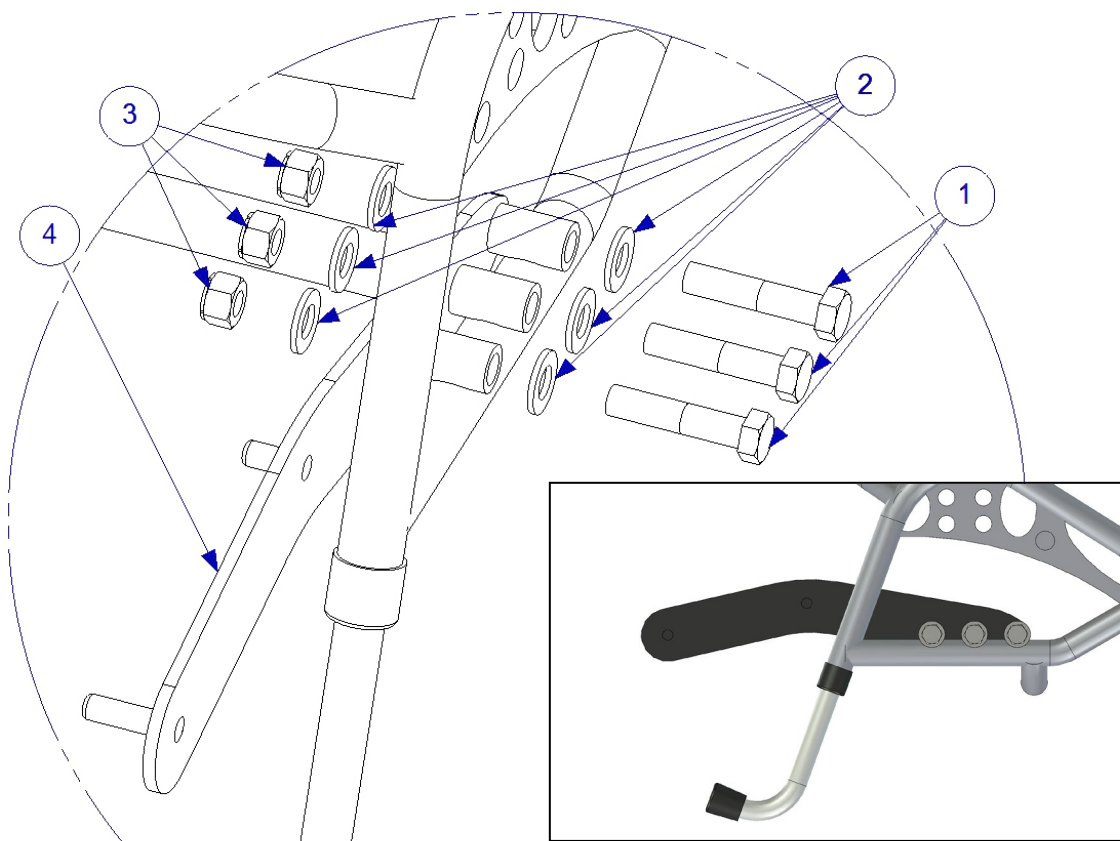

OBS!


När du skall ta av eWalk från rullstolen, så skall tiltning av rygg eller sits ändras till upprest läge.

3. Se bild ovan som visar montering av fästet på höger sida.

För montering skall följande ingå per sida. 20", 22", 24"

Placering	Detalj nummer	Antal	Beskrivning
1	XSM12X55	3	Bult M12 x 55
2	XSM12BR	6	Plan bricka 12,5
3	XSM12ML	3	Låsmutter M12
4	MCG1192R	1	Fäste Höger
5	MCG1192-02	1	Framhjuls plåt

OBS! Om du har 16" hjul så använd endast hjulet och en av bultarna för att montera fästet.

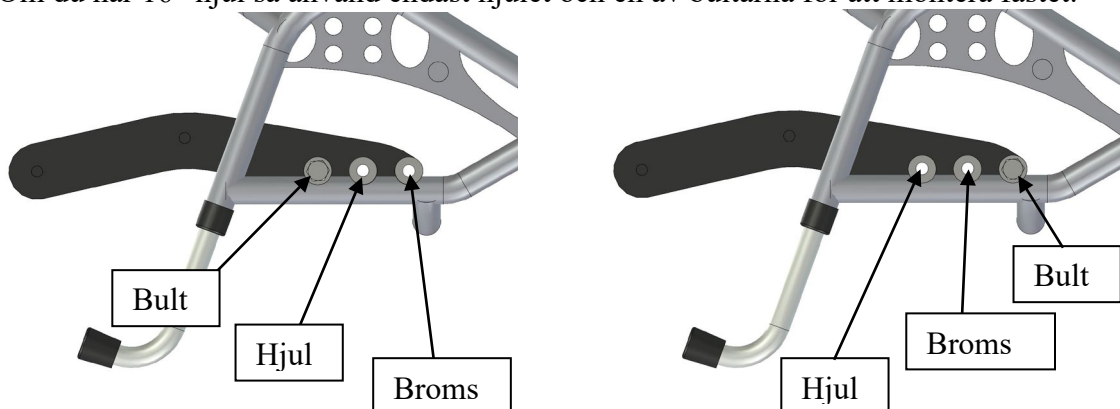



**Om inget annat specificeras, använd följande åtdragningsmoment.
Unless otherwise specified, use the following tightening torque.**

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm