

VH3040-90**Monterings anvisning för Panthera med kolfiberbakaxel.**


1. Byt bakaxel till den gamla Standard axeln. Beställ av Panthera direkt.

**BAKAXEL TIDIGARE STANDARD PASSAR TILL :**

S2 / S3	JA / JA
S2 kort / S3 kort	JA / JA
S2 kort-låg / S3 kort-låg	JA / JA
S2 large / S3 large	JA / JA
S2 swing / S3 swing	JA / JA
S2 swing-kort / S3 swing-kort	JA / JA
U2 / U3	JA / JA
U2 light / U3 light	NEJ / NEJ
Bambino	JA
Micro	NEJ
Panthera X	NEJ

Benämning	Artikel NR:
Bakaxel komplett sittbredd 24	3300024
Bakaxel komplett sittbredd 27	3300027
Bakaxel komplett sittbredd 30	3300030
Bakaxel komplett sittbredd 33	3300033
Bakaxel komplett sittbredd 36	3300036
Bakaxel komplett sittbredd 39	3300039
Bakaxel komplett sittbredd 42	3300042
Bakaxel komplett sittbredd 45	3300045
Bakaxel komplett sittbredd 50	3300050

2. Montera först bakaxeln på stolen.
3. Montera fästet för EasyWheel.

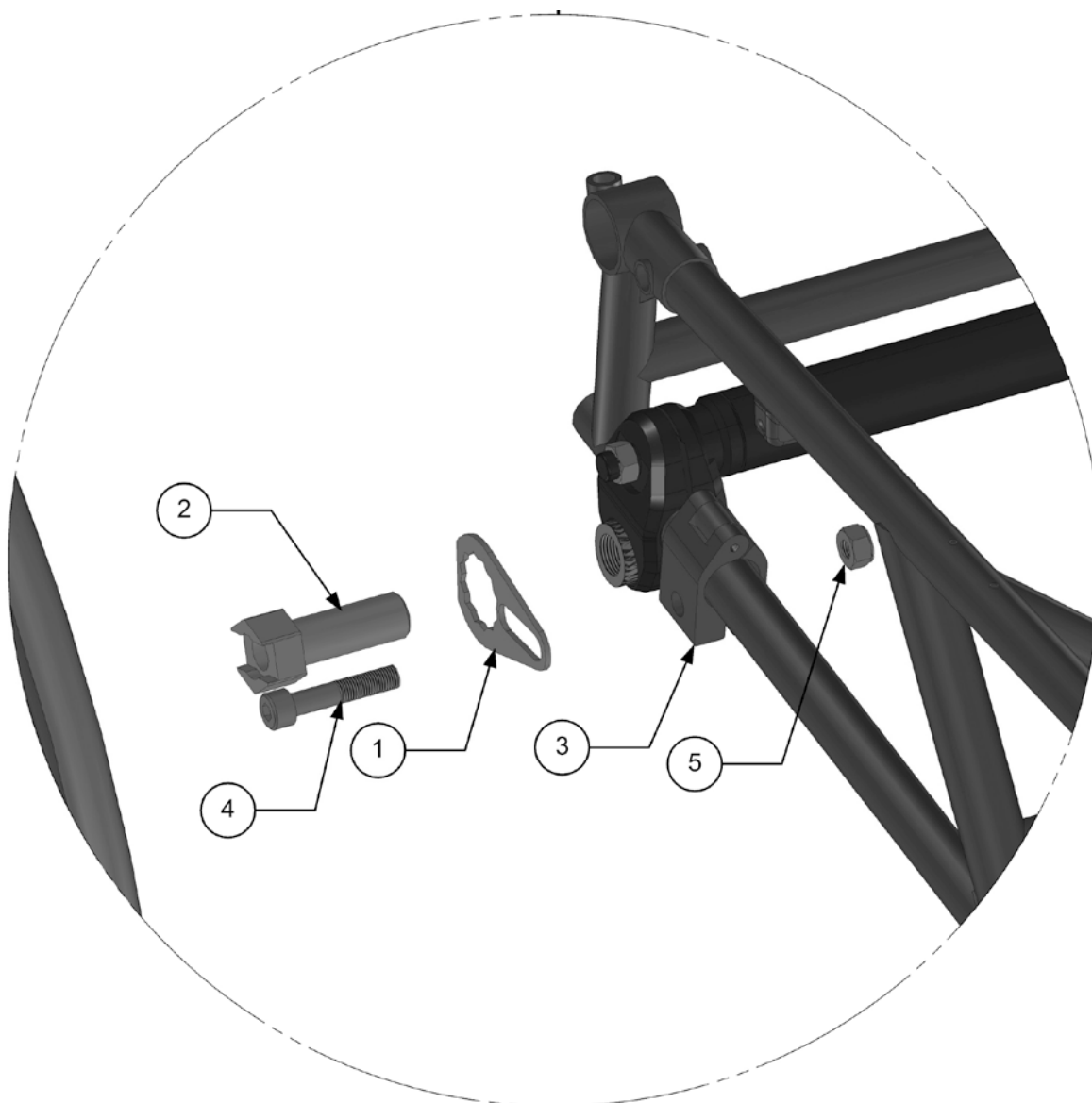

5	XSM8ML	1	Låsmutter M8
4	XSM8X40	1	Skruv M8 x 40
3	290010	1	Klamma
2	VH51001-04	1	Navhylsa
1	VH52002-04	1	Lås Bricka
Pos	Art.nr.	Antal	Beskrivning