



Monterings anvisning Freddy MEM6373 och MEM6374

1. Demontera hjul och navhylsan båda sidorna.

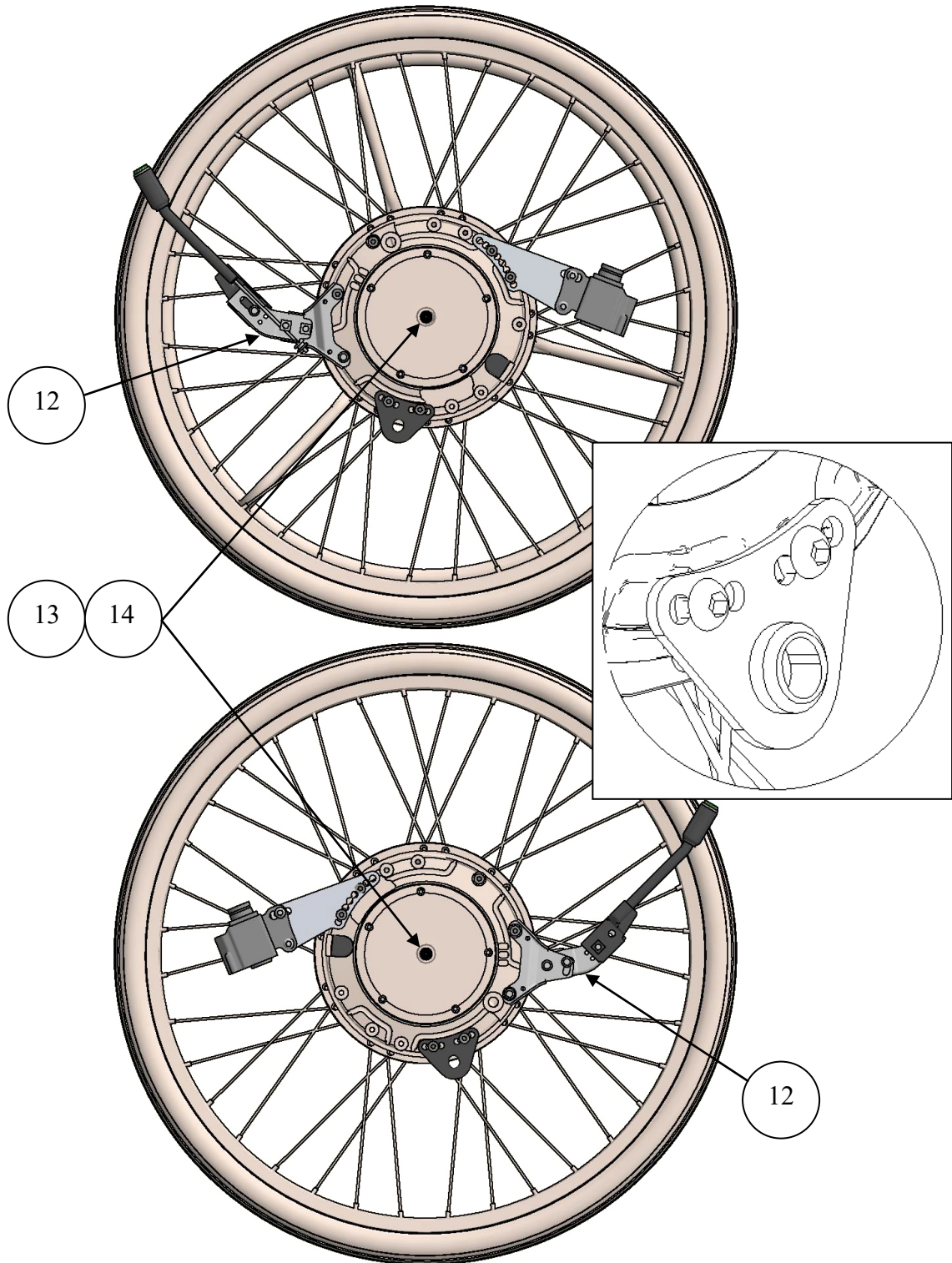

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel Ø12.0 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0
 - Distans med Detalj Nummer: XOE-25383-00.

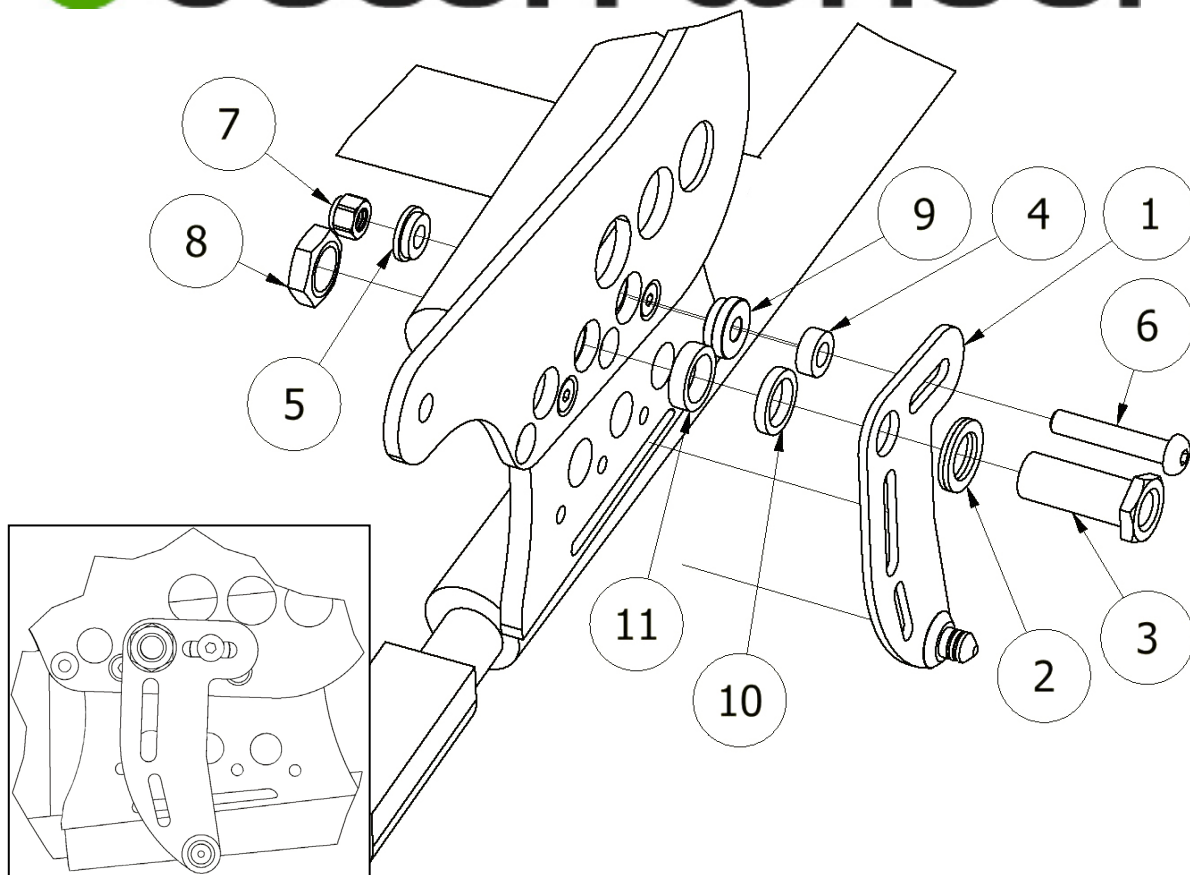

3. Se bild som visar montering av fästet.

4. Detaljer som ingår för montering på en sida.

Placering	Detalj nummer	Antal	Beskrivning
1	XOE-22294-BO	1	Höger Fäste
2	405239	1	Nordlock Bricka M16
3	HW063	1	Navhylsa
4	100 400 002	1	Distans
5	100 400 007	1	Distans
6	XSM8X50	1	Skruv Rundad M8 x 50
7	XSM8ML	1	Låsmutter M8
8	XSM16M	1	Mutter M16 låg
9	100 400 008	1	Distans
10	100 400 004	1	Distans
11	100 400 005	1	Distans
12	XOE-46383-10	1	Vinkel Fäste (b)
13	XOE-25383-00	1	Distans 12
14	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringssats medföljer ej axel, vinkel fäste (b), axel distans eller spårring, för byte se servicebok.

5. Montera den rygghängda batteri väskan.