


**Monteringsanvisning för E-Move, Etac Prio
MEM6327 och MEM6328**


20", 22" och 24"

1. Demontera hjulen på båda sidorna.

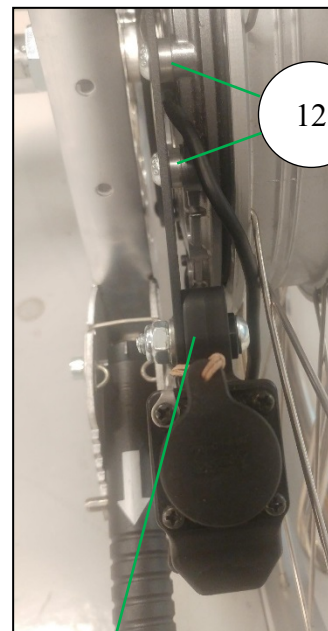

OBS!
Placering av kontakt

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
- Axel Ø12,7 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-C0
3. Avlägsna Etac:s originalplastdetalj som sitter monterad i profilen. Montera sedan fästet, se bilderna på nästa sida som visar montering av fästet på höger sida. Använd monteringsverktyget (11) för att föra ned distansen (9) till det hål som skall användas. Montera sedan på täcklocket (10). **Se sitthöjdstabellen i Etac:s brukarmanual för att välja placering för navhylsan.**

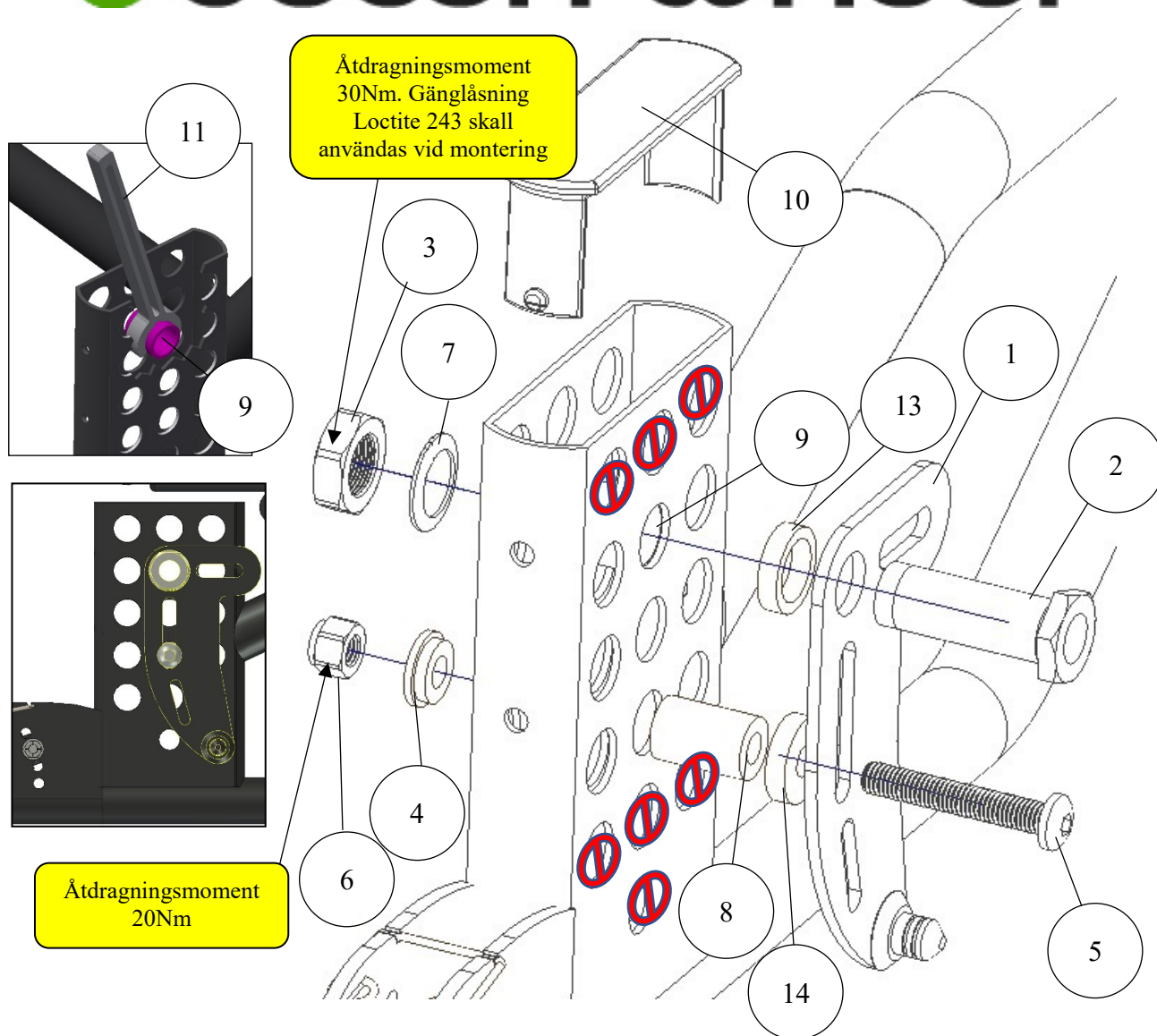

För montering på höger sida, så skall följande ingå.

Placering.	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XOE-22294-BO	1	Höger Fäste
2	HW051	1	Navhylsa
3	XSM16M	1	Mutter M16x1 Låg
4	100 400 007	1	Distans
5	XSM8X50	1	Skruv Rundad M8x50
6	XSM8ML	1	Låsmutter M8
7	XSM16BR3	1	Bricka 17x24x1
8	100 400 085	1	Distans
9	100 400 087	1	Distans
10	MED1636	1	Täcklock
11	MED1637	1	Monteringsverktyg
12	100 400 025	2	Distans
13	100 400 061	1	Distans
14	100 400 060	1	Distans

OBS! Vid separat köp av monteringssats **medföljer ej** axel, axel distans eller spårning, för byte se servicebok.

OBS! Med E-Move monterad går det ej att utrusta stolen med Etac:s Kåpphållare artnr: 27327

4. Montera nu den rygghängda batteriväskan.



**Om inget annat specificeras, använd följande åtdragningsmoment.
Unless otherwise specified, use the following tightening torque.**

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Hubsleevers.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm