



**Monterings anvisning Meyra
Avanti Pro 1.735, Avanti 1.736, Basic 1.751
MEM6201P och MEM6202P**

1. Tänk på att montera rullstolens original tippskydd.
2. Demontera hjulet och navhylsan på båda sidorna.

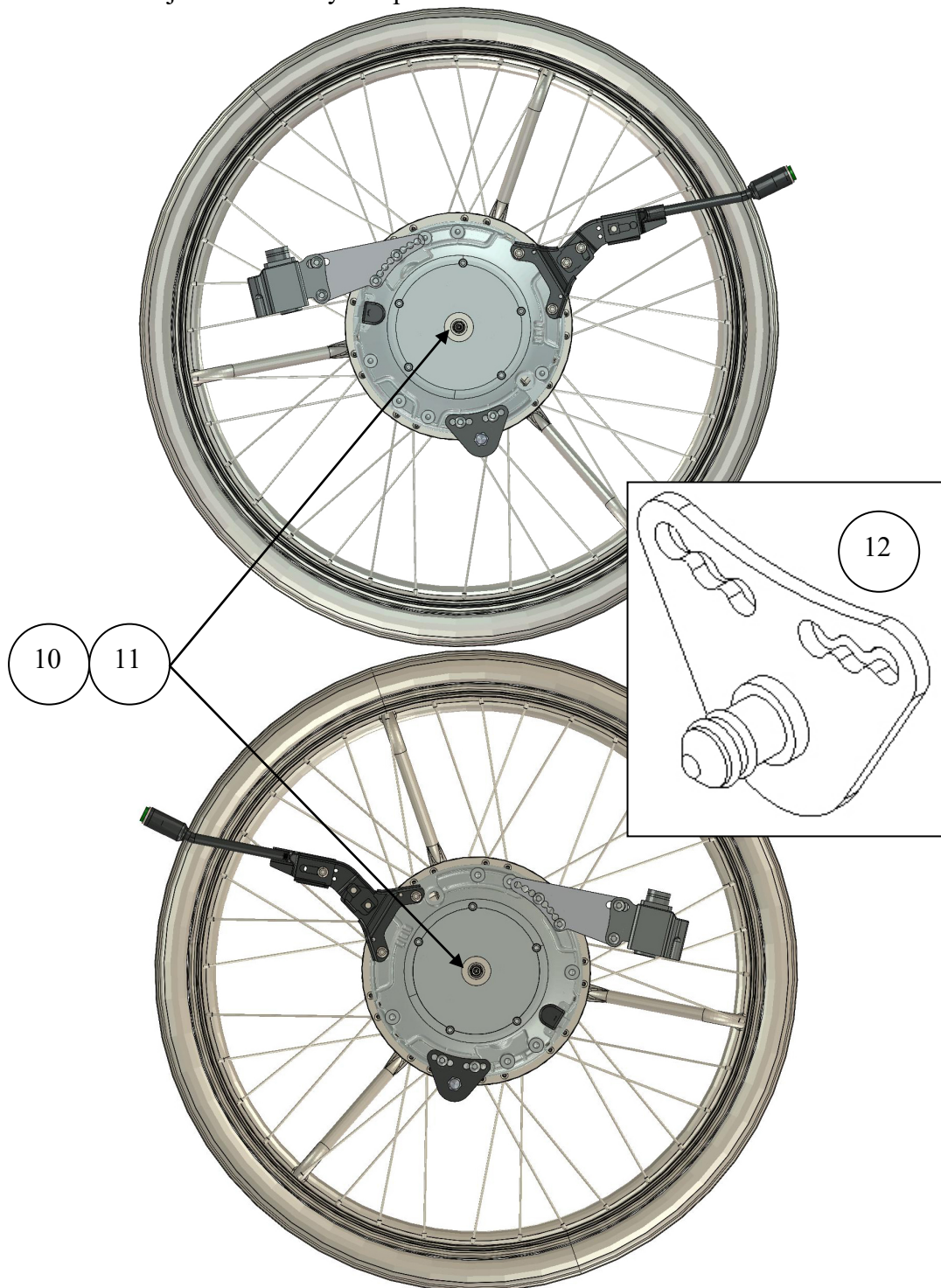

3. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel Ø12 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.
 - Stopp pinne är monterat med Detalj nummer: 320003.

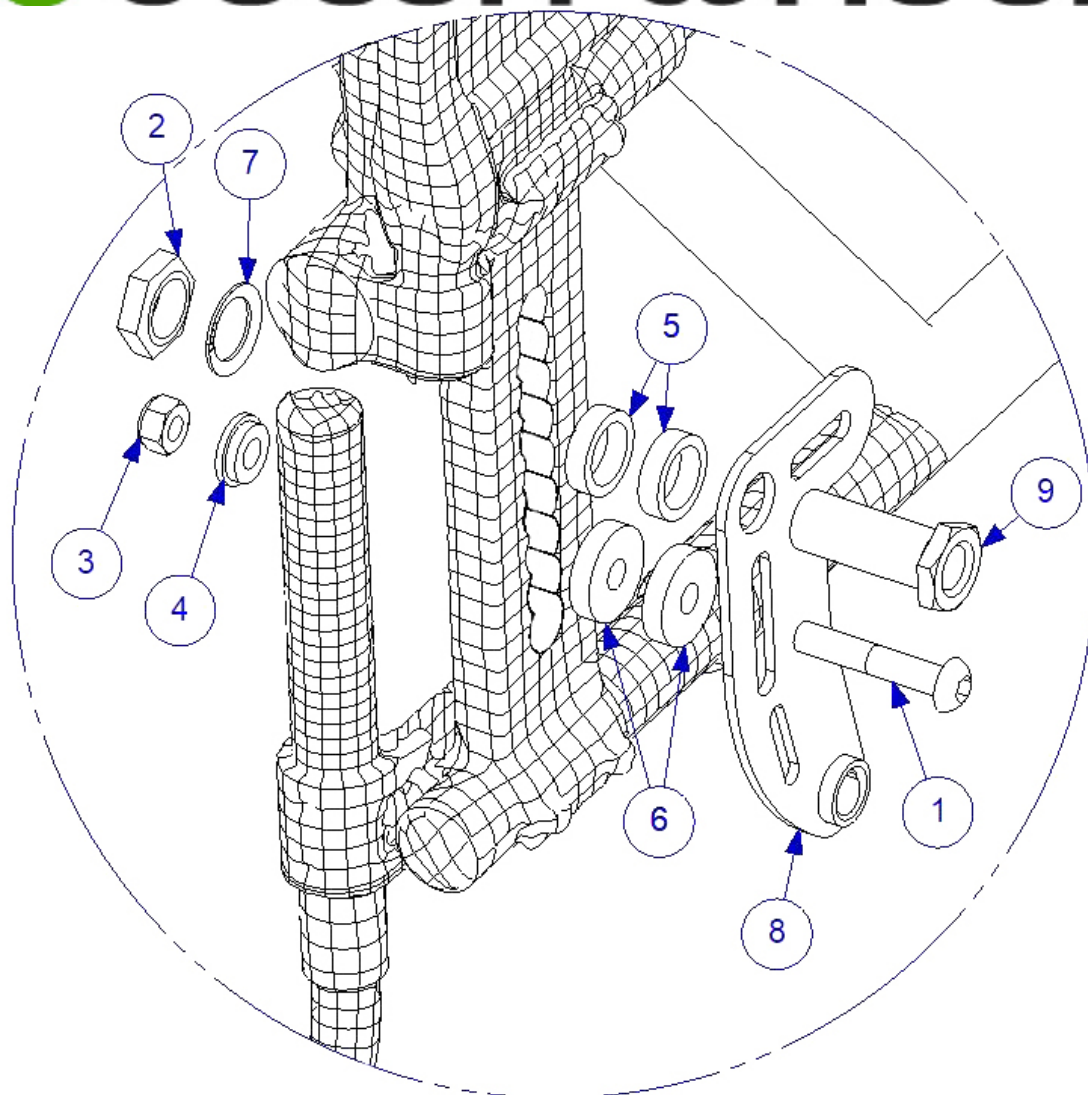

4. Se bilder som visar montering av fästet på höger sida.

För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering.	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XSM8X45	1	Skruv M8 x 45
2	XSM16M	1	Mutter M16
3	XSM8LM	1	Låsmutter M8
4	100 400 007	1	Distans
5	100 400 005	2	Distans
6	100 400 012	2	Distans
7	405242	1	Låsbricka M16
8	310022	1	Fäste
9	HW063	1	Navhylsa
10	XOE-25383-00	1	Distans 12
11	93440-120520	1	Spårring
12	320003	1	Stopp pinne

OBS! Vid separat köp av monteringssats medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.

5. Montera nu den rygghängda batteri väskan.

Åtdragningsmoment / Tightening torque

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Sleeves.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm