


Monterings anvisning för Start M1 Intro, M2 Effect, M3 Hemi, M6 Junior, Innov'Effect MED3088

1. Demontera hjulen och navhylsan på båda sidorna.

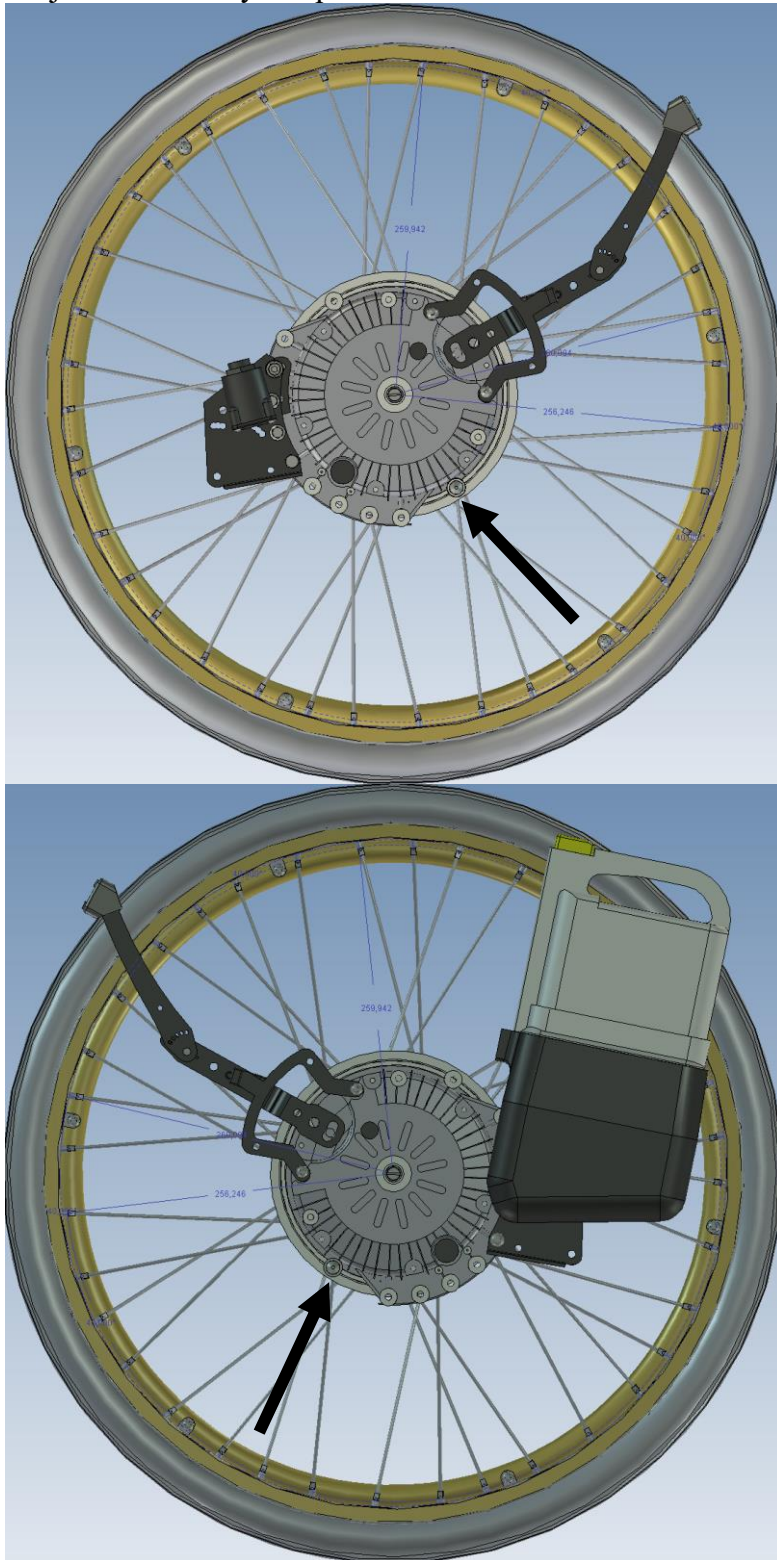

2. Kontrollera att stopp pinnen samt att tipperskydden är demonterade enligt bilderna ovan.

För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	MED2000	1	Fäste
2	405241	1	Nordlock Bricka
3	HW084	1	Navhylsa
4	XSM18M	1	Mutter M18x1
5	MED1384	1	Fäste
6	XSM8ML	1	Låsmutter M8
7	XSM8BR	1	Plan Bricka - M8
8	XSM8X20	1	Skruv M8 x 20
9	405240	1	Lås Bricka M18

2016-05-27