




Infinity Brugervejledning

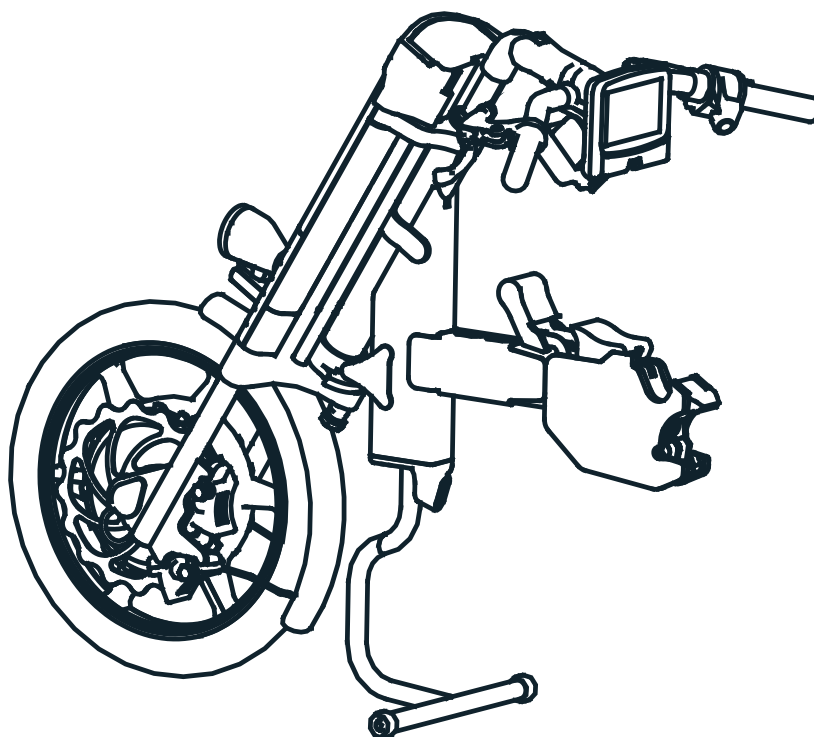

The undersigned, representing the following manufacturer

Decon Wheel AB
Org.No. 556618-9006
Södra Ekeryd 119, 314 91 Hyltebruk
Sweden

hereby declares that the product

Infinity

with the basic UDI-DI 735001014INFBE

and the following references

INF001
INF003
INF004

is in conformity with the Medical Device Regulation (MDR) 2017/745 as a class I medical device based on Annex VIII.

Intended purpose: The device is an electric drive unit for manual wheelchairs with the intention to provide mobility and flexibility to persons who are unable to walk or have restrictions on walking. The device is intended for outdoor use.

This EU declaration of conformity is issued according to Annex IV in MDR and under sole responsibility of the manufacturer.

Hyltebruk, 2021-09-22



Benny Andersson
COO



Indhold

Sikkerhed	4
Almindelige bestemmelser	4
Vejledninger til synshandicappede	4
Formål og tilsigtet anvendelse	4
Ikke tilsigtet brug	4
Symboler	5
Advarsler	6
Mærkning	11
Genbrug	11
Garanti	12
Oplysninger om produktsikkerhed og tilbagekaldelse	12
Beskrivelse af produktet	13
Tekniske data	13
Leveringens omfang	14
Oversigt	15
System til sammenkobling med kørestol	15
Drivsystem	16
Manøvreringssystem	16
Bremsesystem	16
Belysning	16
Display	17
Menustruktur	17
PIN-kode (valgfrit)	18
Startmenuen	19
Køreprofil (A)	20
Indikator for energiflow (B)	20
Speedometer (C)	20
Indstillinger (D)	21
Personlig køreprofil	21
Indstillinger for enhed	22
Oplysninger om enhed	23
Mekaniske indstillinger	25
Indstilling af styret og styrstamme på Infinity	25
Brug af Infinity	26
Sådan kobles Infinity på din kørestol	26
Sådan frakobles Infinity	27
Sådan fjernes og fastgøres adapterbjælken	28
Sådan køres med Infinity	29
Parkeringsbremse	30
Sådan flyttes Infinity, mens den er koblet til en kørestol	30
Transport af Infinity	31
Batteri og oplader	33
Pleje	35
Rengøring	35
Korrosion	35
Brugervedligeholdelse	36
Reparationer	37
Fejlfinding	38
Beskrivelser af fejl	38
Fejlkoder	39

Sikkerhed

Almindelige bestemmelser

Brugervejledningen gælder for Infinity.

Brugervejledningen er skrevet til brugere af Infinity og personer, der hjælper brugere med at få mest muligt ud af Infinity.

Læs brugervejledningen, og gør dig fortrolig med Infinity, før du bruger den.

Vejledninger til synshandicappede

Kontakt den lokale forhandler, hvis du har svært ved at læse denne brugervejledning. Din lokale forhandler kan levere en digital kopi af denne vejledning. Det gør det muligt at forstørre vejledningen eller få den læst højt fra din oplæsningssoftware.

Formål og tilsigtet anvendelse

Infinity er en elektrisk drivenhed, hvis tilsigtede anvendelse er at give personer med handicap på 12 år og derover, som selv kan bruge en manuel kørestol, ekstra fremdrift og øget mobilitet, når de bruger deres manuelle kørestol. Personens vægt må ikke overstige den vægt, der er angivet i de tekniske specifikationer i denne vejledning.

Betingelserne for at anvende produktet er, at den pågældende person har mindst én arm med tilstrækkelig styrke til at kunne betjene gas- og bremsehåndtag. Desuden skal brugeren have tilstrækkelige kognitive evner og motoriske færdigheder til at køre produktet på en sikker måde. Vurderingen af personens evner foretages af Decon eller en af Decon udpeget repræsentant, såsom medarbejder på hjælpemiddelcentraler og forhandlere.

Produktet kan bruges både indendørs og udendørs, helst udendørs. Brug i udendørs miljøer er hovedsageligt på asfalterede overflader såsom veje og cykelstier samt på grusveje. Brug i indendørs miljøer er hovedsageligt større offentlige lokaler såsom biblioteker, købmandsforretninger, indkøbscentre, hospitaler og andre lignende miljøer.

Ikke tilsigtet brug

Enhver anvendelse, der ikke svarer til beskrivelsen i denne brugervejledning. Dette omfatter også de tekniske specifikationer, dvs. maksimal brugervægt, maksimal stigningsevne osv.

Symboler



ADVARSEL!

Risiko for alvorlig personskade eller død.

En handling som, hvis den ikke udføres korrekt, kan medføre skade på operatøren eller andre personer.



FORSIGTIG!

Risiko for materielle skader.

En handling, der, hvis den ikke udføres korrekt, kan føre til materiel skade.



INFO

Ekstra vigtige eller forklarende oplysninger.

Advarsler

Før du bruger Infinity første gang



ADVARSEL!

Brugeren skal have læst og forstået vejledningen og have en forståelse af de forskellige håndtag og brugergrænseflader, som Infinity er udstyret med.



ADVARSEL!

Før du bruger Infinity, skal du vurdere dine færdigheder og afgøre, om du har brug for en hjælper.

For at fastslå behovet for en hjælper skal du også anmode om en ekspertudtalelse til reference.

Hvis din vurdering udelukkende er baseret på din egen mening, kan du eller personer omkring dig risikere at komme til skade.



ADVARSEL!

Øv dig i at køre på en jævn overflade i et sikkert miljø med en hjælper, indtil du føler dig sikker på, hvordan Infinity fungerer.

Hvis du kører på en offentlig vej, før du har helt styr på, hvordan Infinity skal bruges, kan du eller personer omkring dig risikere at komme til skade.



ADVARSEL!

Placer ikke fingre eller hænder under låsehåndtaget, når det sænkes. Hvis du gør det, kan du risikere, at en eller flere fingre eller hele din hånd kommer i klemme.



ADVARSEL!

Placer ikke fingre eller hænder på rotationslåsen, når du drejer styret. Hvis du gør det, kan du risikere at klemme fingeren/fingrene eller hele hånden mellem rotationslåsen og rørene.



ADVARSEL!

Pas på ikke at klemme fingrene, når du isætter eller afmonterer batteriet.



ADVARSEL!

Vær forsigtig, når du kobler Infinity på kørestolen og løfter styrehjulene fra jorden, da fødderne kan risikere at blive fanget mellem fodbuen/fodstøtten på kørestolen og Infinity. Du kan risikere skade på fødder og tæer.



ADVARSEL!

Det er ekstremt vigtigt, at alle skruer strammes korrekt efter indstilling.

Kørsel



ADVARSEL!

Foretag ikke voldsomme sving ved høj hastighed. Der er risiko for, at Infinity og kørestolen vælter.



ADVARSEL!

Ved kørsel på stejle skråninger kan hastigheden og bremselængden overstige den hastighed og bremselængde, der er angivet i EN12184:2014 Tabel 1 og Tabel 2 samt i de tekniske specifikationer.



ADVARSEL!

Når du kører på en stejl skråning, kan det være nødvendigt at begrænse hastigheden ved hjælp af bremserne. Motorbremsen hjælper kun i et vist omfang.



ADVARSEL!

Kør ikke Infinity med tunge tasker eller anden bagage hængende over kørestolens ryglæn. Placer heller ikke tunge genstande i opbevaringsrummet. Kørestolen kan nemt vippe baglæns op ad bakke, hvilket kan forårsage skade på dig eller andre omkring dig.



ADVARSEL!

Kør aldrig Infinity uden at sidde i din kørestol.



ADVARSEL!

Kør aldrig Infinity med mere end én person i kørestolen. Infinity kan risikere at holde op med at fungere, eller kørestolsbrugere kan komme til skade.



ADVARSEL!

Kontroller den resterende batterikapacitet, før du krydser en gade eller vej. Hvis den resterende batterikapacitet er lav, kan Infinity risikere at stoppe.



ADVARSEL!

Vær forsigtig, når du bruger Infinity, så du ikke får hænderne i klemme i kørestolens eller Infinitys eger, bremseskiver osv.



INFO

Brug parkeringsbremsen, når du er stoppet ved f.eks. et trafiklys eller en fodgængerovergang.



INFO

Infinity er udstyret med regenerativ motorbremse, der aktiveres, når gashåndtaget slippes. For at opnå maksimal rækkevidde skal kørslen planlægges så optimalt som muligt, f.eks. skal gassen slippes i god tid inden et kryds.

Vejforhold



ADVARSEL!

Kør ikke med Infinity udendørs i kraftig regn eller snestorm. Førere af andre køretøjer kan have svært ved at se dig. Hvis det begynder at regne eller sne, når du er udendørs, skal du sørge for at komme indendørs så hurtigt som muligt.



ADVARSEL!

Kør ikke Infinity på isdækket underlag. Der er en risiko for, at du ikke kan stoppe Infinity.



ADVARSEL!

Kør ikke i områder med dyb sne eller ophobning af vand. Der er risiko for, at du mister kontrollen. Hvis du ikke kan køre uden om området, skal du sørge for at have en hjælper med dig.

Hvis du kører Infinity på dybt vand, og vand trænger ind i drevet, kan Infinity stoppe.

Tog og bus



ADVARSEL!

Når du kører med tog, skal du altid have en hjælper med dig. Hold på platformen, så du vender mod sporene, og aktiver parkeringsbremsen på Infinity og kørestolens bremses. Nogle platforme hælder lidt mod sporene.



ADVARSEL!

Når du skal køre om bord på eller af en bus eller et tog, skal du altid have en hjælper med dig.

Kørsel på skråninger



ADVARSEL!

Tyngdepunktet med Infinity koblet på en kørestol vil være anderledes, end du er vant til. Derfor skal du være ekstra forsigtig, når du kører på skråninger. Brug ikke Infinity på skråninger med en hældning over 8 grader (14 %). Infinity og kørestolen kan vælte, have problemer med at komme frem eller med at bremse tilstrækkeligt. Første gang, du kører op eller ned ad en bakke, skal du have en hjælper med dig.

Jernbaneoverskæringer



ADVARSEL!

Undgå så vidt muligt jernbaneoverskæringer. Hvis du ikke har andet valg end at krydse jernbanespor, skal du sørge for at have en hjælper med dig. Stop altid før jernbaneoverskæringen, og se til venstre og højre. Når du krydser jernbanen, skal du sørge for at køre så vinkelret på jernbanesporene som muligt. Hvis du kører diagonalt, kan Infinitys eller kørestolens hjul sidde fast i jernbanesporene. Kør ikke nær kanten af jernbaneoverskæringen. Hjulene kan komme uden for jernbaneoverskæringen.



ADVARSEL!

Kontroller den resterende batterikapacitet, før du krydser jernbanespor. Hvis den resterende batterikapacitet er lav, kan Infinity risikere at stoppe midt i det hele.

Opbevaring og transport



ADVARSEL!

Opbevar ikke Infinity, hvor den kan blive våd af regn eller på steder med høj luftfugtighed.



ADVARSEL!

Undgå opbevaring i direkte sollys eller på steder, hvor temperaturen kan være høj.



ADVARSEL!

Infinity må aldrig transporteres koblet på kørestolen. I køretøjer, hvor kørestolen anvendes som sæde, skal Infinity kobles fra stolen og anbringes i bagagerummet eller tilsvarende og spændes fast.



ADVARSEL!

Brug stropper for at sikre, at Infinity kan transporteres sikkert.



ADVARSEL!

Pas på ikke at klemme fingrene, når du isætter eller afmonterer batteriet.



ADVARSEL!

Opbevar altid det frakoblede batteri med beskyttelseslåget på. Eksponerende kontakter kan forårsage en kortslutning og føre til brand eller få batteriet til at revne.

! FORSIGTIG!

Placer Infinity, så ingen dele beskadiges under transporten.

Rengøring

! FORSIGTIG!

Skyl aldrig Infinity med vandslange eller højtryksrensere. Brug ikke damprensere til at rengøre Infinity. De elektroniske enheder kan blive beskadiget, hvilket kan føre til alvorlige funktionsfejl.

! FORSIGTIG!

Rengør ikke med opløsningsmidler som benzin eller fortynder. Dette kan beskadige maling og plastdele på Infinity



INFO

Infinity kan desinficeres korrekt ved hjælp af en klud med alkohol.

Generel anvendelse



ADVARSEL!

Rør ikke ved powermoduliet nederst på fronten, drivhjulet, bremseskiven eller skivebremseklodsen, når du bruger Infinity eller lige efter brug. Under og efter brug kan de være meget varme. Hvis Infinity befinder sig i nærheden af en varmekilde, kan drivmotoren blive meget varm.

Efterlad og opbevar aldrig Infinity, så den udsættes for direkte sollys. Alle metaloverflader på produktet kan i det tilfælde risikere at blive meget varme. For høj temperatur kan også forårsage batterifejl eller fremskynde nedbrydelse af batteriet.



ADVARSEL!

Det er ekstremt vigtigt, at alle skruer strammes korrekt efter indstilling.



ADVARSEL!

Sørg for, at adapterbjælken er korrekt fastgjort til adapterpladerne.



ADVARSEL!

Brug ikke Infinity i nærheden af enheder, der genererer kraftige radiobølger. Hvis Infinity befinder sig i nærheden af en radiobølgekilde og begynder at fungere unormalt, skal du straks slukke for strømmen og flytte dig hurtigt væk fra det aktuelle sted med assistance fra din hjælper eller ved at rulle Infinity koblet på kørestolen derfra med håndkraft.

De svage elektromagnetiske bølger, der udsendes af Infinity, kan påvirke andre elektroniske enheder, såsom automatiske døre og tyverisikringssystemer af den type, der bruges i butikker. I det tilfælde skal du slukke for strømmen og betjene Infinity koblet til kørestolen ved hjælp af en hjælper eller køre den manuelt.



INFO

Adaptersæt bestilles separat.

Affaldshåndtering


Når Infinity er udtjent og skal skrottes, skal du kontakte de lokale myndigheder for at få oplysninger om genbrug og følge deres anvisninger.

Alternativt kan du kontakte din forhandler med henblik på genbrug af din brugte Infinity og tilhørende batteri.

Mærkning

Mærkeplade

Mærkeplade er placeret på undersiden af den midterste del.

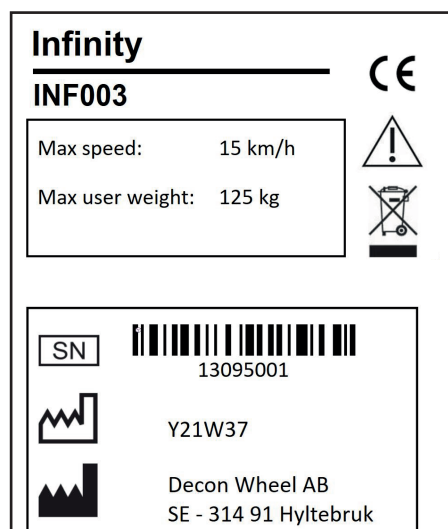

Genbrug

Når Infinity skal overdrages til en ny bruger, skal al teknisk dokumentation følge med. Produktet skal rengøres af en specialist, desinficeres og gennemgå service.

Garanti

Garantiperioden for Infinity er 2 (to) år fra købsdatoen

Hvis der er en materiale- eller produktionsfejl på dit eksemplar af Infinity i denne garantiperiode, vil de defekte dele blive udskiftet eller repareret gratis. Garantien dækker drivenheden og opladeren. Forbrugsvarer som batterier, dæk og slanger er ikke omfattet af denne garanti.

Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes forsætligt misbrug fra brugerens side eller uagtsom brug, f.eks. fejl forårsaget af anden anvendelse end den, der er angivet i brugervejledningen. Denne garanti dækker heller ikke fejl forårsaget af ændring af enheden eller kontinuerlig brug under andre forhold end de angivne, f.eks. overskridelse af maks. vægt osv.

Ridser, afblegning og snavs på produktets overflade som følge af normal brug er ikke dækket af garantien.

Hvis det er nødvendigt med garantireparationer, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt enheden.

Den forventede levetid for det komplette produkt (gælder ikke sliddele) er 5 år fra salgsdatoen.

Oplysninger om produktsikkerhed og tilbagekaldelse

Kontakt forhandleren, hvor enheden blev købt, eller producenten af Infinity for at få oplysninger om produktsikkerhed og eventuelle tilbagekaldelser.

Beskrivelse af produktet

Tekniske data

Motor	Børsteløs PM motor 500 W
Batteritype	Li-Ion 48 V, 10 Ah (480 Wh)
Samlet vægt af Infinity inkl. batteri	24 kg
Hjuldimension	16"
Dækdimension	16 x 2,125"
Lufttryk i dæk	2 bar
Fart	0-15 km/t ¹⁾
Maksimalt antal kilometer med fuldt opladede batterier	45 km ²⁾
Maksimal brugervægt	125 kg
Maksimal stigningsevne	8 grader ³⁾
CE-mærkning	EU-forordning 2017/745 (MDR)
Batterioplader	100-240 V AC, 50/60 Hz
Opladningstid	Normal opladning ca. 3-4 timer
Driftsbetingelser	miljø temperatur luftfugtighed
Klassificering af kørestol (SS-EN 12184:2014)	Inde- og ude- -15 °C til 40 °C Ingen kondens Klasse B
Mindste korridorbredde, som Infinity kan bruges i	Varierer afhængigt af, hvilken kørestol Infinity er koblet på
Maksimal højde af fortove, der kan passeres	50 mm
Statisk stabilitet (ISO 7176-15, bilag A)	Klasse B i alle positioner (frem, tilbage, til siden), dvs. mindst 9 graders hældning eller mere.
Dynamisk stabilitet op ad bakke (ISO 7176-15, bilag A)	Klasse B, mindst 6 graders hældning
Forcering af forhindringer (ISO 7176-15, bilag A)	Klasse B, 50 mm
Maksimal fremadgående hastighed (ISO 7176-15, bilag A)	5-15 km/t
Bremselængde fra maksimal hastighed (ISO 7176-15, bilag A)	0,8-4,5 m
Mindste venderadius (ISO 7176-15, bilag A)	Varierer afhængigt af, hvilken kørestol Infinity er koblet til. Ca. 2,4 m med en stol med sædebredde på 42 cm.

1. Kan tilpasses, så gældende love og bestemmelser overholdes

2. Kørestil, underlag og brugervægt påvirker det maksimale kilometertal

3. Maksimal stigningsevne afhænger af stolens balancering og overflade.

Leveringens omfang

Leveringen af Infinity omfatter følgende:

- A Infinity
- B Oplader inkl. kabler
- C Brugervejledning
- D Opladningsadapter


Adaptersæt



INFO


Adaptersæt bestilles separat.

Der kræves et adaptersæt for at koble Infinity til en kørestol. Adaptersæt skal monteres af en kvalificeret tekniker.

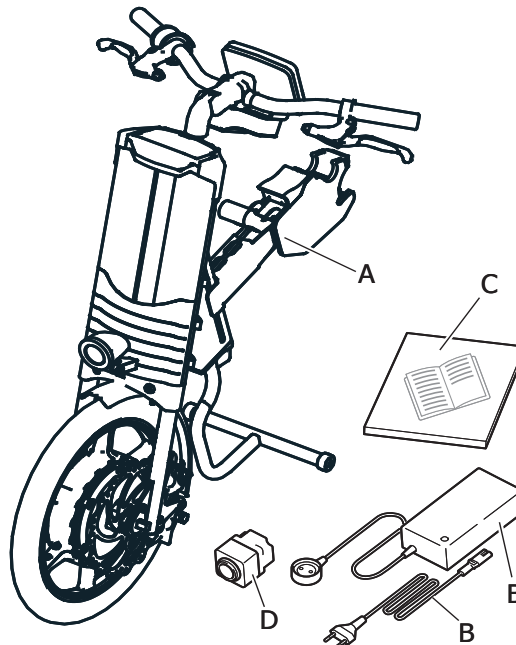

Oversigt

Infinity består hovedsageligt af to dele. En front til manøvrering og kørsel og en mellemliggende del til påkobling på kørestolen.

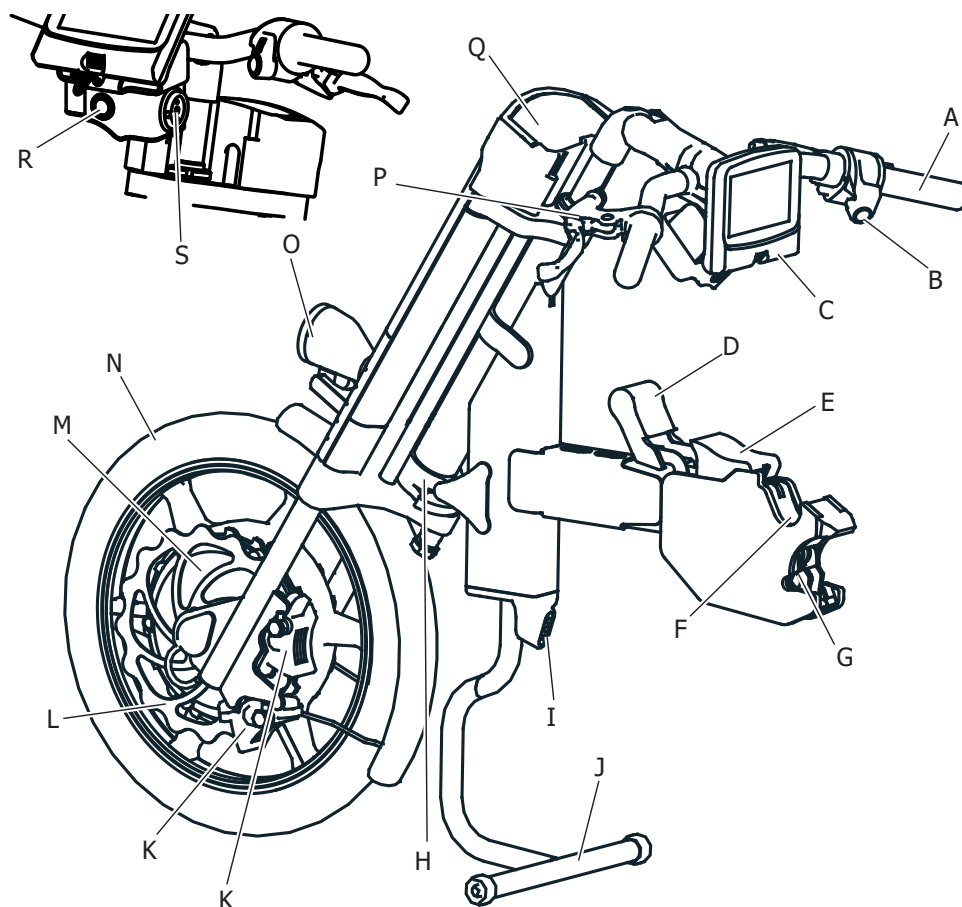

A	Gashåndtag	J	Støtteben
B	Bak-knap	K	Skivebremseklods (x2)
C	Display	L	Bremseskive
D	Låsehåndtag	M	Drivmotor
E	Frigørelsesshåndtag	N	Drivhjul
F	Øvre dockingmekanisme	O	Belysning foran
G	Nedre dockingmekanisme	P	Bremsehåndtag (x2)
H	Rotationslås	Q	Batteriholder med batteri
I	Bagbelysning	R	Startknap
		S	Ladestik

System til sammenkobling med kørestol

Dockingmekanismen (F) og (G) er placeret på bagsiden af den midterste del og danner sammen med den kørestolstilpassede bjælke grænsefladen mellem Infinity og kørestolen. Låsehåndtaget (D) låser dockingmekanismen og løfter støttebenene (J) op. Der er placeret et udløserhåndtag (E) ved siden af dockingmekanismen.

Drivsystem

Drivsystemet består af drivmotor (M) placeret i drivhjulet (N), batteri med batteriholder (Q) og opladningsstik (S).


Manøvreringssystem

Styresystemet består af gashåndtag (A), bak-knap (B), start-knap (R), to bremsehåndtag (P), display (C) og styr.


Bremsesystem

Bremsesystemet kontrolleres regelmæssigt med et interval på 6 (seks) måneder.

Bremsesystemet på Infinity består af to individuelle hydrauliske skivebremseklodser (K) med tilhørende bremsehåndtag (P) og bremseskiver (L). Bremsevæskebeholderne er indbygget i bremsehåndtagene. Bremseskiven og skivebremseklodsen er monteret på drivhjulet.

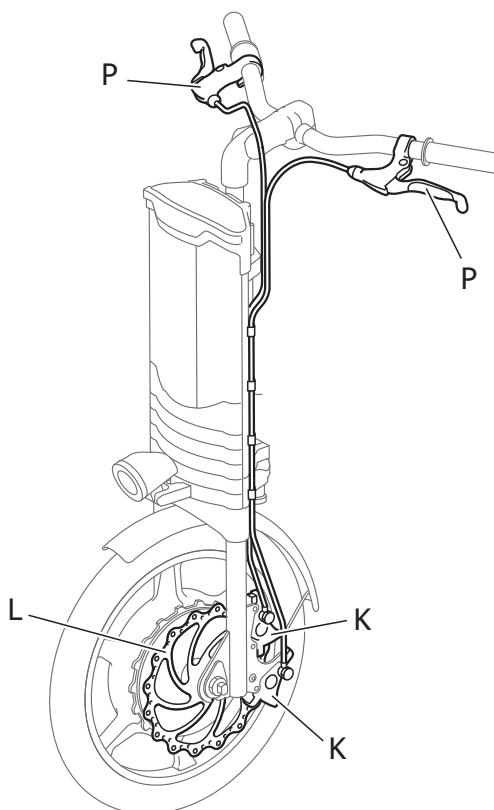

Det er meget vigtigt, at afstanden mellem bremsehåndtaget og styret er mindst 15 mm, når bremsehåndtaget trykkes så langt ind som muligt. Ellers er bremsekraften ikke tilstrækkelig.

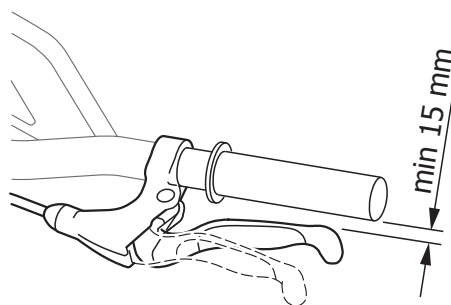

Belysning

Belysningen består af en forlygte (O) med hvidt lys og en rød baglygte (I). Lyset tændes og slukkes fra displayet (C).


Display

Infinity er udstyret med et display med oplysninger til brugeren. Det er også på dette display, at de elektriske indstillinger for Infinity foretages. Skærmen på displayet er en berøringsskærm. Displayet er f.eks. udstyret med et USB-stik til opladning af en mobiltelefon. Maksimal effekt 10 W.


Displayet har to forskellige temaer at vælge imellem, Standard og City.

Menustruktur


Tema Standard

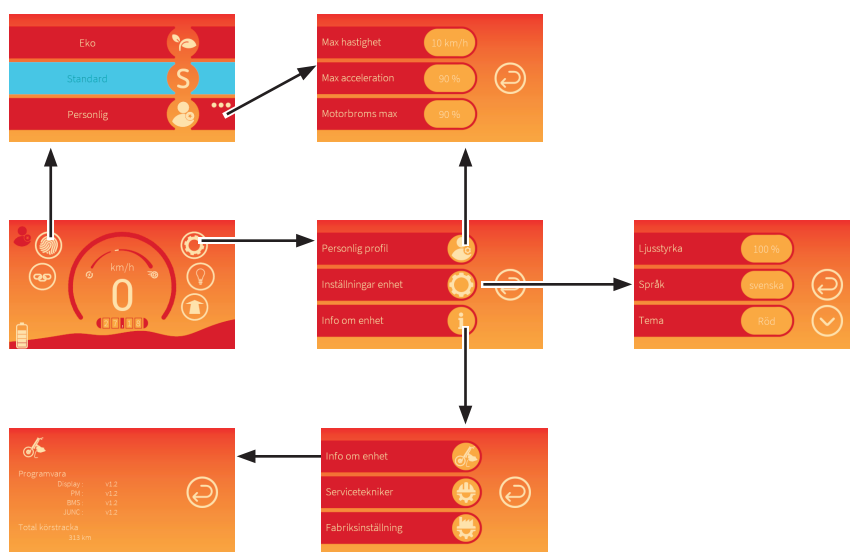

Tema City

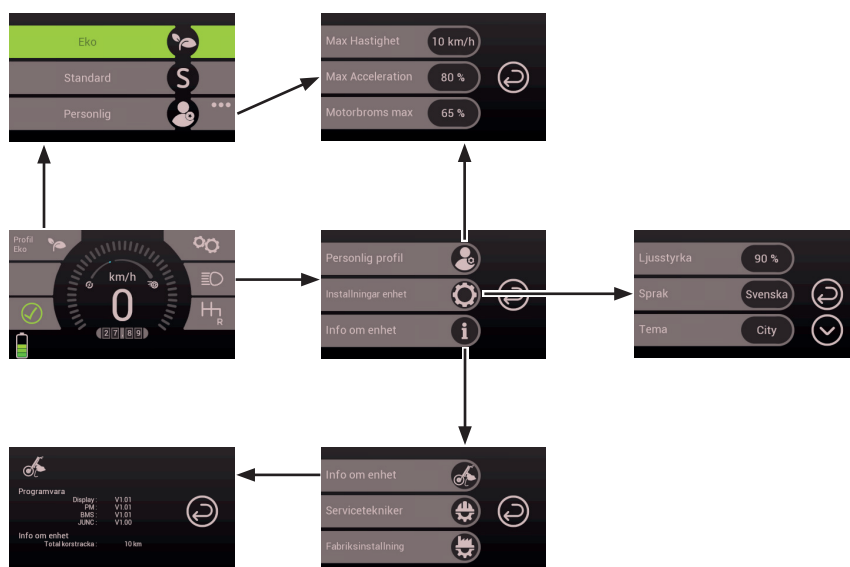

PIN-kode (valgfrit)

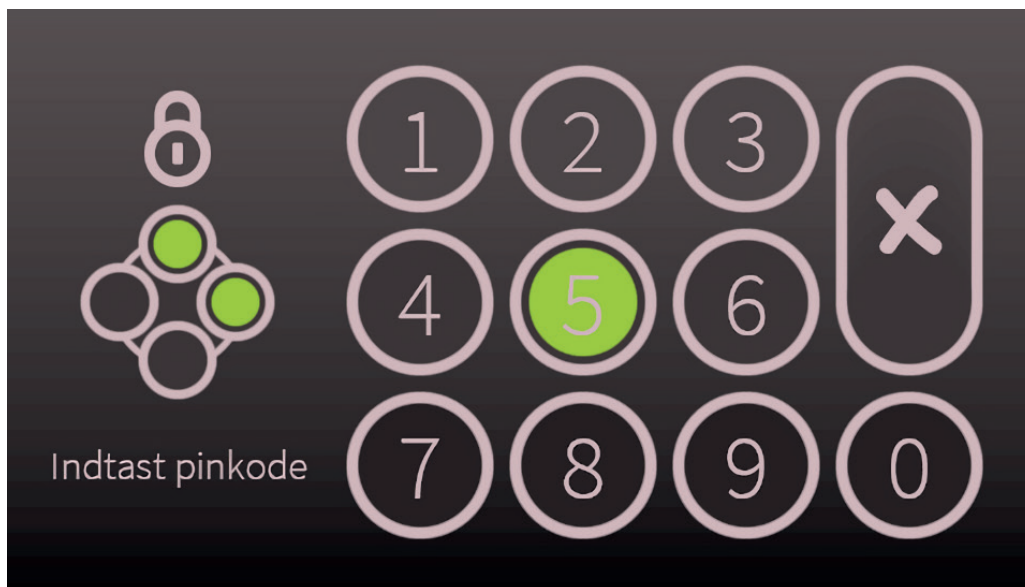


På nogle markeder skal Infinity beskyttes med en PIN-kode. Når du starter Infinity, vil der blive anmodet om denne PIN-kode. Når Infinity leveres fra fabrikken, er PIN-koden: 0000. For hvert indtastet ciffer i PIN-koden vises en grøn prik i feltet i venstre side af displayet. Når alle fire cifre er indtastet, vil dette felt være grønt, hvis du har indtastet den korrekte PIN-kode, og du kan komme videre i Infinity. Hvis der indtastes en forkert PIN-kode, blinker dette felt rødt, og derefter kan du forsøge at indtaste PIN-koden igen.

Brugeren af produktet kan ændre PIN-koden ved at gå ind i enhedsindstillingerne og vælge PIN-kodemenuen. Derefter vil der være instruktioner på displayet om, hvordan du ændrer PIN-koden.

Aktivering og deaktivering af PIN-kode kan kun udføres af en kvalificeret servicetekniker eller producenten af produktet.

Startmenuen

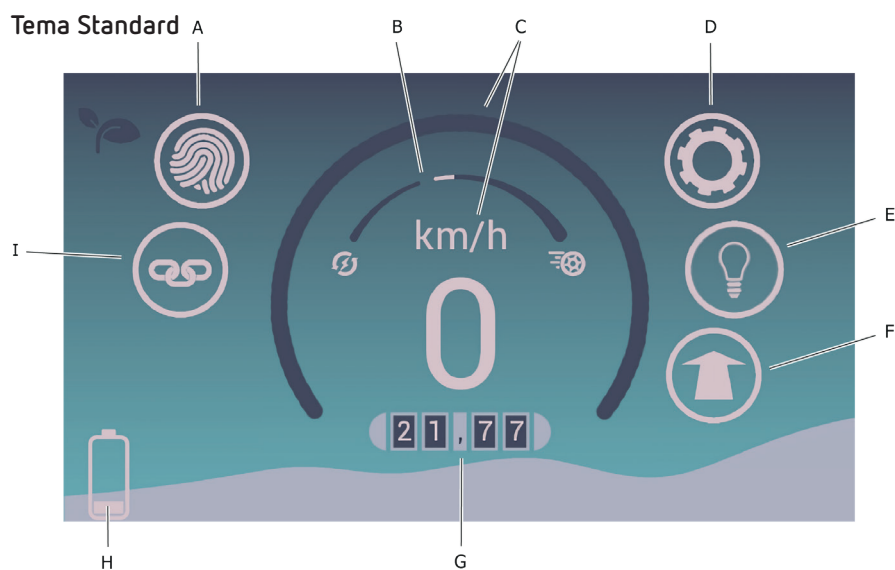

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| A Knap og indikator for køreprofil | F Angivelse af køreretning |
| B Indikator for energiflow | G Triptæller |
| C Speedometer, analogt og digitalt | H Indikator for batteri |
| D Knap for indstillinger | I Indikator for kørestolslås |
| E Knap for belysning | |

Få sekunder efter aktiveringen af Infinity vises startmenuen på displayet. Under kørslen viser startmenuen oplysninger om det aktuelle batteriniveau, hastighed, køreretning og indikation af, om Infinity er låst fast til kørestolen. Der er også knapper til at tænde og slukke for belysning, ændre køreprofilen og foretage indstillinger.

Når du trykker på knapperne på displayet, vises undermenuerne. Her kan du ændre indstillinger, så Infinity er tilpasset dine behov.

Hvis du trykker på , går du et niveau tilbage i menustrukturen. Knappen kan også bruges til at gemme en indstilling.

Du kan hurtigt komme helt tilbage til startmenuen ved at trykke på og holde  nede et par sekunder.

Køreprofil (A)

Symbolet viser, hvilken køreprofil der er valgt. Hvis du trykker på knappen, kommer du til menuen til valg af køreprofil.

- Eco-profilen er fokuseret på så lavt energiforbrug som muligt. Det sker ved at sænke accelerationen og regenerere så meget energi tilbage til batteriet som muligt.
- Standardprofilen er indstillet til at have maksimal acceleration, hastighed og motorbremse. Det betyder, at rækkevidden er reduceret.
- Den personlige profil kan ændres i indstillingsmenuen.



Indikator for energiflow (B)

Skalaen angiver, om der føres energi ud af eller ind i batteriet. Ved for eksempel motorbremsning fungerer motoren som en generator, der oplader batteriet.

Speedometer (C)

Symbolet viser den aktuelle hastighed med analog skala og digital visning.

Indstillinger (D)

Når du trykker på knappen, kommer du til indstillingsmenuen. Fra denne menu kan du gå videre og ændre din personlige køreprofil og enhedsgrænsefladen samt få mere information om Infinity.


Et tryk på den respektive knap fører dig videre til menuen, hvor du kan se og ændre indstillingerne.



Personlig køreprofil

I menuen Personlig køreprofil kan du se aktuelle valg af maksimal hastighed, acceleration og motorbremse.

Tryk på knappen for den parameter, du vil ændre.

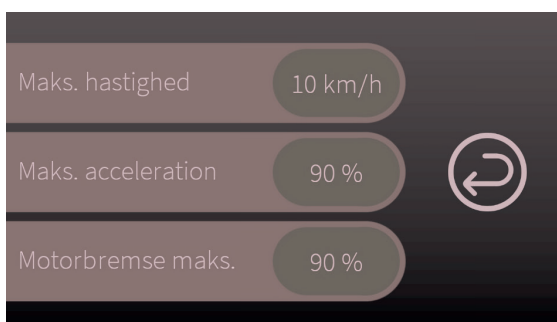

Maksimal hastighed

Tryk pil op for at øge eller pil ned for at reducere den maksimale hastighed i din personlige køreprofil.


Tryk på  for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Personlig køreprofil.



Acceleration

Tryk pil op for at øge eller pil ned for at reducere den maksimale acceleration i din personlige køreprofil.


Tryk på  for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Personlig køreprofil.

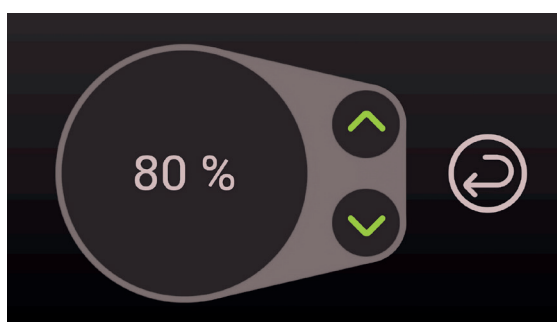

Motorbremse

Tryk pil op for at øge eller pil ned for at reducere effekten af motorbremsning i din personlige køreprofil.

Tryk på  for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Personlig køreprofil.

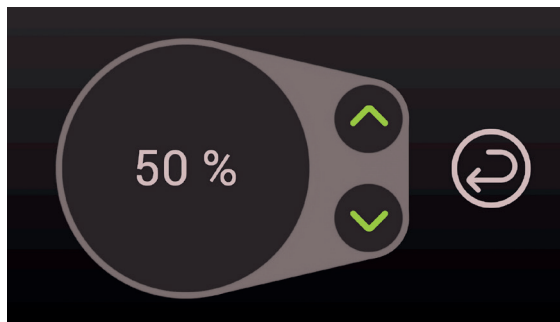

Indstillinger for enhed

Her kan du indstille skærmens lysstyrke og vælge sprog.

I indstillinger kan der også vælges et tema.



Indstilling for lysstyrke

Tryk pil op for at øge eller pil ned for at reducere panelets lysstyrke.


Tryk på  for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Indstillinger for enhed.



Valg af sprog

Tryk pil op eller ned for at vælge sproget.

Tryk på  for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Indstillinger for enhed.

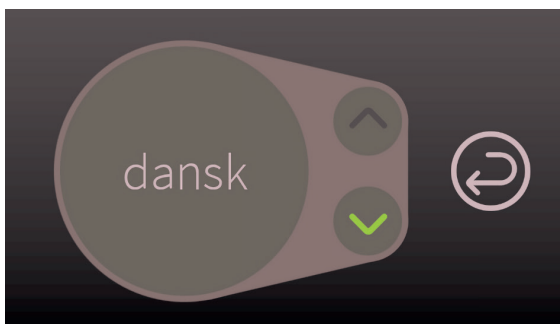


Tema

Det er muligt at vælge mellem to forskellige temaer, Standard og City. Begge temaer giver mulighed for valg af kontrastindstilling, der passer til personer med farveblindhed. Under temaet Standard er der mulighed for forskellige farvevalg.



Tryk pil op eller pil ned for at vælge temaet.

Tryk på  for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Indstillinger for enhed.

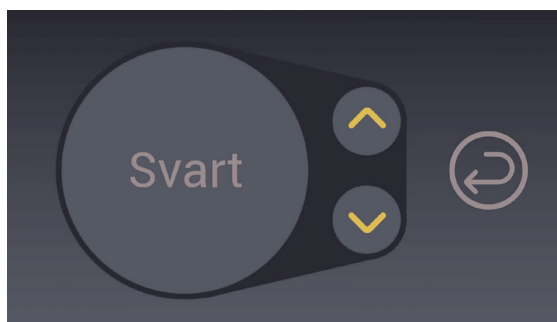

Oplysninger om enhed

Viser feltet med information og status for Infinity. Fra denne menu kan serviceteknikere og fabrikken også gå videre til de indstillinger, som kun de har adgang til.

Tryk på  for at vende tilbage til menuen Indstillinger.



Belysning (E)

Med knappen tænder og slukker du belysningen på Infinity. Begge for- og baglygter tændes og slukkes på samme tid. Knappen er blå, når lyset er tændt.

Retningsvisning (F)

Symbolet viser køreretningen.

Tema Standard:


Pil frem viser kørsel fremad.

Pil tilbage viser kørsel baglæns.

Tema City:

Gråt symbol viser kørsel fremad.

Grønt symbol viser kørsel baglæns

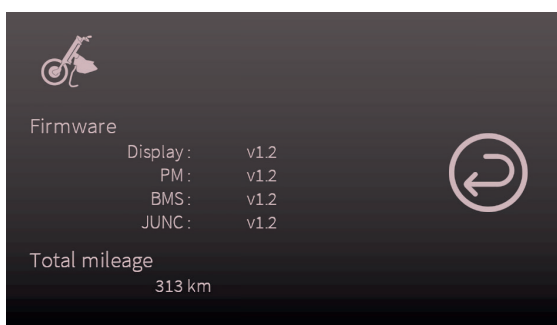

Triptæller (G)

Triptælleren viser det samlede tal for kørte kilometer. Du nulstiller ved at trykke på triptællerens cifre.

Indikator for batteri (H)

Symbolet viser det aktuelle batteriniveau. Når batteriindikatoren kun har én bjælke, er der 5 km kørsel tilbage.



ADVARSEL!

Kontroller den resterende batterikapacitet, før du krydser en gade eller vej. Hvis den resterende batterikapacitet er lav, kan Infinity risikere at stoppe midt i det hele.

Låseindikator (I)

Symbolet angiver, at Infinity er låst fast til kørestolens adapterbjælke.

Tema Standard: Tre sammenkædede lænker  viser, at Infinity er korrekt forankret til adapterbjælken på kørestolen og låst med låsehåndtaget. To ikke-sammenkoblede lænker  angiver, at Infinity ikke er korrekt forankret til adapterbjælken.

Tema City: Grønt symbol angiver, at Infinity er korrekt forankret til kørestolens adapterbjælke og låst med låsehåndtaget. Hvidt symbol angiver, at Infinity ikke er korrekt tilsluttet adapterbjælken.

Du kan ikke køre, uden at Infinity er korrekt koblet på din kørestol.


Mekaniske indstillinger

Indstilling af styret og styrstamme på Infinity

Styr og styrstamme på Infinity kan justeres. Ved at justere styrstammen kan højden og vinklen på styret ændres.

Højdeindstilling

1. Løsn skruen, som holder styrstammen fast, med en 6 mm unbrakonøgle.
2. Flyt styrstammen til den ønskede højde.
3. Stram skruen for at holde styrstammen på plads.

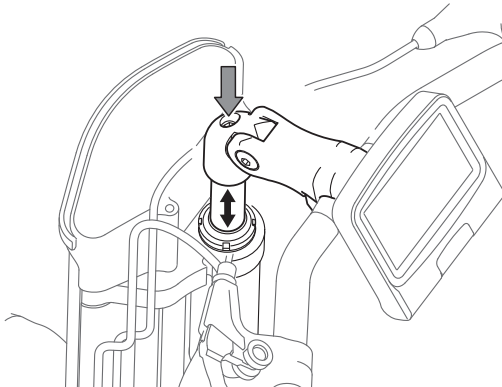


ADVARSEL!

Det er ekstremt vigtigt, at alle skruer strammes korrekt efter indstilling.

Vinkelindstilling

1. Løsn den øverste skrue, der låser vinkelindstillingen, med en 5 mm unbrakonøgle. Hold om nødvendigt imod med en 5 mm unbrakonøgle på den modsatte side.
2. Løsn derefter den nederste skrue, der låser vinkelindstillingen, med en 5 mm unbrakonøgle.
3. Juster styrstammens vinkel.
4. Stram alle skruer for at holde styret på plads.

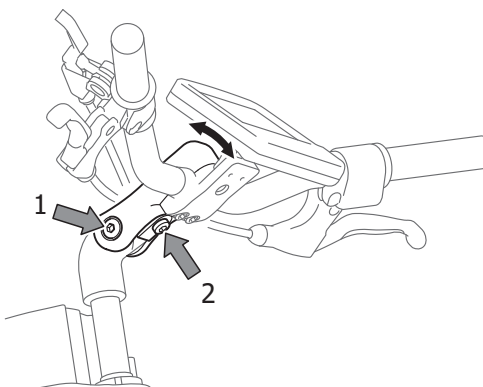


ADVARSEL!

Det er ekstremt vigtigt, at alle skruer strammes korrekt efter indstilling.

Indstilling af styr

1. Løsn de tre skruer, der låser styret fast på styrstammen, med en 5 mm unbrakonøgle.
2. Drej styret til den ønskede position.
3. Stram alle skruer for at holde styret på plads.

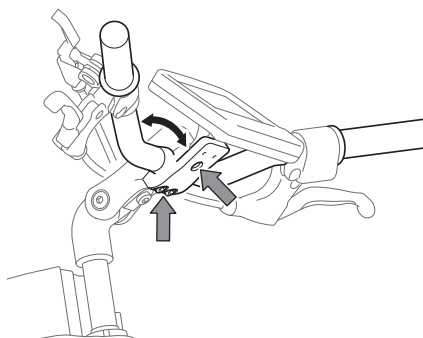

ADVARSEL!

Det er ekstremt vigtigt, at alle skruer strammes korrekt efter indstilling.

Brug af Infinity

Det kræves, at din kørestol er udstyret med Decon Infinity adapterbjælken for at koble Infinity på kørestolen. Installation af adapterbjælken skal udføres af kvalificerede teknikere.



ADVARSEL!

Brugeren skal have læst og forstået vejledningen og have en forståelse af de forskellige håndtag og brugergrænseflader, som Infinity er udstyret med.



ADVARSEL!

Vær forsigtig, når du kobler Infinity på kørestolen og løfter styrehjulene fra jorden, se del 4 af "Sådan kobles Infinity på din kørestol" på side 27, da fødderne kan risikere at blive fanget mellem fodbuen/fodstøtten på kørestolen og Infinity. Du kan risikere skade på fødder og tæer.




ADVARSEL!


Placer ikke fingre eller hænder under låsehåndtaget, når du folder det ned, se del 5 af "Sådan kobles Infinity på din kørestol" på side 27. Hvis du gør det, kan du risikere at klemme din finger/dine fingre eller hele hånden.

Sådan kobles Infinity på din kørestol

1. Stil Infinity og kørestolen op, så dockingmekanismen på Infinity (F, G) er midt ud for dockingmekanismen på kørestolens adapterbjælke. Kør kørestolen imod, indtil adapterbjælken på kørestolen er i kontakt med dockinggen på Infinity.

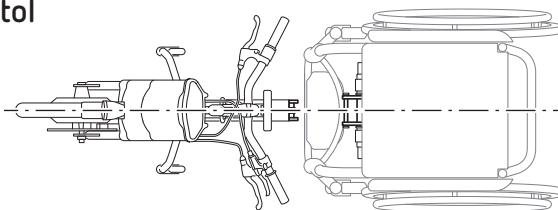


2. Tag fat i styret på Infinity, og træk den skråt nedad for at komme under adapterbjælken. Når den øverste docking har passeret under adapterbjælken, kan Infinity skubbes lidt opad, indtil du kan mærke, at den øverste docking (F) er tilsluttet adapterbjælken. I denne position hviler den øverste docking kun mod adapterbjælken, de er endnu ikke koblet sammen.

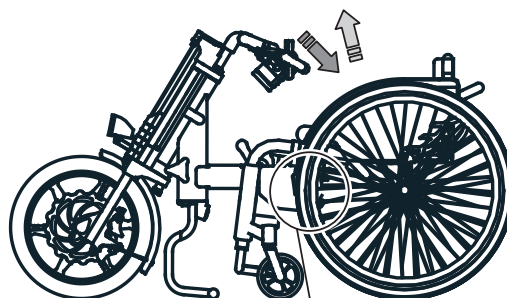

3. Kontroller, at Infinity er koblet på kørestolen ved at trykke Infinity let fra kørestolen ved hjælp af styret.




- Tryk styret på Infinity skråt opad, mens du læner dig lidt bagover, for at løfte kørestolens styrehjul op fra jorden og låse Infinity mod den nederste docking (G). Når Infinity er tilsluttet den nederste docking, høres en kliklyd.

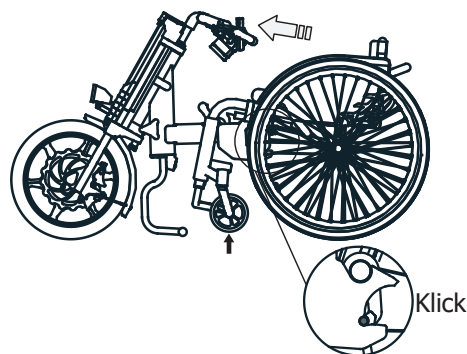


- Tryk først låsehåndtaget (D) frem for at frigøre det. Skub det derefter bagud for at låse Infinity mod adapterbjælken. Støttebenene (J) løftes nu op.

Nu er Infinity klar til at køre.

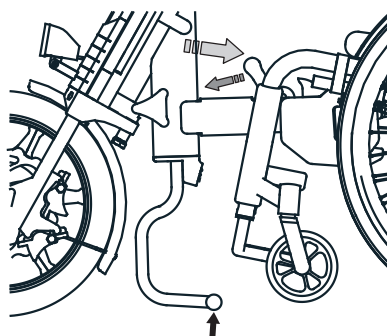


Sådan frakobles Infinity


- Sluk for Infinity med hovedafbryderen (R).
- Sænk låsehåndtaget (D), indtil der høres et **klik**. OBS! Hvis låsehåndtaget skubbes for langt, låses det ikke i sænket position. Støttebenene er nu foldet ned, men når ikke jorden.
- Fold udløserhåndtaget (E) op i åben position for at forberede frigørelse.

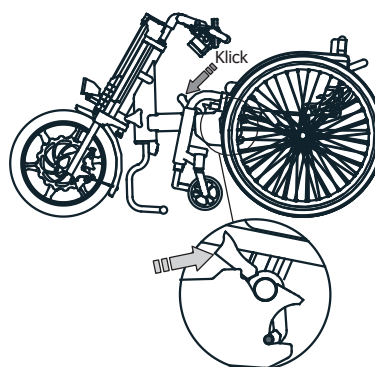

- Tryk nu styret fremad, mens du læner dig bagover, for at låse den nederste docking (G) op. Når den nederste docking er låst op, høres et klik. Slip nu kørestolens styrehjul ned på jorden.

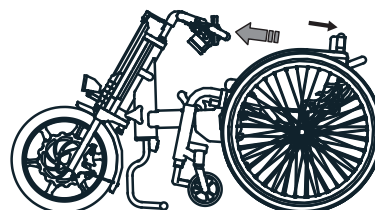

- For at frigøre Infinity helt fra kørestolen skal du trække Infinity skråt ind mod dig og derefter trykke skråt nedad, fremad.

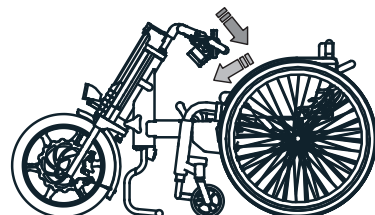

Sådan fjernes og fastgøres adapterbjælken

For at folde en krydsrammekørestol skal du fjerne adapterbjælken.




1. Fjern de QR-stifter, der holder adapterbjælken på plads i holderne.
2. Fjern adapterbjælken fra dens holdere.

Genmontering sker i omvendt rækkefølge



ADVARSEL!

Sørg for, at adapterbjælken er korrekt fastgjort med QR-stifterne.

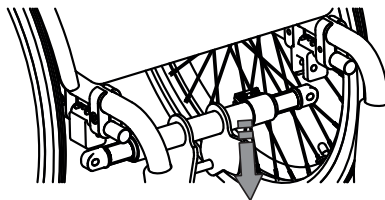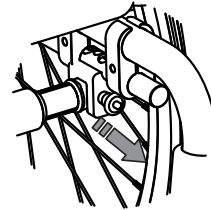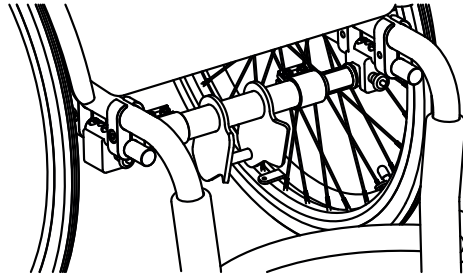

Sådan køres med Infinity



ADVARSEL!

Brugeren skal have læst og forstået vejledningen og have en forståelse af de forskellige håndtag og brugergrænseflader, som Infinity er udstyret med.




ADVARSEL!

Foretag ikke voldsomme sving ved høj hastighed. Det kan ske, at Infinity og kørestolen vælter.

For at køre Infinity skal du først koble Infinity på kørestolen i henhold til afsnittet "Sådan kobles Infinity på din kørestol"

1. Tryk ind på hovedafbryderen, der er placeret under displayet. Lyset i hovedafbryderen blinker ved opstart. Når lampen lyser konstant, er Infinity klar til kørsel.
2. Ved fremadgående kørsel bruges gashåndtaget. Ved bakning bruges den bak-knap, der er placeret ved siden af gashåndtaget.
3. Drej gashåndtaget for at køre og for at styre hastigheden.

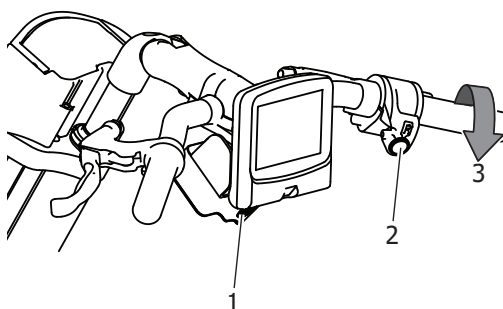

Hastigheden styres primært ved hjælp af gashåndtaget.



ADVARSEL!

Når du kører på en stejl skråning, kan det være nødvendigt at begrænse hastigheden ved hjælp af bremsene. Motorbremsen hjælper kun i et vist omfang.

Teknikker til kørsel over forhindringer og op ad bakke

Forcering af forhindringer

Ved forcering af forhindringer kan det være svært at bevare hjulets kontakt med forhindringen. For den bedste forcering af forhindringer anbefales det at holde ca. 0,5 m foran forhindringen og sætte farten op, inden man når forhindringen, der skal passeres (f.eks. kantsten, vejkant osv.)

Kørsel op ad bakke

Når du kører op ad en stejl bakke (mere end 4-5 graders hældning), anbefales det at flytte tyngdepunktet så langt frem som muligt ved at vippe overkroppen fremad og om muligt bevæge sig længere frem på kørestolens sæde. Når du flytter tyngdepunktet fremad, får Infinity bedre vejgreb med dækket.

En anden alternativ køreteknik, hvis forhold og omgivelser tillader det, er at køre i zigzag op ad bakken.

Parkeringsbremse

Infinity kan udstyres med en parkeringsbremse. Med parkeringsbremsen er det muligt at få Infinity til at holde helt stille på plant underlag. Ved parkering på skrånende overflader skal parkeringsbremsen kombineres med kørestolsbremserne for at sikre, at Infinity og kørestolen ikke begynder at rulle.



INFO

Brug parkeringsbremsen, når du er stoppet ved f.eks. et trafiklys eller en fodgængerovergang.

Sådan flyttes Infinity, mens den er koblet til en kørestol

Hvis du vil flytte Infinity, når den er koblet til en kørestol, skal du slukke for hovedafbrydere. Drivhjulet vil derefter køre på frihjul og kan rulle uden at blive drevet.



ADVARSEL!

Kør aldrig Infinity uden at sidde i din kørestol.

Transport af Infinity

**ADVARSEL!**

Brug stropper for at sikre, at Infinity kan transporteres sikkert.

**ADVARSEL!**

Infinity må aldrig transporteres koblet på kørestolen. I køretøjer, hvor kørestolen anvendes som sæde, skal Infinity kobles fra kørestolen og anbringes i bagagerummet eller tilsvarende og spændes fast.

**FORSIGTIG!**

Placer Infinity, så ingen dele beskadiges under transporten.

Læs Infinity ind i en bil

1. Sluk for strømmen til Infinity.
2. Fjern batteriet fra Infinity for at forhindre, at strømmen pludselig tændes under opbevaring eller transport. Sørg for at sætte beskyttelseslåget på det fjernede batteri.

**ADVARSEL!**

Opbevar altid det frakoblede batteri med beskyttelseslåget på. Eksponerede kontakter kan forårsage en kortslutning og føre til brand eller få batteriet til at revne.

3. Læs Infinity ind i bilen

- a. Løft Infinity ved at holde i styrstammen og forhjulet ved pålæsning.
- b. Pas på ikke at beskadige displayet ved pålæsning.

4. Fastgør Infinity.

- a. Fastgør Infinity for at forhindre den i at bevæge sig under transporten og ramme omkringliggende objekter.

Tip til læsning

- Produktet indeholder følsomme elektroniske dele. Produktet må ikke udsættes for kraftige, målrettede stød eller slag.
- Læs Infinity i så oprejst position som muligt.
- Hvis du lægger Infinity, mens den ligger ned, skal du sørge for, at displayet ikke kan beskadiges, før du sikrer lasten.

Tip til sikring af last

- Sørg for at sikre Infinity med stropper, og placer støddabsorberende materialer under og omkring Infinity.

Ombordstigning på fly

Når du bestiller en flyrejse, skal du altid på forhånd informere flyselskabet om, at du skal medbringe en elektrisk drivenhed til en kørestol og følge deres instruktioner. Giv flyselskabet detaljerede oplysninger om dette på tidspunktet for reservationen. Under flyvning kan standardbatteriet ikke bruges, men der skal anvendes et Travelpack-batteri med lavere kapacitet med følgende specifikationer:

Betegnelse:	Batteri Travelpack Infinity
Varenummer:	LBM1002
Spænding:	48 V
Kapacitet:	6 Ah (288 Wh)
Type:	Tørcelle med indbygget mikrocomputer

Det kan være forbudt at medbringe lithium-ion-batteriet om bord og også at tjekke det ind som håndbagage. Rådfør dig altid med flyselskabet på forhånd.

Opbevaring af Infinity

1. Sluk for strømmen, og fjern batteriet
2. Opbevar Infinity på et sted med normal indendørs temperatur og lav luftfugtighed.
3. Hvis du vil tørre snavs eller pletter af før opbevaring, skal du bruge en hårdt opvredet klud.

Hvis Infinity ikke skal bruges i lang tid, skal batteriet efterlades i maskinen, men med strømmen slukket. Kontroller hver måned, at Infinity fungerer korrekt.

Efter opbevaring af Infinity skal følgende kontrolleres og udføres, før den tages i brug:

- Genaktiver batteriet ved at tilslutte opladeren
- Batteristatus, oplad efter behov
- Bremsefunktion, kontroller, at den virker og ikke er i kontakt med bremseskiven.

Batteri og oplader

Omgivende temperaturer for batteriet

Ved anvendelse på Infinity	-15 °C - 40 °C
Ved opbevaring, afmonteret fra Infinity	10 °C - 25 °C
Ved opladning	5 °C - 30 °C

Opladning af batteri til Infinity kan foretages enten med batteriet i batteriholderen på Infinity eller i fordybningen.

Når batteriet oplades i batteriholderen, skal du tilslutte opladerens magnetforsynede stik til stikket på siden af tilslutningsboksen under displayet.

Når batteriet er afmonteret, skal du bruge den tilpassede adapter sammen med opladeren.



ADVARSEL!

Pas på ikke at klemme fingrene, når du indsætter eller fjerner batteriet.

Infinity-opladeren er udstyret med en lampe, der viser opladningsstatus. Når opladeren er tilsluttet stikkontakten, og lampen lyser grønt, kan opladeren tilsluttes opladningsstikket. Når opladeren er tilsluttet opladningsstikket, og batteriet oplades, lyser opladeren rødt.

Når batteriet er fuldt opladet, bliver lyset grønt. Det kan tage op til 5 timer at oplade op til fuld kapacitet på et fuldt afladet batteri.

Oplad batteriet i Infinity


1. Sæt opladeren i en stikkontakt.
2. Sørg for, at lyset på opladeren er grønt.
3. Tilslut det magnetforsynede stik til opladningsstikket ved displayet.



INFO


Sørg for, at lyset på opladeren lyser rødt. Dette angiver, at opladningen er i gang.

4. Når opladningen er færdig, skal du frakoble opladeren fra Infinity og fra stikkontakten.

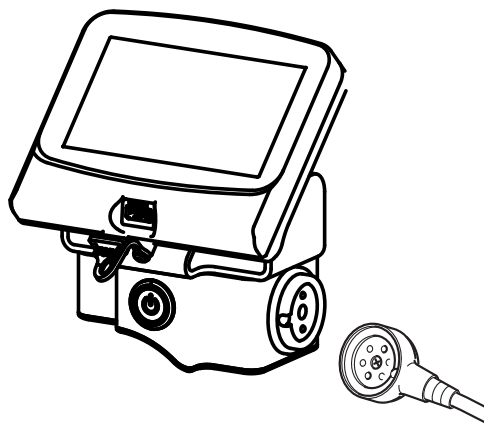


Oplad batteriet, når det er taget ud af Infinity

1. Fold håndtaget op, og løft batteriet ud af holderen.

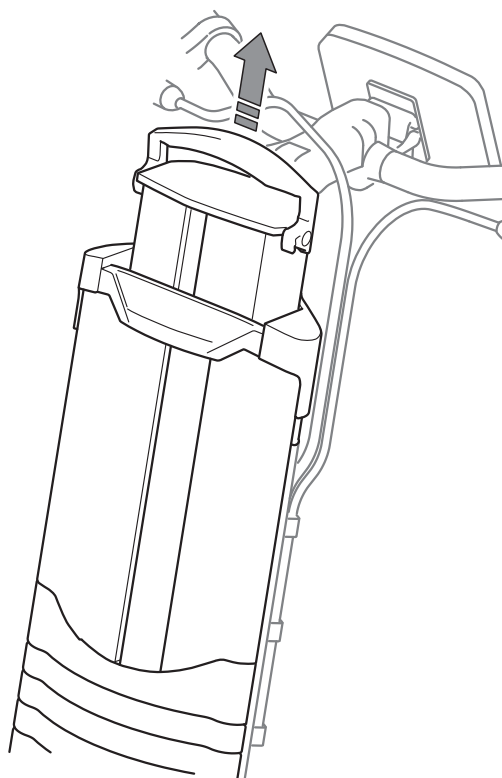

2. Tilslut adapteren til batteristikket.
3. Sæt opladeren i en stikkontakt.
4. Sørg for, at lyset på opladeren er grønt.
5. Tilslut det magnetforsynede stik til opladningsstikket på opladningsadapteren.

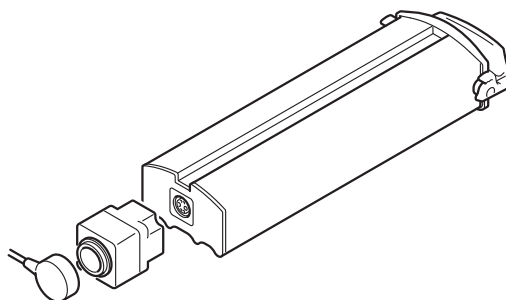

INFO

Sørg for, at lyset på opladeren lyser rødt. Dette angiver, at opladningen er i gang.

6. Når opladningen er færdig, skal du frakoble opladeren fra opladningsadapteren og stikkontakten.
7. Frakobl opladeren fra batteristikket, og sæt batteriet tilbage i holderen på Infinity. Sænk håndtaget, så batteriet låses sikkert fast.

Opbevaring af batteri

Opbevar batterierne på et køligt og tørt sted (et sted med en temperatur på mellem 10 og 25 °C er optimalt til opbevaring). Hvis du planlægger ikke at bruge Infinity i længere tid (en måned eller længere), skal du oplade batteriet, indtil der vises tre bjælker på displayet, før du opbevarer det. **Hvis batteriet ikke er i brug i lang tid, går det automatisk i opbevaringstilstand, hvis spændingsniveauet i batteriet ikke er for højt. Hvis batteriet er gået i opbevaringstilstand, skal det genaktiveres ved at sætte det til opladning.** Kontroller hver 3. måned, at spændingen i batteriet ikke er faldet til for lavt et niveau. Hvis der vises en eller ingen batteribjælke, skal du oplade batteriet, til der vises 3-4 bjælker for opladning.

Pleje

Rengøring

Hvis Infinity bliver snavset på grund af normal brug, skal du rengøre den med en fugtig og hårdt opvredet klud. Hvis Infinity er meget snavset, skal du bruge en klud og et neutralt rengøringsmiddel. Sørg for, at der ikke er noget rengøringsmiddel tilbage på Infinity efter rengøring.

! FORSIGTIG!

Skyl aldrig Infinity med vandslange eller højtryksrensere. Brug ikke damprensere til at rengøre Infinity. De elektroniske enheder kan blive beskadiget, hvilket kan føre til alvorlige funktionsfejl.

! FORSIGTIG!

Rengør ikke med opløsningsmidler som benzin eller fortynder. Dette kan beskadige maling og plastdele på Infinity



INFO

Infinity kan desinficeres korrekt ved hjælp af en klud med alkohol.

Korrosion

De Infinity-dele, der kan blive udsat for korrosion, er fremstillet af aluminium, rustfrit stål eller stål. Materialerne og overgangene mellem materialerne er overfladebehandlet, og derfor er der ingen øget risiko for korrosion. Du bør dog altid tørre våde eller fugtige overflader på Infinity af med en klud efter brug.

Brugervedligeholdelse

Brug en kopi af denne side til at notere, hvornår og af hvem kontrollerne udføres.
Gem protokollen.

Følgende kontrol foretages hver sjette måned efter første anvendelse.

Enhed	Handling	Dato	Kontrollant
Oversigt	Støj, klemte dele		
	Kontrol af låsning mod adapterbjælken på kørestolen		
	Dæklufttryk og slid		
	Huller i drev, skader, farlig skade, skarpe kanter		
	Kontroller stramning af skruer		
	Snavsede tilslutningsstik på batteriet		
	Kabler, visuel kontrol for eventuelle skader		
	Kabler, kontrol af tilslutninger		
Batteri og oplader	Kabler, visuel kontrol for eventuelle skader		
	Kabler, kontrol af tilslutninger		
	Batteri, visuel kontrol for skader		
Bremseser	Bremsestange, visuel kontrol for skader		
	Bremsekive, visuel kontrol for skader		
	Skivebremseklods, visuel kontrol for skader og lækage		
	Skivebremseklods, tilspænding af skruer		
	Bremsehåndtag, visuel kontrol for skader og lækage		
	Bremsehåndtag, tilspænding af skruer		

Reparationer

- Brugeren må ikke reparere eller servicere Infinity selv.
- Brugeren må ikke selv fjerne og sende dele af Infinity til forhandleren til reparation.
- Hvis reparation er påkrævet, skal du kontakte din forhandler, selvom fejlen er af mindre alvorlig karakter.
- Hvis dele er beskadiget eller mangler, skal du straks kontakte forhandleren. Returner Infinity til forhandleren for at få udskiftet eller repareret dele.
- Kontakt altid forhandleren for normal vedligeholdelse, reparation eller service. Hvis Infinity ikke repareres, eller ikke alle dele bruges under monteringen, kan brugeren, personer i omgivelserne eller ejendom blive beskadiget.
- Ved reparationer og service benytter forhandleren sig af servicemanualen, reservedelskataloget og anden dokumentation. Denne dokumentation er ikke tilgængelig for brugeren og offentligheden.

Punktering



INFO

Dækket på Infinity har samme struktur som et cykeldæk. Derfor kan et cykelværksted som regel reparere et fladt dæk og udskifte dækkene på Infinity. Hvis du ikke har adgang til et cykelværksted, skal du kontakte din forhandler.

Fejlfinding

Beskrivelser af fejl

Brug nedenstående tabel til fejlfinding, før du kontakter forhandleren.

Status	Lampe i hovedafbryder	Baglygte	Lyd-signal	Kontrolpunkt	Handling
Displayet på Infinity starter ikke, når hovedafbryderen tændes.	Serie	–	Nej	Sørg for, at batteriet er opladet	Oplad batteriet
	Serie	–	Nej	Er batteriet korrekt installeret?	Kontroller, at batteriet er korrekt installeret
	Serie	–	Nej	Elektrisk kobling/kontakt/kabel mellem front og elektrisk boks under display	Tryk koblingen sammen med pilene vendt mod hinanden
	Blinker én gang	Blinker én gang	Nej	Sørg for, at kablerne er forsvarligt fastgjort til bagsiden af displayet	Installer kablet korrekt på bagsiden af displayet.
Reagerer ikke på gashåndtag	Konstant lys	–	Nej	Er støttebenet hævet, og låsehåndtaget i bagposition?	Bevæg låsehåndtaget til bagpositionen.
	Konstant lys	–	Nej	Ingen indikation på displayet om, at Infinity er låst fast til stolen?	Bevæg låsehåndtaget til bagpositionen.
	Konstant lys	–	Nej	Ingen indikation på displayet af, at Infinity er låst fast til stolen, selvom låsehåndtaget er i bagposition.	Sørg for, at intet forhindrer støttebenet i at gå op til sin øverste position.
	Konstant lys	–	Nej	Sørg for, at kablet fra gashåndtaget er forsvarligt fastgjort til bagsiden af displayet.	Installer kablet korrekt på bagsiden af displayet
	Konstant lys	–	Nej	Sørg for, at kontakten mellem motoren og strømmodulet er sammenkoblet.	Tilslut stikket mellem motoren og strømmodulet.
Infinity kan ikke dockes mod stolens adapter	–	–	–	Ujævnt underlag	Flyt Infinity og kørestol til mere jævnt underlag
	–	–	–	Højdeindstillingen for Infinity er ændret	Indstil højde og benstøtte på Infinity, så de passer til den aktuelle adapter, der bruges til sammenkobling med kørestolen.
	–	–	–	Den nederste dockingmekanisme er blevet skubbet ind i sin låste position	Træk i udløserhåndtaget for at låse den nederste dockingmekanisme op.

Fejlkoder

Fejlkode	Forklaring af fejl	Handling
C6CB N:01	Kommunikationsfejl for strømmodul	Kontroller kablet mellem strømmodulet og displayet. Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
C6CB N:02	Kommunikationsfejl for BMS/batteri	Kontroller, at batteriet er sat korrekt i maskinen. Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
C6CB N:03	Kommunikationsfejl for tilslutningsboks/ forgreningsdåse	Kontroller kablet mellem forsiden og den tilslutningsboks, der vises. Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
ABBE N:01	Overstrømsbeskyttelse 1 strømmodul	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
ABBE N:02	Overstrømsbeskyttelse 2 for strømmodul	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
ABBE N:03	Overstrømsbeskyttelse for strømmodul	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
ABBE N:04	Generel fejlovervågning udløst	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
ABBE N:05	Kommunikationsfejl	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
ABBE N:06	Strømmodul overophedet	Sluk Infinity, og vent 5 minutter Start Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
ABBE N:07	Hallgiverfejl	Sørg for, at stikket mellem motoren og strømmodulet er korrekt tilsluttet Start Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
ABBE N:08	Kortslutning af motorens faser	Sørg for, at stikket mellem motoren og strømmodulet er korrekt tilsluttet, og at kablet ikke er beskadiget Start Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
2090 N:01	Fejl i kommunikationsdata	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
2090 N:02	Kommunikationsfejl	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
7F42 N:01	Fejl i kommunikationsdata	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
7F42 N:02	Fejl i kommunikationsdata	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
7F42 N:03	Fejl i kommunikationsdata	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
7F42 N:04	Fejl i kommunikationsdata	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
2DF1 N:01	Batteriet er ikke klar	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
2DF1 N:02	Kommunikationen med batteriet gik tabt	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

Fejlkode	Forklaring af fejl	Handling
2DF1 N:03	Batteriet er varmt, motorbremse og opladning afbrydes	Hvis det er muligt, skal du flytte batteriet til et køligere sted. Vent 10 minutter. Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
2DF1 N:04	Batteriet koldt, motorbremsen og opladningen afbrydes	Hvis det er muligt, skal du flytte batteriet til et varmere sted. Vent 30 minutter. Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
2DF1 N:05	Overstrømsbeskyttelse for BMS/batteri	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
2DF1 N:06	Kortslutning for BMS/batteri	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
2DF1 N:07	Overspændingsbeskyttelse for BMS/batteri	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
2DF1 N:08	Beskyttelse mod underspænding for BMS/batteri	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
2DF1 N:09	Forhåndsopladning af BMS/batteri mislykkedes	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
2DF1 N:10	Batteriet er for varmt, alle funktioner slukkes	Flyt batteriet til et køligere sted. Vent 30 minutter. Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
2DF1 N:11	Batteriet er for varmt, alle funktioner slukkes	Flyt batteriet til et varmere sted. Vent 60 minutter. Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
2DF1 N:12	Batteriet er ubalanceret	Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
1337 N:01	Kortslutning af gashåndtag	Kontroller kablerne til gashåndtaget Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
1337 N:02	Afkoblingsfejl for gashåndtag	Kontroller kablerne til gashåndtaget Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
1337 N:03	Afkoblingsfejl for gashåndtag	Kontroller kablerne til gashåndtaget Genstart Infinity på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

Decon Wheel AB

Södra Ekeryd 119, 314 91 Hyltebruk

Tlf.: +46 (0)345 40880

Fax: +46 (0)345 40895

E-mail: info@decon.se

