



Monteringsanvisning

ADV5X02DSK, ADV5X03DSK, ADV5X04DSK,
ADV5X05DSK, ADV5X06DSK, ADV5X07DSK,
ADV5X15DSK, ADV5X18DSK

Adventus DSK Kryssraminfästning
Universal

1. Säkerhet och föreskrifter

Symboler



WARNING!

Risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till skador på operatören eller andra personer.



FÖRSIKTIGHET!

Risk för materiella skador.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till materiella skador.



INFO

Extra viktig eller förklarande information.

Allmänna föreskrifter

Denna monteringsanvisning skall alltid följas vid montering av adaptersats ADV5 DSK Adventus Kryssramsinfästning Universal.

Inställning av Adventus-hjulet tillsammans med den kompletta kryssramsinfästningen visas i brukarmanualen för Adventus hjulet.


Varningar



WARNING!

Monteringsarbeten och ändringsarbeten som beskrivs i detta dokument får endast utföras av utbildad servicetekniker, återförsäljare eller annan av Decon Wheel utsedd representant.

2. Översikt

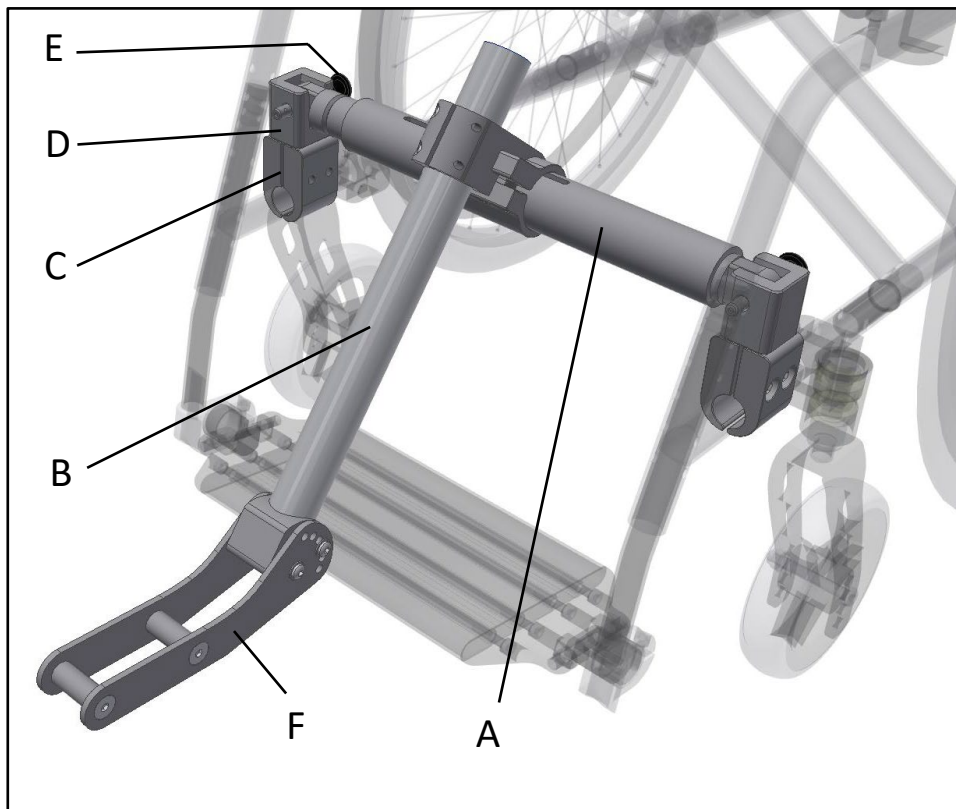

- A Adapterbalk
- B Adapterbalk gaffel
- C Klamma
- D Hållare
- E QR Axel adapterbalk
- F Gaffel

INFO

Utformningen av Adapterkit varierar beroende på ramstorlek samt rullstolsmodell och kanske inte stämmer överens med bilden ovan. Denna monteringsanvisning visar en generell montering på rullstolar med runda rör där infästning av Adapterkit sker i rullstolens nedre ramrör.




INFO

Adapterkit kan också, beroende på rullstolens utformning, monteras i det övre ramröret under rullstolens sits. Principen för en sådan montering är densamma som det som beskrivs i följande kapitel.

3. Montering adapterkit

Börja med att montera klamma (C) och hållare (D) på rullstolens nedre ramrör med hjälp av dem medföljande skruvarna. Montera klämmorna (C) löst så att dessa fortfarande kan flyttas i längdled.

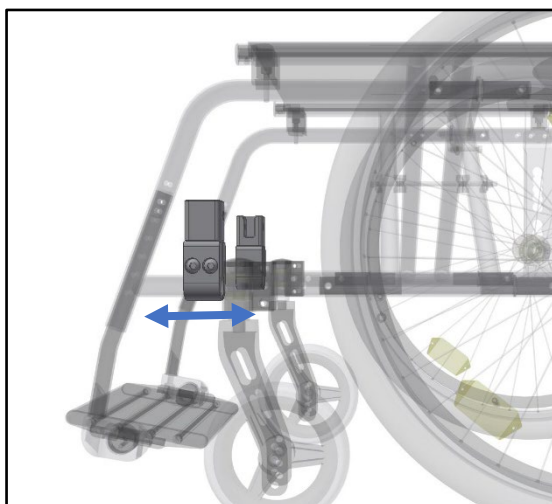


Klämmorna (C) samt hållarna (D) skall monteras vertikalt.





Om möjligt, placera skruvskallarna mot rullstolens insida för bättre åtkomst.

Montera sedan i adapterbalken (A) och lås den i hållarna med hjälp av QR axlarna (D). Dra nu åt skruvarna som sitter i klämmorna (C).

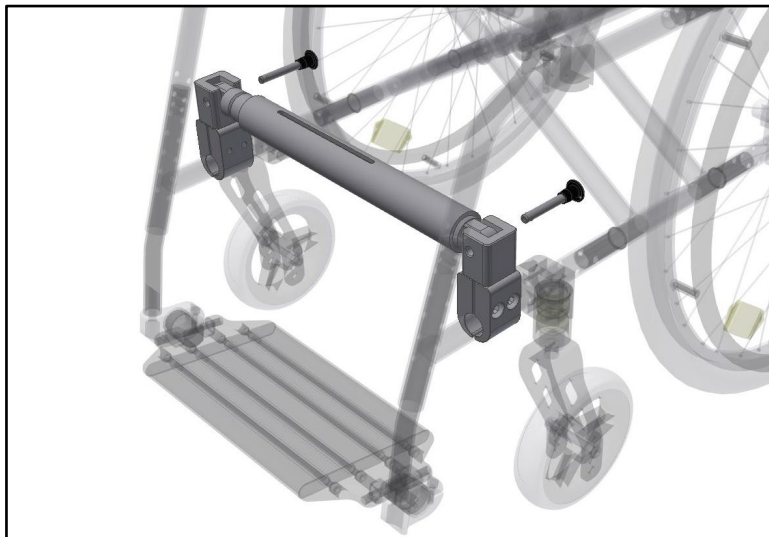

 INFO

QR axlarna kan monteras i hållarna (D) både från fram och baksidan.

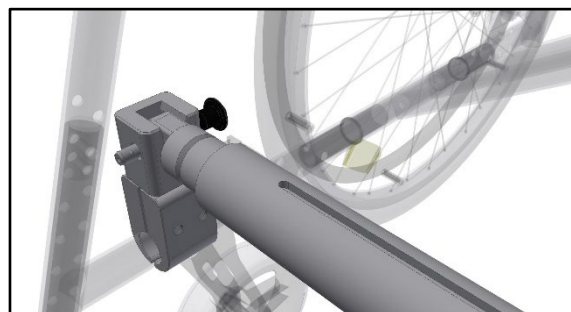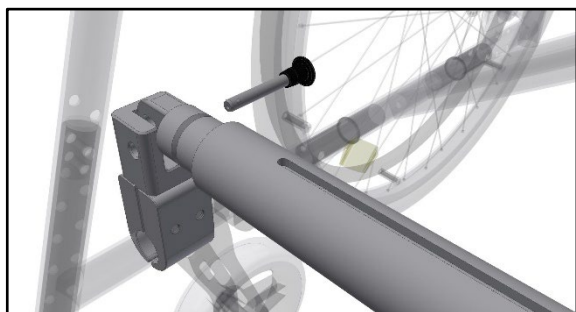

 INFO

Kontrollera efter att skruvarna dragits åt att det fortfarande går att ta loss adapterbalken ur sin hållare och att QR axlarna går att dra ut. Om det går trögt lossa skruvarna till hållaren på ena sidan och finjustera.

 WARNING!


Skruvarna skall dras åt med ett moment om 8-10Nm (M6) alt. minst 15-20Nm (M8). Loctite 243 eller likvärdigt skall appliceras på skruven innan den monteras om inte taggbrickor ingår i klämman som monteras.

4. Inställning av adapterbalken

Montera adapterbalk gaffel (B) på adapterbalken (A)




Kontrollera att adapterbalk gaffel (B) är centrerad. Montera sedan bort skruvarna (G) i gaffeln samt kontrollera att skruvarna (H) är lossade.

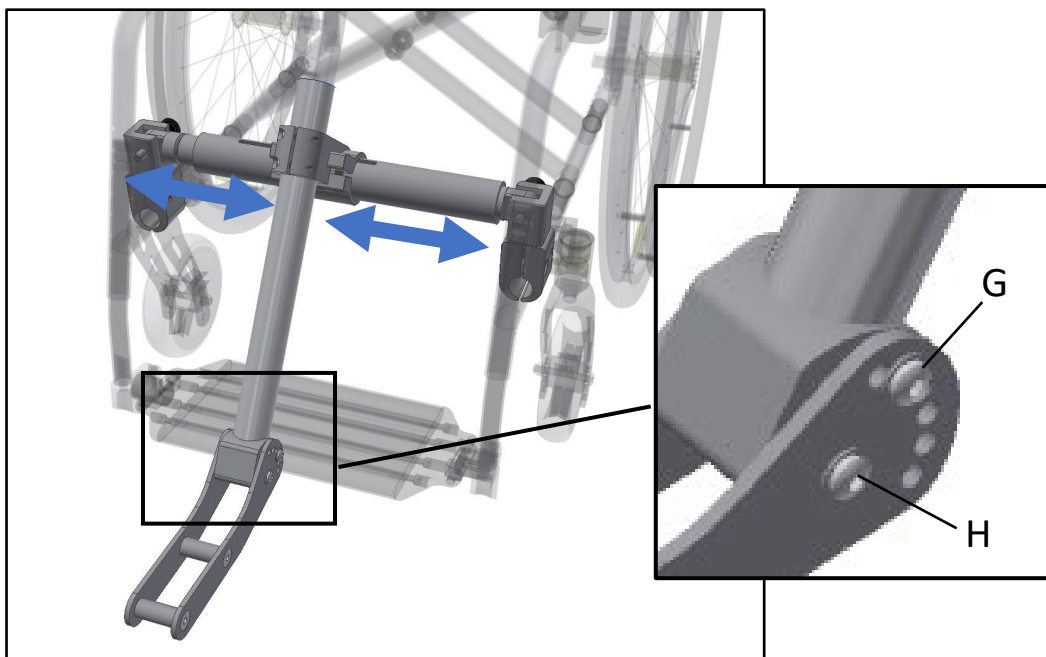


Montera nu det medföljande nivåverktyget på adapterbalkens gaffel. Justera höjden och vinkeln på både adapterbalk gaffel (B) samt gaffeln (F).

Beroende på rullstolens utformning och inställning kan gaffeln hamna antingen över eller under fotplattorna/fotplattan.

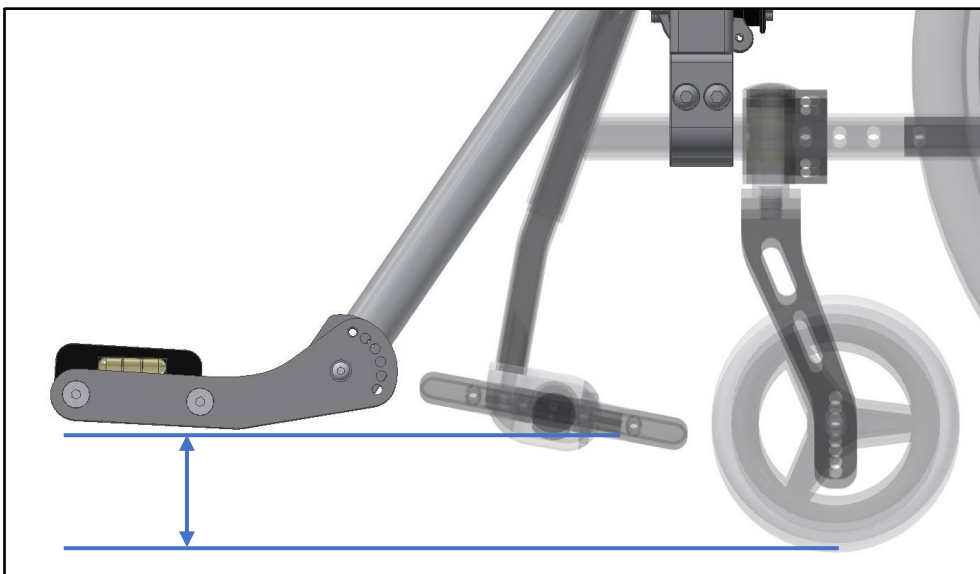


 INFO

Den utstickande delen av gaffelröret kan kapas med bågfil ifall denna kolliderar med rullstolens ram.

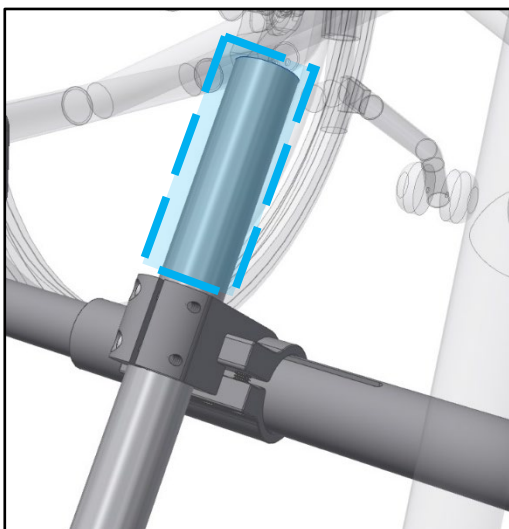


Återmontera skruvarna (G) i adapterbalk gaffel i det utav hålen som passar bäst sett till gällande förhållande. Dra nu åt skruvarna.

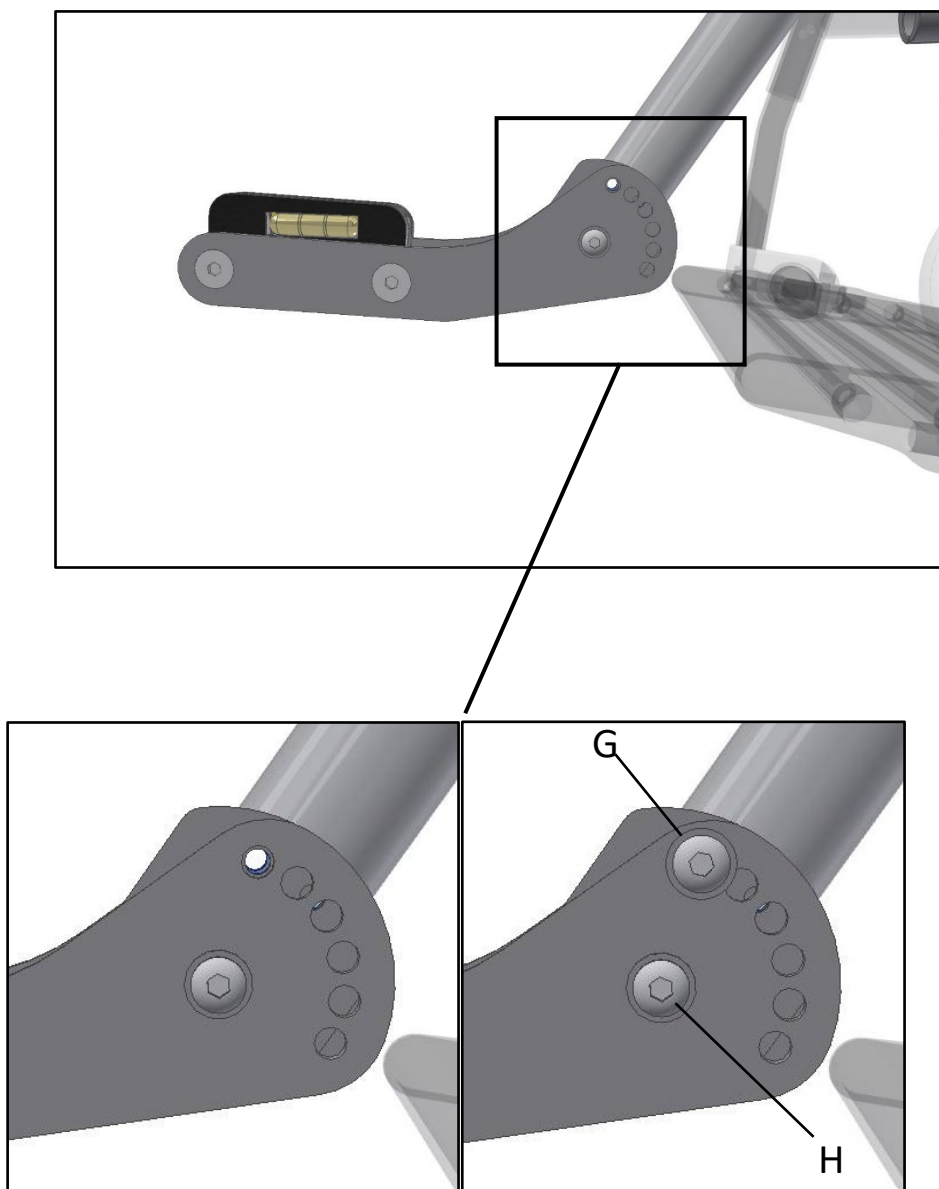

 VARNING!

Skruvarna (G&H) skall dras åt med ett moment om 8-10Nm. Loctite 243 eller likvärdigt skall appliceras på skruven innan den monteras.

Dra nu åt skruvarna som håller fast klamman mot adapterbalken (A) samt dee skruvar som håller fast adapterbalk gaffel (B). **I båda klämmorna skall skruvarna dras åt lite i taget stegvis. Dra åt skruvarna (I) till åtdragningsmoment 30-35Nm uppnås. Dra åt skruvarna (J) till åtdragningsmoment 8-9Nm uppnås.** Kontrollera också i detta steg att adapterbalken fortfarande är centrerad i rullstolens ram samt att vinkeln är korrekt enligt nivåverktyget.

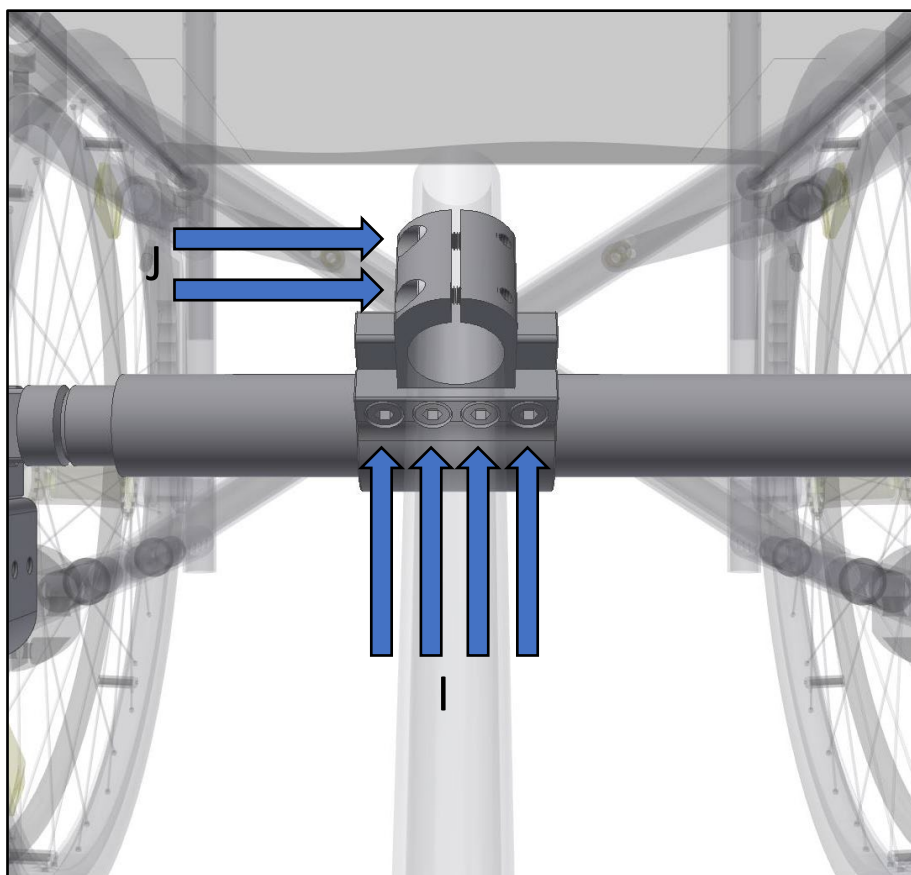

Kontrollera en sista gång att alla skruvar är åtdragna. Se nu brukarmanualen för Adventus för fortsatt installation, denna kan laddas ned från www.decon.se.

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 119, SE-314 93 Hyltebruk, Sweden
Tel: +46 (0)345 40880
Fax: +46 (0)345 40895
E-mail: info@decon.se

