



Monterings anvisning Küschall Compact, Ultra-Light MEM6085P och MEM6086P

1. Demontera hjulen på båda sidorna.

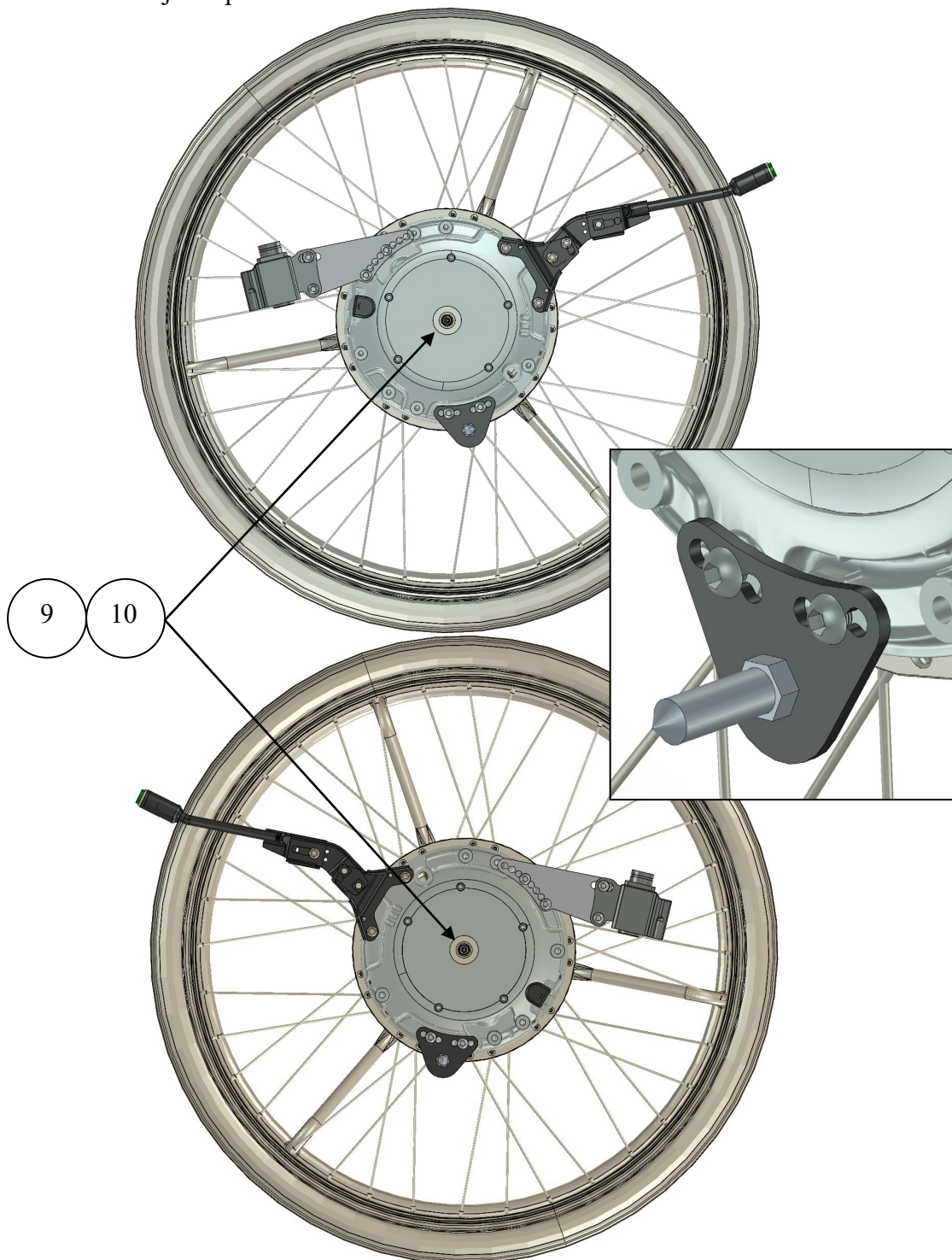

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel Ø12,7 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-C0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.
 - Stopp pinne är monterat med Detalj nummer: 290000, 300001 och XSM8ML.

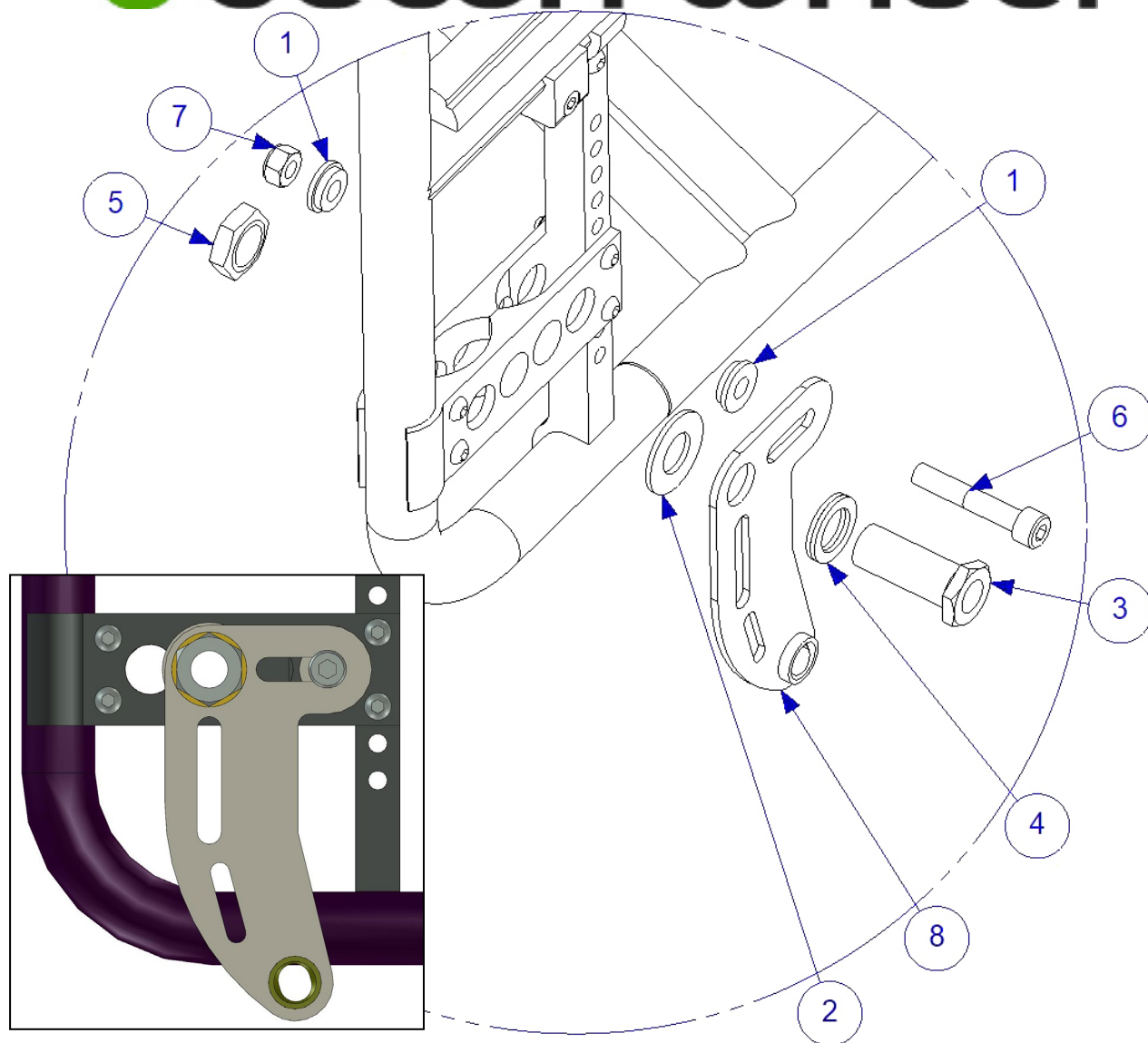

3. Se bilder som visar montering av fästet (höger sida).

Detaljer som ingår för montering av fästet på en sida.

Placering	Art.Nr.	Antal	Beskrivning
1	100 400 007	2	Distans
2	XSM16BR2 A2	1	Planbricka M16 x 2 A2
3	HW069	1	Navhylsa M16x1/12,7
4	405239	1	Nordlock Bricka M16
5	XSM16M	1	Mutter M16X1 Låg
6	XSM8X45	1	Skruv M8 x 45
7	XSM8ML	1	Låsmutter M8
8	310022	1	Fäste
9	XOE-25383-00	1	Distans 12,7
10	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringssats medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.

4. Montera den rygghängda batteri väskan.