

FREELI

Pædiatrisk elektrisk kørestol

Brugsanvisning



Dokumentreference: FRE-002 Version 3.0

ELI INNOVATION

CE | Fremstillet i Frankrig

Indhold

Indhold.....	2
1. Produktidentifikation.....	3
2. Sådan læses denne manual.....	3
3. Velkommen og vigtig sikkerhedsinformation.....	4
4. Opdag FREELI.....	5
5. Specifikationer.....	7
6. Samling.....	8
7. Brug af FREELI hver dag.....	9
8. Justering af sæde, hovedstøtte, armlæn og fodstøtte.....	10
9. Hjul og bremseser.....	13
10. Batteri og opladning.....	14
11. Joysticket.....	15
12. Brug af FREELI i nærheden af andre enheder.....	16
13. Transport.....	17
14. Rengøring og vedligeholdelse.....	18
15. I tilfælde af problemer.....	20
16. Garanti og kontakt.....	21

Produktnavn	FREELI
Type / model	FRES
Producent	ELI INNOVATION
Adresse	73 route de Corbas, 69200 VENISSIEUX FRANKRIG
Hjemmeside	www.eliinnovation.com
Mærkning	CE – Medicinsk enhed

1. Produktidentifikation

Tiltænkt anvendelse

FREELI er en elektrisk kørestol, der er udviklet til børn fra 18 måneder og opefter, med en maksimal brugervægt på 26 kg. Den er beregnet til indendørs brug på stabile, plane overflader og giver uafhængig mobilitet til børn med nedsat gangfunktion.

Om denne manual

Denne manual er beregnet til forældre, omsorgspersoner og sundhedsprofessionelle, der støtter barnet. Læs den venligst grundigt før første brug og gem den til fremtidig reference.

En digital version af denne manual er tilgængelig på www.eliinnovation.com. En trykt kopi på det lokale sprog leveres med hver ny kørestol.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres teknisk uden varsel. For den seneste version, henvises til producentens hjemmeside.

Standarder og overensstemmelse

FREELI overholder EN 12184:2022 (indendørs brug) og de gældende standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Den fulde overensstemmelseserklæring er tilgængelig hos din forhandler eller på www.eliinnovation.com.

2. Sådan læses denne manual

Gennem hele denne manual bruges følgende fremhævede bokse til at gøre dig opmærksom på vigtig information.

ADVARSEL En farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlig personskade.

FORSIGTIG En situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre personskade eller skade på produktet.

NOTE Nyttig information, der hjælper dig med at få det bedste ud af din FREELI.

TIPS Praktiske råd til daglig brug, justering eller vedligeholdelse.

FREELI og dens emballage har også symboler. De vigtigste betyder: se instruktionerne før brug, og maksimal brugervægt 26 kg.

3. Velkomst og vigtig sikkerhedsinformation

Velkommen, og tak fordi du har valgt FREELI.

FREELI er mere end en kørestol. Det er udviklet til at give dit barn frihed til at udforske verden på sine egne vilkår, allerede fra en meget tidlig alder. Selvstændig mobilitet er en vigtig del af et barns udvikling, og vi er stolte af at kunne støtte dig på denne rejse.

Læs venligst dette afsnit grundigt, før du begynder at bruge FREELI. Hvis noget er uklart, kontakt din forhandler eller sundhedsspecialist.

Sikkerhedsadvarsler

ADVARSEL – Voksenopsyn påkrævet

FREELI skal altid bruges under opsyn af en voksen, der er klar til at gribe ind i tilfælde af fare. Dette gælder til enhver tid, uanset barnets kendskab til kørestolen .

ADVARSEL – Professionel vejledning

Før første brug, bed en sundhedsspecialist eller uddannet forhandler om at demonstrere sikker brug. De vil hjælpe dig med at vælge den optimale siddeposition, joystickplacering og justeringer til dit barn.

ADVARSEL – Modificér ikke produktet

Modificér ikke FREELI på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten. Uautoriserede ændringer kan have alvorlige sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil annullere garantien.

ADVARSEL – Små dele

Nogle dele kan fjernes uden værktøj. Disse små dele udgør en kvælningfare. Hold dem uden for små børns rækkevidde, når de ikke er monteret på kørestolen.

Brug ikke FREELI, hvis...

Stop med at bruge FREELI og kontakt din forhandler, hvis du bemærker noget af følgende:

- Dele af kørestolen ser deformerede, revnede eller ødelagte ud
- Usædvanlige lyde, vibrationer eller lugte, især fra batteriet eller motorområdet
- Kørestolen reagerer ikke på joysticket som forventet
- Batteriet er beskadiget, oppustet, lækker eller viser nogen form for unormalitet
- Du mener, at brugen udgør en risiko for brugeren eller for personer i nærheden

Vær opmærksom omkring FREELI

FREELI er en lavprofil kørestol. Dette er med vilje – det placerer dit barn i samme højde som deres jævnaldrende – men det betyder, at du skal være opmærksom på specifikke risici:

- Hjørner, klemningspunkter og knusningszoner: kontrollér miljøet regelmæssigt
- Højdefasthed: barnet sidder lavt; vær opmærksom på lave genstande såsom bordkanter og hylder
- Andre børn: hold kravlende babyer, småbørn og legekammerater væk fra hjulene og fodstøtten
- Kæledyr: tag ekstra forholdsregler, når der er dyr til stede

Indberetning af hændelser

Enhver alvorlig hændelse relateret til FREELI skal indberettes til din forhandler og til den kompetente myndighed i dit land.

4. Oplev FREELI

FREELI er en elektrisk kørestol, der er specielt designet til små børn med nedsat gangfunktion. Den giver sikker, uafhængig mobilitet fra en tidlig alder og støtter barnets udvikling, selvtillid, og social inklusion.

FREELI er designet til børn fra 18 måneders alderen med en maksimal brugervægt på 26 kg. Disse tal er vejledende værdier – egnethed afhænger af barnets højde, vægt, og holdning. Vi anbefaler at konsultere en sundhedsprofessionel for at bekræfte, at FREELI er egnet til dit barn.

FREELI er designet til indendørs brug på stabile, plane overflader og lette hældninger – hjemme, i børnehave, i skole og lignende daglige miljøer. Den er designet til at transportere ét barn ad gangen.

BEMÆRK – Vokser med dit barn

FREELI er bygget til at tilpasse sig, efterhånden som dit barn vokser. Sædet, ryglænet, hovedstøtten, armlænene og fodstøtten kan alle justeres, så kørestolen kan bruges i flere år.

Oversigt



1	Hovedstøtte
2	Ryglæn
3	Joystick (styreenhed)
4	Fodstøtte
5	Medhjælperkontrol (valgfrit)
6	Armlæn
7	Batteri
8	Drivhjul

Tilpasning

FREELI kan tilpasses gennem en række muligheder og tilbehør, som er opført på bestillingsformularen og i tilbehørskataloget, der fås hos din forhandler.

ADVARSEL – Tredjeparts tilbehør

Hvis tilbehør fra andre producenter bruges sammen med FREELI, skal alle gældende sikkerhedsinstruktioner og lovkrav overholdes. ELI INNOVATION kan ikke holdes ansvarlig

for konsekvenser, der opstår fra enheder eller tilbehør, som ikke er en del af dets modulære system.

BEMÆRK – Regelmæssige eftersyn

Vi anbefaler at kontrollere kørestolens indstillinger og tilstand mindst en gang hver 6. måned for at sikre en optimal og sikker pasform, efterhånden som dit barn vokser.

5. Specifikationer

Forventet bruger alder	Fra 18 måneder
Maksimal brugervægt	26 kg
Samlet længde	650 mm
Samlet bredde	580 mm
Totalvægt (med batteri)	40 kg
Totalvægt (uden batteri)	30 kg
Maksimal hastighed	6 km/t
Rækkevidde (pr. fuld opladning)	Op til 25 km
Køretøjstype	Forhjuls træk
Sæde bredde	Op til 300 mm
Sædedybde	160–350 mm
Sædehøjde	350 mm / 450 mm
Fodstøtte til sæde	180–400 mm
Ryglænets hældningsvinkel	90–100°
Sædehældning	0–15°
Dæk	Punkteringssikre massive dæk
Batteri	Genopladeligt LiFePO ₄ , 25,6 V / 20 Ah / 512 Wh
Driftstemperatur	+5 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur	10 °C til +45 °C

6. Samling

FREELI leveres delvist adskilt for transport. Følg nedenstående trin for at samle den før første brug.

BEMÆRK

En video, der viser hele samleproceduren, er tilgængelig på www.eliinnovation.com.

Før du starter

Pak FREELI og alle dens komponenter ud. Kontrollér med følgesedlen, at intet mangler eller er beskadiget. Hvis noget mangler eller er beskadiget, skal du kontakte din forhandler før samling.

Samlingstrin

1. **Hæv sædet** – Hæv sædet ved at trække i håndtagene på hver side.
2. **Hovedstøtte** – Monter hovedstøtten i ryglænet og spænd håndskruerne.
3. **Kropskilere** – Monter kropsstøttekilerne ved at skubbe dem på håndskruen bag på ryglænet.
4. **Armlæn** – Monter armlænene over kropsstøttekilerne og stram håndskruerne.
5. **Joystick** – Monter joysticket under armlænet (højre eller venstre side, efter behov) ved at bruge den medfølgende fingerskrue. Det er vigtigt at sikre, at kablerne er korrekt isat og fastgjort.
6. **Batteri** – Skub forsigtigt batteriet ind i holderen, tryk det ind for at aktivere kabelstikket, og sikre det med fastgørelsesremmen.
7. **Følgekontrol (valgfrit)** – Hvis der medfølger en følgekontrol, skal den tilsluttes som beskrevet i dens egne instruktioner.



ADVARELSE Efter samling, og før første brug med et barn, kontrollér at alle håndskruer og fingerskrue er strammet godt, og at alle komponenter er sikkert på plads.

ADVARELSE Anbring ikke et barn i FREELI, før samlingen er helt færdig og kontrolleret.

7. Brug af FREELI hver dag

Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger FREELI sikkert i daglige miljøer. Læs det sammen med sikkerhedsinformationen i afsnit 3.

Driftsmiljø

FREELI er beregnet til indendørs brug på faste, stabile og plane overflader – hjemme, i børnehave, i skole og lignende miljøer. Brug den kun på fast jord og lette hældninger.

ADVARELSE – Hældninger

Kør ikke op eller ned ad hældninger, der er stejlere end 5°. På en for stejl hældning kan FREELI glide eller vælte. På enhver hældning skal du reducere hastigheden – bremselængden er betydeligt længere end på plan jord.

ADVARELSE – Fortovskanter og trapper

Kør ikke ud over en kantsten eller ned ad trapper. Brug altid tilgængelige ramper. Ledsageren skal tage styringen i enhver situation, der udgør en åbenbar fare, f.eks. smalle stier, vejkanten, vand eller trapper.

Hastighed

Vælg hastigheden i henhold til barnets færdighedsniveau og miljøet. Hvis du bruger Freeli indendørs eller i trange rum, kan den køres med reduceret hastighed for at gøre det nemt for dit barn at bevæge sig rundt om forhindringer. Hvor miljøet tillader det, kan en højere hastighed anvendes.

FREELI stopper, så snart joysticket slippes.

TIPS – Nødsituation stop

For at stoppe FREELI med det samme, er den hurtigste måde ganske enkelt at tage barnets hånd væk fra joysticket. Kørestolen kan også slukkes ved at bruge tænd/sluk-knappen på joysticket.

Vejr og overflader

FREELI er beregnet til indendørs brug og skal beskyttes mod vand og ekstreme temperaturer.

FORSIGTIGHED

Brug ikke FREELI i regn, og lad den ikke stå udendørs i regnvejr.

Kør ikke gennem vandpytter.

Dele, der er i kontakt med barnet, kan blive varme eller kolde i nærheden af varme- eller kuldekilder eller i direkte sollys. Kontrollér før barnet sættes i sædet.

Krydse en vej

Når man krydser en vej, skal ledsageren have fuld kontrol over kørestolen – enten ved at bruge ledsagerbetjeningen eller ved at skifte til friløbstilstand for at skubbe kørestolen manuelt (se afsnit 9).

Andre børn og kæledyr

- Hold øje med andre børn i nærheden af FREELI for at forhindre kollisioner eller at hænder og fødder bliver klemt. Vær særligt opmærksom omkring kravlende babyer og småbørn.
- Lad ikke andre børn kravle eller klatre på FREELI.
- Tag ekstra forholdsregler, når der er kæledyr til stede.

Før og under brug, kontrollér området omkring FREELI for farer: hjørner, klemningspunkter, fald og klemningsfare. Da FREELI er lav, skal du være særligt opmærksom på frihøjde over barnets hoved.

8. Justering af sæde, hovedstøtte, armlæn og fodstøtte

FREELI er designet til at kunne justeres til dit barns størrelse og holdning, og til at vokse med dem over flere år.

ADVARSEL – Juster aldrig med barnet siddende

Juster aldrig sædepositionen, mens barnet sidder i kørestolen – der er risiko for fastklemning og skade. Den eneste undtagelse er armlæn og kropsstøttekilerne, som kan justeres med forsigtighed, mens barnet sidder.

TIP

Vi anbefaler at konsultere en sundhedsprofessionel for at fastlægge den optimale siddeposition. Den rigtige position hjælper barnet med at føle sig tryk, sikker og i kontrol.

Sædet

For dit barns sikkerhed, skal du altid bruge det medfølgende bælte og sele. Juster stropperne på for at opnå en tæt pasform. Hvis du er usikker, skal du kontakte din sundhedsudbyder eller forhandler.

Sædedybde: træk i håndtagene på hver side af sædet, åbn sidevingerne, skub sædet til den ønskede position, og frigør håndtagene i de tilsvarende huller.



Sædevinkel (vip): brug håndtagene bagpå, i hver ende af stolen. For at sænke vinklen, træk sædet opad. For at hæve den, hold sædet og træk et af håndtagene bagud, og slip derefter.

Ryglæsvinkel: træk i håndtagene på hver side af sædet, vip ryglænet til den ønskede position, og frigør håndtagene i de tilsvarende huller. Ryglænet kan også foldes ned ved at bruge det forreste hul.



TIP

Overvåg hvor længe barnet bruger FREELI, og juster sædet regelmæssigt for deres komfort og holdning.


Hovedstøtten

Juster nakkestøttens højde ved at løsne den sorte håndskrue (drej mod uret). Indstil den ønskede højde, og spænd derefter skruen igen.



Armlænene og kropsstøtterne

Armlænene og kropsstøttekilerne er sikret med fingerskruer og kan glide langs skinnerne. Juster deres højde og bredde ved let at løsne håndskruerne, skubbe dem til det ønskede hak og spænde dem fast igen.

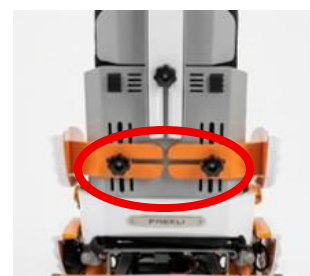

FORSIGTIG Hvis du justerer armlænene eller kropsstøtterne, mens barnet sidder i sædet, skal du gøre det med stor forsigtighed for at undgå at klemme eller støde barnet.

Fodstøtten

Sørg for at barnets fødder er korrekt placeret på fodstøtten. Fødder placeret fremad eller til siden kan forårsage skade. Fodstøtten kan udstyres med remme for at holde barnets fødder sikkert. Den kan fastgøres før eller efter, at barnet sidder i sædet.

Fodstøttehøjde: stå foran stolen, træk fodpladen mod dig, flyt den op eller ned, og skub den ind i hakket for den ønskede højde.



ADVARELSE Vær opmærksom på risikoen for skade, hvis et barn forsøger at klatre op på fodstøtten.

9. Hjul og bremsler

FREELI er udstyret med punkteringssikre, solide dæk – – som aldrig skal pumpes op. FREELI har forhjulstræk.

Bremsning og frikoblingstilstand

Hvert drivhjul har en låsemekanisme, der fungerer som en bremse. Motormekanismen har to positioner:

- Køretøjs-tilstand – håndtaget er aktiveret. FREELI er bremsset, når den står stille, og kan køres. Dette er den normale driftstilstand.
- Frikoblingstilstand – håndtaget er frakoblet. FREELI har ingen aktiv bremsning og kan skubbes manuelt.

De mekaniske frigørelseshåndtag er placeret mellem fodstøtten og hjulene.

Brug af frikoblingstilstand

Frikoblingstilstand bruges til at flytte FREELI manuelt – til transport, for at krydse en vej, eller hvis batteriet er afladet. For at aktivere frikoblingstilstand, frakobl begge frigørelseshåndtag. For at vende tilbage til køretøjs-tilstand, aktiver begge håndtag.

ADVARSEL – Ingen bremsning i frikoblingstilstand

I frikoblingstilstand har FREELI ingen aktiv bremsning. Vær altid i kontrol over kørestolen, når håndtagene er frakoblet, især hvis barnet sidder i sædet.

ADVARSEL – Genaktiver bremserne

Sørg altid for, at begge håndtag er aktiveret (køretøjs-tilstand), når FREELI står stille eller efterlades uden opsyn. Lad aldrig FREELI stå i frikoblingstilstand på en skråning.

ADVARELSE Brug aldrig frikoblingstilstand til at lade FREELI rulle ned ad en hældning. Dette er ekstremt farligt.

FORSIGTIG Træk eller skub ikke FREELI, mens den er i køretøjs-tilstand. Skift altid først til frikoblingstilstand.

10. Batteri og opladning

FREELI drives af et genopladeligt LiFePO₄-batteri. Kun personale, der er autoriseret af producenten, har tilladelse til at ændre eller udskifte batteriet.

Før hver brug

Kontrollér, at batteriets opladningsniveau, vist på joystickindikatoren, er tilstrækkeligt til den tilsigtede brug.

Fjernelse og genmontering af batteriet

Batteriet kan fjernes, for eksempel til transport. For at fjerne det, løs spændestroppen og skub batteriet mod dig ved hjælp af håndtaget – vær forsigtig med ikke at tabe det. For at montere det igen, skub det forsigtigt ind i holderen, tryk det ind for at aktivere kabelstikket, og fastgør det med stroppen.

Opladning af FREELI

1. Sørg for, at hovedkontakten er slukket.
2. Indsæt opladerens kabelstik i opladningsporten på forsiden af joysticket.
3. Sæt opladeren i stikkontakten og tænd den.
4. Under opladning blinker joystickindikatorens lys i sekvens. FREELI kan ikke køres under opladning.
5. Når opladningen er færdig, sluk og tag opladeren ud af stikkontakten, og frakobl derefter kabelstikket fra joysticket.

TIP – Opladningsrutine

En fuld opladning tager cirka [X] timer.

Hvis FREELI bruges hver dag, skal du oplade den dagligt.

Lad ikke batteriet være til opladning i længere perioder efter det er fuldt opladet.

Hvis FREELI ikke bruges i længere tid, skal batteriet genoplades regelmæssigt. Undgå at opbevare det helt tomt eller helt fuldt i længere perioder.

Brug af opladeren sikkert

- Brug kun den oplader, der leveres af producenten.
- Kontrollér, at spændingen på mærkepladen svarer til netspændingen i dit land.
- Hold opladeren tør og rengør den kun med en tør klud. Undgå overophedning af den.

ADVARSEL – Batteri- og opladersikkerhed

Brug aldrig et beskadiget, oppustet eller utæt batteri. Stop brugen straks og kontakt din forhandler.

Brug aldrig en oplader, du mener er beskadiget.

Sluk altid hovedkontakten, før du tilslutter eller frakobler opladeren.

Kør aldrig FREELI, mens den er under opladning.

Oplad kun batteriet mellem +5 °C og +40 °C. Opladning under 0 °C kan permanent beskadige batteriet.

ADVARSEL – Bortskaffelse

Batteriet må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal indsamles separat til genbrug. Kontakt din forhandler.

11. Joysticket

Joysticket er barnets kontrol. Det giver proportional kontrol: hastigheden er proportional med hvor langt joysticket skubbes, inden for de definerede hastighedsgrænser.

Joysticket kan monteres på enten højre eller venstre armlæn ved hjælp af skruen under armlænet. Sørg for, at alle kabler er korrekt isat og sikret.



Tænding

Tænd FREELI ved at bruge kontakten på joysticket.

Justering af hastigheden

Hastigheden indstilles ved hjælp af de to nederste knapper. Lysene i midten af joysticket viser den aktuelle hastighedsindstilling – jo flere lys der er tændt, desto højere hastighed. Brug den nederste venstre knap til at sænke hastigheden, og den nederste højre knap til at øge den.

Kørsel

FREELI bevæger sig i den retning, joysticket skubbes, med en hastighed proportional med hvor langt det skubbes. Den stopper, så snart joysticket slippes.

BEMÆRK

Vælg hastigheds indstillingen i henhold til barnets færdigheds niveau og miljøet. . Start med en lav indstilling for en ny fører.

ADVARSEL Sørg for, at joysticket er monteret inden for barnets rækkevidde, og at barnet nemt kan frigøre det. Den hurtigste måde at stoppe FREELI i en nødsituation på er at tage barnets hånd af joysticket.

TIP

En sundhedsperson kan rådgive om, hvilken joystick-position og hvilke indstillinger der passer bedst til dit barn.

12. Brug af FREELI i nærheden af andre enheder

FREELI opfylder de gældende internationale standarder for elektromagnetisk interferens (EMI). Dog kan elektromagnetiske felter – såsom dem, der genereres af radio- og tv-sendere samt mobiltelefoner – påvirke, hvordan FREELI fungerer. Elektronikken i FREELI kan også generere et lavt niveau af elektromagnetisk interferens, inden for de niveauer, der er tilladt ved lov.

Af disse grunde bedes du tage følgende forholdsregler:

- Hvis FREELI begynder at bevæge sig uventet, sluk den straks.
- Tænd eller brug ikke bærbare transceivere eller kommunikationsenheder (såsom tovejskommunikationsradioer), mens FREELI er tændt.
- Undgå at komme tæt på kraftige radio- og tv-sendere.
- Tilføjelse af elektrisk tilbehør eller andre komponenter, eller ændring af FREELI på nogen måde, kan have ukendte elektromagnetiske virkninger på dens elektroniske dele.
- Vær ekstra forsigtig, når FREELI er i nærheden af andre elektriske kørestole.

ADVARSEL

Hvis FREELI bevæger sig eller bremser uventet, sluk den straks og kontakt din forhandler.

13. Transport

Dette afsnit forklarer, hvordan du transporterer FREELI sikkert, for eksempel i en bil.

Forberedelse af FREELI til transport

- Sluk joysticket.
- Sørg for, at hjulene er i køreposition (udløserhåndtagene er aktivert) og ikke i friløbstilstand.
- Batteriet kan fjernes for at gøre FREELI lettere og nemmere at håndtere (se afsnit 10).

Sammenklapning af FREELI

FREELI kan foldes sammen uden værktøj for at gøre den mere kompakt til transport og opbevaring. Ryglænet foldes ned på sædet. Sluk joysticket før sammenklapning.

1. Åbn sidevingerne på begge sider af sædet for at få adgang til stemplerne.
2. Træk i stemplet på hver side for at frigøre ryglænet. Det ene stempel har en kvartdrejningslås: drej det, så det forbliver frigjort af sig selv, så du har én hånd fri til næste trin.
3. Fold ryglænet ned på sædet.
4. Frigør stemplerne, så ryglænet holdes i den foldede position.

For at folde stolen ud skal du følge fremgangsmåden i omvendt rækkefølge: Træk i (og lås op for) stemplerne, løft ryglænet op, indtil det låser sig fast, frigør stemplerne, og luk sidevingerne.



ADVARSEL

Før du bruger FREELI igen, kontrollér at ryglænet er helt låst oprejst på begge sider. Sørg for, at stemplerne er aktiveret, og at ryglænet ikke bevæger sig.

FORSIGTIG Hold fingrene væk fra ryglænets hængselområde under sammenklapning og udfoldning for at undgå at klemme dem.

Sikring af FREELI i et køretøj

Hvis dit køretøj har et fastgørelsessystem, skal du bruge det til at sikre FREELI på plads. Følg altid producentens anvisninger for fastgørelsessystemet.

ADVARSEL – Fastgørelsessystemer

ELI INNOVATION er ikke ansvarlig for de anvendte fastgørelsessystemer eller hvordan de bruges. Brug kun fastgørelsessystemer, der opfylder de gældende lovkrav og er designet til den samlede vægt af FREELI.

ADVARSEL – Transportér ikke et barn i FREELI

FREELI er ikke beregnet eller godkendt til brug som sæde i et motorkøretøj. Et barn må aldrig blive transporteret, mens det sidder i FREELI. Barnet skal transporteres i et godkendt køretøjssæde, og FREELI skal sikres separat.

Flyrejse

Hvis du planlægger at tage på flyrejse med FREELI, skal du kontakte flyselskabet på forhånd. FREELI-batteriet er et LiFePO₄-batteri, der har bestået UN 38.3-testen og er godkendt til transport på passagerfly i henhold til IATA's regler for farligt gods – men flyselskaber har deres egne regler, så kontrollér altid før rejsen.

14. Rengøring og vedligeholdelse

Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse holder FREELI sikker, komfortabel og i god stand samt forlænger dens levetid.

ADVARELSE Sluk altid FREELI før du rengør eller udfører nogen form for vedligeholdelse.

Rengøring

Stel og plastdele	Tør af med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel. Undgå store mængder vand.
Sæde- og ryglænsbetræk	Aftagelige betræk kan maskinvaskes ved minimum 60 °C.
Sele og stropper	Kan maskinvaskes.
Oplader	Rengør kun med en tør klud. Brug aldrig vand.

FORSIGTIG Brug ikke højtryksvand, damprensere, opløsningsmidler eller slibende produkter. Nedsænk ikke nogen del af FREELI i vand.

Regelmæssig kontrol

Vi anbefaler, at man kontrollerer med et hurtigt visuelt blik før hver brug:

- Batteriets opladningsniveau er tilstrækkeligt
- Hjul og dæk er i god stand
- Joystick reagerer korrekt
- Ingen synlige skader, løse dele eller usædvanlige lyde
- Bælte, sele og stropper er i god stand og korrekt justeret

Kontroller desuden mindst hver 6. måned, at alle håndskruer sidder fast, at justeringerne holder sikkert, at bremserne og friløbsmekanismen fungerer i begge tilstande, og at mærkaterne er på plads og læselige.

BEMÆRK

Når barnet vokser, bør du bruge 6-måneders-kontrollen som en anledning til at gennemgå og justere sædet, så det sidder optimalt.

Opbevaring

Opbevar FREELI indendørs, et tørt sted, væk fra varme- og kuldekilder. Hvis FREELI ikke bruges i længere tid, så pas på batteriet som beskrevet i afsnit 10.

Service, reparationer og reservedele

Nogle dele af FREELI er designet til at blive udskiftet, når de er slidte eller beskadigede – for eksempel dæk, betræk og kåber.

ADVARSEL

Vedligeholdelse, reparationer og udskiftning af dele (bortset fra rutinemæssig rengøring og de justeringer, der er beskrevet i denne manual) skal udføres af producenten eller autoriseret personale. Modificér ikke FREELI.

For service, reparationer eller bestilling af reservedele, kontakt din forhandler.

15. I tilfælde af et problem

Dette afsnit hjælper dig med at løse simple problemer. Hvis et problem ikke er nævnt her, eller fortsætter efter de foreslåede kontrol, så sluk FREELI og kontakt din forhandler.

ADVARELSE Forsøg ikke selv at udføre reparationer. Bortset fra nedenstående kontrol skal alle reparationer udføres af producenten eller autoriseret personale.

Problem	Mulig årsag	Hvad skal du kontrollere
FREELI tænder ikke	Joystick slukket / batteri afladet / batteri ikke tilsluttet	Tryk på den elektriske kontakt; oplad batteriet; kontrollér at batteriet er fuldt aktiveret
FREELI bevæger sig ikke	Hjul i frakoblet tilstand / opladning / batteri afladet	Aktiver begge frigøringshåndtag; tag opladeren ud; oplad batteriet
FREELI kører langsomt	Lav hastighedsindstilling / lavt batteri	Øg hastigheden med nederste højre knap; kontrollér og oplad batteriet
Kort rækkevidde	Batteri ikke fuldt opladet / batteri ældes	Oplad fuldt før brug; kontakt din forhandler for at kontrollere batteriet
Batteri oplader ikke	Oplader ikke tilsluttet / temperatur for lav	Kontrollér forbindelserne; oplad mellem +5 °C og +40 °C
Joystick reagerer ikke	FREELI er under opladning / løst kabel	Afbryd opladeren; sluk og kontakt din forhandler
Usædvanlig støj eller lugt	Mulig mekanisk eller batteri fejl	Stop med at bruge FREELI straks og kontakt din forhandler
Batteri oppustet eller lækker	Batteri fejl	Stop straks, hold væk fra varme, kontakt din forhandler

BEMÆRK – Joystick indikatorlys

FREELI bruger et nVR2 kontrolsystem. Hvis der opstår en fejl, blinker batteri indikatoren på joysticket et antal gange for at angive typen af fejl.
[Indsæt officiel nVR2 fejlkodetabel – skal indhentes fra kontrolsystemleverandøren.]

BEMÆRK

Når du kontakter din forhandler, skal du have FREELI serienummeret klar (format FRESXXX, på produktmærkatens).

16. Garanti og kontakt

Garanti

For information om garantibetingelserne for din FREELI, kontakt din forhandler.

ADVARSEL Ændring af FREELI uden skriftlig tilladelse fra producenten vil annullere garantien og kan have alvorlige sikkerhedsmæssige konsekvenser.

Garantien dækker ikke skader som følge af forsømmelse, misbrug, forkert brug eller manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual.

Ansvar for sikker brug

FREELI er en medicinsk enhed. Sikker brug forudsætter, at man følger anvisningerne i denne manuel, kun bruger FREELI til det tilsigtede formål og sikrer, at der altid er konstant opsyn af en voksen til stede. Den voksne, der fører opsyn med barnet, er ansvarlig for at kontrollere miljøet og forhindre ulykker.

Kontakt

Ved spørgsmål samt for service, reparationer, reservedele eller yderligere dokumentation, kontakt venligst din forhandler. Din forhandler tilbyder også telefonisk teknisk support på hverdage.

Hvis du ikke ved, hvem din forhandler er, kan du finde deres kontaktoplysninger på www.eliinnovation.com.

BEMÆRK

En digital version af denne manual og anden produktdokumentation er tilgængelig på www.eliinnovation.com.

Producent

Producent	ELI INNOVATION
Adresse	73 route de Corbas, 69200 VENISSIEUX FRANKRIG
Hjemmeside	www.eliinnovation.com