



1. Demontera hjulen på båda sidorna.

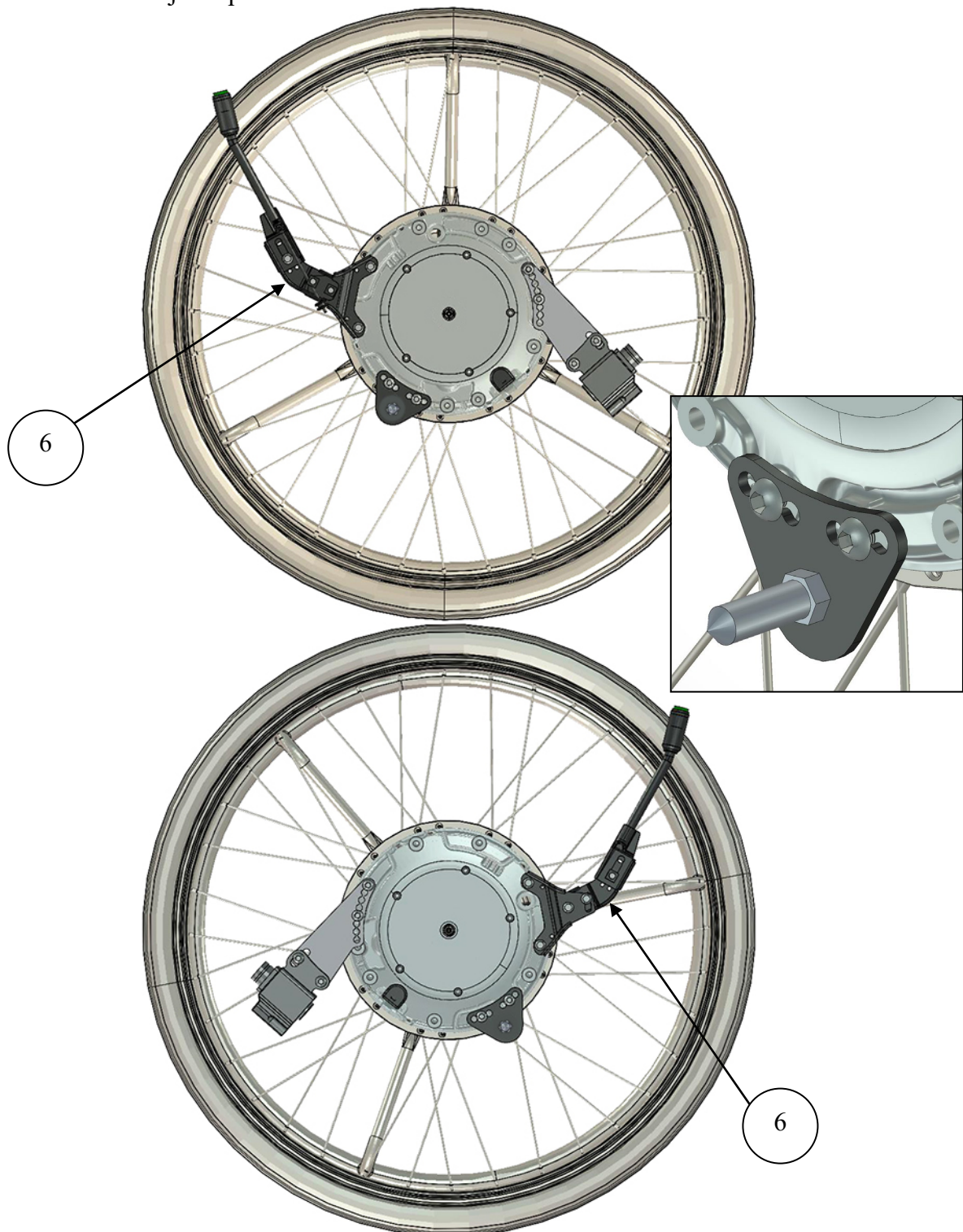

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
- Axel Ø12,7 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-C0
 - Stopp pinne är monterat med Detalj nummer: 290000, 300001 och XSM8ML.

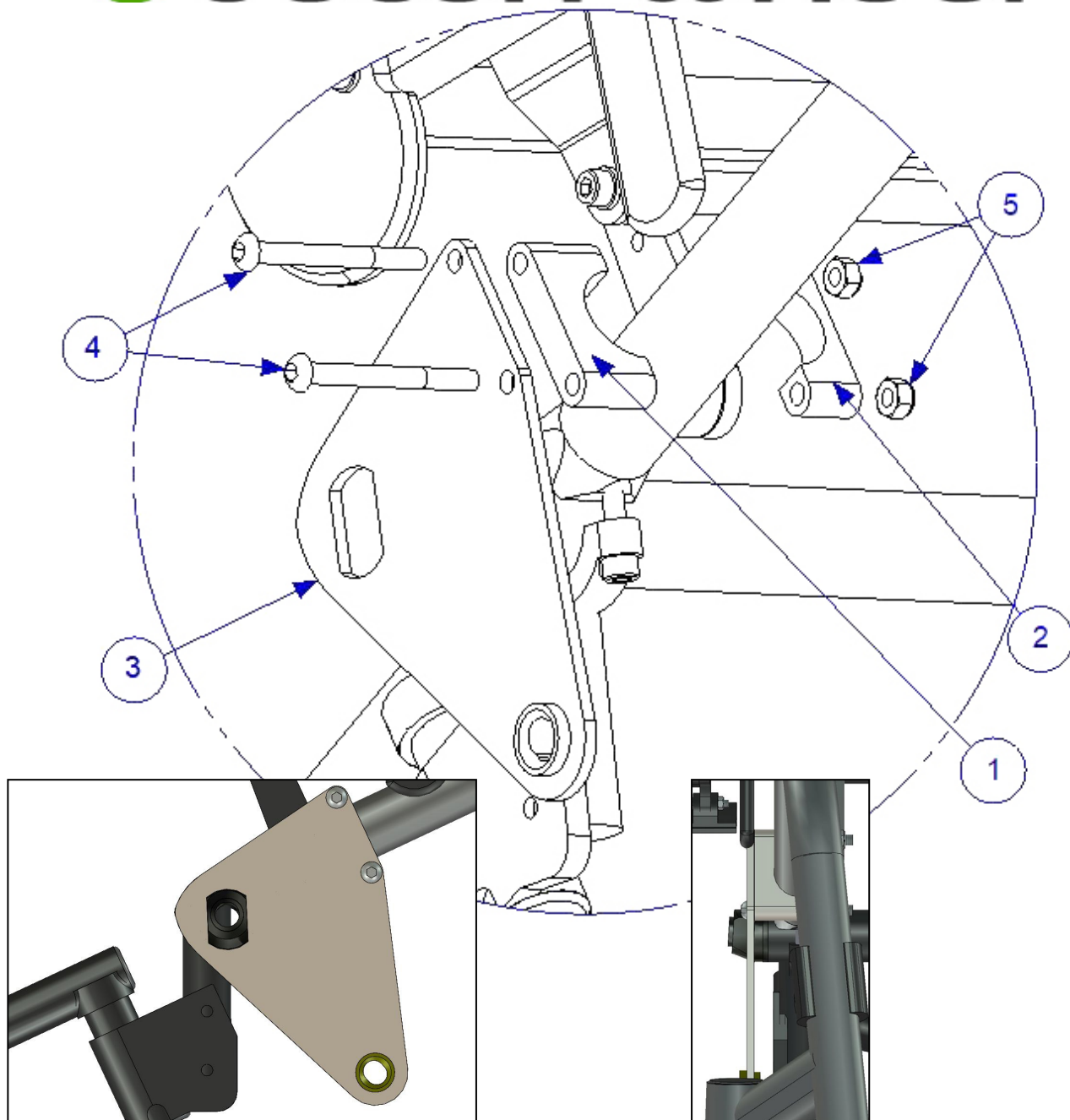

3. Se bilder som visar montering av fästet (höger sida). Notera att plattan skall peka rakt ner, det vill säga lodrät.

Detaljer som ingår för montering av fästet på en sida.

Placering	Art.Nr.	Antal	Beskrivning
1	300088	1	Klamma
2	300089	1	Klamma
3	310033	1	Fäste
4	XSM6X65	2	Skruv Rundad M6 x 65
5	XSM6ML	2	Låsmutter M6
6	XOE-46383-10	1	Vinklat spak fäste

4. Montera den rygghängda batteri väskan.