



Monteringsanvisning INFM7002, INFM7102, INFM7202

Infinity Adaptersats
Panthera S3/U3/U3 Light/U3 Light L

1. Säkerhet och föreskrifter

Symboler



VARNING!

Risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till skador på operatören eller andra personer.



FÖRSIKTIGHET!

Risk för materiella skador.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till materiella skador.



INFO

Extra viktig eller förklarande information.

Allmänna föreskrifter

Denna monteringsanvisning skall alltid följas vid montering av adaptersats INFM7002, INFM7102, INFM7202 Adaptersats Panthera S3/U3. För att sedan kunna koppla Infinity på rullstolen krävs att Infinity ställs in enligt separat monteringsanvisning.


Varningar



VARNING!

Monteringsarbeten och ändringsarbeten som beskrivs i detta dokument får endast utföras av utbildad servicetekniker, återförsäljare eller annan av Decon Wheel utsedd representant.

2. Översikt

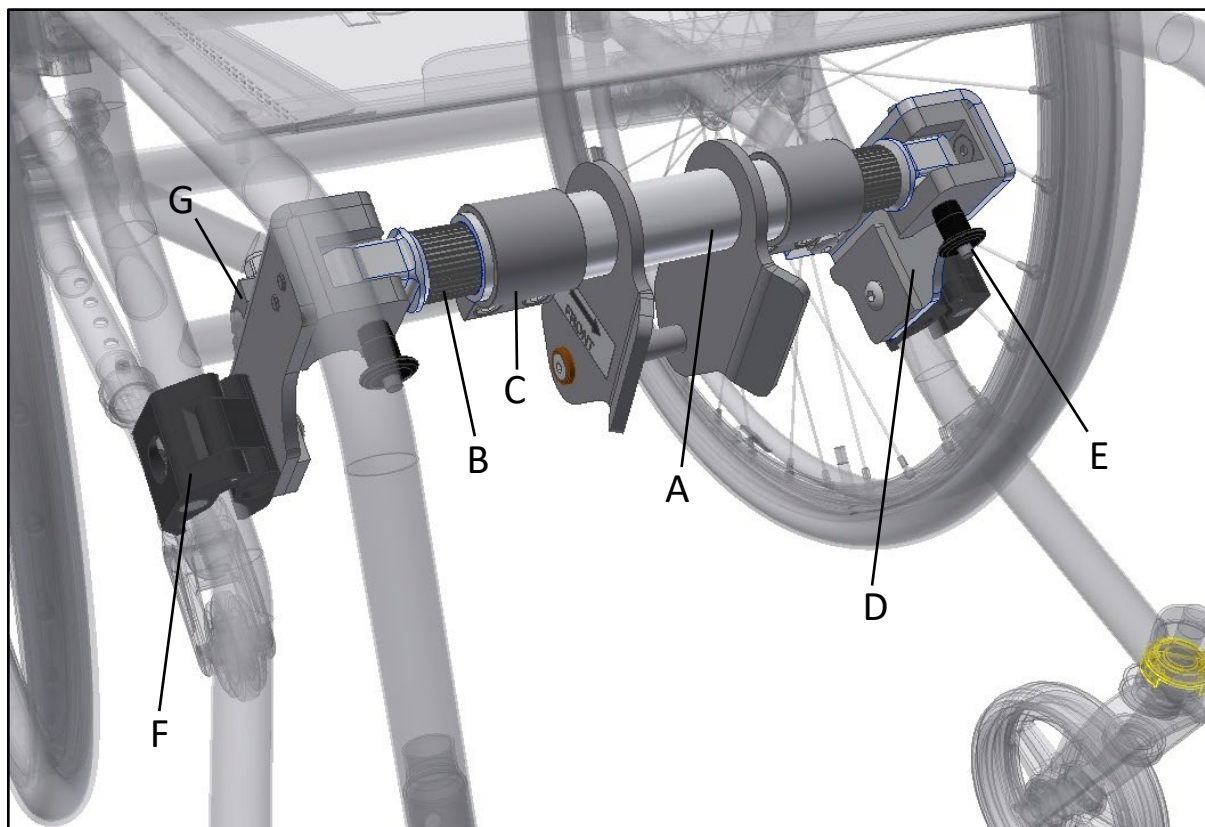

- A Centrumrör adapterbalk
- B Ytterrör adapterbalk
- C Klämma
- D Förmonterad adapterplåt
- E QR-Pinne
- F Universal klämma
- G Panthera klämma

3. Montering och inställning

Montera den förmonterade adapterplåten (D), universal klämman (F), kil (I), hylsa (J), skruv (K) och bricka (L) på rullstolen. Dra åt skruven löst så att delarna går att flytta utmed röret som klämman sitter runt.

Fäst Panthera klämman (G) runt röret med hjälp av skruv (K), bricka (L) och låsmutter (M). Dra åt skruven löst.

Kontrollera att den förmonterade adapterplåten (D) sitter korrekt och dra åt samtliga skruvar.




Montera båda sidor



WARNING!


Skruvarna (K) i universal klämma (F) och Panthera klämma (G) skall dras åt med ett moment om 10-15Nm.

Loctite 243 el. likvärdigt skall appliceras på skruven som håller universal klämma (F).

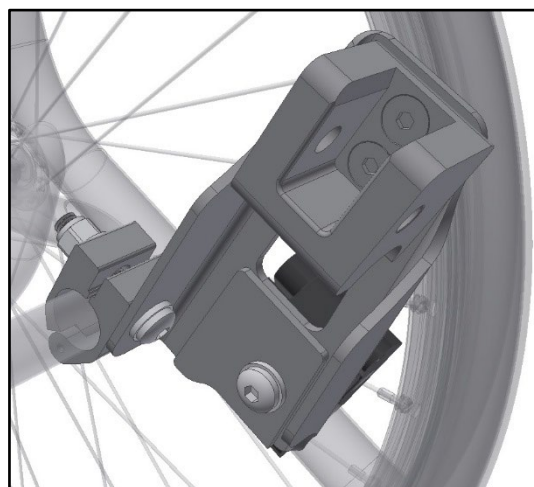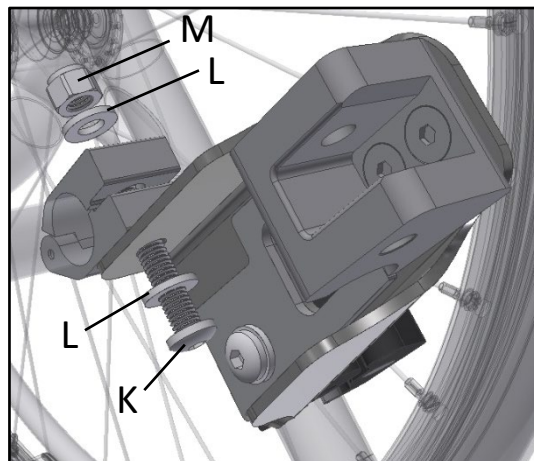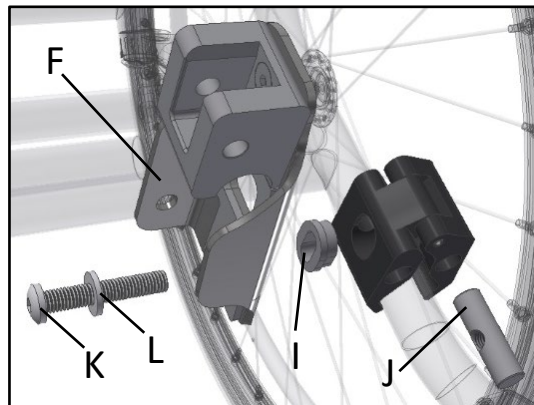


Montera den kompletta adapterbalken bestående av centrumrör (A), ytterrör (B) och klamma (C). Denna fästs in i fäste adapterbalk (D) med hjälp av QR-Pinnarna (E).

Se till att ändarna på de yttre rören (B) är parallella så att adapterbalken passar in i sina hållare. Centrumröret (A) skall kunna flyttas i sidled samt roteras.

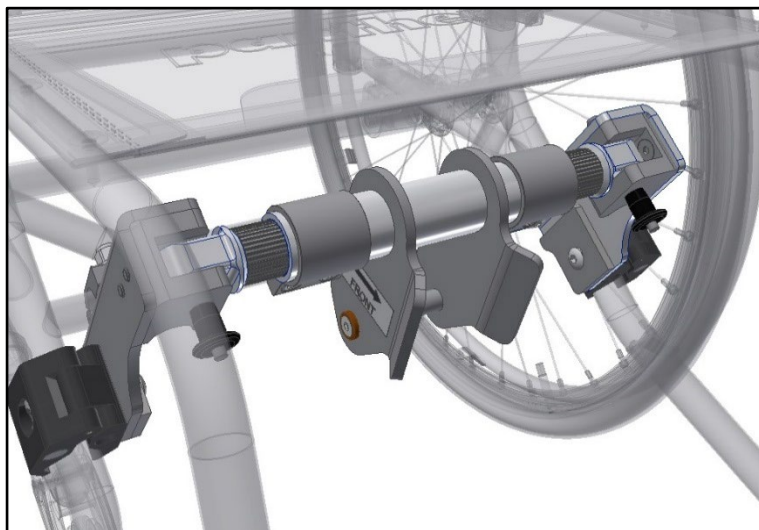

Dra åt skruvar i panthera klämman (H) först. Kontrollera efter åtdragning att centrumröret fortfarande kan förflyttas i sidled samt roteras. Dra sedan åt skruvarna i universal klämman (G).

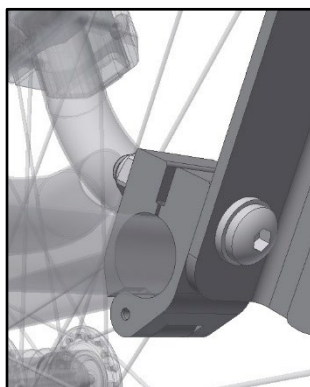

INFO

Kontrollera så att pilen på klistermärket monterat på centrumröret (A) pekar framåt i körriktningen. Om detta är vänt fel kommer det ej gå att koppla Infinity mot adapterbalken.

WARNING!

Skruvarna i panthera klämman (H) skall dras åt med ett moment om 15-20Nm.

Skruvarna i universal klämman (G) skall dras åt med ett moment om 10-15Nm.


INFO

Adapterbalken har splines med fasta lägen inuti sig. Därför kommer vattenpasset troligen ej att hamna exakt i våg utan man får välja det hack som är närmst.

Inställning av rätt vinkel för centrumröret kan ske på två sätt beroende på hur långt dem yttre rören är instuckna i centrumröret. Båda sätten beskrivs nedan. **Nivåvekryget följer ej med leveransen av adaptersetet utan detta levereras tillsammans med Infinity.**


Alt.1

Med hjälp av det nivåverktyg som följer med leveransen av Infinity (inte adapter set) ställ in rätt vinkel på centrumröret genom att vrida detta tills det hamnar i våg. Röret har splines innuti sig, det kommer kännas ett litet klick för varje steg som röret roteras. När rätt vinkel har uppnåtts, kontrollera att centrumröret är centrerat i rullstolen. Dra nu åt skruvarna i samtliga klammor (C).

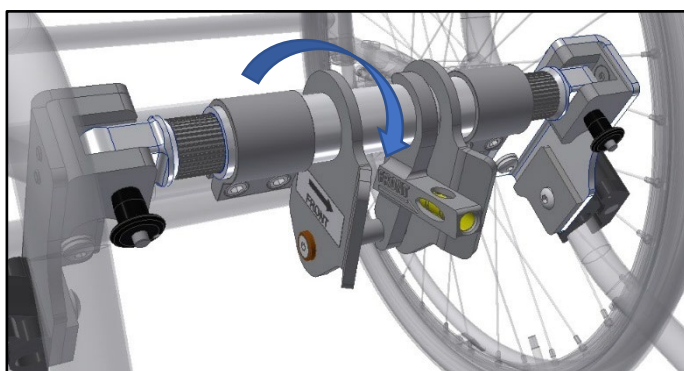


WARNING!

Skruvarna i klammorna (C) skall dras åt med ett moment om 7-9Nm.

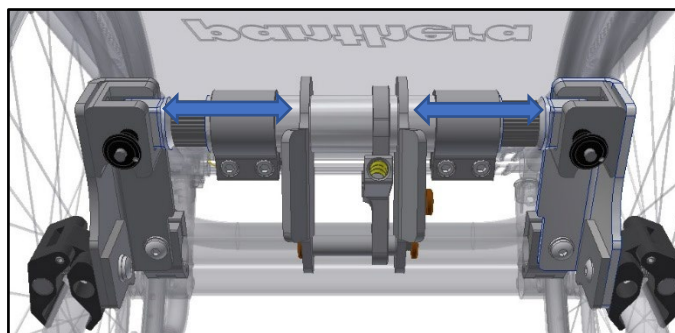


Alt.2

Med hjälp av det nivåverktyg som följer med leveransen av Infinity (inte adapter set) ställ in rätt vinkel på centrumröret. Montera endast ett innerrör i centrumröret och vrida detta tills det hamnar i våg. När rätt vinkel har uppnåtts, montera den andra innerröret i samma position/vinkel som det första. Kontrollera att centrumröret är centrerat i rullstolen. Dra nu åt skruvarna i samtliga klammor (C).

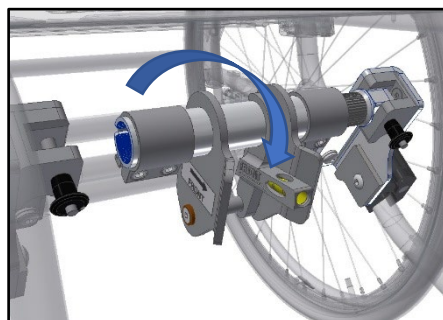**WARNING!**

Skruvarna i klammorna (C) skall dras åt med ett moment om 7-9Nm.

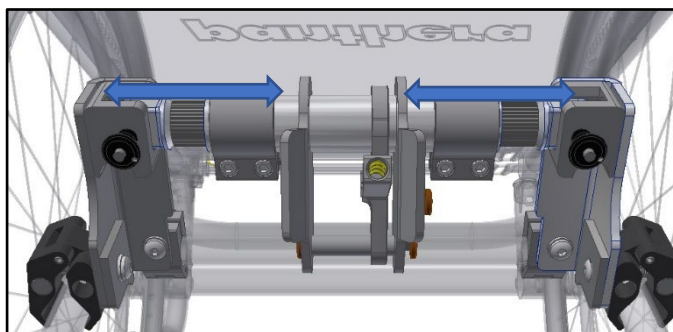

Läs nu igenom monteringsanvisningen för Infinity som följde med leveransen av denna. Montera och ställ in Infinity enligt de anvisningar som anges i denna.

**INFO**

I det fall rullstolens bromsar monterats bort vid montage av adapterbalken glöm ej att återmontera dessa. Om sittklädseln har lossats glöm ej heller att återmontera denna.

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 119, SE-314 93 Hyltebruk, Sweden
Tel: +46 (0)345 40880
Fax: +46 (0)345 40895
E-mail: info@decon.se

